

# Meywalk® MK4



Gåstolen som ger en  
naturlig och trygg gång.

MAYDAY AID

MEYWALK®MK4 säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 33 b, 434 39 KUNGSBACKA  
Tel: 0300-56 97 00, Fax: 0300-56 97 01, info@maydayaid.se, www.maydayaid.se



# Meywalk® MK4

Naturlig och säker gång.

**Meywalk®MK4** är uppföljaren till den populära Meywalk MK3. Flera nya smarta funktioner finns med efter önskemål från både användare och vårdpersonal. Förutom fjädningen i sidorören har Meywalk MK4 även en dynamisk sadel som fjädrar mjukt i sidled. Sadeln följer bäckenets naturliga rörelsemönster vid gång. För ökad trygghet är bakåtspärr, riktningsspärr och släpbroms redan monterade i standardutförande.

**Meywalk®MK4** är enkel att justera och ställa in för att passa användaren och alla vardagsinställningar kan göras helt utan verktyg. Den öppna designen, liksom sitsens höj- och sänksystemet, gör det säkert för användaren att ta sig i och ur gästolen. När hävbygel på gästolens främre del lösgörs från låsklämman, sänks hela sittenhetsen till en höjd motsvarande sitthöjden på en säng, stol eller rullstol.

Användaren kan då lättare förflytta sig till gästolen och får hjälp med uppresningen då hävbygel åter trycks ned och låses. Belastningen för medhjälparen blir endast 1/3 av användarens vikt.



## Stabil, trygg och smidig

Tiltfunktionen på sittenhetsen gör det möjligt att vinkla gästolen till användarens kroppshållning för en bekvämare gång. Tack vare den stabila ramen, stora bakhjul och lättmanövrerade länkhjul fram, blir gästolen både stabil, trygg och smidig att använda. Gästolen är främst avsedd att användas inomhus på jämnt och plant underlag.

En bålstödsring med omkrets 70, 90, 105, 120 eller 130 cm och fjädrar ingår i standardutförande. Vid beställning välj önskade fjädrar efter användarens vikt.



Meywalk MK4 har en maxvikt på 130 kg

## Fakta

	M	L
Artikelnummer	11200	11250
Längd	86 cm	98 cm
Bredd	62 cm	66 cm
Sadelhöjd*	61-85 cm	79-103 cm
Bålstödhöjd	103-137 cm	118-150 cm
Bakhjul	275 x 40 mm	275 x 40 mm
Framhjul	200 x 30 mm	200 x 30 mm
Max belastning	130 kg	130 kg
Vikt	32 kg	34 kg
Färg	röd/silver	svart/silver
* vid belastning		

## Slitstark och tålig

Alla ramdelar är av stål, vilket ger en stabil konstruktion. Färgen är pulverlackerad för att få en slitstark och tålig yta. Bålstödsringen och handbygeln är av polyuretan, PUR, som är mjuk, hållbar och lätt att rengöra.

## Tillbehör

- Bendelare
- Höjdreduceringsbeslag
- Lägre bygel
- Fotskyddsskenor
- Vinklad magplatta
- Höftstöd
- Tippstöd



MEYWALK®MK4 säljs i Sverige genom:  
MAYDAY AID AB  
Arendalsvägen 33 b, 434 39 KUNGSBACKA  
Tel: 0300-56 97 00, Fax: 0300-56 97 01  
info@maydayaid.se, www.maydayaid.se

MAYDAY AID