


Korg

Använd snäppkrokarna för att fästa korgen på de halvmåneformade ringarna. (se bild 7). Korgen kan sitta kvar när sulkyn fälls ihop. Max vikt i korgen är 3 kg.

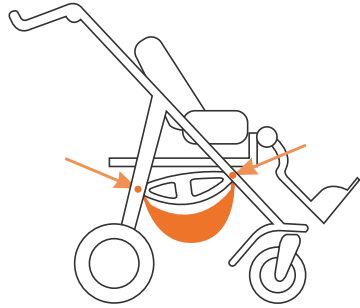

(bild 7)

Skötselråd

JAZZ chassit är tillverkad av stål av hög kvalitet, aluminium som är lackad med motståndskraftigt värmelack. Chassit kan tvättas med varmt vatten och vanliga rengöringsmedel.

Garanti / CE-märkning

Thomashilfen är certifierad enligt ISO standards DIN EN ISO 13485:2003. Både materialval och förädling möter högsta tillverkningsstandard.

Thomashilfens produkter har 3 års garanti på ramdelar, som utgår från och med leveransdatum / faktura datum. Garantin gäller i de fall där skada uppstår på grund av material-, konstruktions- eller tillverkningsfel. Garantin inbegriper inte underhåll, reparation eller byte av delar till följd av normalt slitage.

JAZZ chassit är en CE-märkt produkt enligt de Europeiska EN 1888 standard.



EASys^{BSS®inside}

Ergonomical and adjustable safety system for rehabilitation strollers

Bruksanvisning till JAZZ chassi

SE



Kära användare av Sittvagnen Jazz EASyS!

Sittvagnen Jazz EASyS är framtagen och designad för barn med funktionshinder av företaget Thomas Hilfen. Efter flera år av forskning, tester och undersökningar har Thomas Hilfen utvecklat ett nytt koncept för sittvagnar för att kunna producera en av de säkraste och mest avancerade sitt system som är möjligt.

För att göra inställningen och användandet av EASyS sittsystem och chassi säkert och bekväm för Dig men kanske framförallt för Ditt barn ber vi dig att läsa denna servicehandbok först innan sittvagnen tas i bruk.

Har Du fler frågor eller funderingar, ber vi Dig ta kontakt med oss.

Mer information om våra andra hjälpmedel för funktionshindrade hittar Du enklast genom att besöka vår hemsida www.maydayaid.se

Vår adress:

Jazz EASyS säljs i Sverige genom:

Mayday Aid AB

Algatan 1

S- 134 40 Gustavsberg

Tel: +46 (0) 8-574 120 00

Fax: + 46 (0) 8-574 120 01

info@maydayaid.se

www.maydayaid.se

Jazz EASyS är en sittvagn som produceras av:

Thomashilfen GmbH & Co Medico KG

Walkmuhlerstrasse 1

D -27432 Bremervörde

Tel.+49 (0) 47 61 / 8 86-68


www.thomashilfen.com

Denna bruksanvisning ger information om inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Jazz chassi. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna hoppas vi att ni får stor glädje av Jazz chassi.

Jazz chassi finns i två storlekar och passar till sättenhet Easys, som finns i två storlekar.

Vinkla sittenheten

Lossa låsvredet under sitsen, (till höger) och vinkla sitsen i önskat läge. (bild 5)
Dra åt låsvredet.

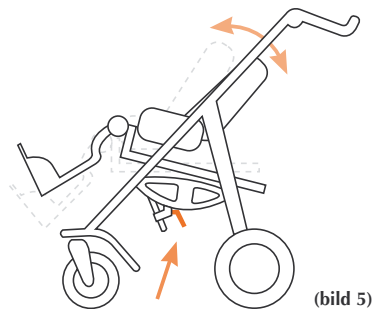

VARNING: När låsvredet lossas kan sitsen vinklas okontrollerat, ta ett stadigt tag i ryggstödet på sitsen, och vinkla sitsen till önskat läge. Vi rekommenderar att vinkla sitsen utan barn i sulkyn.

Parkeringsbromsens funktion

Sätt på bromsen:

Sätt foten på bromsen och tryck ner.



Ta upp bromsen:

Placera foten under bromsen och lyft upp den.

Upphängningssystem

Fixera fjädern

Dra ut låssprinten från fjädern och fixera fjädern genom att vrida låssprinten ett halvt varv. (Se bild 6)

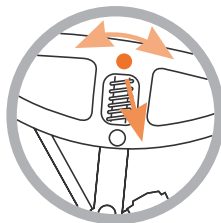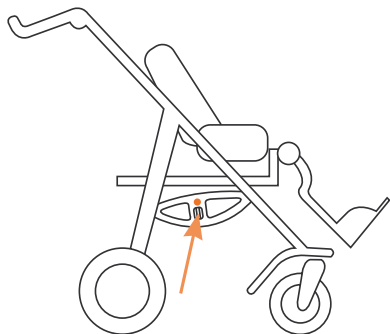

(bild 6)


Frigör fjädern

Fixera låssprinten till fjädern, (den låser sig automatiskt).

Ändringar av sitsens färdriktning

SÄKERHETSINFORMATION: Kontrollera noga att sättenheten är ordentligt, säkert och rätt fastsatt i chassiet, innan barnet placeras i sulkyn.

Under sitsen finns en click-fix spak, drag den framåt och lyft bort sitsen från chassiet. Vänd sitsen ett halvt varv i den önskade riktningen och placera sitsen på chassiet. Tryck click-fix spaken i låsposition. (se bild 3).

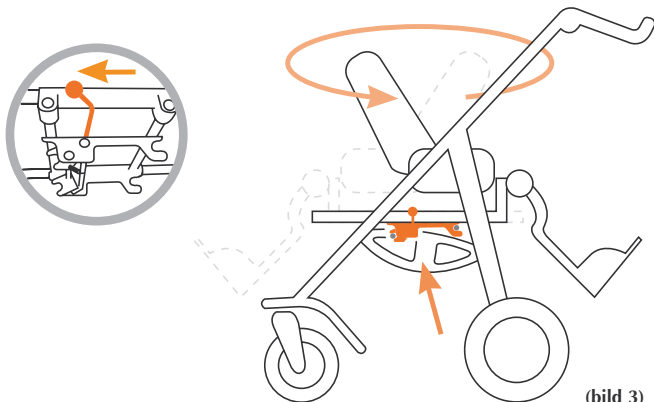


Riktningsspärr

Spärr av länkhjul fram

Ställ hjulet rakt fram och fixera med låssprinten i hålet på framhjulsgaffeln. (Den låses med ett hörbart ljud).

Ledade länkhjul fram

Dra ut låssprinten ur framhjulsgaffeln och vrid den ett halvt varv. (se bild 4)

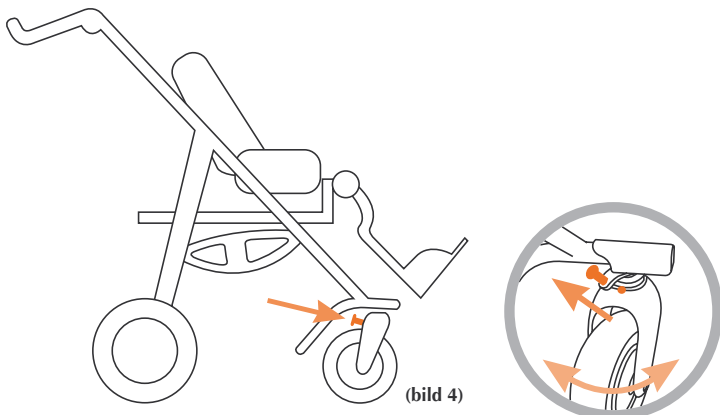

Innehåll

Sida

Generella säkerhetsinstruktioner.....	4
Tekniska data.....	5
Hopfällning av sulky	5
Ändring av sitsens färdriktning	6
Länkhjul och riktningsspärr	6
Vinkla sättenhet	7
Bromsfunktion.....	7
Upphångnings system	7
Korg / väska.....	8
Skötsel råd.....	8
Garanti.....	8



Säkerhetsinstruktioner:

- Vi rekommenderar att du justerar EASyS sittenhets var tredje månad så ditt barn får bästa sittkomfort.
- Det ska endast sitta ett barn i JAZZ EASyS sulkyn.
- Kontrollera månadsvis att det inte finns sand eller andra partiklar i sittenhetsens glidsystem. Se till att de skruvar som är lösa skruvas åt.
- Kom ihåg att ordentligt skruva åt de skruvar / handvred du använt, varje gång du förändrat någon sittkomfort för ditt barn.
- Sätt på / trampa ner parkeringsbromsen varje gång du ska placera / ta ur barnet i / ur JAZZ EASyS eller när du ska montera på ett tillbehör.
- VARNING: Blöta eller platta hjul påverkar parkeringsbromsens styrka / effektivitet. Om sulkyn står oanvänd en längre tid, aktivera parkeringsbromsen för att undvika att sulkyn rullar iväg.
- Överstig inte max vikt eller max storlek för sulkyn. Läs de tekniska data för att få rätt information.
- Om barnet lutar sig väldigt långt ut mot sidorna om sulkyn kan detta orsaka så sulkyn blir instabil och välter. Se därför till att barnet alltid är fastspänt när barnet sitter i sulkyn.
- Häng inte kassar / väskor eller andra föremål på vagnen utan lägg dem i korgen (finns som tillbehör) under vagnen. Annars finns det risk för att vagnen välter.
- Barnet bör alltid vara fastspänd med bältet (standard utrustning) när barnet sitter i JAZZ EASyS. Lämna aldrig barnet utan uppsikt, även när parkeringsbromsen är på och barnet är fastspänd. Var också uppmärksam om det finns barn som leker i närheten. JAZZ EASyS ska manövreras av en vuxen.
- JAZZ EASyS innehåller många små delar och kan om de pillas loss och stoppas i munnen orsaka kvävning. Kontrollera varje månad att skruvar, plasthattar, etc. att de sitter åt ordentligt.
- Bältet som levereras med sulkyn (standard utrustning), ska inte användas som säkerhetsbälte vid transport med färdtjänst eller bil. När barnet sitter i sulkyn i färdtjänst eller bil så ska bilens befintliga säkerhets utrustning användas.
- Använd alltid bältet som följer med sulkyn eller abduktionsblock när tillbehörs bälten (ex. fjärilsbälte, H-bälte) används, för att undvika att barnet glider ur sulkyn och skadar sig.
- Var uppmärksam när du kör sulkyn i / nära backar, ojämn mark, hinder och trafikerade vägar. Ska sulkyn bäras uppför trappor bör det vara två eller fler som lyfter.
- När det är mörkt ute eller vintertid, använd ljusa kläder eller reflex för att synas ordentligt i mörkret.
- Använd bruksanvisningen när du ska ställa in sittenhetsen eller fälla ihop sulkyn.
- Alla förändringar på chassit (ex. borra hål i chassit) försvagar konstruktionen så att sulkyn inte är godkänd för transport i buss / bil.
- Innan du använder sulkyn, kontrollera alltid att sittenhetsen är ordentligt fastsatt i chassit och att ryggestödet och tiltfunktionen är fastlåsta.


Tekniska data

JAZZ EASyS	stl 1	stl 2
Vinkling av sits	-10° till +45°	-10° till +40°
Totala mått (b x h x l)	60 x 104 x 100 cm	70.5 x 111 x 111 cm
Storlek ihopfälld (b x h x l)	60 x 50 x 88 cm	70.5 x 52 x 99 cm
Handtagshöjd	92 - 114 cm	92 - 120 cm
Hjul (fram / bak)	7,5" / 10"	7,5" / 10"
Max brukarvikt	35 kg	40 kg
Vikt	15,9 kg	18,6 kg
Förändring sitsen färdriktning	180°	180°

Hopfällning

Hopfällning av sulky

Ta tag i handtaget till sulkychassiet. Vinkla in den övre handtagsdelen. Vinkla upp fotplattan mot sitsen, genom att lossa skruvarna till fotplattan. Fäll ner ryggstödet så att sitsen och ryggstödet ligger plant. Ta tag i de båda stoppen på sidorna av chassiet och dra uppåt samtidigt som främre delen av sulky viks inåt under resten av sulky. (se bild 2)

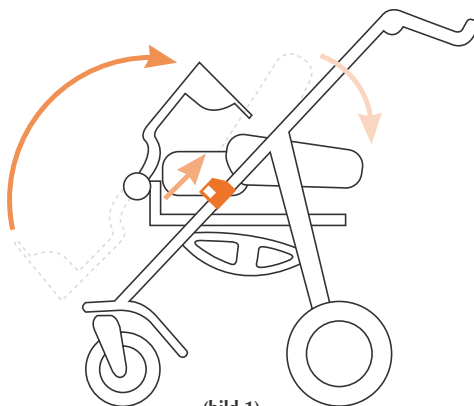

Uppfällning av sulky

Ta tag i handtaget på sulky och drag uppåt, se till att den främre delen på sulky vinklas ut. Dra i handtaget tills det härs ett klickande ljud. Det är låsstopp på båda sidorna av sulkychassiet. Är fotstödet infällt, vinkla ner det till önskat läge och skruva fast det i låst position.

För att få rätt position på ryggstödet se bruksanvisning för Jazz Easys sittenhet.

WARNING: håll chassiet nära marken, låt det inte falla.
Ha inte fotbromsen på, hjulen kan bli skadade.

