

# Meywalk® MK4



Gåstolen som ger en  
naturlig och trygg gång.

MAYDAY AID

MEYWALK®MK4 säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA  
Tel: 0300-56 97 00, Fax: 0300-56 97 01, info@maydayaid.se, www.maydayaid.se

CE

2014-05-07

# Meywalk® MK4

Naturlig och säker gång.

**Meywalk®MK4** är en modern gåstol för barn, ungdomar och vuxna. Flera nya, smarta funktioner har tillkommit efter önskemål från både användare och vårdpersonal. Förutom fjädringen i sidorören, har Meywalk MK4 även en dynamisk sadel som fjädrar mjukt i sidled. Sadeln följer bäckenets naturliga rörelsemönster vid gång. För ökad trygghet är bakåtspärr, riktningsspärr och släpbroms redan monterad i standardutförande.

**Meywalk®MK4** är enkel att justera och ställa in för att passa användaren och alla vardagsinställningar kan göras helt utan verktyg. Den öppna designen, liksom sitsens höj- och sänksystemet, gör att det är säkert för användaren att ta sig i och ur gåstolen. När hävbygeln på gåstolens främre del lösgörs från låsklämman, sänks hela sättenheten ner till en höjd motsvarande sitthöjden på en säng, stol eller rullstol. Användaren kan då lättare förflytta sig till gåstolen och får sedan hjälp med uppresningen då hävbygeln åter trycks ned. Belastningen för medhjälparen blir endast 1/3 av användarens vikt.

Gåstolen kan enkelt transporteras i större personbil.

## Stabil, trygg och smidig

Tiltfunktionen på sättenheten gör det möjligt att vinkla gåstolen till användarens kroppshållning för en bättre gång. Tack vare den stabila ramen, stora bakhjul och lättmanövrerade länkhjul fram, blir gåstolen både stabil, trygg och smidig att använda. Gåstolen kan användas både inomhus och utomhus på rent, jämnt och plant underlag.

Bålstödsring och fjädrar ingår i standardutförandet. Vid beställning ange storlek på bålstödsring och önskad färg på fjädrarna efter användarens vikt.

## Slitstark och tålig

Alla ramdelar är av stål för en stabil och tålig konstruktion. Färgen är pulverlackerad vilket ger en slitstark och tålig yta. Bålstödsringen och handbygeln är polstrad med skumgummirör av polyuretan, PUR, som är mjuk, behaglig och lätt att rengöra. **Meywalk®MK4** är testad och godkänd för användare upp till 130 kg.

## Fakta

	Mini	Small	Medium	Large
Artikelnummer	12000	13000	11200	11250
Längd	80 cm	85 cm	86 cm	98 cm
Bredd	56 cm	62 cm	62 cm	66 cm
Sadelhöjd*	28-52 cm	50-67 cm	61-85 cm	79-103 cm
Bålstödshöjd	55-77 cm	74-99 cm	103-137 cm	118-150 cm
Bakhjul	275 x 40 mm	275 x 40 mm	275 x 40 mm	275 x 40 mm
Framhjul	1150 x 32 mm	150 x 32 mm	200 x 30 mm	200 x 30 mm
Max belastning	80 kg	100 kg	130 kg	130 kg
Vikt	20 kg	25 kg	32 kg	34 kg
Ramfärg	Gul	Grön	röd/silver	svart/silver

\* vid belastning



CE

MEYWALK®MK4 säljs i Sverige genom:  
MAYDAY AID AB  
Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA  
Tel: 0300-56 97 00, Fax: 0300-56 97 01  
info@maydayaid.se, www.maydayaid.se

MAYDAY AID



Gåstolen är främst avsedd att användas inomhus på plan och slät yta men kan också användas ute på plan, torr mark.

## Tillbehör

- Bendelare
- Höjdreduceringsbeslag
- Lägre bygel
- Fotskyddsskenor
- Vinklad magplatta
- Höftstöd
- Tippstöd
- Limpsadel

