

# MINIWALK



Fjädrande gåstol för barn



MINIWALK säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA  
Tel: 0300-56 97 00, Fax: 0300-56 97 01, info@maydayaid.se, www.maydayaid.se



# MINIWALK

## Fjädrande gåstol för barn

Miniwalk är en fjädrande gåstol för barn som behöver stöd för att kunna komma upp och gå. Med rätt stöd kan barnet använda sina resurser för att utforska omgivningen på egen hand.

Miniwalk, gåstol för barn, finns i två storlekar. Storlek 1 för de små barnen som har börjat gå och upp till ca 4 år. Storlek 2 för barn i ungefärlig ålder 4-7 år. Vid utbyte av de två sidovingarna, kan man lätt ändra Miniwalk storlek 1 till storlek 2. På så sätt växer gåstolen med barnet.


Miniwalk levereras med sadel, bålstöd, fjädrar, länkhjul med avbärarhjul fram, massiva hjul bak och parkeringsbromsar.

## Anpassas lätt för olika behov

Miniwalk ställs in individuellt. Såväl bålstödsringens som sadelns höjd ställs in utifrån barnets mått. På sidovingarna finns linjaler som gör inställningen enkel. Handbygeln kan ställas i vinkel och djupled.

Miniwalk är enkel att ställa in och lätt att justera för varje barns behov. I Miniwalk får barnet en rak och naturlig gåställning så att skelett, muskler och ligament belastas rätt och minskar spasticitetet.

Bålstödsringen hjälper till att hålla upp överkroppen. Den finns i två storlekar samt i två olika modeller för att passa barnets bröstomfång. Sadeln ger stöd och möjlighet till en liten paus mitt i leken.

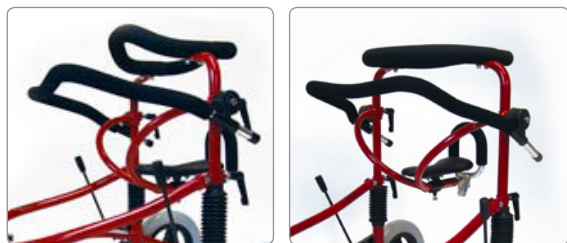

## Tekniska specifikationer

	Storlek 1	Storlek 2
Färg	Turkos	Röd
Art nr	106061	106062
Längd	74 cm	74 cm
Bredd	65 cm	65 cm
Sitthöjd	27-48cm	27-63 cm
Bålstödhöjd	52-75 cm	67-90 cm
Länkhjul fram, massiva	150x30 mm	150x30 mm
Bakhjul, massiva	250x50 mm	250x50 mm
Total vikt	15 kg	15 kg
Max belastning	40 kg	40 kg



Miniwalk kan lätt ändras från storlek 1 till storlek 2 genom att byta de två sidovingarna.



## Tillbehör

För barn som behöver extra stöd, kan Miniwalk utrustas med ett antal olika tillbehör.

Tippstöd  
Släpbroms  
Bakåtspärr  
Riktningsspärr  
Höftstöd  
Magplatta

Fotskyddsskenor långa  
Fotskyddsskenor korta  
Bendelare  
Limpsadel  
Stöbygel, monteras då sadel inte används.

Viktnpassade fjädrar i gåstolen ger barnet en mjuk och naturlig gång.

10-15 kg=grön fjäder  
15-20 kg=silvergrå fjäder  
20-25 kg=svart fjäder



MINIWALK säljs i Sverige genom:  
MAYDAY AID AB  
Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA  
Tel: 0300-56 97 00, Fax: 0300-56 97 01  
info@maydayaid.se, www.maydayaid.se

MAYDAY AID