

**MAYDAY AID**

## Montera regnskyddet på EIO vagnen

1. Packa upp det transparenta regnskyddet och håll ut det så att luckan hamnar ovanför sufflettens framkant




2. Trä regnskyddet under handtaget så att det täcker tygsufflettens bakkant.



3. Dra regnskyddets framkant över fotstödet på vagnen.



4. Sätt ihop kardborrebanden på sidan av regnskyddet som ligger över suffletten.

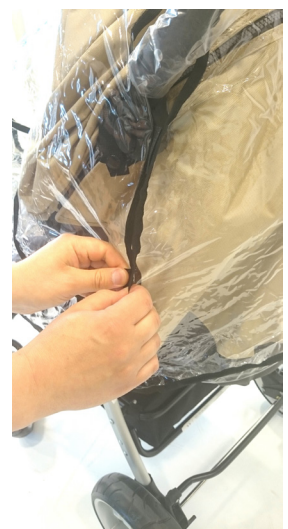

6. Kontrollera att luckan är öppen så att det kommer in frisk luft till barnet som sitter i vagnen.

