

Meywalk MK4 är en gåstol som finns i
fyra storlekar: Mini, Small, Medium och
Large

Storlek Mini, gul

Storlek Small, grön

Storlek Medium, röd

Storlek Large, svart

Standardutförande: Bålstödsring, sadel,
fjädrar, handtagsbygel, parkeringsbromsar,
avbärarhjul och massiva hjul.



Meywalk 2000, storlek Medium

Användningsområde

Meywalk MK4 är en gåstol som skall användas som stöd vid upprätt gående eller stående. Gåstolen kan användas både ute och inne. Gåstolen skall endast användas av en person åt gången och vara individuellt inställd i bålstöds- och sadelhöjd. Meywalk MK4 får inte användas att köra någon/något på.

Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

Se www.maydayaid.se



Viktigt att veta

Vid utomhusanvändning får aldrig brukaren lämnas ensam i gåstolen, en vuxen person måste alltid övervaka. Tänk på att ojämna mark kan orsaka att gåstolen välter eller rullar iväg.

Försök att förutse olycksrisker såväl i inomhusmiljö som utomhus!




Ta med i bil / Fäll ihop



Meywalk MK4 kan delas i två delar. Dra upp sättenheten som sitter fästad på de två vertikala rören ur den nedre chassidelen.

Sättenheten, övre delen, får inte placeras i nedre chassit om inte fjädrarna är på plats.

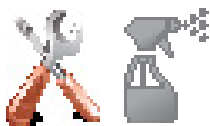

Skötsel / Underhåll

Runt hjul samlas mycket damm och hår, skruva av hjulen och ta bort smuts och damm regelbundet eller när gåstolen rullar trögt. Kontrollera alltid att hjulen sitter fast och att bålstöds- och sadelhöjd är placerad på rätt höjd för användaren. Använd aldrig en skadad eller defekt produkt.

Tvätta ren gåstolen med mjuk, fuktig trasa och milda rengöringsmedel t ex diskmedel. Kontrollera alltid att bromsar fungerar efter tvätt! Förvara gåstolen inomhus.

Mer information hittar du på www.maydayaid.se