


Bruksanvisning **Spjålsängen Lotte**

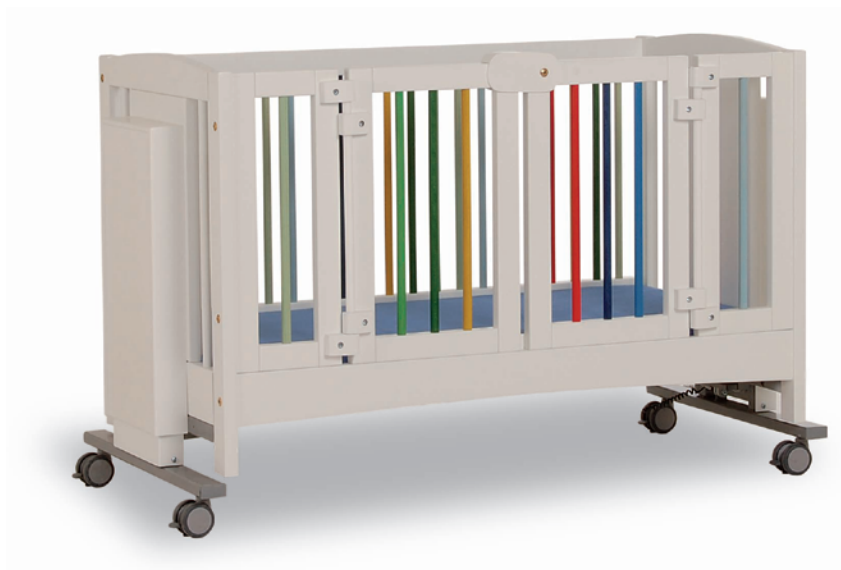

Tillhör säng med serienummer:



Denna bruksanvisning ger information om användningsområde, montering och skötselråd för spjalsängen Lotte.

Genom att läsa igenom bruksanvisningen och följa skötselråden, så hoppas vi att ni får glädje och nytta av sängen.

Innehållsförteckning

Användningsområde	3
Kontroll vid leverans	4
Monteringsanvisning	6
Sänggrindarna	12
Elektriskt styrsystem	13
Anvisning för manöverdosan	14
Rengöring och rekonditionering	15
Garanti	16
Teknisk data	17
Produktansvar MDR	17
Säkerhetsanvisningar	18
Kontaktinformation	20

Användningsområde

Spjäsängen Lotte är en spjäsäng och/eller vårdäng som kan användas till barn i åldersgruppen nyfödda, till ca 2-3 års ålder.

Sängen får endast användas av ett barn. Syskon och föräldrar får inte vara i sängen tillsammans med barnet. Sängen skall användas för att sova i. Sängen skall inte användas som lekplats för barnet om inte en vuxen finns i närheten.

De två grindarna på sängens långsida kan öppnas och stängas på ett enkelt men säkert sätt. Sängen kan höjas och sänkas för att underlätta för föräldrar med nedsatt rörlighet eller för annan vårdpersonal.



Kontroll vid leverans

Spjålsängen levereras i delar. Kontrollera att sängens alla delar finns med, samt förpackningen för eventuella skador innan den monteras. Nedan följer en beskrivning av de delar som medföljer i paketen, kontrollera gärna med bild 1.

Läs igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera sängen.

Verktyg som behövs vid monteringen är:

- Insexnyckel (5 mm)
- Stjärnskruvmejsel
- Skruvdragarbit/skruvmejsel torx nr 20

1. Hel långsida (1 st)
2. Gavel med lyft (2 st)
3. Grindlås (1 st)
4. Grind på långsida (2 st)
5. Underliggande balk (2 st)
6. Gängad tapp med skruvhattar (6 st)
7. Skruvar (8 st)
8. Skruvhattar (8 st)
9. Skruv 3 x 25 mm (6 st), torx nr 20
10. Insexnyckel (1 st)
11. Träpluggar (4 st)
12. Styrbox (2 st), bild 2

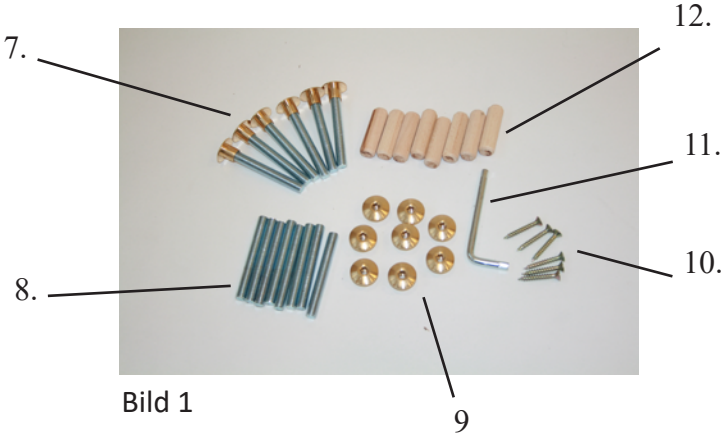
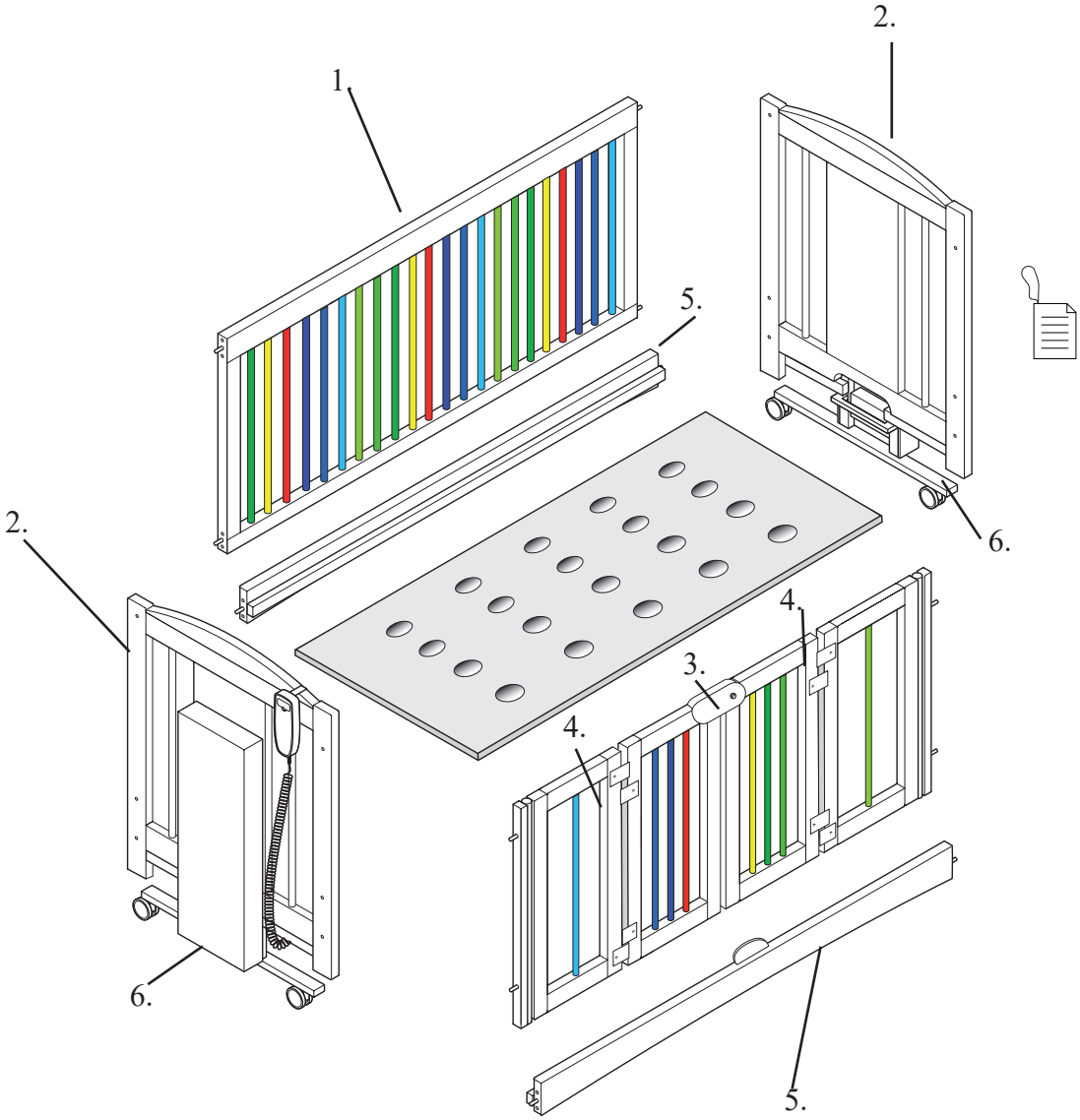


Bild 1

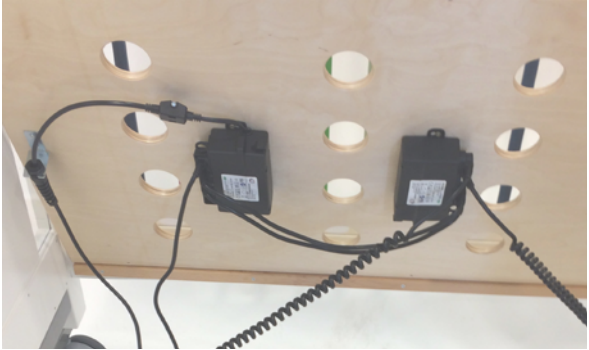


Bild 2

Monteringsanvisning

Två personer behövs vid montering av spjålsängen Lotte. Lägg ut samtliga delar på golvet. Skydda sängdelarna genom att placera dem på filtar eller mattor. Lås samtliga hjul under monteringen.

För in träpluggarna på den underliggande balkens kortsida, enligt bild 2.
Montera främre långsidans balk enligt bild 2.



Bild 2

För in skruvarna med skruvhattarna i de förborrade hålen på den vänstra gaveln och skruva fast, enligt bild 3.



Bild 3

Lägg de underliggande balkarna enligt bilden med bärlisten för sängbotten inåt och grindstoppet (A) mot sängens framsida.

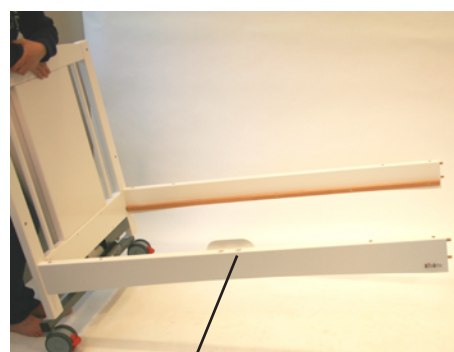


Bild 4

A

Montera bakre långsidan med spjälor, över den bakre balken, se bild 5.

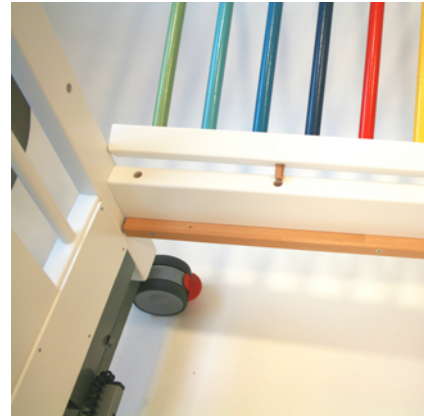


Bild 5

Skruva fast långsidan i sänggaveln, uppe och nere, se bild 6.



Bild 6

Skruva in skruvarna på underbalken och montera högra sänggaveln, enligt bild 7 och bild 8.



Bild 7

Matcha träpluggarna och skruvarnas förborrade hål på sänggaveln, se bild 8



Bild 8

Skruva på skruvhattarna på höger och vänstra sidan på gaveln. Skruva först i dem löst för att slutligen dra åt alla skruvar hårt. Se bild 9.



Bild 9

Placera sängbotten på sängens bärlister. Tänk på att de två förmonterade sängmotorerna skall hamna vid den bakre långsidan.



Bild 10

Börja med att plugga in högra sladden som utgår från höger kortsida, se bild 11 A (höger gavel i motorn). Montera därefter vänster sladd i yttersta kontakten i motorn, se bild 11 B.



Bild 11 A



Bild 11 B

Skruva fast kontaktskyddet, när alla sladdarna är monterade, med en stjärnskruvmejsel.



Bild 12

Skruva fast sängbotten i ramen.
Använd de sex skruvarna i de
förborrade hålen. Använd en
skruvmejsel/skruvdragare med
torx.



Bild 13

Tänk på att grindarna är rörliga när
de monteras. Stor klämrisk!

Håll fast grinddelarna vid
monteringen för att undvika
klämskador.



Bild 14

Skruva fast grinden i sänggaveln.
Använd medföljande insexnyckel,
se bild 15.



Bild 15

Testa åt vilket håll grinden öppnas innan den monteras fast i sängen, grindarna skall öppnas utåt.



Bild 16

Sätt fast grindarna enligt bild 17.



Bild 17

Skruva fast grindarna i sänggavlarna.

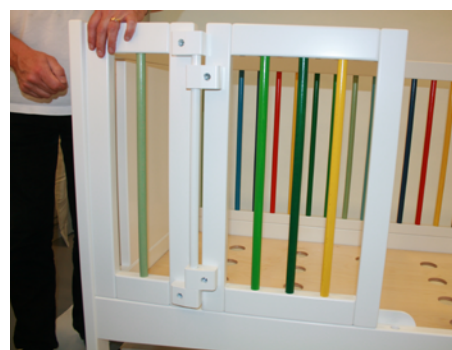


Bild 18

Öppna grindarna

1. Lyft upp grindlåset (A).
2. Lyft grinden rakt uppåt och öppna.



Bild 19

Stäng grindarna

4. Lyft grindarna rakt uppåt och stäng.
6. Fäll ner grindlåset.



Bild 20


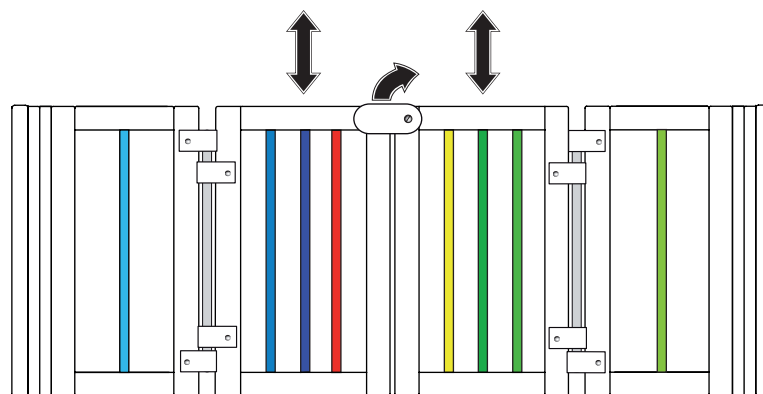


Bild 21

Elektriskt styrsystem

Det elektriska styrsystemet består av två boxar monterade på sängbottens undersida. Var noggrann med att montera sladdar på rätt sätt för att undvika skador på enheten, enligt bild 22.

1. Anslut lyftpelarnas, högra och vänstra sida, elkablar i A. Se sidan 9 för mer information.
2. Montera kontaktskyddet över kontakterna med hjälp av en stjärnskruvmejsel.
3. Anslut motorns kontakt i närmaste vägguttag, se D.

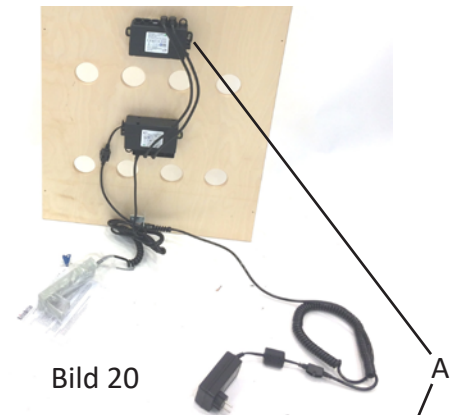

OBS! Drag alltid ur strömsladden innan förflyttning av sängen sker!

4. Lås upp manöverdosan, enligt "Anvisning för manöverdosan", sidan 14. Testa att höj- och sänk funktionerna fungerar innan sängen används för att sova i.

Var uppmärksam på att inte överskrida den maximala användningstiden för motorenheten. Efter två minuters användning måste enheten vara avstängd i minst 18 minuter.

OBS! Använd inte sängen om problem uppstår med det elektriska styrsystemet. Kontakta Mayday Aid AB omedelbart.

Anvisning för manöverdosan

Manöverdosans knapplås skall vara aktiverat, är manöverdosan inte används, för att förhindra skador och olyckor.

Lås upp manöverdosan genom att sätta den blå nyckeln i manöverdosans baksida och vrida nyckeln till symbolen med ett öppet lås.

Manöverdosan är nu redo att användas.

För att låsa manöverdosan, vrid den blå nyckeln till symbolen med ett stängt lås.

Manöverdosans knappar kan nu inte användas, denna inställning rekommenderas då småsyskon finns i närheten.

Testa sängens funktioner:

Höj upp sängen till max höjd.
Sänk sängen till lägsta höjd.

Öppna grindlåset genom att föra rundeln bakåt. Lyft därefter upp grinddörren. För bägge grindarna så brett isär, som det är möjligt, för information se sid 12.



Bild 23



Bild 24

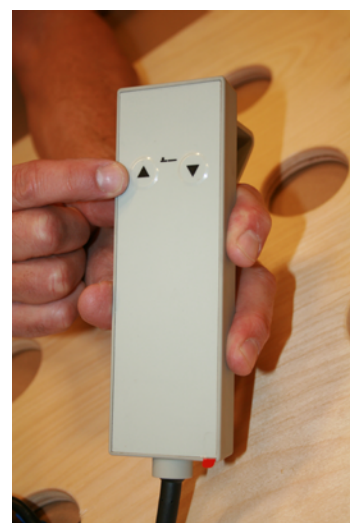


Bild 25

Rengöring och rekonditionering

VARNING!

Sängens elkontakt får inte vara ansluten till ett vägguttag vid rengöring.

Tvätta av sängen med flytande, neutrala rengöringsmedel, använd ett rengöringsmedel utan slipmedel.

Torka av med torr trasa. Vid behov kan desinfektionsprip användas.

Använd inte rengöringsmedel som innehåller syror, baser eller lösningsmedel som t ex aceton eller thinner.

Använd inte scotchsvamp eller andra hårda material som kan skrapa sönder lackfärgen.

Högtryckstvätt skall inte användas. Sängen får inte spolås eller läggas i vatten eller andra vätskor.

På en av lyftpelarna hittar man en märkningetikett, se nedan.

Observera bland annat följande:

- Sängen får endast användas inomhus.
- Sängen skall sänkas ner när ett barn är i sängen.
- Höjdjustering får endast göras av vuxen person

Rengöring av manöverdosa

Tvätta manöverdosan ren med fuktad trasa och rengöringsmedel. Utsätt inte manöverdosan för högtryckstvätt eller ångrengöring.

Rekonditionering fortsättning

Följande färger skall användas vid målningsförbättring.

RAL No	Färg
1023	Trafikgul
3000	Eldröd
5013	Koboltblå
5015	Himmelsblå
6027	Ljusgrön
6005	Mossgrön
6018	Gulgrön
6019	Grönvit
7037	Dammgrå
9016	Trafikvit

Garanti

Spjålsängen Lotte har 3 års garanti. Garantin gäller under förutsättning att rengöringsråden, rekonditionering- och säkerhetsanvisningarna följs och att sängen endast används till det sängen är avsedd för, se användningsområde sidan 3.

Fel, som omfattas av garantin, skall omedelbart meddelas till Mayday Aid AB.

Kontaktuppgifter finns på sista sidan.

Uppge alltid sängens serienummer. Numren finns på etiketten som sitter på sängen, se bild 26.

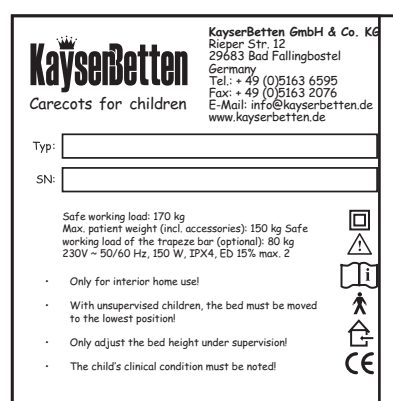


Bild 26

Teknisk data

Höjd inkl hjul	min 104cm	max 164 cm
Längd	141,5 cm	
Bredd	70 cm	
Bädd/madrass mått Vikt	60 x 120 cm	
(säng med lyftstativ)	100 kg	
Max brukarvikt	75 kg	
Ligghöjd med hjul	min 38 cm	max 98 cm
Grind och spjälhöjd hjul,	65 cm	
diameter	10 cm	
Max madrasshöjd	18 cm	
Driftsljud	< 50 dB	

Produktansvar och säkerhet

Sängen Lotte är en CE märkt produkt. Detta är en garanti på att sängen Lotte uppfyller alla gällande europeiska säkerhetskrav.

Företaget Kayserbetten GmbH försäkrar härmed, som producent med ensamt ansvar, att sängen Lotte är CE märkt enligt (EU) direktiv 2017/745 MDR om medicinsk utrustning i klass 1. Produkten får inte ändras, inga tillbehör eller reservdelar från någon annan tillverkare får monteras utan att CE märket tas bort och produktansvaret slutar att gälla.

Säkerhetsanvisningar

Spjålsängen måste stå på plant golv. Sängen måste vara utrustad med spjålskydd och madrass anpassad efter spjålsängens mått.

Barnet får ej lämnas ensamt i sängen då grindarna är öppna. Sängen måste vara i nedsänkt i dess nedersta läge om barnet ska krypa i eller ur på egen hand.

Var uppmärksam på att elsladdar placeras på ett sådant sätt att de inte kan komma i kläm eller skadas på annat sätt. Var noga med att inte utsätta det elektriska styrsystemet, sladdar och kontakter för fukt. Kontrollera regelbundet sladdarna för skador för att undvika kortslutning.

OBS! Drag alltid ur strömsladden innan förflyttning av sängen sker!



Bild 27

Tänk på att madrass, spjålskydd, kuddar, täcke, lakan, lekmobiler och kramdjur skall vara barnsäkra och fria från farliga kemikalier.

Sängen får ej användas till annat än vad som anvisats i denna manual. Endast originaldelar får användas.

Säkerhetsanvisningar forts.

Det är inte tillåtet att vistas eller förvara saker under sängen, då kan det elektriska styrsystemet kan skadas. Var särskilt observant om det finns små barn eller husdjur i närheten.

Låt inte barn leka med manöverdosan.

Låt aldrig barn klättra på sängen.

Var uppmärksam på klämriskn från grindar och lyftsystem när sängen används.

Låt hjulen vara låsta förutom då sängen behöver flyttas. Sängen är tung och bör lyftas av minst två personer.



När barnet är ensam i sängen måste:

1. grindarna vara stängda och låsta.
2. underredet vara i sitt nedersta läge.
3. manöverdosans knappar vara låsta.

Dra ur kontakten innan sängen flyttas.

Sängen bör kontrolleras en gång per månad.

Kontrollera:

- Sängens funktioner och utrustningen till det elektriska styrsystemet.
- Dra alla skruvar så att sängen är stabil.
- Sängbotten, så att inga sprickor eller liknande har uppstått.

Spjålsången Lotte

Såls i Sverige genom:

MAYDAY AID AB
Arendalsvågen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300-56 97 00
Fax 0300-56 97 01

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se



Producent:

KAYSERBETTEN GmbH & Co. KG
Rieper Strasse 12
D-29683 Bad Fallingbostel

Tel: +49 5163-6595
Fax: +49 5163-2076

info@kayserbetten.de
www.kayserbetten.de


Pflegebetten für Kinder