

Ibland är det svårt att bestämma mått och storlek på bålstödsring.

Lägg bålstödsringen på ett bord. Placera en tumstock på insidan av bålstödsringen och mät den inre bredden över till nästa sida, se bild.

Är måttet 21 cm är bålstödsringen ca 70 cm i omkrets

Är måttet 27 cm är bålstödsringen ca 90 cm i omkrets

Är måttet 32 cm är bålstödsringen ca 105 cm i omkrets

Är måttet 38 cm är bålstödsringen ca 120 cm i omkrets

Är måttet 40 cm är bålstödsringen ca 130 cm i omkrets



**Är du osäker på om bålstödsringen passar till en Miniwalk, Meywalk 2000 eller till en Meywalk MK4?**

Vänd bålstödsringen upp och ner, finns där fyra hål på undersidan passar bålstödsringen Miniwalk (70 +90 cm) eller Meywalk 2000.

Standard bålstödsringen är uppåtböjd på mitten, den andra modellen är helt rak. Tänk på att beställa rätt sidovingar till rätt storlek.

Finns där två hål centrerade på bålstödsringens framsida så passar den till en Meywalk MK4. Bålstödsring till MK4 finns i en modell.