



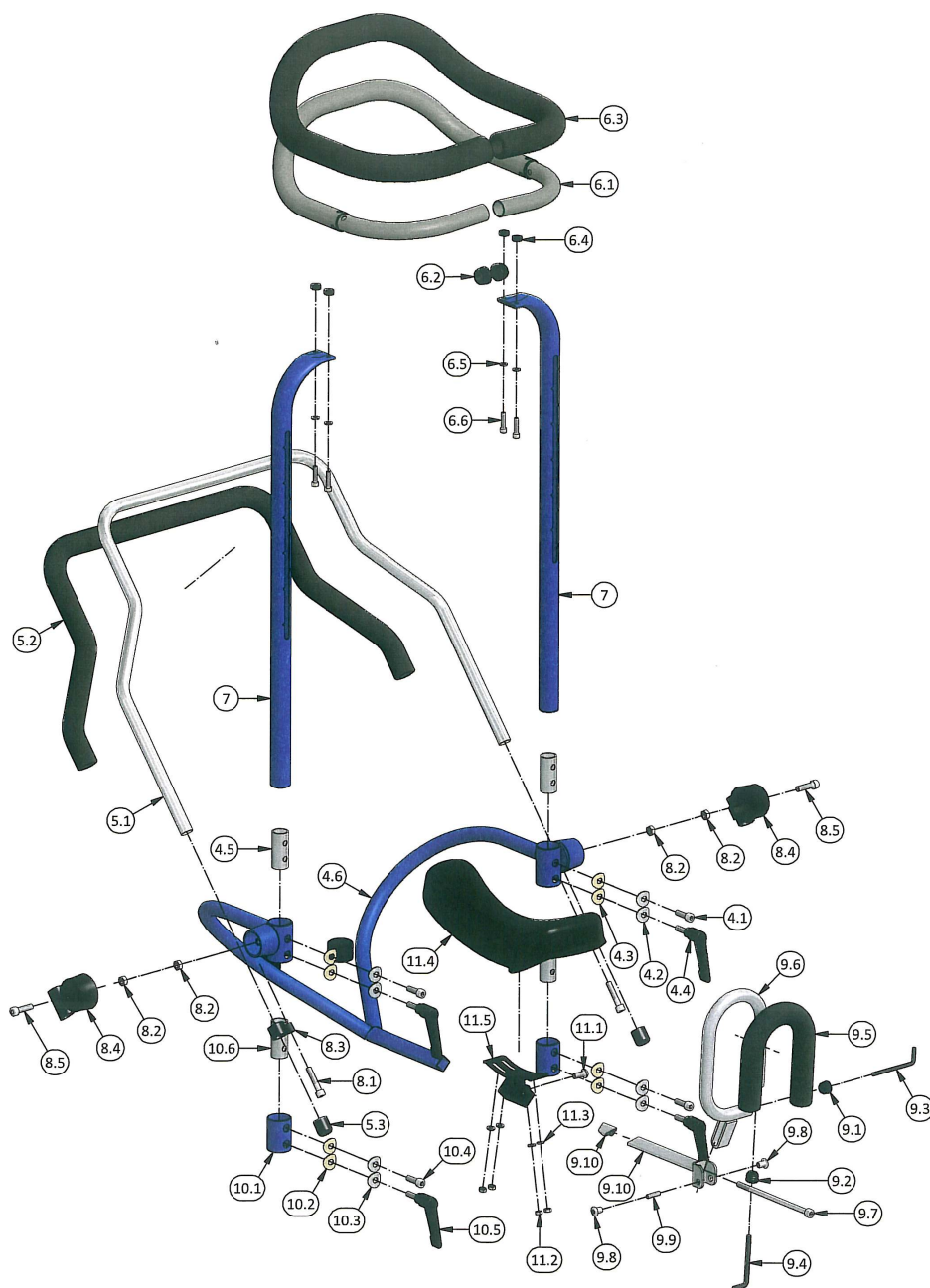

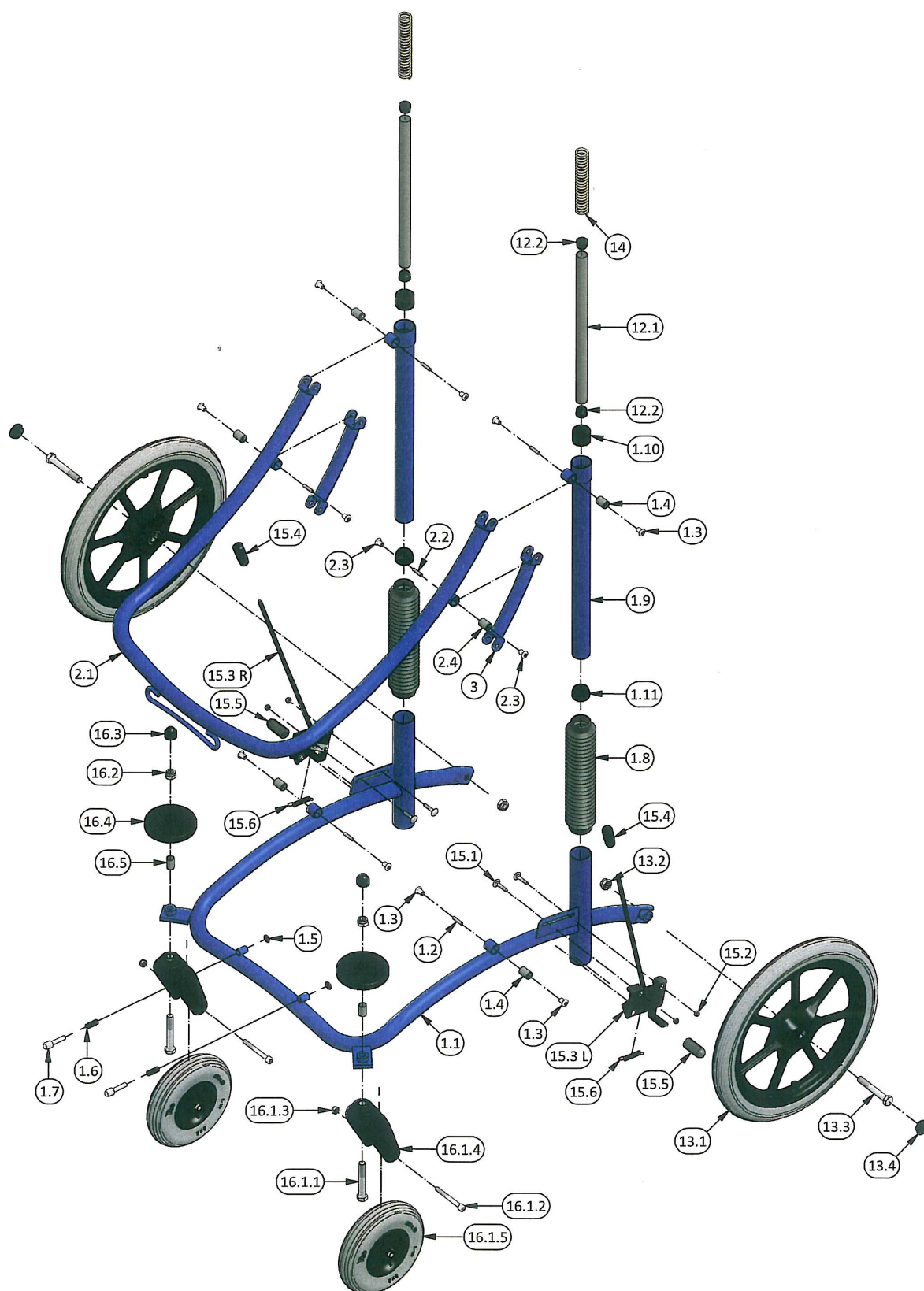

Pos.nr	Artikelnr	Artikel	Pos.nr	Artikelnr	Artikel
1:			6:		
1.1	104144	Stålrör Meywalk 2000, large/medium, blå	106100	Bålstödsring 70, std	
1.1	104400	Stålrör Meywalk 2000, small, grön	106101	Bålstödsring 70, rak	
1.2	40931	Gängad stång M6 * 24	104220	Bålstödsring 90, std	
1.3	41907	Mutterhuvud M6 15/ 8,8 * 15	104221	Bålstödsring 90, rak	
1.4	104040	Invändig bussning	104223	Bålstödsring 105, std	
1.5	42258	Låsbricka 8 mm	104224	Bålstödsring 105, rak	
1.6	49920	Tryckfjäder	104226	Bålstödsring 120, std	
1.7	104063	Låsskruv	104227	Bålstödsring 120, rak	
1.8	104085	Bälg	104320	Bålstödsring 130, std	
1.9	104171	Nedre ramrör, komplett, medium	104321	Bålstödsring 130, rak	
1.9	104170	Nedre ramrör, komplett, large	6.1	106024	Bålstödsring 70std utan skumrör
1.9	104483	Nedre ramrör, komplatt, small	106068	Bålstödsring 70 rak utan skumrör	
1.9.2	42735	Nylonbricka Ø35/Ø30,5 * 24	104184	Bålstödsring 90 std utan skumrör	
1.10	49684	Plastplugg 35 mm	104205	Bålstödsring 90 rak utan skumrör	
2:			104195	Bålstödsring 105 std utan skumrör	
2.1	104084	Hävarmsrör, medium	104208	Bålstödsring 105 rak utan skumrör	
2.1	104069	Hävarmsrör, large	104201	Bålstödsring 120 std utan skumrör	
2.1	104450	Hävarmsrör, small	104212	Bålstödsring 120 rak utan skumrör	
2.2	40931	Gängad stång M6 * 24	104218	Bålstödsring 130 std utan skumrör	
2.3	41907	Mutterhuvud M6 Ø15/Ø8,8 * 15	104107	Bålstödsring 130 rak utan skumrör	
2.4	104040	Invändig bussning	6.2	49675	Plastplugg 25 mm, svart
3:			6.3	106907	Skumrör till bålstödsring 70
3:	104082	Förbindelserör, medium, blå	104909	Skumrör till bålstödsring 90	
3:	104068	Förbindelserör, large, blå	104910	Skumrör till bålstödsring 105	
3:	104475	Förbindelserör, small, grön	104912	Skumrör till bålstödsring 120	
4:			104913	Skumrör till bålstödsring 130	
4.1	40433	Insexskruv M8 * 30	6.4	42715	Nylonbricka Ø15/Ø6,3 * 5
4.2	104160	Stålbricka M8	6.5	42106	Platta M6 Ø12/Ø6,4 * 1,60
4.3	42222	Nylonplatta Ø24/Ø8,4 * 2,00	6.6	40423	Insexskruv CH M6 * 25 mm
4.4	49904	Låsvred M8	7:		<i>För artikelnummer och priser till sidovingar se prislistan</i>
4.5	104135	Inre justeringsrör	8:	104098	Utvändig kon, komplett
4.6	104139	Sadelbygel, medium/large, blå	8.1	40435	Insexbult M8 * 40
4.6	104415	Sadelbygel, small, grön	8.2	41108	Mutter M8
4.6	104416	Sadelbygel, small grön (mindre avstånd)	8.3	104057	Låsbeslag för handbygel
5:	104039	Handbygel, komplett, medium/large	8.4	51167/51168	Utvändig kon
5:	104422	Handbygel, komplett, small	8.5	40434	Insexbult M8 * 35
5.1	104939	Handbygel utan skumrör medium/large	9:	104169	Rumpstopp med fäste
5.1	104420	Handbygel utan skumrör small	9.1	100001	Plastplugg
5.2	104900	Skumrör till handbygel	9.2	100001	Plastplugg
5.2	106900	Skumrör till handbygel, small	9.3	49005	Insexnyckel 5 mm
5.3	49619	Plastplugg 19 mm	9.4	49006	Insexnyckel 6 mm
			9.5	104901	Skumrör till rumpstopp
			9.6	104657	Rumpstopp
			9.7	104190	Insexskruv M8 * 160mm
			9.8	41907	Mutterhuvud M6 Ø15/Ø8,8 * 15
			9.9	40931	Gängad stång M6 * 24
			9.10	51209/51210	Expanderbult till rumpstopp

Pos.nr	Artikelnr	Artikel
10:		
10.1	104146	Yttre justeringsrör, blå
10.1	104405	Yttre justeringsrör, grön
10.2	42222	Nylonbricka Ø24/Ø8,4 * 2,00
10.3	104160	Stålbricka M8
10.4	40433	Insexbult M8 * 30
10.5	49904	Låsvred M8, bult 25 mm
10.6	104135	Inre justeringsrör
11:	104290	Sadel med fäste, medium/large
11:	106065	Sadel med fäste, small
11.1	40432	Insexbult M8 * 2
11.2	41356	Mutter
11.3	42106	Bricka M6 Ø12/Ø6,4 * 1,60
11.4	45000	Sadel
11.4	106056	Sadel, small
11.5	104061	Sadelbeslag, medium/large
11.5	106044	Sadelbeslag, small
12:	51212	Avståndsrör, large
	51211	Avståndsrör, medium
	104408	Avståndsrör, small
12.2	49672	Plastplugg 22 mm, svart
13:		
13.1	112400	Bakhjul, massivt
13.2	41312	Mutter M12
13.3	40168	Bult M12 * 80, 8.8
13.4	49518	Plastbricka
14:	104291	Fjäder vit, 20-40kg
	104292	Fjäder gul, 40-60kg
	104293	Fjäder blå, 60-80kg
	104294	Fjäder röd, 80-100kg
15:		
15.1	40323	Bult M6 * 30
15.2	41306	Mutter M6
15.3L	110901	Broms komplett, vä, medium/large
15.3R	110900	Broms komplett, hö, medium/large
15.3L	104406	Broms komplett, vä, small
15.3R	104407	Broms komplett, hö, small
15.4	49914	Bromshandtag
15.5	49926	Bromskloss
15.6	49941	Bromsfjäder
16:		
16.1	112016	Framhjul, komplett, medium/large
16.1	112151	Framhjul komplett, small
16.1.1	40168	Bult M12 * 80, 8.8
16.1.2	40449	Bult CH M8*70
16.1.3	41308	Låsmutter M8
16.1.4	49554	Hjulgaffel 200 * 50 mm, svart, medium large
16.1.4	49530	Hjulgaffel 150 * 32 mm, svart, small
16.1.5	49555	Framhjul 200 * 50 mm, svart, medium/large
16.1.5	112150	Framhjul 150 * 32 mm, svart, small
16.2	41312	Låsmutter 12
16.3	49612	Plasthatt
16.4	49921	Skyddshjul Ø100/Ø15,5 * 20,5
16.5	104041	Avståndsrör