



Meywalk 2000 Small



Meywalk 2000 Medium



Meywalk 2000 Large

Rekonditioneringsanvisning för gåstolarna: Meywalk 2000, Small, Medium, Large

Observera!

Gåstolarnas utseende kan variera beroende på modell, storlek och tillbehör. På nedre ramen, vid bakhjulet sitter en etikett med benämning och serienummer.



* Se Lathund på www.maydayaid.se/meywalk,-gastol.aspx för att mäta storleken på bålstödsringen.

Rengöring av gåstolen i hemmiljö

Tvätta av gåstolen med rengöringsmedel, använd ett rengöringsmedel utan slipmedel. Torka av med torr trasa. Vid behov kan också desinfektionsprip användas.

Använd ej scotchsvamp eller andra hårda material som kan skrapa sönder lackfärgen.

Använd gärna dagligen tryckluft för att snabbt få bort grus och damm från gåstolen. Högtryckstvätt skall inte användas direkt på hjullager.

Rengöring av gåstolen på hjälpmedelscentral

Tvättkabinett:

Meywalk 2000 kan rengöras i tvättkabinett med program innehållande tvätt i 60°C under 3 min och tvätt i 90°C under 1 min med en normal tvättcykel på ca 25 - 45 minuter.

Eftertorka gåstolen genom att dela /lyfta av sitheten och placera de öppna rörändarna neråt så att avrinning sker.

Montera ihop gåstolen

Meywalk 2000 har två avståndsrör som först skall placeras i var sitt nedre sidorör, ovanpå läggs fjädern innan ihopmontering.

Rekonditioneringsanvisning för gästolarna: Meywalk 2000, Small, Medium och Large

Byte av skumrör

Byte av skumrör på bålstödsring, handtagsbygel och rumpstopp på meywalk.

Allt skadat eller torkat skumrör skall bytas ut mot nytt, se reservdelar för respektive storlek och modell.

Montera av respektive del från gästolen.

Avlägsna alla gamla rester. Använd tryckluft för att trycka på det nya skumröret. Talk på insidan av skumröret kan underlätta vid byte.

För att undvika hårt slitage på skumröret på bålstödsringen, rekommenderar vi att montera på konstläderöverdrag på bålstödsring och handtagsbygel, se tillbehör på: www.maydayaid.se.



Byt ut

Delar som spruckit, fått rostskador eller skadats skall omedelbart bytas ut, originaldelar skall alltid användas. Önskar man bättre på lackytan med samma färg som på gästolsramen kan detta beställas.

På ramen skall det finnas en etikett med följande information:

*Denna produkt säljs i Sverige genom
Mayday Aid AB
Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA*

Gör rent länkhjulen:

Runt länkhjulen samlas mycket damm, hår mm.

Smutsen gör rullstolen trög att köra.

Tänk på att ta bort/ rengöra länkhjulen ofta.

Gör så här:

Skruva av länkhjulen från gaffel.

Borsta rent.

Montera tillbaka hjulet.

Kontrollera att hjulet rullar lätt framåt.



Kontrollera innan användning att:

- Tippstöden fungerar och är rätt placerade i höjd.
- Fram och bakhjulen rullar lätt.
- Hjulen inte är sönder eller slitna.
- Gästolen rullar rakt då den skjuts framåt.
- Parkringsbromsarna fungerar.
- Hävbygeln sänker sadeln och att sittenheten kan låsas fast i uppfällt läge.

