


Rekonditioneringsanvisning för sängen Lotte

Produktbeskrivning:
spjålsäng för barn,
elektrisk höj- och sänkbar

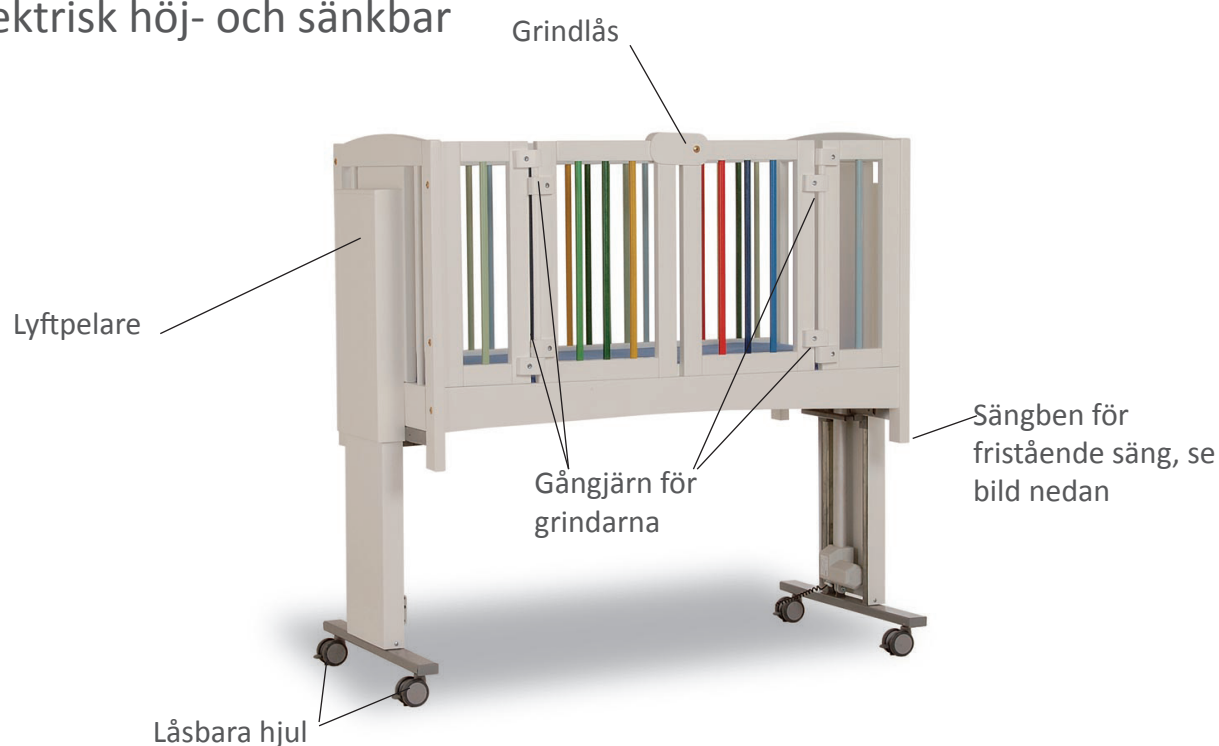

Observera!

Sängen Lottes utseende kan variera beroende på modell och tillbehör. På nedre ramen, vid bakhjulet sitter en etikett med benämning och serienummer.



Rengöringsinstruktioner

WARNING!

Sängens elkontakt får absolut inte vara ansluten till ett vägguttag vid rengöring.

Tvätta av sängen med flytande, neutrala rengöringsmedel, använd ett rengöringsmedel utan slipmedel.

Torka av med torr trasa. Vid behov kan desinfektionsprens användas.

Använd inte rengöringsmedel som innehåller syror, baser eller lösningsmedel som t ex aceton eller thinner. Använd inte scotchsvamp eller andra hårda material som kan skrapa sönder lackfärgen.

Högtryckstvätt skall inte användas. Sängen får inte spolås eller läggas i vatten eller andra vätskor.

På en av lyftpelarna hittar man en märkningetikett, se nedan. Observera bland annat följande:

- Sängen får endast användas inomhus.
- Sängen skall sänkas ner när ett barn sover eller befinner sig i sängen.
- Höjdjustering får endast göras av vuxen person

På sänggramen skall det finnas en etikett med följande information:

**Denna produkt säljs i Sverige genom
Mayday Aid AB
Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA**

Beställ ny om denna saknas!

Rengöring av manöverdosa

Tvätta manöverdosan ren med fuktad trasa och rengöringsmedel. Utsätt inte manöverdosan för högrtryckstvätt eller ångrengöring.

Gör rent sänghjulen:

Runt hjulen samlas mycket damm, hår mm. Smutsen gör att hjulen / sängen rullar trögt och ojämnt.
Tänk på att rengöra ofta.

Kontrollera innan återanvändning att:

- Alla skruvar är åtdragna.
- Sängbotten är hel och sitter fastskruvad i ramen.
- Grindarna går att öppna och stänga.
- Grindlåset fungerar.
- De fyra hjulen rullar och går att låsa.
- Alla spjälor sitter fast förankrade i ramen.
- Lyften och manöverdosan fungerar



KayserBetten
Pflegebetten für Kinder