




Sprängkiss spjålsång LOTTE

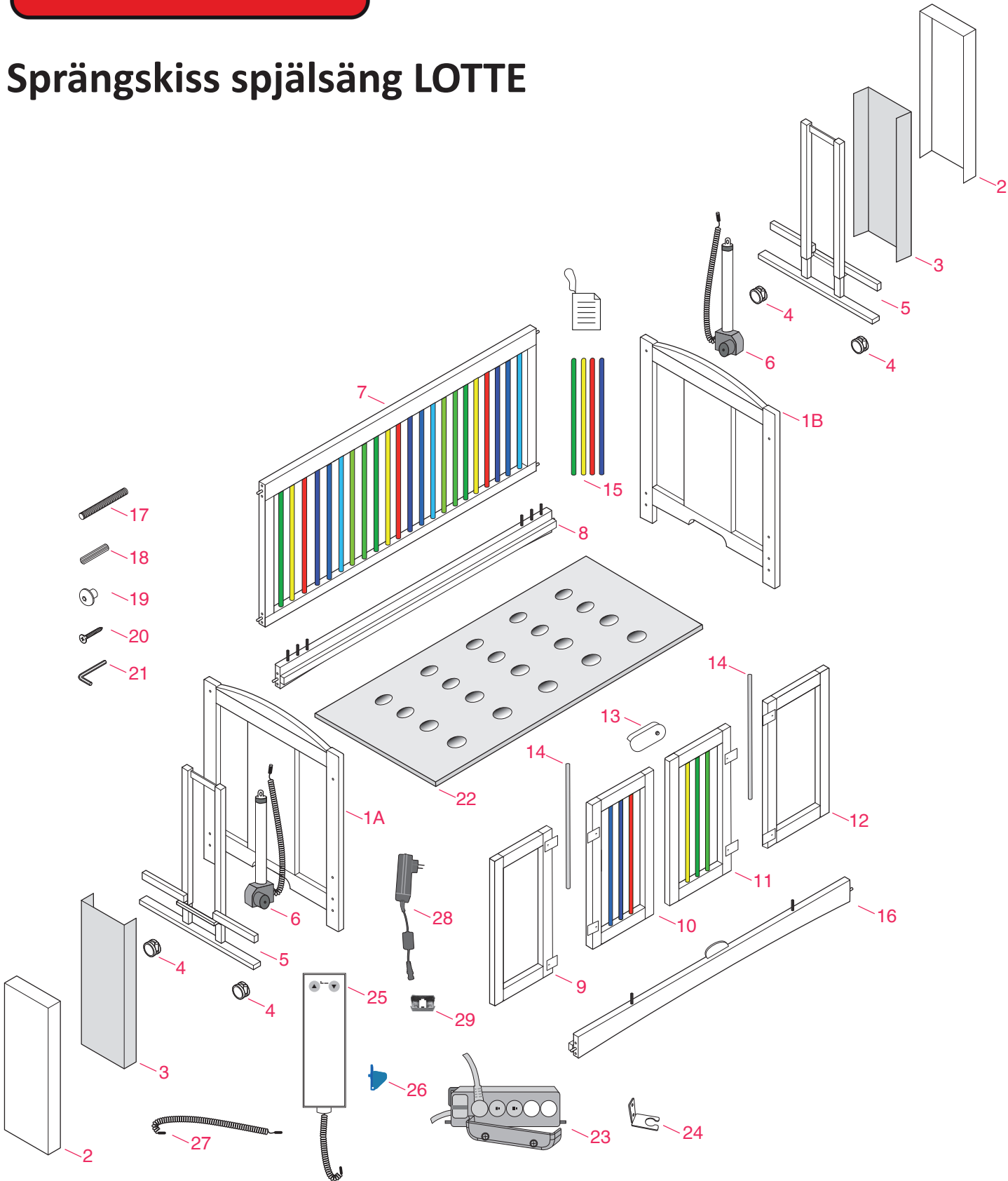

Reservdelsprislista 2015.11.01 - Spjålsäng LOTTE 120 x 60 cm

Pos.	Gavlar	Antal	Artikelnummer
1A	Sänggavel vänster	1	MA901203
1B	Sänggavel höger	1	MA901204
2	Skyddskåpa i trä	2	901788 / 11884
3	Metallkåpa i trä	2	901045 / 10231
4	Hjul 10 cm ø	4	80290 / 11727
5	Lyft ställning	2	901205
	Baksida		
7	Hel långsida med spjålor	1	MA901206
8	Underliggande balk, bak	1	MA901207
	Grinddelar		
9	Fast sidodel till grind, vä	1	MA901208
10	Grind, vä	1	MA901209
11	Grind, hö	1	MA901210
12	Fast sidodel till grind, hö	1	MA901211
13	Grindlås	1	MA901212
14	Gångjärnsstag i metall	2	901374
15	Spjåla, ange färg		900807
16	Underliggande balk, fram	1	MA901213
	Beslag		
17	Gängad tapp 118 x 65mm	14	901832 / 10342
18	Träplugg 10 x 30	4	71829 / 11669
19	Skruvhatt, mässing	14	20023 / 10358
20	skruv 3.5 x 30	6	901308 / 10146
21	Sexkantnyckel	1	20026 / 10359
	Sängbotten		
22	Bottenplatta i trä med ventilationshål	1	MA901214
	Elektriska komponenter		
6	Lyftpelare med motor	2	451860 / 12009
23	Styrsystem med kontaktskydd	1	500463
24	Vinkelfäste	1	900286 / 10330
25	Manöverdosa	1	500495/ 901217
26	Knapplås till manöverdosa	1	HS key 901867
27	"Telefon"sladd	1	500878 / 901580 / 12021
28	Strömsladd	1	500665 / 901370 / 12012
29	Sladdhållare, svart	1	400041 / 12025