

TA BORT SÄKERHETSREGLN

A. Dra ut spärren med röd kula på vänster och höger sida.



B. Lyft ner säkerhetsregeln.



ÖPPNA GRINDAR

1. Håll låsspärren nedtryckt.

2. Skjut bort låsspärren på grindens övre del.

3. Skjut upp låsregeln på grinden och öppna.

4. För grindarna åt sidan, låt grindens framkant löpa i nedre skenan.



STÄNGA GRINDAR

1. Skjut upp låsregeln och tryck grindsidan mot sängen.



2. Skjut ner låsregeln när låsregeln hamnat över grindens skena.



3. Håll låsspärren nedtryckt.

4. Skjut in låsspärren på grindens övre del.



SÄTT PÅ SÄKERHETSREGELN

A. Lyft upp och häng på säkerhetsregeln.



B. Tryck in spärren med röd kula på vänster och höger sida.

