

Bruksanvisning **Blue Wave**



MAYDAY AID

 **rifton.**

Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna hoppas vi att ni får stor glädje av badstolen.

Bruksanvisningen innehåller både handhavandeinformation till användaren och information om teknisk service till personal på exempelvis Hjälpmiddelscentralen.

Bruksanvisningen gäller från årsmodell 2005 och tillsvidare.

Innehållsförteckning

Allmän information	3	Bålbälte	10
Användningsområde	3	Huvudstöd	11
Garanti och hållbarhet	4	Benremmar	11
Service och reparationer	4	Storleksguide	11
Blue Wave - Introduktion	5	Underhåll och skötsel	12
Allmänna säkerhetsinstruktioner	6	Teknisk information	12
Kontroll och montering vid leverans	7	Tillbehör: Badkarsunderrede	13
Höjdinställning av benstöd	8	Duschunderrede	13
Justera sättenheten	8	Montering av badstol på underrede	13
Badstolens klädsel	9	Teknisk data	14
Standardklädsel	9		
Mjuk klädsel	10		

MAYDAY AID AB

Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300-56 97 00
Fax 0300-56 97 01

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se

Allmän information

Blue Wave är en badstol för barn och unga med maxlängd ca 170 cm, maxvikt 73 kg.

Blue Wave används vid bad i badkar eller i dusch. Badstolen kan med fördel användas med tillhörande badkars- eller duschunderrede.

Blue Wave finns i tre storlekar.

Badstolen Blue Wave ger både den som badar och den som hjälper till, en bättre och säkrare arbetssituation och en tryggare bad- och duschmiljö.

Det är viktigt att ständigt se över badstolen, så att den fungerar optimalt. Badstolen kan ställas in individuellt utan verktyg och har inga skruvar som behöver kontrolleras. För att undvika skador eller felanvändning ber vi dig läsa igenom följande instruktioner och anvisningar noga.

Om du har frågor eller undrar över något är du alltid välkommen att ringa eller skriva till oss, våra kontaktuppgifter hittar du på sidan 2.

Vi hoppas du kommer att bli riktigt nöjd med badstolen Blue Wave.

Användningsområde

Badstolen är bekväm, enkel att justera och tar liten plats då den inte används. Badstolen skall användas för att sitta i vid bad. Badstolen får bara användas av en person åt gången.

Badstolen kan ställas direkt i ett badkar men kan också monteras på ett badkarsunderrede för att höjas upp från badkarsbotten.

Badkarsstolen kan också monteras på ett duschunderrede med hjul, för att underlätta vid dusch.

Blue Wave skall användas som duschstol av barn, ungdomar som har problem med att sitta eller stå på grund av muskelsvaghet eller andra funktionsnedsättningar i extremiteterna.

Huvudstöd, bålbalten och benbalten hjälper till att ge stöd och stabilitet.

Blue Wave får endast användas under övervakande av en vuxen person.

Produktansvar och säkerhet

Badstolen Blue Wave är en CE märkt produkt. Detta är en garanti på att Badstolen Blue Wave uppfyller alla gällande europeiska säkerhetskrav. Företaget RIFTON[®] försäkrar härmed, som producent med ensamt ansvar, att Badstolen Blue Wave är CE märkt enligt direktiv 93/42/EEC om medicinsk utrustning i klass 1. Badstolen Blue Wave har en livslängd på 5 år vid normalt användande.

Produkten får inte ändras, inga tillbehör eller reservdelar från någon annan tillverkare får monteras utan att CE märket tas bort och produktansvaret slutar att gälla.

Garanti och hållbarhet

Garanti gäller endast då produkten används enligt denna bruksanvisning vilken följer producentens rekommendationer.

Badstolen Blue Wave har 5 års garanti på ramen. Garanti gäller då badstolen Blue Wave förvaras och används inomhus samt att underhåll och skötselanvisningarna efterföljs.

Service och reparationer

Service och reparationer på Badstolen Blue Wave skall endast utföras av behörig personal som t ex hjälpmedelstekniker eller representanter från företaget MAYDAY AID AB.

Vid montering och justering av tillbehör behövs inga verktyg.

Tänk på miljön, spara gärna denna bruksanvisning.


Blue Wave - Introduktion

Blue Wave finns i storlekarna small, medium och large.

Badstolen är tillverkad för att underlätta för barn och unga som behöver stöd för att kunna bada eller duscha på ett säkert sätt. Blue Wave får endast användas inomhus. Huvudstöd, bålbalten och benbalten ingår alltid. Mer information om klädsel finner du på sidan 9 och 10.

Standardutförande

1. Ryggstöd
2. Huvudstöd
3. Bålstödsbälte/ höftbälte
4. Sits
5. benbalten
6. Spak för sittvinkel
7. Bakre benstöd
8. Främre benstöd

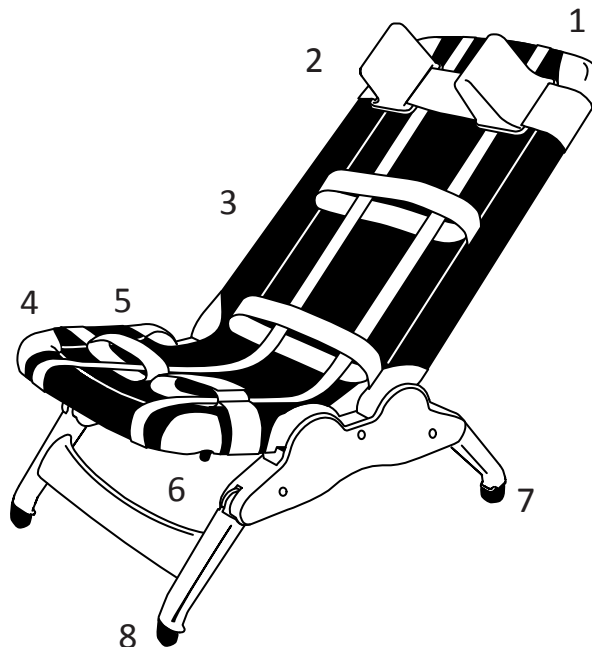

Blue Wave erbjuder två olika klädsel, standard eller mjukt. Man behöver inga verktyg för att ändra höjden på benstöden eller vinkeln på sits och rygg. Badstolen är lätt att fälla ihop och ta med sig, hänga på väggen eller ställa undan då den inte används.

Lämna aldrig någon ensam som sitter i badstolen Blue Wave!

Allmänna säkerhetsinstruktioner

Läs hela bruksanvisningen innan du använder Badstolen Blue Wave. Lär dig funktionerna och hur du hanterar produkten, öva gärna praktiskt att vinkla benstöd och sättenheten.

Som förälder eller annan målsman är du ansvarig för säkerheten omkring ditt barn. Säkerheten kan äventyras om du inte följer instruktionerna i bruksanvisningen. Många oväntade situationer kan dyka upp som inte kan förutses och därför inte beskrivs i bruksanvisningen. Vi ber er därför att alltid vara försiktiga och informera alla personer som finns runt brukaren, som använder sig av hjälpmedlet och de olika tillbehören, om hur produkten fungerar och skall användas.

Kontakta oss gärna för mer information eller om det finns några oklarheter i bruksanvisningen, se sid 2 för kontaktinformation.

Viktigt!

Badstolen är avsedd för en person att sitta i vid bad eller dusch. Följ alltid längd- och viktrekommendationerna, se sid 14.

Gör alltid en bedömning om det föreligger någon tipprisk om brukaren har kraftiga, ofrivilliga rörelser eller svår spasticitet.



Bild 1

Kontroll vid leverans

I originalförpackningen finner du följande vid leverans:

- Badstol med klädsel och ihopfäll-
da benstöd. Obs! Huvudstödet är
placerat på ryggstödet baksida vid
transport, montera enligt bild 2.
- Ev underrede enligt beställning
- Bruksanvisning



Bild 2

Varning!

Ta bort allt förpackningsmaterial som skyddat under transport.
Tänk på att plastpåsar och liknande kan vara livsfarligt för små barn att
leka med. Kvävningrisk!

Badstol, ihopfälld

När badstolen inte används kan den fällas
ihop och hängas på väggen, se bild 3.



Bild 3

Höjdställning av benstöden

Både badstolen och badkarsunderredet har ben som kan ställas i olika vinklar, ju rakare (vertikal) desto högre höjd. Gör som följande:

1. Ta tag i det horisontella röret mellan benen, drag försiktigt ut från stolen.
2. Roterar benstödet neråt eller uppåt.
3. Tryck in benen i önskad position.



Bild 4

Badstolen blir som lägst (och tar minst plats) då benen monteras så plant, horisontellt, som möjligt, se bild 7.

Viktigt!

Kontrollera noga att benen är fixerade på plats innan någon skall använda badstolen.

Justera sittenheten

Både sitsen och ryggstödet kan vinklas för att ge så optimal sittställning som möjligt. Gör följande:

1. Dra de röda låsspakarna A, mot dig, den finns på vardera sida om sitsen.
2. Ställ sitsen i önskad position.
3. Släpp de röda låsspakarna, kontrollera att sitsen fastnar i önskat läge.

En del barn tycker inte om att sitta kvar i stolen då man justerar sittvinkeln. Gör gärna inställningarna innan badstolen skall användas.



Bild 5

Badstolens klädsel

Standardklädsel

Standardklädseln är tillverkad av förstärkt, glesvävt tyg i vinyl. Vattnet rinner lätt igenom det relativt glesvävda tyget och klädseln torkar snabbt, se bild 6.

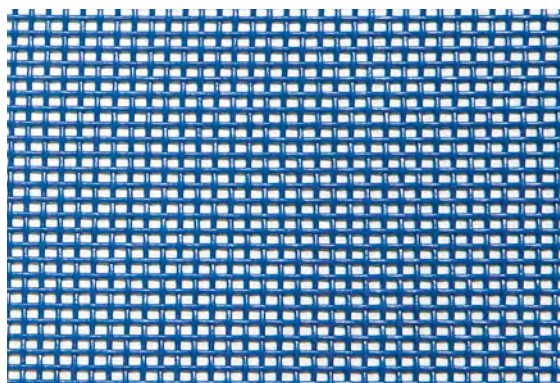


Bild 6

Med standardklädseln ingår två bälten fastsatta på ryggstödet. Ett bälte skall sitta runt bålen, det andra bältet skall sitta runt midja/höft, se bild 7.

Kontrollera att bältena sitter bekvämt och inte ger röda märken eller irriterar huden.



Bild 7

På sitsen sitter två bälten för att ge stöd och stabilitet runt benen.

Önskar man en mer abducerande sittställning kan man ta bältet runt benet och därefter fästa ihop bältena under sitsen, se bild 8.

Alla bälten som inte används kan enkelt monteras av från badstolen.



Bild 8

Mjuk klädsel

Den mjuka klädseln är tillverkad av vävd polyestertyg. De olika bälten är av nylon med kardborreband för fastsättning, se bild 9.



Bild 9

Bålbälte

I den mjuka klädseln ingår ett bålbälte på storlekarna small och medium samt två bålbälten på storlek large, med dubbla funktioner. Det "inre" bältet sätts fast runt brukarens bål, se bild 10.



Bild 10

De yttre remmarna kan därefter sättas fast på var sida för att ge stabilitet i sidled beroende på hur mycket stöd som behövs, se bild 11.



Bild 11

Huvudstöd

Huvudstöd ingår i standardutförande och medföljer alltid vid leverans. Notera att huvudstödet är monterat på ryggstödet baksida vid leverans och skall flyttas till ryggstödet framsida innan badstolen kan användas, se bild 12.

Skjut huvudstödet sidostöd in eller ut på bältet för att passa huvudets bredd. Huvudstödet kan ställas i höjd med kardborreknäppningen på ryggstödet.



Bild 12

Benremmar

Benremmarna hjälper till att fixera barnens ben. Kardborreband gör det enkelt att justera remmarna till varje barns individuella storlek, bild 13.



Bild 13

Storleksguide

Mät brukaren liggande. Mät hela längden.

Storlek	small	medium	large
Längd	50 - 91 cm	81 - 127 cm	117 - 173 cm

Tänk på att barn växer och välj hellre den större storleken när det är möjligt. Kontrollera att maxbelastningen inte överskrids.

Lämna aldrig någon som sitter i badstolen Blue Wave utan uppsikt!

Vardagligt underhåll och skötsel

Tvättråd klädsel

Det är enkelt att ta av klädseln. Börja med att vinkla upp ryggen och sitsen, se bild 14.

Lossa först klädsel från sitsen, därefter från ryggen.

Klädseln kan tvättas i maskin 70°C.

Sätt ihop alla kardborreband innan klädseln läggs i maskin.

Torktumla på låg temperatur.

Använd rengöringsmedel utan blekningsmedel.



Bild 14

Tvättråd badstolsram, badkarsunderrede och duschunderrede

Tvätta av ram och underredet med vatten och rengöringsmedel. Undvik slipmedel, blekningsmedel, skurborstar, Swinto och dylikt som kan skada ramens yta.

Badstolen och badkarsunderredet kan också göras rent i en autoklav, vid max 75°C samt i tvättkabinett (gäller ej standardklädsel). Se detaljerade anvisningar i dokumentet Rekonditioneringsanvisning.

Kontroll av funktion

Badstolen, badkarsunderredet och duschunderredet bör kontrolleras regelbundet av föräldrar eller omsorgspersonal i samband med användning.

Kontrollera klädseln för revor i tyg och hållor. Byt ut trasig klädsel direkt, eftersom det annars kan finnas risk för personskada.

Kontrollera att vinklingsfunktionen i rygg, sits och ben fungerar.

Om duschunderrede används, kontrollera att hjulen rullar fritt och att bromsarna fungerar. Hjulen bör rengöras från hår, tvålorester och dylikt varje vecka. Hjulen rengörs bäst genom att spruta in vatten i hjulet från undersidan.

Vid regelbunden kontroll och rengöring i samband med användning, förlängs produkternas hållbarhet. Badstolen och dess tillbehör är konstruerade så att inga skruvar behöver kontrolleras och dras åt.

Läs dokumentet Rekonditioneringsanvisning Badstol Blue Wave för ytterligare rekommendationer om rengöring och underhåll av badstolen och dess tillbehör.

Tillbehör:

Badkarsunderrede

Badkarsunderredet höjer upp badstolen, som högst med ca 23 cm. Den högre höjden kan ge en bättre arbetshöjd då man assisterar vid bad, se bild 15. Alla storlekar av badstolen kan monteras på badkarsunderredet.



Bild 15

Duschunderrede

Duschunderredet är utrustad med fyra hjul, vilket underlättar vid förflyttning. De fyra hjulen går att låsa separat. Alla storlekar av badstolen kan monteras på duschunderredet, se bild 16. Lås alltid hjulen då badstolen används vid dusch.



Bild 16

Montering av badstol på underrede

Ställ benstöden så vertikalt som möjligt på badstolen. Tryck ner benstöden i respektive hål på underredet tills dess att de röda låsspakarna klickar på plats. För att ta loss badstolen från underredet, tryck ner den röda låsspaken, en i taget, se bild 17, och lyft benstöden upp från underredet.



Bild 17

Obs! Badkarsunderredet skall inte placeras ovanpå duschunderredet.

Huvudprodukt

E513 Badstol Blue Wave, mjuk klädsel, small

E514 Badstol Blue Wave, standard klädsel, small

E523 Badstol Blue Wave, mjuk klädsel, medium

E524 Badstol Blue Wave, standard klädsel, medium

E533 Badstol Blue Wave, mjuk klädsel, large

E534 Badstol Blue Wave, standard klädsel, large

Tillbehör

E517 Badkarsunderrede

E518 Duschunderrede

Reservdelar

E561 Klädsel standard, small

E562 Klädsel standard, medium

E563 Klädsel standard, large

E571 Klädsel mjuk, small

E572 Klädsel mjuk, medium

E573 Klädsel mjuk, large

E545 Huvudstöd (mjuk klädsel)

E544 Huvudstöd (standard klädsel)

E564 Komplet set med bälten, small, standard klädsel

E565 Komplet set med bälten, medium, standard klädsel

E566 Komplet set med bälten, large, standard klädsel

E574 Komplet set med bälten, small, mjuk klädsel

E575 Komplet set med bälten, medium, mjuk klädsel

E576 Komplet set med bälten, large, mjuk klädsel

Teknisk information

- Den mjuka klädseln är tillverkad av vävd polyestertyg. De olika bälten är av nylon med kardborreband för fastsättning.
- Standardklädseln är tillverkad av förstärkt, glesvävt tyg i vinyl.
- De olika bälten är av nylon med kardborreband för fastsättning.
- Duschunderredet är konstruerad av aluminumrör med en extra hållbar vit ytlackering.
- Alla material är fria från latex och ftalater.
- Alla övriga komponenter är av rostfritt stål.

Teknisk data **Blue Wave**

Mått i cm	small	medium	large
Sittdjup	33	33	42
Sittbredd	37	37	37
Rygghöjd	46	64	81
Sitthöjd	5-18	5-18	5-18
Sitthöjd på badkarsunderrede	28-43	28-43	28-43
Sitthöjd på duschunderrede	71	71	71
Klädselns längd då sittenheten är plan	83	98	126
Bredd	43	43	43
Badkarsunderredets höjd	25	25	25
Badkarsunderredets längd	81	81	81
Badkarsunderredets bredd	43	43	43
Duschunderredets höjd	53	53	53
Duschunderredets bredd	69	69	69
Duschunderredets längd	84	84	84
Max belastning	27 kg	54 kg	73 kg
Rygg och sittvinkel inställningar	0°, 22°, 45°, 67°, 90°	0°, 22°, 45°, 67°, 90°	0°, 22°, 45°, 67°, 90°

Badstolen **Blue Wave**

Säljs i Sverige genom:

MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300 - 56 97 00
Fax 0300 - 56 97 01

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se



Producent

Rifton Equipment
PO Box 260
Rifton NY 12471-0260

Int'l Tel: 845-658-7750
Int'l Fax: 845-658-7751

sales@rifton.com
www.rifton.com

