

Bruksanvisning Hörnsitsen Paddan -
Corner Seat



Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av sitthörnan Paddan - Corner Chair. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna hoppas vi att ni får stor glädje av sitthörnan med tillbehör.

Innehållsförteckning

Allmän information	3
Användningsområde	3
Produktansvar och säkerhet	4
Garanti och hållbarhet	4
Service och reparationer	4
Sitthörnan - Introduktion	5
Allmänna säkerhetsinstruktioner	6
Kontroll vid leverans	7
Inställningsmöjligheter	7
Inställning av abduktionskloss	8
Ryggstödfunktioner	9
Höftbältet	10
Brösthäls	11
Montering av ryggkil	11
Tips	12
Underhåll och skötsel	13
Checklista	14
Teknisk data	14

MAYDAY AID AB

Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300-56 97 00

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se

Allmän information

Paddan - Corner Chair är en sitthörna för barn och ungdomar. Sitthörnan finns i tre storlekar. Sitthörnan skall vara placerad på golvet då den används. Det är viktigt att kontrollera att alla skruvar är åtdragna innan ett barn placeras i stolen. Barnet ska kunna sitta bra och säkert i hörnstolen med hjälp av höftbältet, abduktionsklossen och bröstbältet.

För att undvika skador eller felanvändning ber vi dig att läsa igenom följande instruktioner och anvisningar noga. Om du har frågor eller undrar över något är du alltid välkommen att ringa eller skriva till oss, kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan 2.

Vi hoppas du kommer att bli riktigt nöjd med din sitthörna.

Användningsområde

Paddan - Corner Chair skall användas som hörnstol placerad på golvet för barn som har svårt att klara av att sitta på egen hand. Med hjälp av sitthörnan kan barnet sitta själv och bli delaktig i lekar och samlingar som sker i barngrupper. Sitthörnan skall användas och förvaras inomhus.

Sitthörnan får endast användas under övervakande av en vuxen person.

Produktansvar och säkerhet

Jenx Corner seat är en CE märkt produkt. Detta är en garanti på att Jenx Corner Chair uppfyller alla gällande europeiska säkerhetskrav. Företaget JENX[®] försäkrar härmed, som producent med ensamt ansvar, att Paddan är CE märkt enligt (EU) direktiv 2017/745 MDR om medicinsk utrustning i klass 1.

Produkten får inte ändras, inga tillbehör eller reservdelar från någon annan tillverkare får monteras utan att CE märket tas bort och produktansvaret slutar att gälla.

Garanti och hållbarhet

Garanti gäller endast då produkten används enligt denna bruksanvisning vilken följer producentens rekommendationer.

Jenx Corner Seat har 2 års garanti. Garanti gäller då Jenx Corner Seat förvaras inomhus samt att underhåll och skötselanvisningarna efterföljs.

Service och reparationer

Service och reparationer på Jenx Corner Seat skall endast utföras av behörig personal i samråd med representant från företaget MAYDAY AID AB.

Sitthörnan Paddan - Corner Seat får inte användas att sitta i, om något på stolen är trasigt, om delarna inte sitter stabilt fast eller om tyget är sönder.

Kontakta ansvarig arbetsterapeut, fysioterapeut (sjukgymnast) eller Hjälpmedelscentral.

Reservdelar och tillbehör kan beställas och kompletteras med i efterhand.


Vid montering och justering behövs insexnycklar. Var noga med att alltid dra åt insexskruvarna efter justering. Kontrollera att bältena sitter fast ordentligt och är rätt åtdragna.

Lämna aldrig ett barn som sitter i sitthörnan ensam!

Paddan - Jenx Corner Seat / Sitthörnan - Introduktion

Sitthörnan finns i storlekarna 1, 2 och 3, där storlek 1 är den minsta storleken. Sitthörnan är tillverkad och utformad för att hjälpa barn, som behöver stöd, att kunna sitta på egen hand. Sitthörnan får endast användas inomhus på plant, rent golv eller på matta. På bilden nedan visas Sitthörnan i standardutförande dvs utan tillbehör. I Sverige används namnet Paddan för Jenx Corner Seat.

1. Golvplatta
2. Nedre ryggstödet
3. Övre bålstödet/nackstöd
4. Abduktionskloss
5. Höftbälte
6. Brösthälte
7. Bakre stödben

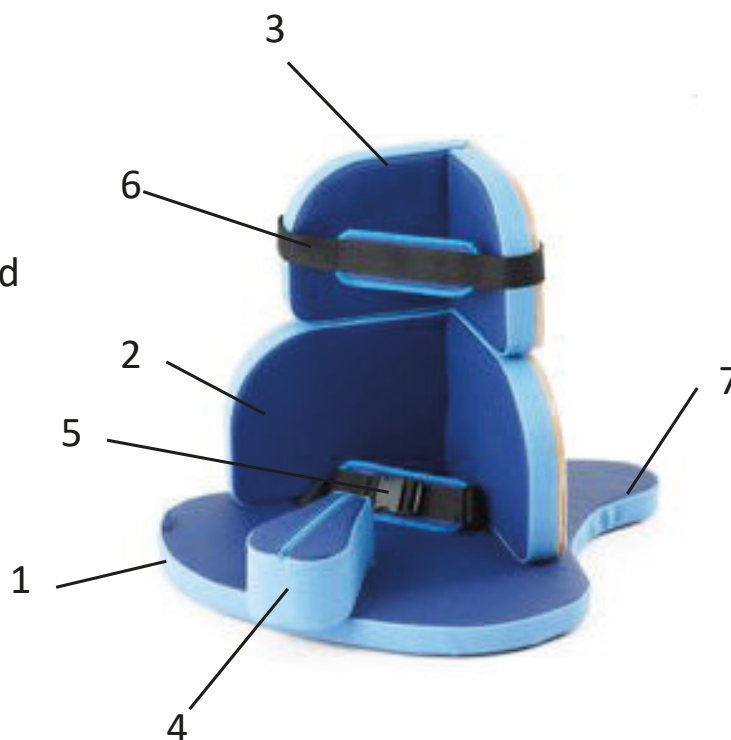

Paddan - Corner Seat är en golvsits av hög kvalitet. Corner Seat - Sitthörnan är tillverkad av en träram som polstrats med tåligt tyg, som kan torkas av med fuktig trasa, gärna med mildt, miljövänligt rengöringsmedel.

Allmänna säkerhetsinstruktioner

Läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder sitthörnan.
Lär dig de olika funktionerna och hur du hanterar produkten bäst.
Som förälder eller annan målsman är du ansvarig för säkerheten omkring ditt barn.
Säkerheten kan äventyras om du inte följer instruktionerna i bruksanvisningen.
Många oväntade situationer kan dyka upp som inte kan förutses och därför inte beskrivs i bruksanvisningen. Vi ber er därför att alltid vara försiktiga och informera alla personer som finns runt barnet, som använder sig av hjälpmedlet och dem olika tillbehören, om hur produkten fungerar och skall användas.

Kontakta oss gärna för mer information eller om det finns några oklarheter i bruksanvisningen, se sidan 2 för kontaktinformation.

Viktigt!

Sitthörnan får endast användas på plan, slät golvyta inomhus.
Följ rekommendationerna för ålder och vikt. Placeras inte sitthörnan på ett bord eller liknande, hörnstolen kan falla och barnet kan skadas.

Placera aldrig ett för stort barn i en för liten hörnstol, ej heller i en extremt framåtlutad eller bakåtlutad position - tipprisk!



Bild 1

Kontroll vid leverans

I originalförpackningen finner du följande delar vid leverans:

- Bottenplatta med nedre hörndel
- Bakre höjdstag med övre hörndelen monterad.
- Höftbälte
- Brösthälte
- Abduktionskloss
- Tillbehör enligt beställning
- Bruksanvisning

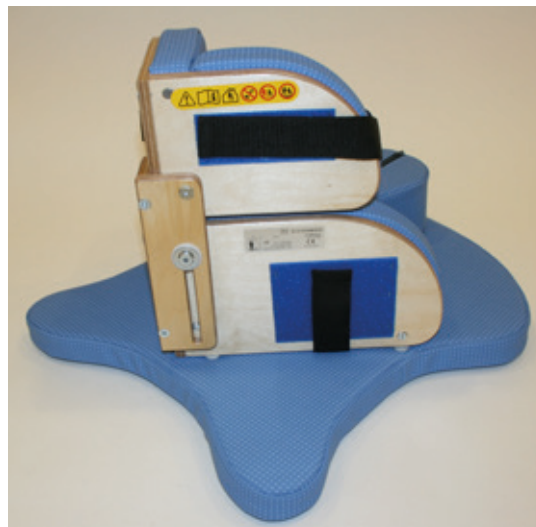


Bild 2

Varning!

Ta bort allt förpackningsmaterial som skyddat sitthörnan under transport. Tänk på att plastpåsar och liknande kan vara livsfarligt för små barn att leka med – kvävningrisk!

Inställningsmöjligheter

Innan barnet kan sitta i hörnstolen bör man justera vissa inställningar så att hörnstolen blir anpassad efter barnets kropp och sittförmåga.



Bild 3

Inställning av abduktionskloss

Dra upp blixtlåset som sitter på abduktionsklossens ovansida, se sidan 7 bild 3.

För tyget åt sidan. Använd en insexnyckel med långt skaft. Lossa skruven försiktigt så att abduktionsklossen kan skjutas fram eller bak i skåran.

Prova fram avståndet - sittdjupet som barnet behöver för att kunna sitta bekvämt och stadigt, se bild 4.



Bild 4

Kontrollera att skruven dras åt efter den önskade inställningen är gjord. Dra ihop dragkedjan på ovansidan av abduktionsklossen.



Bild 5

Ryggstödetets funktioner

På hörnstolens baksida finns ett trästag med två skåror som justerar höjden av det övre ryggstödet.



Bild 6

Genom att lossa på skruvarna på både höger och vänster sida om ryggstödet och skjuta det övre ryggstödet uppåt kan man förlänga ryggstödet.

Behöver barnet inte så mycket stöd för övre bålen, kan man helt enkelt montera av den övre ryggdelen.



Bild 7

Höftbältet

Höftbältet fram knäpps ihop med ett fixlockslås. Tryck med tumme och pek-finger samtidigt på var sida om spännet, dra sedan den inre lås delen ut från spännet. Se bild 8.

För att justera längden på bältet drar man i bältets remmar som finns på utsidan av nedre ryggstödet.

Remmen sätts fast på önskad längd mot kardborreplattan på utsidan av nedre rygghörnan. Se bild 9.



Bild 8



Bild 9

Brösthäftet

Brösthäftet har en bred polstrad tygdel mitt fram för att göra häftet så bekväm som möjligt mot kroppen.

Brösthäftet justeras med hjälp av kardborrefästerna som är placerade på vardera sidan av den övre rygghäftet, se bild 10.



Bild 10

Viktigt!

Lämna aldrig ett barn i sitthörnan ensam. Ha alltid barnet under uppsikt!

Montering av rygghäftet

En del barn kan sitta mer uppsträckt och rak i ryggen om dem får ett tryck mot ryggraden. Rygghäftet placeras i hörnet av stolen. Se bild 11.

Förlänger man rygghäftet genom att montera det övre rygghäftet högt upp kan man använda två rygghäftet placerade över varandra för att täcka hela rygghäftet.



Bild 11

Tips!

Om ryggkilen inte stannar kvar i hörnet, kan du trycka fast ryggkilen med hjälp av ett dubbelhäftat kardborreband.

Ta den mjuka delen mot ryggstödet om du senare behöver ta bort ryggkilen, då fastnar inte kläder mot kardborrebandet som sitter kvar.

Placera gärna kardborrebandet i den nedre sitthörnans överkant, se bild 12.



Bild 12



Bild 13

Jenx Lekbord kan ställas framför sitthörnan. Kardborrebanden på sidan av bordet kan sättas fast på sitthörnans nedre ryggdel, se bild 13.

Underhåll och skötsel

Sitthörnan ska endast användas på plant, slätt och hårt underlag. Sitthörnan är främst avsedd för användning inomhus, men begränsad utomhusanvändning är tillåten. Var dock uppmärksam på att underlaget måste vara plant, torrt och fritt från vatten, smuts och fukt.

Sitthörnan får inte förvaras utomhus. Rengör och tvätta av sitthörnan ofta, använd fuktad trasa och milda rengöringsmedel såsom diskmedel eller liknande. Sitthörnan kan torkas av med desinfektionsmedel, använd ett ytdesinfektionsmedel med tensid alternativt ett oxiderande ytdesinfektionsmedel.

Sitthörnan - Corner Seat skall kontrolleras regelbundet för bästa hållbarhet och funktion.



Bild 14

På bild 14 visas sitthörnan med bröstbälte, ryggkil och höftbälte.

Teknisk data sitthörnan Paddan - Corner Seat

Mått i cm	storlek 1	storlek 2	storlek 3
Ca ålder	6 mån - 2 år	1 år - 6 år	4 år - 10 år
Max brukarvikt	25 kg	35 kg	50 kg
Sittdjup	35	37	46,5
Sittbredd	33	39	49,5
Nedre ryggdels höjd	16,5	23,5	23,5
Övre ryggdels höjd	31,5 - 42,5	44 - 62	50 - 68
Vikt	6,6 kg	7,8 kg	10,6 kg

Checklista

	Dagligen	Varje vecka	Varje månad
Bröstkådet	X		
Höftbältet	X		
Abduktionskloss		X	
Höjjusteringen övre ryggdel			X

Sitthörnan **Corner Seat -
Paddan**

Säljs i Sverige genom:

MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300 - 56 97 00

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se

MAYDAY AID

Producent:

JENX Limited
Wardsend Road
Sheffield, S6 1RQ, UK

Tel +44 (0)114 285 3376

export@jenx.com
www.jenx.com

