



MAYDAY AID

ThevoChair

- En rogivande gungstol



Thomashilfen

Denna bruksanvisning ger information om användningsområde och skötselråd för gungstolen ThevoChair samt beskrivning av gungstolens olika funktioner.

Genom att läsa igenom bruksanvisningen och följa skötselråden, så hoppas vi att ni får god användning och glädje av stolen.

Innehållsförteckning

Introduktion	sid 2
Kontroll vid leverans	sid 2
Användningsområde	sid 3
Teknisk beskrivning	sid 4
Montering	sid 5
Tillbehör	sid 6
Skötselråd	sid 7
Garanti	sid 7
Teknisk data	sid 8
Observera	sid 9

Kontroll vid leverans

Gungstolen levereras i en enhet, tillsammans med eventuella tillbehör enligt beställning. Kontrollera ThevoChair gungstolen innan den tas i bruk så att inga skador vid transporten har inträffat.

Användningsområde

ThevoChair är en gungstol som är framtagen för att reducera symtom hos personer med oro, rastlöshet och depression som förstärks vid t ex en demenssjukdom.

Gungandets positiva effekt är bevisat i kliniska studier.

Vid dagligt användande blir personen lugnare, kommunicerar bättre och blir mer öppen för omvärlden.



Teknisk beskrivning

ThevoChair har ett ryggstöd som kan fällas lätt bakåt i en behaglig lutning. I ryggstödet sitter det monterat "vingar" (se bild 1), som återfjädrar kroppens rörelser, såväl de små andningsrörelserna som större kroppsrorelser. Denna mikrostimulans ökar perceptionen, vilket tillsammans med det mjuka gungandet, reducerar symtom som oro, aggressivitet och depression hos personer med demenssjukdom.

I basen på ThevoChair finns en anordning som skapar ett mjukt och behagligt gungande (bild 2 och 3). Endast minimal igångsättningskraft behövs.

Som tillbehör finns det också en fotpall med samma gungfunktion.

ThevoChair är CE-märkt.



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Montering

Lyft försiktigt upp gungstolen ur kartongen. Var uppmärksam på att stolens ryggstödets ligger i framåtfällt läge i kartongen och att lyftgreppet därför måste tas under stolens sits.

Släng bort plasten som skyddar stolen.

När stolen står på golvet kan ryggstödet fällas upp.

Innan stolen används ska ryggstödet skruvas fast i förankringsstödet (A, bild 4) som finns baktill under sitsen. Avlägsna plasten som skyddar skruven och staget.

Använd medföljande insexskruv och fasta nyckel för att lösgöra bulten (bild 5).

Trä skruven genom förankringsstödet och fästet (B, bild 4) som sitter monterat nedtill på ryggstödet. Skruva på bulten på skruven igen så att staget sitter helt fast (bild 5).

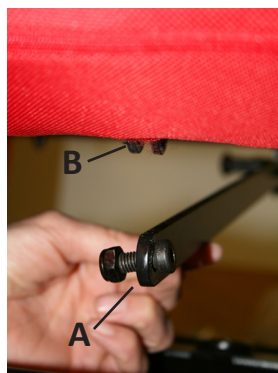


Bild 4



Bild 5

Tillbehör

Fotpall

Fotpallen (bild 6) har, liksom ThevoChair, en gungfunktion som harmonierar med gungstolen och därmed ökar stolens effektivitet.

Fotpallen levereras färdigmonterad. Bild 6



Inkontinensöverdrag

Inkontinensöverdraget (bild 7) skyddar stolens klädsel mot fukt och fläckar.

Överdraget levereras i fyra enheter; ryggstöd, två armstöd och sits. Överdrag finns även för fotpallen.



Bild 7

Skötselråd

ThevoChair har bomullsklädsel av högsta kvalitet. Klädseln bör dock skyddas från direkt solljus, eftersom även högkvalitativa material kan blekas vid långvarig exponering.

Klädseln kan inte tvättas separat. Rengör tyget genom att torka med desinfektionsmedel.

Om stolen nyttjas frekvent på exempelvis en vårdenhets rekommenderar vi att ett inkontinensöverdrag används för att skydda tyget.

Inkontinensöverdraget kan maskintvättas i 65 grader och torktumlas.

Garanti

ThevoChair har 2 års garanti. Garantin gäller under förutsättning att skötselråden följs och att stolen endast används till det den är avsedd för.

Fel som omfattas av garantin skall omedelbart meddelas till Mayday Aid. Kontaktuppgifter finns på sista sidan.

Teknisk data

ThevoChair

Ryggstödet's höjd	72 cm
Stolens höjd (med bas)	110 cm
Stolens höjd (utan bas)	108 cm
Bredd	73 cm
Sitsens djup	47 cm
Sitsens bredd	55 cm
Ryggstödet's vinkel	112°/115°
Sitsens höjd (med bas)	48 cm
Sitsens höjd (utan bas)	46 cm
Max belastning	140 kg

Fotstöd

Höjd (max)	41 cm
Bredd	44 cm
Djup	44 cm



Observera!

Var uppmärksam på att stolen rör sig och inte bör användas som stöd av personer som har nedsatt balansförmåga. Detta är särskilt viktigt att vara medveten om när den äldre ska sätta sig i stolen eller resa sig från den.

Ha inte fingrarna inne i gunganordningen under stolen.

Gungstolen måste stå på plant underlag.

Utsätt inte gungstolen för fukt eller höga temperaturer.

Stå inte på pallen på grund av fallrisken.

Gungstolen får maximalt belastas med 140 kg.

Endast originaldelar får användas.

Ta ej bort skruvar eller dylikt än vad som här anges.

ThevoChair

Säljs i Sverige genom:

MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300-56 97 00
Fax 0300-56 97 01

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se



Producent:

THOMASHILFEN
Walkmühlenstrasse 1
D - 27432 Bremervörde
Tyskland

Tel +49(0)4761/886-63 eller -68
Fax +49(0)4761/88619

www.thevo-division.com

