

Bruksanvisning **DISCOVER**



MAYDAY AID

meyland-smith
mobility and more

Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av krypvagnen DISCOVER. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna hoppas vi att ni får stor glädje av krypvagnen Discover.

Innehållsförteckning

Montering vid leverans	3
Standardutförande	3
Varför är det bra för barn att lära sig krypa?	4
Höjdjustering av magdynan	5
Säkerhetsföreskrifter	5
Underhåll och skötsel	6
CE-märkning	6
Teknisk data	7
Data	7

Krypvagnen DISCOVER finns i två storlekar. Krypvagnen är ett hjälpmedel för barn som vill lära sig krypa. Rörelse, som förflyttning via krypning är en av de främsta basfunktionerna i den motorisk utvecklingen.

Att finna förmågan att röra sig på egen hand, ger barnet möjlighet att utforska sin omgivning och skaffa sig nya erfarenheter.

DISCOVER är avsedd att användas inomhus men kan också användas på plant, slätt och torrt underlag utomhus.

Säljs genom:

MAYDAY AID AB

Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300-56 97 00
Fax 0300-56 97 01

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se

Montering vid leverans

Discover levereras ihopmonterad. Kontrollera att de fyra hjulen snurrar runt sin axel och mot golvet utan någon avvikande rörelse.

Standardutförande

Pulverlackerat stålchassi, röd med höjdreglerbar magdyna.
Fyra massiva ledade hjul.



Discover är en krypvagn för barn i åldern 1 - 5 år

- Lägg barnet som ska krypa med magen på magdyna.
- Justera höjden så att barnet kan böja in knäna under sig för att sparka sig fram och att armarna når golvet.
- Max brukarvikt 25 kg


Varför är det bra för barn att lära sig att krypa?

- Huvudkontrollen tränas.
- Nack- och ryggmusklerna stärks.
- Armarnas styrka och skuldrornas stabilitet tränas.
- Förbättrad styrka och kontroll av ryggens nedre del och höfterna.
- Barnet kommer automatiskt på en armlängds avstånd från leksaker på golvet vilket är ett bra avstånd för synstimulering.
- Dynamiken i krypagnen gör att barnet inte får mer hjälp än nödvändigt och kan träna sig i att själv komma upp i knäfyfota.
- Barnet får uppleva "orsak-verkan" då även en liten rörelse i nedre extremiteten ger en förflyttning framåt.
- Även barn med mycket liten bål- och huvudkontroll kan få en egen förflyttning.
- Den reciproka (växelvisa rörelsen) förbereder barnet för gångträning.
- En självständig förflyttning ska vara rolig och motiverande för barnet och viktig för den psykosociala utvecklingen.
- Sammanfattningsvis är allt ovanstående viktiga delar i att förbereda och stärka barnets förmåga att sitta, stå och gå med eller utan hjälpmedel.



Höjdjustering av magdynan

Runt höjdstaget sitter ett svart gummiband. För gummibandet så högt som möjligt. Dra därefter ut metallskänken så att piggen kommer bort ifrån sin tidigare placering. Skjut höjdstaget till önskad position. Tryck in metallskänken så att höjdplaceringen är fast. För gummibandet ner och håller metallskänken mot ramen.

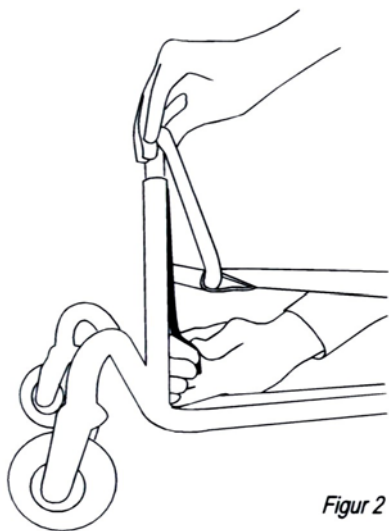

Magdynan som barnet vilar magen mot kan justeras i höjd när barnet växer. Var vaksam på att barnet inte får in och skadar händerna i hjulen.

Krypvagnen Discover kan användas för att träna att stå stabilt i fyrfotstående och kunna förflytta sig genom att krypa.

Höjdjustering av magdyna

Säkerhetsföreskrifter

Krypvagnen Discover får aldrig användas av ett barn utan tillsyn av en vuxen person. Tänk på att barn kan rulla ut över farliga kanter såsom trappor mm.

- Lämna aldrig ett barn ensam som använder sig av krypvagnen!
- Discover får inte användas för att sitta eller stå på!

Underhåll och skötsel

Tvätta av krypvagnens rörchassi med fuktad trasa och mild rengöringsmedel t ex diskmedel. Magdynan torkas av med vatten och mildt rengöringsmedel. För desinfektion använd desinfektionsmedel.

För att säkerställa att krypvagnen rullar lätt, se till att hjulen hålls fria från damm, hår etc. Kontrollera att hjulen monteras på ordentligt efter avmontering. Kontrollera regelbundet att det inte är skador och slitage på krypvagnen Discover som kan medföra säkerhetsrisk. Produkt som är skadad eller saknar skruvar eller liknande får inte användas.

Ändringar eller anpassningar ska utföras av kvalificerad personal. Gör inga anpassningar på produkten på egen hand.

CE-märkning


DISCOVER är en CE-märkt medicinteknisk produkt. Företaget Meyland-Smith försäkrar härmed, som producent med ensamt ansvar, att DISCOVER uppfyller de särskilda krav som ställs enligt direktiv 93/42/EEG.

DISCOVER är testad av Berlin Cert, Prüf- und Zertifizierstelle für Medizinprodukte BmbH, an der Technischen Universität Berlin.



Teknisk data

2017-01-16

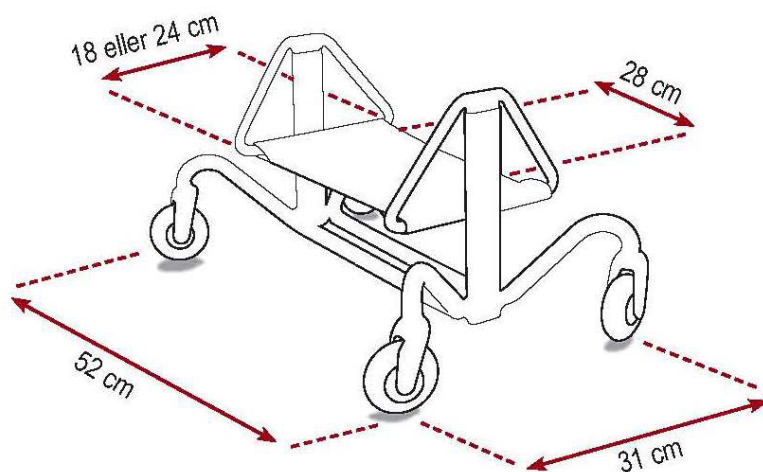

Fakta	storlek 1	Storlek 2
Total bredd	52 cm	52 cm
Total djup	31 cm	31 cm
Magdynans bredd	28 cm	28 cm
Magdynans djup	18 cm	24 cm
Magdynans höjd	10 - 21 cm	10 - 21 cm
Max belastning	25 kg	25 kg
Vikt	4 kg	4 kg

Material

Ram:	Pulverlackerat stålrör
Beslag:	Elektrogalvaniserat stål
Polstring:	Polyuretan skumgummi
Hjul:	Massiva däck på plastfälgar med smörjfria kullager

DISCOVER

Säljs i Sverige genom:

MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300 - 56 97 00
Fax 0300 - 56 97 01

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se



Producent:

Meyland-Smith a/s
Industrivej 27, DK - 9830 Taars

Tel: +45 98 96 19 85
Fax: +45 98 96 19 86

info@meyland-smith.dk
www.meyland-smith.dk

meyland-smith
mobility and more