

Bruksanvisning **Skötbord Kajsa**



Tillhör skötbord med serienummer:




Pflegebetten für Kinder

Denna bruksanvisning ger information om användningsområde, montering och råd för skötbordet Kajsa.

Genom att läsa igenom bruksanvisningen och följa informationen, så hoppas vi att ni får glädje och nytta av skötbordet.

Innehållsförteckning

Användningsområde	3
Monteringsanvisning	4
Viktigt! Värna om säkerheten	4
Anvisning för manöverdosan	5
Rengöring och rekonditionering	5
Rengöring av manöverdosa	6
Garanti	6
Teknisk data	7
CE-märkning	7
Säkerhetsanvisningar	8-9
Kontaktinformation	10

MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300-56 97 00

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se

Användningsområde

Skötbordet Kajsa kan användas både i vård och omsorgsenheter och i privata hem.

Skötbordet kan variera i utseende och storlek, se bilder nedan.

Endast ett barn får befinna sig på skötbordet åt gången.
Skötbordet får inte användas som säng eller som lekplats.

Barnet får endast befinna sig på skötbordet om en vuxen finns precis bredvid.
Sidokanterna är 15 cm höga för att ge en trygg och säker plats för ditt barn.

Skötbordet kan höjas och sänkas för att underlätta för föräldrar med funktionsvariation eller för annan vårdpersonal.



Monteringsanvisning

Börja med att välja en lämplig plats för skötbordet.

Använd inte onödiga förlängningssladdar.

Anslut strömförsörjningen

- Lossa den valsade nätkabeln.
- Anslut motorerna för höjdjustering till nätaggregatet.

Sätt i stickkontakten i stickkontakten och tryck på den gröna knappen på nätkontakten.

Justeringsmotorerna är nu redo att användas.

Allmän information om elektromagnetisk kompatibilitet

De elektriska drivenheterna motsvarar skyddskraven som nämns i riktlinjen för råd för anpassning av förordningarna i medlemsländerna för elektromagnetisk kompatibilitet (EMV) (86/336 / EWG). Det kan dock inte helt utslutas att under vissa omständigheter kan det uppstå en störning, särskilt när man använder mobiltelefoner bland elektriska apparater.

Användningsområde / indikation / kontraindikation

Skötbordet är lämpligt för omsorg och vård. Skötbordet fungerar för såväl personer som använder sig av rullstol som för personer som står upp vid omvård av annan person.

Viktigt! Värna om säkerheten

1. När du använder höjdjusteringsfunktionerna får det inte finnas några föremål eller någon person, t ex småsyskon runt/under skötbordets rörelseområde, klämrisk!
2. Skötbordet får inte användas för att transportera personer.
3. I händelse av att anslutningskablar eller andra anslutningsledningar på bordet skadas måste dessa bytas ut av certifierad elektriker för en korrekt reparation.
4. För att undvika potentiell fara som orsakas av felaktig drift ska endast behörig personal / vårdgivare kunna låsa respektive låsa upp manuell styrning via nyckel.


Anvisning för manöverdosan

Manöverdosans knapplås skall vara aktiverat när manöverdosan inte används för att förhindra skador och olyckor.

Lås upp manöverdosan genom att sätta den blå nyckeln i manöverdosans baksida och vrida nyckeln till symbolen med ett öppet lås. Manöverdosan är nu redo att användas.

För att låsa manöverdosan, vrid den blå nyckeln till symbolen med stängt lås.

Manöverdosans knappar kan nu inte användas, denna inställning rekommenderas om småsyskon finns i sängens närhet.

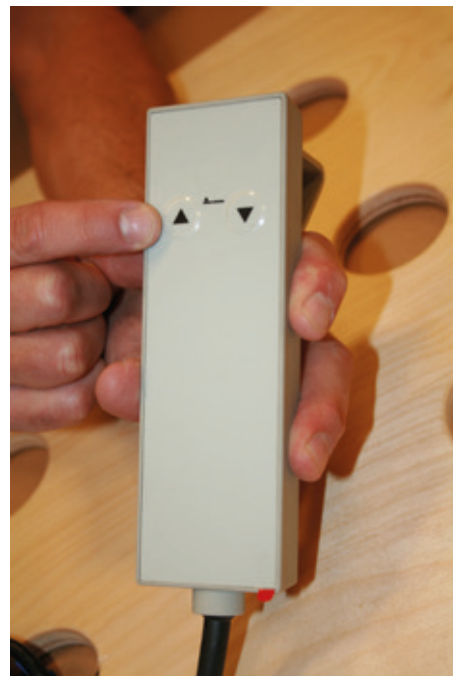

VIKTIGT!

Endast vuxna personer får använda manöverdosan!

Rengöring och rekonditionering

VARNING!

Skötbordets elkontakt får inte vara ansluten till ett vägguttag vid rengöring.

Tvätta av skötbordet med flytande, neutrala rengöringsmedel, använd helst ett rengöringsmedel utan slipmedel. Torka av med torr trasa. Vid behov kan desinfektionsprit användas.

Rengöring och rekonditionering, fortsättning

Använd inte rengöringsmedel som innehåller syror, baser eller lösningsmedel som t ex aceton eller thinner.

Använd inte scotchsvamp eller andra hårda material som kan skrapa sönder lackfärgen.

Högtryckstvätt skall inte användas. Skötbordet får inte spolas eller läggas i vatten eller andra vätskor.

- Skötbordet får endast användas inomhus.
- Höjdjustering får endast göras av vuxen person.

Rengöring av manöverdosa

Tvätta manöverdosan ren med fuktad trasa och rengöringsmedel. Utsätt inte manöverdosan för högtryckstvätt eller ångrengöring.

Garanti

Changing Table (Skötbordet Kajsa) har 3 års garanti. Garantin gäller under förutsättning att anvisningarna gällande rengöring, rekonditionering och säkerhetsråden följs och att skötbordet endast används till det skötbordet är avsedd för, se användningsområde sidan 3.

Produktfel, som eventuellt omfattas av garantin, skall omedelbart meddelas till Mayday Aid AB. Kontaktuppgifter finns på sista sidan. Uppge alltid skötbordets serienummer. Numren finns på liknande etikett, se bild.

 KayserBetten Carecots for children	KayserBetten GmbH & Co. KG Rieper Str. 12 29683 Bad Fallingb. Ostel Germany Tel.: + 49 (0)5163 6595 Fax: + 49 (0)5163 2076 E-Mail: info@kayserbetten.de www.kayserbetten.de
Typ:	
SN:	
Safe working load: 170 kg Max. patient weight (incl. accessories): 150 kg Safe working load of the trapeze bar (optional): 80 kg 230V ~ 50/60 Hz, 150 W, IPX4, ED 15% max. 2'	
- Only for interior home use! - With unsupervised children, the bed must be moved to the lowest position! - Only adjust the bed height under supervision! - The child's clinical condition must be noted!	

Teknisk data

Vikt (skötbord med lyftstativ) 260 kg

Max brukarvikt 150 kg

Lägsta höjd med hjul ca min 60 cm max 100 cm

Sidokanter 15 cm

Spänning 230V

Nominell frekvens 50/60 Hz

Typ av spänning AC

Max. strömförbrukning 0,8 A

Nominell drifttid / vilotid max drifttid på 2 minuter, sedan 18 minuter vilotid

Skyddsklass IP44 / Skyddsklass II / typ B

Driftsbrus ca. 65 dB

CE-märkning

KayserBett Type "Changing Table"

(Svenskt namn: Skötbord Kajsa)

är en CE-märkt medicinteknisk produkt.

Företaget Kayserbetten GmbH & Co.KG försäkrar härmed, som producent med ensamt ansvar, att skötbordet "Changing Table" uppfyller de särskilda krav som ställs enligt direktiv 93/42/EEC attachment I samt 89/336/EEG.



Säkerhetsanvisningar

Skötbordet måste stå på plant golv. Skötbordet bör vara utrustad med en madrass anpassad efter skötbordets mått.

Barnet får ej lämnas ensamt i på skötbordet.

Var uppmärksam på att elsladdar placeras på ett sådant sätt att de inte kan komma i kläm eller skadas på annat sätt. Var noga med att inte utsätta det elektriska styrsystemet, sladdar och kontakter för fukt. Kontrollera regelbundet sladdarna för skador för att undvika kortslutning.

OBS! Drag alltid ur strömsladden innan förflyttning av skötbordet sker!

Tänk på att madrass, lekmobiler och kramdjur skall vara barnsäkra och fria från farliga kemikalier.

Skötbordet får ej användas till annat än vad som anvisats i denna bruksanvisning.
Endast originaldelar får användas.



Säkerhetsanvisningar forts.

Det är inte tillåtet att vistas eller förvara saker under skötbordet, då kan det elektriska styrsystemet kan skadas. Var särskilt observant om det finns små barn eller husdjur i närheten.

Låt inte barn leka med manöverdosan.

Låt aldrig barn klättra på skötbordet.

Var uppmärksam på klämrisker från lyftsystem när skötbordet används.

Låt hjulen vara låsta förutom då skötbordet behöver flyttas.



Skötbordet bör kontrolleras en gång per månad.

Kontrollera:

- Skötbordets funktioner och utrustningen till det elektriska styrsystemet.
- Dra åt alla skruvar så att skötbordet är stabilt.

Skötbordet Kajsa

Säljs i Sverige genom:

MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300-56 97 00

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se



Producent:

KAYSERBETTEN GmbH & Co. KG
Rieper Strasse 12
D-29683 Bad Fallingbommel

Tel: +49 5163-6595
Fax: +49 5163-2076

info@kayserbetten.de
www.kayserbetten.de


Pflegebetten für Kinder