

Bruksanvisning **Charlotte**



Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av sitthörnan Charlotte. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna hoppas vi att ni får stor glädje av Charlotte.

## Innehållsförteckning

Allmän information	3
Användningsområde	3
Produktansvar och säkerhet	4
Garanti och hållbarhet	4
Service och reparationer	4
Sitthörnan Charlotte - Introduktion	5
Allmänna säkerhetsinstruktioner	6
Kontroll vid leverans	7
Inställningsmöjligheter	7
Inställning av abduktionskloss	8
Inställning av sidostöden	8
Inställning av huvudstöd	9
Inställning av sidostöd samt ryggplatta i höjd	9
Underhåll och skötsel	10
Teknisk data	11
Checklista	11

## **MAYDAY AID AB**

Arendalsvägen 35  
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300-56 97 00  
Fax 0300-56 97 01

info@maydayaid.se  
www.maydayaid.se

## Allmän information

Charlotte är en sitthörna för barn och ungdomar. Sitthörnan Charlotte finns i tre storlekar. Sitthörnan kan vara placerad på golvet eller monterad på en gånstige då sitthörnan skall användas.

Det är viktigt att kontrollera alla skruvar innan ett barn ska sitta i stolen. Barnet ska kunna sitta säkert i stolen med hjälp av höftbältet, abduktionsklossen och bröstbältet.

För att undvika skador eller felanvändning ber vi dig att läsa igenom följande instruktioner och anvisningar noga. Om du har frågor eller undrar över något är du alltid välkommen att ringa eller skriva till oss, kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan 2.

Vi hoppas du kommer att bli riktigt nöjd med sitthörnan Charlotte.

## Användningsområde

Charlotte skall användas som hörnstol placerad på golvet för barn som har svårt att klara av att sitta på egen hand. Med hjälp av Charlotte kan barnet sitta själv och bli delaktig i lekar och samlingar som sker i barngrupper. Sitthörnan Charlotte skall användas och förvaras inomhus.

Sitthörnan Charlotte får endast användas under övervakande av en vuxen person.

## Produktansvar och säkerhet

Sitthörnan "Corner chair" Charlotte är en CE märkt produkt. Detta är en garanti på att sitthörnan Charlotte uppfyller alla gällande europeiska säkerhetskrav. Företaget Smirthwaite Ltd försäkrar härmed, som producent med ensamt ansvar, att sitthörnan Charlotte är CE märkt enligt direktiv 93/42/EEC om medicinsk utrustning i klass 1.

Produkten får inte ändras, inga tillbehör eller reservdelar från någon annan tillverkare får monteras utan att CE märket tas bort och produktansvaret slutar att gälla.

## Garanti och hållbarhet

Garanti gäller endast då produkten används enligt denna bruksanvisning vilken följer producentens rekommendationer.

Charlotte har 2 års garanti. Garanti gäller då Charlotte förvaras inomhus samt att underhåll och skötselanvisningarna efterföljs.

## Service och reparationer

Service och reparationer på Charlotte skall endast utföras av behörig personal i samråd med representant från företaget MAYDAY AID AB.

Sitthörnan Charlotte får inte användas att sitta i om något på stolen är trasigt, om delarna inte sitter stabilt fast eller om tyget är sönder. Kontakta arbetsterapeut, fysioterapeut (sjukgymnast) eller Hjälpmedelscentral.


Reservdelar och tillbehör kan beställas och kompletteras med i efterhand.

Vid montering och justering behövs insexnycklar. Var noga med att alltid dra åt insexskruvarna efter justering. Kontrollera att bältena sitter fast ordentligt och är rätt åtdragna.

## Charlotte - Introduktion

Charlotte finns i storlekarna 1, 2 och 3, där storlek 1 är den minsta storleken. Charlotte är tillverkad för att hjälpa barn, som behöver stöd för att kunna sitta på egen hand. Sitthörnan Charlotte får endast användas inomhus på plant, rent golv eller på matta. På bilden nedan visas Charlotte i standardutförande det vill säga utan tillbehör.

1. Golvplatta
2. Sido /Bålstöd
3. Nackstöd
4. Abduktionskloss
5. Höftbälte
6. Ryggstöd
7. Bakre stödben
8. Justering för sittbredd
9. Justering för sidostöd

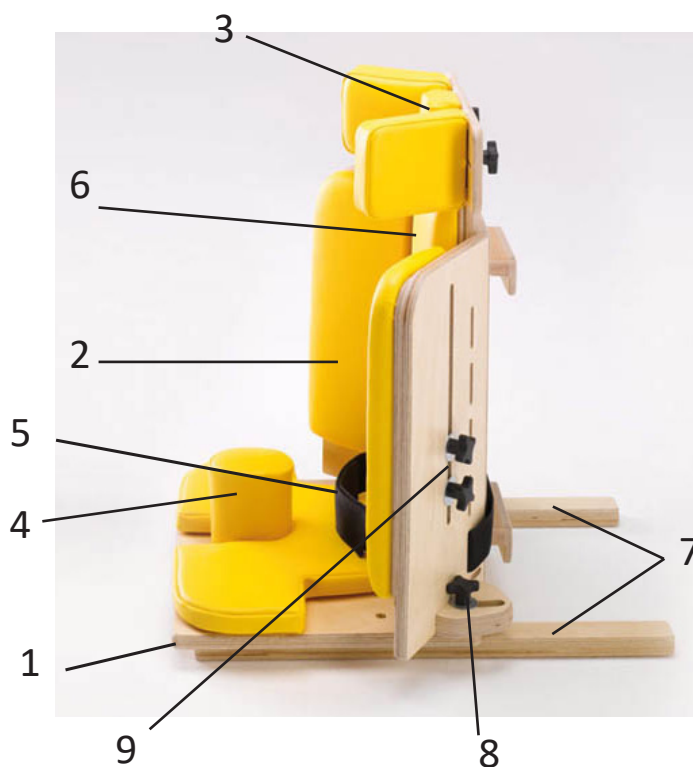

Charlotte är en golvsits av hög kvalitet. Charlotte är tillverkad av en träram som polstrats med ett tåligt tyg som kan torkas av med fuktig trasa med mildt rengöringsmedel eller desinfektionsmedel.

## Allmänna säkerhetsinstruktioner

Läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder sitthörnan Charlotte. Lär dig funktionerna och hur du hanterar produkten. Som förälder eller annan målsman är du ansvarig för säkerheten omkring ditt barn. Säkerheten kan äventyras om du inte följer instruktionerna i bruksanvisningen. Många oväntade situationer kan dyka upp som inte kan förutses och därför inte beskrivs i bruksanvisningen. Vi ber er därför att alltid vara försiktiga och informera alla personer som finns runt barnet, som använder sig av hjälpmedlet och dem olika tillbehören, om hur produkten fungerar och skall användas.

Kontakta oss gärna för mer information eller om det finns några oklarheter i bruksanvisningen, se sidan 2 för kontaktinformation.

### Viktigt!

Charlotte får endast användas på plan, slät golvyta inomhus. Följ rekommendationerna för ålder och vikt. Placeras inte sitthörnan Charlotte på ett bord eller liknande, hörnstolen kan falla och barnet kan komma att skadas.

Placera aldrig ett för stort barn i en för liten hörnstol, ej heller i en extremt framåtlutad eller bakåtlutad position - **varning för tipprisk!**



Bild 1

## Kontroll vid leverans

I originalförpackningen finner du följande delar vid leverans:

- Huvudstöd
- Sidostöd
- Höftbälte
- Sittdyna
- Abduktionskloss
- Tillbehör enligt beställning
- Bruksanvisning

## Varning!

Ta bort allt förpackningsmaterial som skyddat sitthörnan under transport. Tänk på att plastpåsar och liknande kan vara livsfarligt för små barn att leka med – **varning för kvävningsrisk!**



Bild 2

## Inställningsmöjligheter

Innan barnet kan sitta i hörnstolen Charlotte bör man justera vissa inställningar så att stolen blir anpassad efter barnets kropp och förmåga.

## Höftbältet

Höftbältet knäpps ihop med hjälp av kardborreband.

## Brösthälet

Brösthälet kan beställas som tillbehör och används för barn som behöver stöd även för överkroppen. Placera bröstbältet i önskad höjd genom skårorna på ryggstödet och knäpp ihop med hjälp av kardborrebanden.

## Inställning av abduktionskloss

Lossa skruven på undersidan försiktigt så att abduktionsklossen kan skjutas fram eller bakåt i skåran.

Prova fram avståndet som barnet behöver för att kunna sitta bekvämt och stadigt.

Skruva därefter fast skruven i det önskade läget.

Se bild 4.



Bild 3

## Inställning av sidostöden

Sidostöden kan dels justeras i vinkel, dels i höjd, se inställning av sidostöd samt ryggplatta i höjd

Lossa på skruven på ryggens baksida vid sittplattan. Placera sidostödet i önskad vinkel. Skruva fast ordentligt.

Gör likadant på andra sidan.



Bild 4



## Inställning av huvudstöd

På hörnstolens baksida finns ett stag med två skåror. Lossa på rattarna överst på ryggen och ställ huvudstödet steglöst i rätt höjd.

Huvudstödet kan också ställas i bredd på var sida.

Genom att lossa på skruvarna på både höger och vänster sida om ryggstödet och skjuta det övre ryggstödet uppåt kan man förlänga ryggstödet.

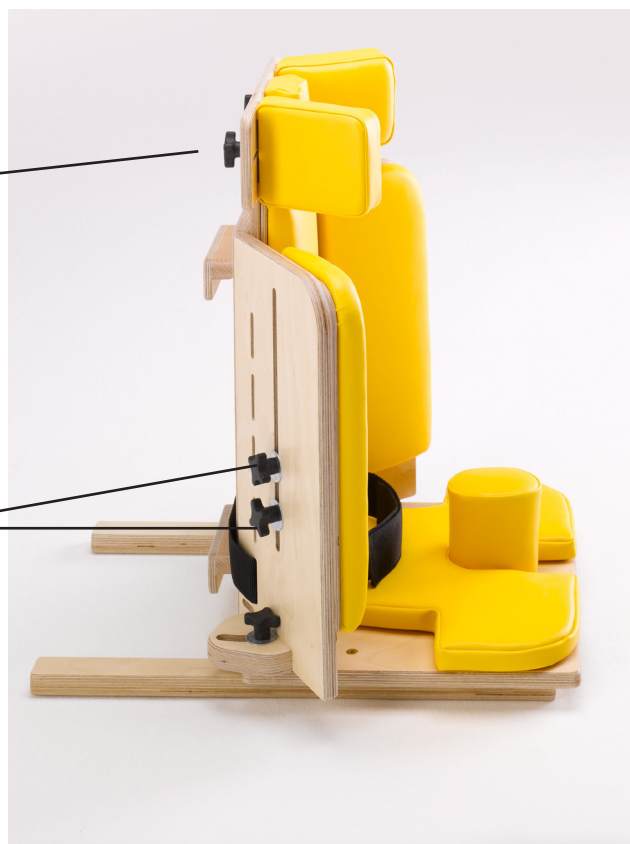


Bild 5

## Inställning av sidostöd samt ryggplatta i höjd

På sidostöden och på ryggplattan sitter rattar i varsin skåra.

Skjut polstringen till önskad höjd. Dra åt bägge skruvarna efter justeringen.



Bild 6

## Viktigt!

Lämna aldrig ett barn i sitthörnan Charlotte ensam. Ha alltid barnet under uppsikt!

## Underhåll och skötsel

Sitthörnan Charlotte ska endast användas på plant, slätt och hårt underlag. Charlotte är främst avsedd för användning inomhus, men begränsad utomhusanvändning är tillåten. Var dock uppmärksam på att underlaget måste vara plant, torrt och fritt från vatten, smuts och fukt.

Charlotte får inte förvaras utomhus. Rengör och tvätta av sitthörnan Charlotte ofta, använd fuktad trasa och milda rengöringsmedel såsom diskmedel eller liknande. Sitthörnan Charlotte kan torkas av med desinfektionsmedel, använd ett desinfektionsmedel med tensid alternativt ett oxiderande ytdesinfektionsmedel.



Bild 7

## Teknisk data sitthörnan Charlotte

Mått i cm	storlek 1	storlek 2	storlek 3
Ca ålder	6 mån - 2 år	1 år - 6 år	4 år - 10 år
Max brukarvikt	25 kg	35 kg	50 kg
Sittdjup	30	30	35
Max sittbredd	40	40	45
Rygghöjd	41 - 52	52 - 66	55 - 69
Vikt	10kg	12 kg	14 kg

## Checklista

	Dagligen	Varje vecka	Varje månad
Bröstkådet	X		
Höftbältet	X		
Abduktionskloss		X	
Justering bredd x höjd			X

Sitthörnan **Charlotte**

Säljs i Sverige genom:

**MAYDAY AID AB**  
Arendalsvägen 35  
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300 - 56 97 00

[info@maydayaid.se](mailto:info@maydayaid.se)  
[www.maydayaid.se](http://www.maydayaid.se)

**MAYDAY AID**

Producent:

**G&S Smirthwaite**  
17 Wentworth Road,  
Newton Abbot, Devon  
TQ 12 6TL UK

**Tel +44 (0)1626 835552**

[info@smirthwaite.co.uk](mailto:info@smirthwaite.co.uk)  
[www.smirthwaite.co.uk](http://www.smirthwaite.co.uk)

