

Bruksanvisning



EASyS Advantage



Senast redigerad 2021-04-21

MAYDAY AID


Thomashilfen

Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av sittvagnen EASyS Advantage. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna hoppas vi att ni får stor glädje av er sittvagn.

Innehållsförteckning

Allmän information	3	Ryggvinkel	12
Användningsområde	3	Klädsel	12
Produktansvar och säkerhet	4	Fälla upp sittvagnen	13
Garanti och hållbarhet	4	Fälla ihop sittvagnen	14
Service och reparationer	4	Vändbar sättenhet	15
EASyS Advantage - Introduktion	5	Service- och rekonditioneringsanvisning	16
Allmänna säkerhetsinstruktioner	6	Checklista	16
Kontroll vid leverans	7	Demontering och skrotningsinstruktion	16
Monteringsanvisning	7	Teknisk data	17
Montering av korg	8		
Sitsvinkeln	8		
Montering av sättenhet	8		
Riktningsspärr	9		
Parkeringsbroms	9		
Sittdjup	10		
Sittbredd	10		
Ryggstödshöjd	10		
Benlängd / Fotplatta	11		
Vinkla benstödet	11		

Mayday Aid AB

Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300-56 97 00

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se

Allmän information

EASyS Advantage är en sittvagn för barn och ungdomar. Sittvagnen är framtagen och designad för barn och unga med funktionsvariation och som behöver sitta bekvämt och säkert vid förflyttning. För att kunna göra inställningar av sittvagnen så enkelt som möjligt, ber vi dig läsa denna bruksanvisning först, innan sittvagnen tas i bruk.

Om du har frågor eller undrar över något är du alltid välkommen att ringa eller skriva till oss, kontaktuppgifter hittar du på sidan 2.

Vi hoppas du kommer att bli riktigt nöjd med sittvagnen EASyS Advantage.

Användningsområde

EASyS Advantage är en sittvagn för barn och ungdomar. Observera att endast ett barn får åka i sittvagnen. Använd alltid bälten eller selen så att barnet sitter säkert och inte kan ramla ur vagnen. Sittvagnen får endast köras av en vuxen person. EASyS Advantage skall skjutas framför förälder eller annan vårdnadsgivare.

Sittvagnen är lätt att köra. Fixera gärna framhjulen med riktningsspärrarna rakt, då sittvagnen ska köras på ojämna mark. När EASyS Advantage körs på plan mark blir sittvagnen smidigare att svänga om man tar bort riktningsspärren på framhjulen.

EASyS Advantage skall användas för barn eller ungdomar som behöver hjälp med förflyttningar.

Tack vare EASyS Advantage konstruktion kan man fälla ihop sittvagnen så att den får plats i bagageutrymmet.

Varning!

Lägg alltid väskor, kassar eller andra tunga föremål i korgen, (under vagnen) annars finns risk för att sittvagnen tipsar bakåt.

Produktansvar och säkerhet

EASyS Advantage är en CE märkt produkt. Detta är en garanti på att Advantage uppfyller alla gällande europeiska säkerhetskrav.

Företaget Thomashilfen GmbH[®] försäkrar härmed, som producent med ensamt ansvar, att Advantage är CE märkt enligt direktiv 93/42/EEC om medicinsk utrustning i klass 1.

Produkten får inte ändras, inga tillbehör eller reservdelar från någon annan tillverkare får monteras utan att CE märket tas bort och produktansvaret slutar att gälla.

Garanti och hållbarhet

Garanti gäller endast då produkten används enligt denna bruksanvisning vilken följer producentens rekommendationer.

EASyS Advantage har 2 års garanti. Garanti gäller då EASyS Advantage förvaras inomhus samt att service, skötsel- och rekonditioneringsanvisningar efterföljs.

Service och reparationer

Service och reparationer på EASyS Advantage skall endast utföras av behörig personal som till exempel hjälpmedelstekniker eller representanter från företaget Mayday AidAB.

Vid montering och justering av tillbehör behövs verktyg. Var noga med att alltid dra åt låsrattar, skruvar mm efter justering.

Lämna aldrig barn, som sitter eller sover i sittvagnen ensam!

EASyS Advantage - Introduktion

EASyS Advantage finns i två storlekar och är tillverkad för att passa barn som behöver sitta i vagn under förflyttningar. EASyS Advantage ska köras av vuxen person.

Tänk på att tipprisk föreligger då sittvagnar körs på ojäm och sluttande mark.

På bilden nedan visas EASyS Advantage med korg, riktningsspärr och nackstöd. I standardutförandet är klädseln grå och transportfästen ingår.

1. Körhandtagsbåge
2. Parkeringsbroms
3. Bakhjul
4. Riktningsspärr
5. Framhjul
6. Fotplatta
7. Sidostöd
8. Långa sidostöd
9. Höftstöd
10. Korg



Bild 1

Allmänna säkerhetsinstruktioner

Läs hela bruksanvisningen innan du använder sittvagnen EASyS Advantage. Lär dig funktionerna och hur du hanterar produkten, öva gärna praktiskt att slå ihop och fälla ut sittvagnen.

Som förälder eller annan målsman är du ansvarig för säkerheten omkring ditt barn. Säkerheten kan äventyras om du inte följer instruktionerna i bruksanvisningen. Många oväntade situationer kan dyka upp som inte kan förutses och därför inte beskrivs i bruksanvisningen. Vi ber dig därför att alltid vara försiktig och informera alla personer som finns runt barnet som använder sig av hjälpmedlet om hur produkten fungerar och skall användas.

Använd parkeringsbromsen varje gång du sätter i eller tar barnet ur EASyS Advantage. Parkeringsbromsa vagnen när du ska montera eller justera ett tillbehör.

Kontakta oss gärna för mer information eller om det finns några oklarheter i bruksanvisningen, se sid 2, för kontaktinformation.

Viktigt!

EASyS Advantage får användas ute och fungerar på såväl jämn som ojämn mark. Tänk på att sittvagnar kan tippa på gropigt eller rulla iväg på sluttande mark. Kontrollera alltid EASyS Advantage efter flygresor eller liknande. Sittvagnen kan ha blivit utsatt för kraftiga slag och hård hantering.



Bild 2

Kontroll vid leverans

I originalförpackningen finner du följande delar vid leverans:

- Sittenhets med klädsel
- Chassi med transportfästen
- Korg
- Tillbehör enligt beställning
- Bruksanvisning



Bild 3

Varning!

Ta bort allt förpackningsmaterial som skyddat sittvagnen under transport. Tänk på att plastpåsar och liknande kan vara livsfarligt för små barn att leka med – kvävningsrisk!

Monteringsanvisning

Lyft upp EASyS Advantage ur förpackningen. Vrid den röda låsknappen på vardera sidan, se bild 4.

Ta tag i körhandtaget, eventuellt behöver körhandtaget ställas i en annan vinkel. Lyft rakt upp tills dess ett ljudligt låsklick hörs.

Under sitsen finns en låsklämma som reglerar sitsvinkeln, placera sitsen i önskad position, se bild 5.



Bild 4

Montering av korg

Korgen ingår i standardutförandet.
Fäst korgen under sittenheten i de fyra metallöglorna som sitter på ramen.
Se bild 5.



Bild 5

Varning!

Lägg alltid väskor, kassar eller andra tunga föremål i korgen, annars finns risk för att sittvagnen tipsar bakåt!

Sitsvinkeln

På ryggen sitter ett låsreglage som reglerar sitsvinkeln, placera sitsen i önskad lutning, se bild 6. Kontrollera alltid att sitsen sitter fast i önskad vinkel efter justering.



Bild 6

Montering av sittenhet

Sitsen på EASyS Advantage kan monteras så att barnet antingen åker i färdriktningen eller att föraren kan ha ögonkontakt med barnet.

Under sittenheten finns metallkrokar. Krokarna skall fästas på chassiramen. Luta sitsen bakåt, för in krokarna i ramen, se bild 7. Tryck sedan ner främre delen av sitsen, ett ljudligt klick skall höras då sitsen låses automatiskt fast i sitsen.

Kontrollera alltid att sitsen sitter ordentligt fast innan barnet placeras i sittvagnen.



Bild 7

Hjulets olika funktioner

A. Riktningsspärr

Riktningsspärren hindrar framhjulen från att snurra runt. Gör följande för att låsa riktningsspärren.

Ställ hjulen i rak linje bakåt. Lyft upp och vrid den svarta hatten på riktningsspärren. Släpp ner hatten så att hjulens fixeras i rak linje med bakhjulen.

Genom att låsa alla fyra hjulen rakt fram blir det lättare att köra sittvagnen på ojämnt underlag som trottoarer som lutar eller i snö och slask.

När man ändrar körriktning är det lättast att försiktigt luta sulkyn bakåt och samtidigt vända sulkyn åt önskat håll.

B. Parkeringsbroms

Parkeringsbromsen hindrar hjulet helt från att rotera. Gör följande för att låsa med parkeringsbromsen:

Stå bakom sulkyn. Håll fast körhandtaget. Tryck ner bromsröret. Kontrollera att bromsklossarna på var sida slår an mot bakhjulen.

Tänk på att inte lämna parkeringsbromsen på hjulet under lång tidsperiod, bromsklossen kan då lämna märken på hjulet och göra hjulet ojämnt.



Bild 8



Bild 9

Sittdjup

Lyft upp klädseln från sitsen.
Lossa på insexskruvarna i skårorna på sittplattan och på höftstöden.
Skjut eller dra plattan i framkant tills dess att rätt sittdjup är inställd. Skruva fast.
Sittplattan skall ge lårbenen lång understödsyta. Tänk på att sitsen bör sluta ca 2-3 cm innan knävecket.



Bild 10

Sittbredd / Höftstöd

Vik undan klädseln från sitsen. Lossa på de fyra låsrattarna under sitsen som håller höftstöden på plats.

Skjut in eller tryck ut höftstöden till önskad placering. Fixera därefter positionen genom att dra fast låsrattarna igen.



Bild 11

Ryggstödshöjd

Skruva upp låsrattarna i skårorna. Dra upp eller skjut ner översta ryggstödsplattan till önskad höjd.
Skruva fast låsrattarna på vardera sidan.

Då ryggstödshöjden befinner sig i lägsta höjd kan "överbliven" klädseln tryckas ner mellan ryggstödsplattan och sittplattan.



Bild 12

Benlängd / Fotplattan

Inställning av fotplattans höjd.

Lossa först på bägge skruvarna på fotplattans fäste. Lyft upp eller sänk fotplattan till önskad höjd.

Fotplattan kan fällas upp då förflyttning i eller ur vagnen görs. Fotplattan kan också vinklas. Dra åt skruvarna ordentligt efter att en ändring är gjord.



Bild 13

Vinkla benstödet

A. Lossa låsspaken på bägge sidor.

För fotplattan upp eller ner för önskad vinkel i knäled. Skruva och lås fast på bägge sidor.



Bild 14

Tips!

Då barnet ligger plant och sover eller vilar i vagnen bör benstödet höjas till vågrät position.

När barnet sitter rakt upp med ryggen, bör man vinkla benstödet rakt ner.



Bild 15

Ryggvinkeln

Ryggvinkeln kan steglöst ställas i lutning. Lossa på låsvredet på ryggstödet baksida. För låsvredet uppåt eller neråt i skåran. Notera hur ryggstödet lutning förändras. Skruva åt låsvredet när ryggens lutning kommer i önskad position.

Under låsvredet sitter en låsspärr. Låsspärren löser ut automatiskt när rygglutningen går förbi dess läge. Dra ut låshatten för att passera läget för att få ner ryggstödet till plant läge.



Bild 16

Klädseln

Polstringen / Klädseln är specialvävd för att få luft att cirkulera mellan sittenheten och barnets hud. Luftspalten gör att EASyS Advantage är skön och bekväm att sitta i under såväl sommar som vintertid.

Klädseln kan enkelt tas av för tvätt med hjälp av kardborrebanden/dragkedja på sidan, se bild 17.



Bild 17

Knäpp ihop de långa sidostöden med sidoklädseln.

Klädseln kan tas av för att tvättas i maskin 40°. Klädseln skall inte torktumlas. Om klädseln utsätts för starkt solljus kan det blekna. På bilden visas uttaget för sufflett-fästet, se bild 18.

Tyget i klädseln är flamsäkert. Extra klädsel finns som tillbehör.



Bild 18

Vi rekommenderar att ta av sittenheten vid ihopfällning. Sittvagnen blir både enklare och lättare att hantera när man lyfter vagnen.

Fälla upp sittvagnen med sittenheten monterad på

Sittenheten skall vara monterad i färdriktningen då den fälls ihop tillsammans med chassi-underredet.

1. Lyft i körhandtaget, tryck in på knappen på körhandtagets sidor för att kunna vinkla handtaget för ett bättre grepp.
2. Ta tag i körhandtaget och dra sedan uppåt med en rörelse, sätt gärna foten på röret mellan bakhjulen. Ett ljudligt klick skall höras från bägge sidor när låsspärrarna hamnar på plats.
3. Vinkla sittenheten, se sid 8.
4. Vinkla ryggstödet, se bild 13.
5. Justera fotstödet/ knäleden, se sid 11



Bild 19



Bild 20



Bild 21

Fälla ihop sittvagnen med sittenheten monterad på underredet

1. Sittenheten måste vara monterad i färdriktningen, se bild 22.
2. Vinkla ner ryggstödet horisontellt, se bild 22.
3. Fäll upp fotplattan, vinkla knäleden uppåt så att fotplattan hamnar i sitsen, se bild 23.
4. Stå bakom sittvagnen, lyft säkerhetsbygeln samt låspärren på var sida om chassi ramen. Dra låspärrarna uppåt. Tryck vagnen framåt. Vagnen viker ihop sig, se bild 23.



Bild 22



Bild 23

Fälla ihop sittvagnen utan sittenheten påmonterad

1. Ta av sittenheten. Ta tag i låsspaken på ryggstödet baksida, dra sittenheten bakåt. Lyft bort sittenheten.
2. Stå bakom chassiramen / underredet.
3. Lyft säkerhetsbygeln samt låspärrarna på var sida uppåt. För körbygeln bakåt samtidigt som du trycker vagnen framåt. Vagnen viker ihop sig.
4. Lås fast vagnen genom att trycka in den röda låsspaken på sidan efter ihopslagning.



Bild 24

Service- och rekonditioneringsanvisningar

EASyS Advantage klädsel är enkel att ta av. Tvättas i maskin 40 grader. Vi rekommenderar att lägga klädseln plant under torkning, torktumla inte.

Borsta regelbundet bort ludd och annan smuts från kardborrebanden så att kardborren fäster ordentligt. Stäng ihop kardborrebanden innan klädseln tvättas.

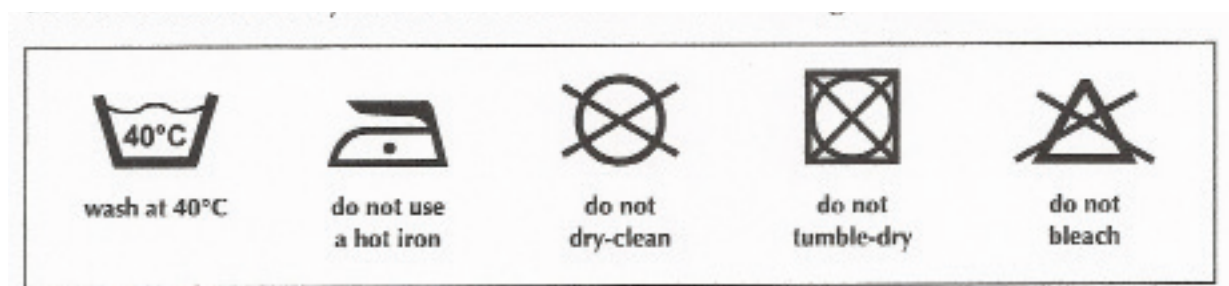


Bild 25

Skötsel av chassiram

Sittvagnen EASyS Advantage chassiram skall torkas av med fuktig trasa och milda rengöringsmedel till exempel diskmedel. Ramens lack behåller sin glans och färg bäst om den inte utsätts för skrap mot hårda ytor. Använd inte stålull eller liknande material vid rengöring. Var försiktig vid ihopfällning.

Vändbar sättenhet

Sättenheten på EASyS Advantage kan monteras i färdriktning eller som här på bild 21, ansikte mot ansikte.

För många föräldrar innebär det stor trygghet att hela tiden kunna ha ögonkontakt med sitt barn.



Bild 26

Service- och rekonditioneringsanvisningar, fortsättning

Sittvagnen EASyS Advantage skall förvaras inomhus.

Sand, hår och skräp förstör kullager. Håll därför hjulen så rena som möjligt.

Rengör ofta ramrör, hjulnav, bälten m m.

EASyS Advantage skall kontrolleras regelbundet för bästa hållbarhet och funktion, var vänlig följ checklistan nedan.

Checklista

	Dagligen	Varje vecka	Varje månad
Bälten, klädsel och körhandtag	X		
Parkeringsbroms	X		
Låsvred och skruvar		X	
Bakhjul, framhjul och kullager			X
Fotplattans höjd			X

Demontering och skrotningsinstruktion

Mayday Aid AB arbetar för hållbar utveckling genom återvinning. Att återvinna avfall betyder att man tar tillvara på material och försöker återanvända dem. Kontakta din kommun för information om var du kan lämna in din förbrukade sittvagn/ sulky för återvinning.

Material som ska lämnas på återvinningscentral är följande:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Metall | Återvinns och sorteras med METALL |
| 2. Gummi / Plast | Återvinns och sorteras med BRÄNNBART |
| 3. Klädsel, tyg, remmar och annan textil. | Återvinns och sorteras med BRÄNNBART |

Teknisk data EASyS Advantage

Mått i cm	Storlek 1	Storlek 2
Sittdjup	19 - 30	27 - 38
Sittbredd	19 - 31	25 - 37
Ryggstödshöjd	41,5 - 68	55 - 74
Handtagshöjd	92 - 114	92 - 120
Underbenslängd	17,5 - 29	21 - 37
Fotvinkel	78° - 100°	78° - 100°
Knäinkel	90° - 180°	90° - 180°
Höftvinkel (vinkling av ryggstöd)	90° - 180°	90° - 180°
Vinkling av sittenhet i A chassi (Tilt-in-space)	-10° till +35°	-10° till +35°
Totala mått uppfälld (L x B x H)	99,5 x 59,5 x 114	107 x 69 x 120
Totala mått ihopfälld (L x B x H)	82 x 59,5 x 42,5	86 x 69 x 55
Framhjul	7,5"	7,5"
Bakhjul	10"	10"
Vikt, sittenheten	9 kg	10,4 kg
Max belastningsvikt	35 kg	40 kg
Vändbar sittenhet	180°	180°

Sittvagnen



EASyS Advantage

Säljs i Sverige genom

Mayday Aid AB

Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300 - 56 97 00

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se



Producent

Thomashilfen GmbH

Medico KG
Walkmühlenstrasse 1
27432 Bremervörde

Tel +49 (0) 47 61 / 88 677

info@thomashilfen.de
www.thomashilfen.de

