

Sadelöverdrag med gel till gästolarna: Miniwalk, Meywalk 2000 och MK4

Monteringsanvisning

- Gelsadelöverdragen finns till tre sadlar: mini, mellan och stor.
- Materialet är svart konstläder och tvättas av med desinfektionsmedel.



Bild 1

- På bilden ovan är sadelöverdraget monterad på gästolen MK4 med stor sadel.



Bild 2



Bild 3



Bild 4

Lägg geldynan med överdraget som på bilden med texten synlig.

Börja med att stoppa in geldynan "Front" i överdraget, därefter "Back".

Lägg gelsadelöverdraget över sadeln och dra ihop dragkedjan både fram och bak. Fäst slutligen kardborrebanden under sadelsitsen.