

MAYDAY AID

# Harry, Heathfieldstol



Denna bruksanvisning ger information om användningsområde och skötselråd för Harry, Heathfield stolen samt beskrivning av några av de vanligaste tillbehören.

Genom att läsa igenom bruksanvisningen och följa skötselråden, så hoppas vi att ni får god nytta av stolen.

## **Innehållsförteckning**

Introduktion	sid 2
Kontroll vid leverans	sid 2
Användningsområde	sid 3
Teknisk beskrivning	sid 4
Montering	sid 5
Tillbehör	sid 6
Skötselråd	sid 7
Garanti	sid 7
Teknisk data	sid 8
Observera	sid 9

## **Kontroll vid leverans**

Stolen levereras monterad, tillsammans med eventuella tillbehör enligt beställning. Kontrollera stolen för eventuella skador innan den tas i bruk.

## Användningsområde

Harry, Heathfield stolen är lämplig för barn från 2 år till unga vuxna som behöver visst stöd i sittande. Ett flertal tillbehör finns tillgängliga för att stolen ska kunna möta de behov som finns.

Harry, Heathfield stolen kan väljas med höj- och sänkbara eller fasta armstöd. Vid beställning väljs även plan eller formad sits samt hög eller låg rygg. Stolen finns i ett flertal färger.



## Teknisk beskrivning

- A. Ryggstöd
- B. Höj- och sänkbart armstöd
- C. Stödben
- D. Höftbälte
- E. Formad sits

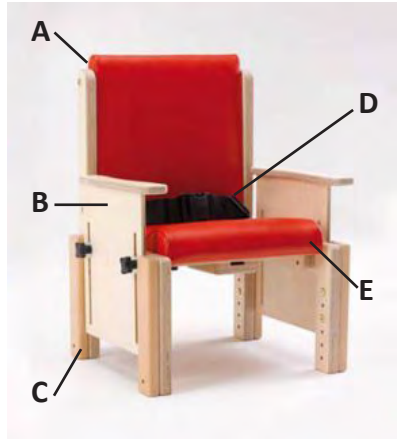


Bild 1

## Kontroll vid leverans

Kontrollera först kartongens yttre för eventuella transportskador. Detta bör göras i samband med leverans.

Stolen levereras monterad. Eventuella tillbehör som inte kan levereras påmonterade är packade separat. Släng omedelbart bort all plast, eftersom det kan utgöra kvävningrisk.

Kontrollera alla delar och kontakta direkt Mayday Aid AB vid eventuella fel.

## Inställningar

### Justering av sitsdjup

Sitsdjupet justeras genom att de två handskruvarna (A, bild 2) under sitsen lossas och sitsen skjuts framåt eller bakåt tills dess att önskat sittdjup är uppnått. Skruva fast skruvarna igen för att låsa läget.

Ett riktmärke är att hålla cirka 25 mm mellanrum mellan knäts baksida och sitsens framre kant för att undvika tryck.

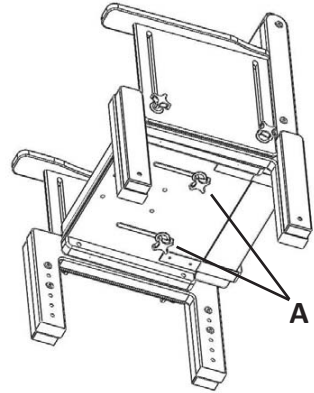


Bild 2

### Justering av sitthöjd

Sitthöjden justeras genom att de två skruvarna på stödbenens utsida (A, bild 3) respektive insida (B, bild 3) lossas med den medföljande insexnyckeln.

Se till att alla stödben är inställda på samma höjd innan skruvarna sätts på plats och skruvas åt. Kontrollera att stolen står stabilt innan brukaren sätter sig.

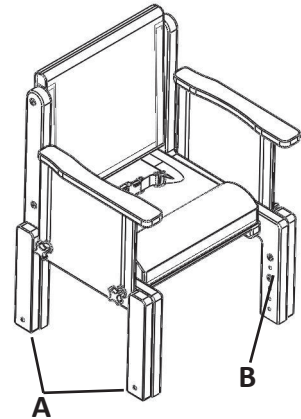


Bild 3

## Justering av armstöd

Observera att detta enbart gäller stolar med justerbara armstöd.

För att justera armstödens höjd lossas handskruvarna (A, bild 4) på armstödet sida och skjuts uppåt eller nedåt till önskad höjd. Skruva sedan fast skruvarna igen. Se till att båda armstöden ställs in på samma höjd.

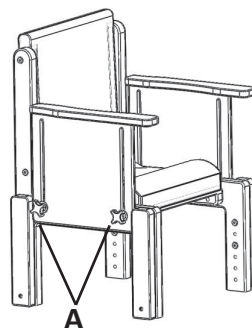


Bild 4

Armstöden kan sänkas till samma höjd som sitsen, för att förenkla förflyttning. Gäller dock ej storlek 1.

## Höftbälte

Höftbältet låses genom att A (bild 5) förs in i B (bild 5) tills ett klick hörs.

Höftbältet öppnas genom att båda sidorna på A trycks in.

Höftbältets längd justeras genom att dra åt eller lossa bältet i bältesklämman.

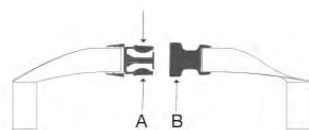


Bild 5

Höftbältet kan tas loss för rengöring eller dylikt genom att de lossas från knappfästena under sitsen (A, bild 6).

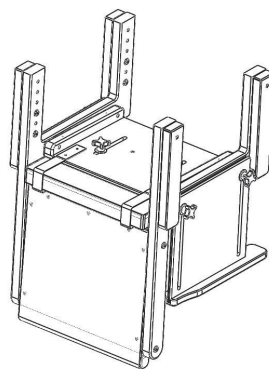


Bild 6

## Några vanliga tillbehör

### Bord

Bordet (bild 7) skjuts på armstöden och block på bordets undersida roteras för att låsa bordet i position.

Armstöden måste vara ställda i exakt samma höjd innan bordet monteras.



Bild 7

### Abduktionskloss

Abduktionsklossen monteras under sitsen och skjuts framåt eller bakåt till önskad position innan den låses med handskruven (A, bild 8).

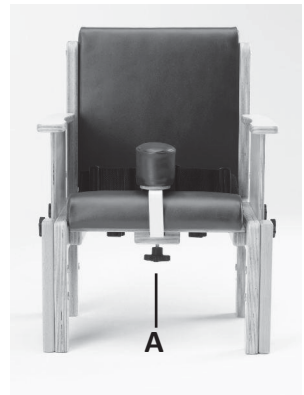


Bild 8

### Bas med hjul

Placera de bakre stödbenen vid de bakre blocken på basen. Använd de medföljande skruvarna och fäst stödbenen vid blocken.

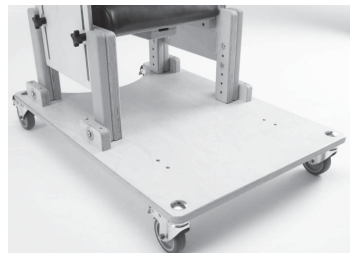


Bild 9

### Ställbart fotstöd

Det ställbara fotstödet monteras på stolen genom att de främre benen skjuts in mellan basens sidor och fästs med de medföljande skruvarna.

Fotstödet höjd och vinkel kan anpassas till brukaren genom att handskruvarna (A, bild 10) lossas och plattan ställs i det läge som önskas. Skruva åt handskruvarna igen innan fotstödet används.

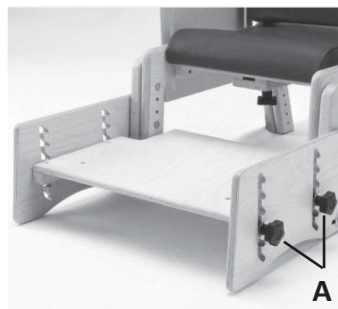


Bild 10

### Vändbar fotplatta

Fotplattan och medarna monteras på stolens stödben med de fyra medföljande skruvarna (A, bild 11). Tillbehöret kan monteras så att fotplattan antingen ligger direkt på golvet eller på medarna, vilket ger en förhöjning på några cm.

Skruva åt skruvarna ordentligt innan stolen ska användas.

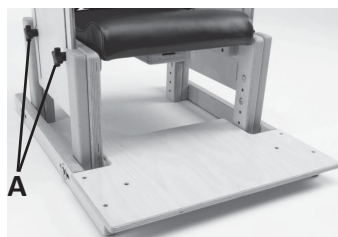


Bild 11

### Dynor

Det finns ett flertal olika modeller och storlekar på dynor som ger stöd för bäckenet och ländryggen. Se de olika modellerna och storlekarna på beställningsguiden.

Sidostöden (bild 12) kilas in under armstöden och kan därför bara användas på stolar med justerbara armstöd.

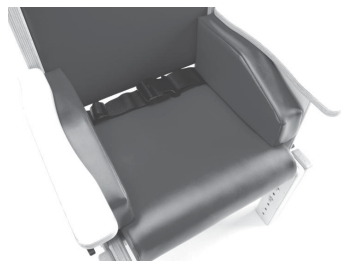


Bild 12



## Övriga tillbehör

Det finns ett flertal tillbehör till Heathfieldstolen som inte visas i denna bruksanvisning. Dessa visas på beställningsguiden. Kontakta gärna Mayday Aid AB för hjälp med anpassning av stolen.

## Teknisk data

(alla mått anges i mm)

Storlek	Sitthöjd	Sittbredd	Sittdjup
1	190-240	240	180-240
2	210-310	280	220-310
3	270-340	320	260-340
4	310-410	360	320-410
5	350-450	430	370-470
6	400-500	430	450-550

## Rengöring

Stolens trädelar och klädseln rengörs med en fuktig trasad och mildt rengöringsmedel. Höftbältet kan vid behov rengöras i tvättmaskin på låg temperatur och hängtorkas. Höftbältet får en torktumlas. Blekmedel, starka lösningsmedel, slipmedel, syntetiska rengöringsmedel och antibakteriella rengöringsmedel får ej användas.

## Garanti

Harry, Heathfieldstolen är CE-märkt och har 2 års garanti, förutsatt att stolen används på det sätt den är avsedd att användas och att det inte utsätts för yttre åverkan. Kontakta Mayday Aid vid frågor gällande garantin.



## **Säkerhetsanvisningar**

Lämna aldrig brukaren ensam i stolen utan uppsikt.

Alla inställningar ska göras innan brukaren sätter sig i stolen.

Stolen får enbart användas inomhus och på plant golv.

Överskrid aldrig max belastning.

Använd alltid höftbältet eller motsvarande tillbehör när brukaren sitter i stolen.

Endast originaldelar och -skruvar får användas till stolen.

När bord används till storlek 1 och 2 måste stolen utrustas med medar, fotstöd eller bas med hjul för att bli stabil. Det finns annars en risk att stolen tippar.

Förvara stolen i en rumstempererad och torr miljö. Får inte stå i direkt solljus.

# Harry, Heathfield stolen

Säljs i Sverige genom:

**MAYDAY AID AB**  
Arendalsvägen 35  
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300-56 97 00  
Fax 0300-56 97 01

info@maydayaid.se  
www.maydayaid.se



Producent:

**G&S SMIRTHWAITE LDT**  
17 Wentworth Road  
Heathfield  
Devon TQ12 6TL

Tel +44 1626 835552  
Fax +44 1626 835428

info@smirthwaite.co.uk  
www.smirthwaite.co.uk

