

Flux är en posterior rollator som finns i fyra storlekar.

Storlek 1, för de minsta barnen, finns i röd färg, storlek 2 blå, storlek 3 havsblå, storlek 4 grå.

Standardutförande: Handtag, riktningsspärr, släpbroms, backspärr och massiva hjul.



Flux storlek 1

Användningsområde

Flux är en posterior rollator som skall användas som stöd vid gående bakom brukaren. Rollatorn kan användas både ute och inne. Rollatorn skall endast användas av en person åt gången och vara rätt inställd i höjd. Rollatorn får inte användas att köra någon/något på. Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Se www.maydayaid.se



Viktigt att veta

Vid utomhusanvändning bör handtagsbroms vara monterad. Tänk på att ojämn mark kan orsaka att rollatorn kan välta.


Hopfällningsstagen mellan fram- och bakhjul måste vara spärrat i ytterläge vid användning. Höjden på handtagen får inte överstiga låsfjäders utfällningsläge. Används korg måste tippskydd vara monterade. Belasta rollator Flux och korgen endast upp till maxvikt.



Ta med i bil / Fäll ihop



1. Dra ut den svarta låshatten och vrid den. Lossa därefter på utfällningsstagen på rollatorns bågiga sidor.

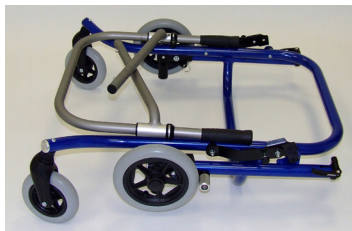

2. Fäll ihop chassit, önskar man göra rollatorn ännu mindre, lyft upp handtagen ur chassit och slå ihop det, se bild. Insexnyckel behövs.



Skötsel / Underhåll

Runt hjul samlas mycket damm och hår, skruva av hjulen och ta bort smuts och damm regelbundet eller när rollatorn går trögt. Kontrollera att hjulen sitter fast och att handtagen sitter på rätt höjd för användaren. Använd aldrig en skadad eller defekt rollator. Tvätta ren rollatorn med mjuk, fuktig trasa och milda rengöringsmedel t ex diskmedel. Kontrollera alltid att bromsar fungerar efter tvätt! Förvara rollatorn inomhus.

Mer information hittar du på www.maydayaid.se