

Meywalk® 4



Large



Micro



Small



Medium

Gåstolen som ger en säker gång.



MEYWALK®4 säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA
Tel: 0300-56 97 00, info@maydayaid.se, www.maydayaid.se



Meywalk® 4

Naturlig och säker gång.

Meywalk®4 är en modern gåstol för barn, ungdomar och vuxna. Flera nya, smarta funktioner har tillkommit efter önskemål från både användare och vårdpersonal. Förutom fjädringen i sidorören, har Meywalk 4 även en dynamisk sadel som fjädrar mjukt i sidled. Sadeln följer bäckenets naturliga rörelsemönster vid gång. För ökad trygghet är bakåtspär, riktningsspär och släpbroms redan monterad i standardutförande.

Meywalk®4 är enkel att justera och ställa in för att passa användaren och alla vardagsinställningar kan göras helt utan verktyg. Den öppna designen, liksom sitsens höj- och sänksystemet, gör att det är säkert för användaren att ta sig i och ur gåstolen. När hävbygeln på gåstolens främre del lösgörs från låsklämman, sänks hela sättenheten ner till en höjd motsvarande sitthöjden på en säng, stol eller rullstol. Användaren kan då lättare förflytta sig till gåstolen och får sedan hjälp med uppresningen då hävbygeln åter trycks ned. Belastningen för medhjälparen blir endast 1/3 av användarens vikt. Hävbygeln finns på storlekarna small, medium och large. Gåstolen kan enkelt transporteras i större personbil då gåstolen enkelt kan delas.

Stabil, trygg och smidig

Tiltfunktionen på sättenheten gör det möjligt att vinkla gåstolen till användarens kroppshållning för en bättre gång. Tack vare den stabila ramen, stora bakhjul och lättmanövrerade länkhjul fram, blir gåstolen både stabil, trygg och smidig att använda. Gåstolen kan användas både inomhus och utomhus på rent, jämnt och plant underlag.

Bålstödsring och fjädrar ingår i standardutförandet. Vid beställning ange storlek på bålstödsring och önskad färg på fjädrarna efter användarens vikt.

Slitstark och tålig

Alla ramdelar är av stål för en stabil och tålig konstruktion. Färgen är pulverlackerad vilket ger en slitstark och tålig yta. Bålstödsringen och handbygeln är polstrad med skumgummirör av polyuretan, PUR, som är mjuk, behaglig och lätt att rengöra. **Meywalk®4, storlek medium och large**, är testad och godkänd för användare upp till 130 kg.

Fakta

| | Micro | Small | Medium | Large |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Artikelnummer | 14000 | 13000 | 11200 | 11250 |
| Längd | 77 cm | 85 cm | 86 cm | 98 cm |
| Bredd | 51 cm | 62 cm | 62 cm | 66 cm |
| Sadelhöjd | 25-45 cm | 44-67 cm | 60-84 cm | 80-104 cm |
| Bålstödshöjd | 52-65 | 74-99 cm | 101-133 cm | 120-152 cm |
| Bakhjul | 275 x 40 mm | 275 x 40 mm | 275 x 40 mm | 275 x 40 mm |
| Framhjul | 150 x 32 mm | 150 x 32 mm | 200 x 30 mm | 200 x 30 mm |
| Max belastning | 60 kg | 100 kg | 130 kg | 130 kg |
| Vikt | 13 kg | 25 kg | 32 kg | 34 kg |
| Ramfärg | svart/grå | grön | röd/silver | svart/silver |



Gåstolen är främst avsedd att användas inomhus på plan och slät yta men kan också användas ute på plan, torr mark.

Tillbehör

- Bendelare
- Höjreduceringsbeslag
- Bord
- Fotskyddsskenor
- Magplatta
- Höftstöd
- Tippstöd
- Limpsadel



För mer information se beställningsguide:
www.maydayaid.se



CE

MEYWALK®4 säljs i Sverige genom:
MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA
Tel: 0300-56 97 00
info@maydayaid.se, www.maydayaid.se

MAYDAY AID