

Monteringsanvisning sittbreddsdynor



Sittbreddsdynorna finns i två storlekar
2,5cm art nr 6832 / par
5 cm art nr 6835 / par

1. Lyft på sulkyns sittklädsel.
2. Placera sittbreddsdynorna med hjälp av kardborrebanden på var sida på sitsen.
3. Lägg tillbaka sitsklädseln och tryck klädseln in under dynorna.

Tänk på att dragkedjans lås skall placeras mot sulkyns ryggplatta.



På dynans klädseln finns etikett med information om det är en vänster eller en höger dyna och att klädseln kan tvättas i maskin i 60 °C.

