

# Hans och Greta



Sittdyna och ryggdyna  
som ger balans och stöd.

MAYDAY AID

Hans och Greta säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA  
Tel 0300-56 97 00 info@maydayaid.se, www.maydayaid.se

CE

# Hans och Greta

Sittdynan HANS tillsammans med ryggdynan Greta hjälper barn att sitta självständigt. Sittdynan Hans är skålad och ger stabilitet åt sittben, ländrygg och höfter. Sittdynan har också en inbyggd abduktionsförhöjning som hjälper till att dela på benen. Ryggdynan Greta är formad för att ge balans och säkerhet även i sidled.

Sittdynan Hans fixeras med en rem under stolen. Ryggdynan Greta monteras runt ryggstödet med den övre remmen.

I dynans sits finns ett höftbälte. Höftbältet placeras över barnets höft och kan spännas åt fram.

Båda dynorna är mjuka "Soft Touch" och ger barnet ett skönt och bekvämt stöd för självständigt sittande i såväl sittvagn eller på vanlig stol.

Materialet i sitsen släpper inte in vätska. Dynorna rengörs enkelt med flytande tvål, diskmedel eller desinficeras.



Tre olika storlekar av sits och ryggdyna:  
storlek 1 brun  
storlek 2 rosa  
storlek 3 röd  
Färgerna kan utgå och förändras.



Sits och ryggdynan kan läggas samman och bindas ihop med remmarna. Dynorna tar liten plats vid resor.



Ryggdynan Greta kan placeras på en vanlig stolsrygg

Storlek	Stl 1	stl 2	stl 3
Sitthöjd	9 cm		
Sittbredd	20 cm	25 cm	30 cm
Sittdjup	20 cm	25 cm	30 cm
Ryggbredd	19 cm	21 cm	25 cm
Rygg höjd	25 cm	34 cm	36 cm
Yttermått (BxD) sittdyna	27 x 28 cm	33 x 31 cm	38 x 36 cm
Yttermått sittdynans höjd	9 cm	10 cm	11,5 cm
Yttermått ryggdyna (HxB)	26 x 27 cm	34 x 31 cm	36 x 34 cm
Vikt sittdyna	0,68 kg	0,91 kg	1,13 kg
Vikt ryggdyna	0,68 kg	0,91 kg	1,13 kg
Bälten	Ja	Ja	Ja



CE

Hans o Greta dynor säljs i Sverige genom:  
MAYDAY AID AB  
Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA  
Tel 0300-56 97 00  
info@maydayaid.se www.maydayaid.se

MAYDAY AID