

# Harry



## Justerbar stol



Harry stolen säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA  
Tel 0300-56 97 00, Fax 0300-56 97 01, info@maydayaid.se, www.maydayaid.se



# Harry

## Justerbar stol

Harry, Heatfieldstolarna, är enkla, stabila och praktiska att arbeta med. Välj bland sex olika sittbredder, lågt eller högt ryggstöd, plan eller formad sits. Klädseln i galon finns i grönt, gult, blått eller rött tyg. Klädseln är lätt att torka av. Höj- och sänkbara armstöd ingår i standardutförandet samt ett höftbälte.

Armstöden ställs in i rätt höjd, via rattar på armstödens utsida. Armstöden kan enkelt tas bort då de eventuellt är ivägen eller inte behövs.

Under sitsen finns två låsrattar i skåror. Genom att lossa på rattarna kan man enkelt förändra sittdjupet och på så vis ge barnet rätt stöd i rygg och knä.

De fyra stolsbenen justeras vardera med två insexskruvar för att få optimal höjd till golvytan.

Utöver bord som monteras på armstöden på stolen finns också fristående bord som passar till stolen.



Höj- och sänkbara armstöd ingår i standardutförandet



Abduktionskloss.



Sidostöd för bäcken.



Medar.



Ställbart fotstöd



Bord monterat på armstöden.



Knästöd.



Heatfield kan fås i ett flertal färger.



## Fakta

Artikel nr	Sitthöjd	Sittbredd	Sittdjup (alla mått i mm)
6901	180-230	240	180-240
6902	200-300	280	220-310
6903	240-370	320	260-340
6904	290-390	360	320-400
6905	325-425	430	370-460
6906	395-545	430	450-550



Harry stolen säljs i Sverige genom:  
MAYDAY AID AB  
Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA  
Tel 0300-56 97 00, Fax 0300-56 97 01  
info@maydayaid.se www.maydayaid.se

MAYDAY AID