

Paddan och Grodan



Hörnstol Paddan - Corner Chair med Lekbord Grodan - Nursery Table


MAYDAY AID

Paddan och Grodan säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA
Tel 0300-56 97 00 info@maydayaid.se www.maydayaid.se

CE

Hörnstol Paddan - Corner Chair

Snygg och praktisk hörnstol så att alla barn ska kunna sitta med och vara del i lek och aktivitet på golvet. Sittplattan är bred och stabil för att kunna stå stadigt på golvet. Sitt- och ryggdelarna är mjukt polstrade för att ge barnet ett skönt och bekvämt stöd.

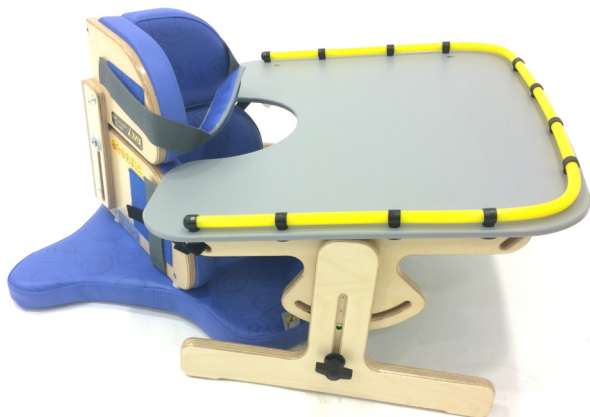

Hörnstol Paddan med lekbord Grodan

Den övre ryggdelen kan ställas in i höjd med hjälp av skruvarna på baksidan av ryggstödet.

Bältena sitter fast med kardborreband och kan lätt placeras där stödet behövs som mest. Höftbältet sätts fast runt barnets höft med fixlocksås.

Abduktionsklossen skruvas fast i sittplattan, placeringen anpassas efter barnets sittdjup. Under dragkedjan på ovansidan av klossen hittar man insexskruven för justering. Tyget är slitstarkt, tål både lek och spill och kan enkelt torkas av med en fuktig trasa.

Fakta Hörnstol Paddan - Corner Chair

Modell	Paddan storlek 1	Paddan storlek 2	Paddan storlek 3
Artikelnummer	JNR41	JNR42	JNR44
Max användarvikt	25 kg	35 kg	50 kg
Sittplattans storlek (mm)	490-500	520 – 540	600 – 630
Ryggstödshöjd (mm)	315 – 425	440 – 620	500 – 680
Sittdjup (mm)	160 – 260	180 – 280	260 – 360

Fakta Lekbord Grodan - Nursery Table

Modell	Grodan storlek Mini	Grodan storlek 1	Grodan storlek 2
Artikelnummer	JNR 64	JNR 65	JNR 66
Vinkling av bordskiva	+40° till -40°	+40° till -40°	+40° till -40°
Basytan (mm)	600 x 380	600 x 380	700 x 420
Bordshöjd (mm)	190 – 280	245 – 345	245 – 400
Bordsytan (mm)	620 – 520	620 – 520	700 – 520



Ryggkilen placeras i hörnet för att ge stöd åt ryggraden och uppmuntra till upprensning av bål och rygg.

Lekbordet Grodan - Nursery Table

Fristående lekbordet Grodan kan sättas fast med kardborreband ihop med hörnstolen. Bordet är utskuret fram så att bordsskivan kan komma nära barnet. Bordet understödsyta ger barnets underarmar ett stabilt stöd som hjälper barnet att kunna hålla huvud och kropp upprest. Såväl hörnstol som bord kan desinfekteras vid behov.



Produkterna kan förekomma i olika färger.



Paddan - Corner Seat och Grodan - Nursery Table
säljs i Sverige genom:
MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA
Tel 0300-56 97 00
info@maydayaid.se www.maydayaid.se

MAYDAY AID