

Rekonditioneringsanvisning och skötsel Corner Chair - Paddan



Standardutförande:

Hörnstolen Paddan - Corner Chair är utformad för att både små och stora barn skall kunna sitta själva på golvnivå. Hörnstolen består av en golvplatta med två vinklade stöd för höft och bål/huvud. Ett höftbälte och ett bålband samt en abduktionskloss ingår också.



Paddan - Corner Chair finns i tre storlekar och produkten finns med olika färger på polstringen.

På sitsens sidor finns två insexskruvar, för att kunna ändra höjden på bålstödet. På sidorna sitter också kardborrebanden som används för att ändra bältenas längd.



Förklaring symboler på hörnstolens baksida

1. Viktigt!
2. Läs bruksanvisningen
3. Får endast användas inomhus
4. Justera och sätt fast bältena. Kontrollera att bältet inte sitter för hårt åt genom att kunna få ett finger mellan bältet och barnet.
5. Lämna aldrig ett barn ensam sittandes i hörnstolen.
6. Hörnstolen får inte köras runt, ej heller placeras på ojämn yta.



Skötselanvisning:

Paddan - Corner Chair ska tvättas med varmt vatten och milt, miljövänligt rengöringsmedel. Sitthörnan Paddan kan torkas av med desinfektionsmedel.

- Kontrollera dagligen att alla skruvar är åtdragna och varken skruvar eller brickor saknas.
- Kontrollera dagligen att inga vassa, skarpa kanter har uppkommit på träytan.
- Kontrollera dagligen att abduktionsklossen är rätt placerad i sittdjup och sitter fast.
- Rengör kardborrebanden genom att borsta dem rena och fria från damm och smuts.

Rekonditioneringsanvisning:

Paddan - Corner Chair ska tvättas ren med varmt vatten och milt, miljövänligt rengöringsmedel.

Paddan - Corner Chair ska inte tvättas med högstryckstvätt eller liknande.



Kontrollera att fastsättningsremmarna på sidan sitter fast ordentligt och att fixlocks-spännena är hela och fungerar utan anmärkning.

Delar som har spruckit eller skadats skall omedelbart bytas ut, originaldelar skall alltid användas.

Kontrollera efter avslutad rekonditionering att:

- Spännen och bälten fungerar och sitter fast.
- Kardborrebanden sitter fast på sitthörnans baksida och ger fäste för bältena.
- Bålstödet sitter ordentligt fast i ryggdelen.

