



MK4 micro



MK4 mini



MK4 small



MK4 medium



MK4 large

## Rekonditioneringsanvisning för Meywalk MK4

### Standardutförande

1. Bålstödsring
2. Handbygel
3. Skruv för inställning av handbygel
4. Central justeringsenhet
5. Låsring för inställning av bålstödsring
6. Låsring för inställning av tiltfunktion
7. Låsring för inställning av sadelhöjd
8. Sadel med rumpstopp
9. Vred för inställning av sittens höjd
10. Övre sidorör
11. Nedre sidorör
12. Hävbygel
13. Avbärarhjul
14. Framhjul/länkhjul
15. Parkeringsbroms
16. Bakåtpärrbroms
17. Släpbroms
18. Bakhjul
19. Riktningsspärr
20. Fjädrar



Observera!

Gästolarnas utseende kan variera beroende på modell, storlek och tillbehör. På nedre ramen, vid bakhjulet sitter en etikett med benämning och serienummer.

### Rengöring av gästolen i hemmiljö

Tvätta av gästolen med rengöringsmedel, använd ett rengöringsmedel utan slipmedel. Vid behov kan också desinfektionspilot användas. Använd ej scotchsvamp eller andra hårda material som kan skrapa sönder lackfärgen. Torka av med torr trasa.

Använd gärna dagligen tryckluft för att snabbt få bort grus och damm från gästolen.

Högtryckstvätt skall inte användas direkt på hjullager.

### Rengöring av gästolen i tvättkabinett

Gästolen kan rengöras i tvättkabinett i program som tvättar i 60 °C i 3 minuter, desinficerar i 90 °C i 1 min med en tvätt- och torktid på sammanlagt ca 25 - 40 min.

Montera handbygel i upprät position, se bild ovan, innan tvätt i kabinett.

Dela på gästolen efter tvätt och placera överdel och underdel så att allt vatten har en möjlighet att rinna ur rör eller liknande.

Smörj med silikon eller litiumfett vid rörliga delar efter tvätt. Montera ihop gästolen.

OBS!

MK4 ska ha en viktpassad fjäder i varje sidorör vid hopmontering.

## Rekonditioneringsanvisning för Meywalk MK4

### Byte av skumrör / bålstödsring

Byte av skumrör på rumpstopp och bakre rördel på bålstödsring på modell Meywalk MK4. Allt skadat, spruckit skumrör skall bytas ut mot nytt, se reservdelar för respektive storlek och modell.

Montera av respektive del från gästolen. Avlägsna alla gamla rester. Använd tryckluft för att trycka på det nya skumröret. Talk på insidan av skumröret kan underlätta vid byte.



### Byt ut

Delar som har spruckit, fått rostskador eller skadats skall omedelbart bytas ut, originaldelar skall alltid användas. Önskar man bättra på med samma färg som på gästolsramen kan detta beställas.

På ramen skall det finnas en etikett med följande information:

**Denna produkt säljs i Sverige genom  
Mayday Aid AB  
Arendalsvägen 35  
434 39 KUNGSBACKA**

Beställ ny om denna saknas!

### Gör rent länkhjulen:

Runt länkhjulen samlas mycket damm, hår mm. Smutsen gör rullstolen trög att köra. Tänk på att ta bort/ rengöra länkhjulen ofta.

Gör så här:

Skruva av länkhjulen från gaffel.  
Borsta rent.  
Montera tillbaka hjulet.

Kontrollera att hjulet rullar lätt framåt.  
Kontrollera att framhjulet kan rotera runt sin axel.



### Kontrollera innan användning att:

- Toppstöden fungerar och är rätt placerade i höjd.
- Fram och bakhjulen rullar lätt.
- Hjulen inte är sönder eller slitna.
- Gästolen rullar rakt då den skjuts framåt.
- Parkeringsbromsarna fungerar
- Hävbygeln sänker sadeln och kan låsas fast i uppfällt läge.

