

Rekonditioneringsanvisning för sittvagn SWIFTY Storlek 1 och 2

Observera!

Sittvagnarnas utseende kan variera beroende på storlek och tillbehör. På nedre ramen, vid bakhjulet sitter en etikett med benämning och serienummer.



Rengöring av sittvagnen

Tvätta av sittvagnen med rengöringsmedel, använd ett rengöringsmedel utan slipmedel. Torka av med torr trasa. Vid behov kan också desinfektionsprit användas.

Använd ej scotchsvamp eller andra hårda material som kan skrapa sönder lackfärgen.

Högtryckstvätt skall inte användas direkt på hjullager.

Maskintvätta klädseln i 40 grader. Torktumla ej. Torka klädseln plant liggande.

Använd gärna dagligen tryckluft för att snabbt få bort grus och damm från sittvagnens hjul.

De delar som spruckit, fått rostskador eller skadats skall omedelbart bytas ut, originaldelar skall alltid användas.

På ramen skall det finnas en etikett med följande information:


*Denna produkt säljs i Sverige genom
Mayday Aid AB
Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA*

Beställ ny om denna saknas!

Rekonditioneringsanvisning för sittvagn SWIFTY Storlek 1 och 2

Kontrollera att:

1. Ihopfällningsmekanismen fungerar.

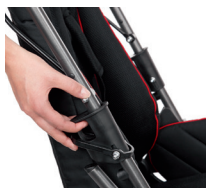

2. Fotplattan fungerar att flytta upp och ner samt går att fälla upp.



3. Sittplattans skruvar är kompletta och att plattan kan justeras i sittedjup.



4. Pröva ryggfällningsmekanismen och kolla att ryggen kan ställas.



5. Pröva också att slå på parkeringsbromsen så att sittvagnen står stilla när bromsen ligger an.



6. Byt ut klädseln och bälten vid behov.



Gör rent hjulen:

Runt hjulen samlas mycket damm, hår mm. Smutsen gör vagnen trög att köra. Tänk på att ta bort/ rengöra hjulen ofta.

Gör så här:

Skruva av framhjulen från gaffel.
Borsta rent.
Montera tillbaka hjulet.

Kontrollera att hjulet rullar lätt framåt.
Kontrollera att framhjulet kan rotera runt sin axel.



Kontrollera alltid innan användning att:

- Fram och bakhjulen rullar lätt.
- Hjulen inte är sönder eller slitna.
- Sittvagnen rullar rakt då den skjuts framåt.
- Parkeringsbromsen fungerar.
- Bältena sitter väl placerade på barnet och säkrar att barnet tryggt sitter kvar i vagnen.