

## Servicemanual Corner Chair - Paddan



### Serviceinformation

Underhållet av ett hjälpmedel / Medicinteknisk produkt ansvarar ägaren för. Om inte underhåll följs upphör garanti att gälla. Tänk på att en produkt som inte servas äventyrar säkerheten runt användare / brukaren och vårdaren.


1. Läs igenom bruksanvisningen noggrant för användning av produkten.
2. Spara bruksanvisningen och ev bifogade verktyg, behåll dem för framtida behov.
3. Rengör produkten med en torr trasa dagligen eller efter användande.
4. Gör en visuell inspektion dagligen.
5. Byt ut skadade eller utslitna delar.
6. Kontrollera att produktens muttrar och skruvar är åtdragna.
7. Kontrollera att övre bålstödet (huvudstödet) det är inställbar i höjd.

Kontrollera att det på sitsens sidor finns två insexskruvar med brickor, så att man kan ändra höjden på bålstödet .

På sidorna sitter också kardborreband som används för att ändra bältenas längd.

### Kontrollera efter avslutad rekonditionering att:

- Spännen och bälten fungerar och sitter fast.
- Kardborrebanden sitter fast på sitthörnans baksida och ger fäste för bältena.
- Bålstödet sitter ordentligt fast i ryggdelen.

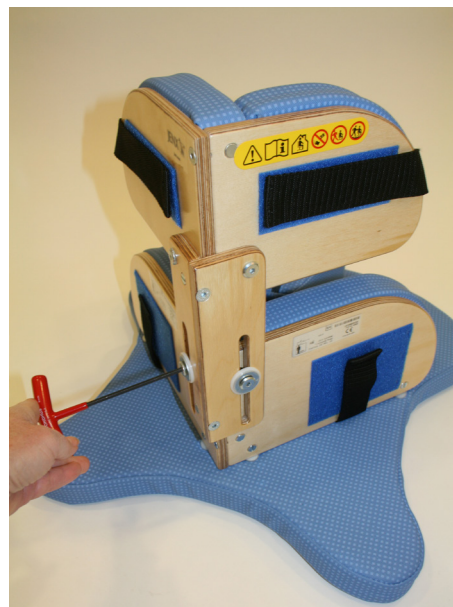

## Skötselansvisning:

- Kontrollera dagligen att alla skruvar är åtdragna och varken skruvar eller brickor saknas.
- Kontrollera dagligen att inga vassa, skarpa kanter har uppkommit på träytan.
- Kontrollera dagligen att abduktionsklossen är rätt placerad i sittdjup och sitter fast.
- Rengör kardborrebanden genom att borsta dem rena och fria från damm och smuts.

## Tvättansvisning:

Paddan - Corner Chair ska torkas ren med varmt vatten och mildt, miljövänligt rengöringsmedel, avsluta med att torka hörnstolen torr.

Paddan - Corner Chair ska inte tvättas med högstryckstvätt eller liknande.



Sitthörnan Paddan kan torkas av med desinfektionsmedel.

## Förklaring symboler

1. Viktigt!
2. Läs bruksanvisningen
3. Får endast användas inomhus
4. Justera och sätt fast bältena. Kontrollera att bältet inte sitter för hårt åt genom att kunna få ett finger mellan bältet och barnet.
5. Lämna aldrig ett barn ensam sittandes i hörnstolen.
6. Hörnstolen får inte köras runt, ej heller placeras på ojämn yta.



Hörnstolen Paddan - Corner Chair är utformad för att både små och stora barn skall kunna sitta själva på golvnivå. Hörnstolen består av en golvplatta med två vinklade stöd för höft och bål/huvud. Ett höftbälte och ett bålband samt en abduktionskloss ingår. Paddan finns i tre storlekar och produkten finns med olika färger på polstringen.

