

Bruksanvisning

Special Tomato Jogger



MAYDAY AID

special
tomato

Denna bruksanvisning ger information om hur 3-hjulsvagnen Special Tomato Jogger ska hanteras för en säker och bekväm användning.

Vi ber er följa monteringsanvisningar, säkerhetsföreskrifter och skötselråd.

Genom att läsa igenom och följa bruksanvisningen hoppas vi att både ni och ert barn kommer att få stor glädje av sulkyn.

Innehållsförteckning

Användningsområde	3
Producentansvar och säkerhet	4
MDR /MDD EU Declaration of Conformity	4
Garantivillkor	5
Allmänna säkerhetsinstruktioner	5
Produktbeskrivning	6
Montering och justering	7
Montering framhjul	8
Framhjulets riktnings spärr	9
Montering bakhjul	10
Parkeringsbroms	11
5-punktsbälte	12
Justering av ryggstöd	13
Körhandtag	14
Säkerhetsrem	14
Sufflett	15
Ihopfällning	16 - 17
Transparent regnöverdrag	18
Korg	19
Polstrat nackstöd	19
Extra positioneringshjälp	20
Skötselråd	21
Underhåll och daglig kontroll	22
Teknisk data	22
Kontaktuppgifter	23

Användningsområde

Special Tomato Jogger är en lättkörd och stabil trehjulig sulky som kombinerar designen hos en klassisk sulky, med extra komfort för barn med särskilda behov av stöd i sittande.

Sulkyn är lättkörd tack vare det svängbara framhjulet och den nätta konstruktionen. Sulkyn har på samma gång en rymlig sittyta för att kunna ge god plats åt barn och ungdomar upp till 50 kg. Sulkyn är enkel att fälla ihop och tar liten plats i bilens bagageutrymme. Lättviktsramen och den genomtänkta utformningen gör att sulkyn endast väger 12 kg och på så sätt blir mycket lätt att hantera.

Sitsen har ett justerbart 5-punktsbälte för barnets säkerhet och en avtagbar, vändbar extra klädsel för enklare rengöring. Ryggstödet kan fällas bakåt till ett skönt viloläge. I standardutförandet ingår en skyddande sufflett.

För barn, som har ett extra behov av sittstöd, kan sulkyn med fördel användas tillsammans med sittdynan Hans och ryggdynan Greta eller sittdynan Susanne, storlek 1 och 2, läs mer på sidan 20.



Producentansvar och säkerhet

Tillverkaren, Special Tomato, garanterar att Special Tomato Jogger är CE-märkt. Inga andra tillbehör eller reservdelar än tillverkarens egna får monteras utan att CE-märkningen upphör att gälla. Detta gäller även väskor och dyligt som placeras på sulkyn på annan plats än i korgen under sitsen.

MDR /MDD EU Declaration of Conformity (Engelska)

All of the Special Tomato products are Class I

All products sold and marketed prior to 26th of May 2021 has to comply with the MDD regulation.

All new products or changed products sold and marketed after the 26 of May 2021 has to comply with the MDR regulations.

If a product comply with the MDD regulation, there will be 5 year period of time to have it updated to the new MDR regulations. The 5 year period counts from the date where the CE declaration of conformity was signed. This means that if this is signed on a specific date prior to 26th of May 2021, it will expire in 5 years from the date of signature.

Global Carehab is registered as the CE authorized representative for the Special Tomato products. This is registered in the database of the Danish Health authorities.

Global Carehab has also been registered in the EU database, Eudamed, from where a SRN number is issued. This number refers directly to Global Carehab and will be visible for all EU member countries. The SRN number will also be written on the new CE declaration of conformities issued by the manufacturer of the Special Tomato products. The products are also marked with Global Carehab being the CE Authorized Representative.

UDI is part of the MDR and will only apply to the products complying with the MDR. This means that product being updated to the MDR during the transition period of 5 years will also have a UDI.

The Eudamed database will gradually be expanded where we have to upload more information about the products. But right now it is only possible to apply for the SRN number.

From the 26th of May 2021 there will be a 1 year time limit to apply for the SRN number and upload documents needed for the same. This means that the new MDR comes into effect by the 26th of May 2021 for all new products, and the registration is only legally required from the 26th of May 2022.

Garantivillkor

Special Tomato Jogger har två års garanti från inköpsdatum. Garantin gäller fabrikationsfel och under förutsättning att sulkyn endast har använts på det sätt som den är avsedd att användas och som beskrivs i denna bruksanvisning.

Vid garantiärende skall Mayday Aid AB kontaktas omgående. Inga garantiärenden får åtgärdas av utomstående part, förutom om detta har överenskommits med representant från Mayday Aid AB. Spara alla handlingar du får i samband med köpet för att kunna bevisa garantins giltighet.

Garantin omfattar inte sådant slitage som uppstår vid normal daglig användning, misskötsel eller i de fall en utomstående part utan tillstånd har genomfört reparationer eller specialanpassningar på sulkyn.

Allmänna säkerhetsinstruktioner

- Lämna aldrig ett barn obevakat i sulkyn.
- Sulkyn är endast avsedd för ett barn åt gången.
- Barnet får aldrig stå på fotstödet.
- Barnet ska ha 5-punktsselen på sig när barnet sitter i sulkyn.
5-punktsselen måste vara väl inställd så att barnet sitter säkert och bekvämt.
- Aktivera alltid parkeringsbromsen när sulkyn står stilla.
- Lasta bara sulkyn på det sätt och med den maximala vikt som denna bruksanvisning visar. En fellastad sulky kan välta och skada barnet. Väskor och annan utrustning ska läggas i korgen under sulkyn och barnet ska sitta fastspänt i sulkyn.
Placera aldrig någonting ovanpå suffletten då den kan skadas.
- Var uppmärksam på klämrisken när sulkyn fälls ihop.
- Barnet får inte sitta kvar i sulkyn under transport i bil eller buss. Inte heller då sulkyn ska transporteras i en rulltrappa eller upp och nedför en trappa.
- Var särskilt uppmärksam vid körning i ojämn terräng.
Upprepad belastning av hårda gupp kan skada sulkyn.
- Framhjulets riktningsspärr ska alltid vara låst när föräldern ska använda sulkyn för exempelvis löpning eller snabba promenader.

Produktbeskrivning - Special Tomato JOGGER



- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Sufflett | 9. Luftpumpade 12" bakhjul |
| 2. Avtagbar sitsklädsel | 10. Parkeringsbroms |
| 3. 5-punktsbälte | 11. Stötdämpande fjädring |
| 4. Fotstöd | 12. Säkerhetsrem |
| 5. Riktningsspärr | 13. Låsspärr |
| 6. Luftpumpade 12" framhjul | 14. Justerbart körhandtagsbåge |
| 7. Trumbroms | 15. Handbroms |
| 8. Korg (tillbehör) | |

Montering och justering

Ram

Packa upp sulky och lägg hjulen åt sidan. Släng allt förpackningsmaterial genast.

Tänk på kvävningensrisken - plastpåsar och liknande kan utgöra en livsfara för små barn.

Lägg sulky med ryggstödet nedåt. Fäll fotstödet ner mot golvet, bild 3, tills ett tydligt klickljud hörs, vilket visar att ramen är fullt utfälld.

Vänd sulky till upprätt position, se bild 4.



Bild 2



Bild 3



Bild 4

Fäst det bakre bältet (A) runt de vertikala ramrören för att stabilisera sitsen, se bild 5.



Bild 5

A

Framhjul

Lägg sulkyn på ryggen, så att den vilar på bakaxlarna och körhandtaget se bild 6.



Bild 6

Placera dom röda säkerhetsbrickorna på var sida om framhjulet, se bild 7 A. För in hjulaxeln i skåran på hjulgaffelnns båda sidor. Se till att säkerhetsbrickorna hamnar på insodan av hjulgaffeln, se bild 7 B.



Bild 7 A



Bild 7 B

Håll fast bulten på hjulaxelns ena sida och skruva åt bulten med låsklämma på den andra sidan, bild 8. Dra inte åt alltför hårt, hjulet skall kunna rulla lätt, se bild 8 A.

Håll säkerhetsbrickorna så att skruven kan fästas från utsidan och hålla brickorna på plats, se bild 8 B.



Bild 8 A



Bild 8 B

Framhjulets riktningspärr

Framhjulets rörlighet kan låsas med en riktningspärr som sitter bakom hjulgaffelns infästning mot fotstödet (C), bild 9.



Bild 9

Riktningspärren inaktiveras genom att den dras ut och vrids 90° så att den inte kan glida in i jacket, se bild 10. Hjulet blir nu fritt rörligt i 360°.



Bild 10

För att aktivera riktningspärren dra den lätt utåt och rotera 90° så att den hamnar i jacket. Hjulet måste stå i rakt ställt läge.

Eventuellt behöver hjulet ruckas på lite för att riktningspärren ska hamna i låst läge, se bild 11.



Bild 11

Bakhjul

Montera bakhjulen genom att skjuta staget i hjulet in i bakaxeln, se bild 12. Ett tydligt klick-ljud visar att hjulet sitter fast.



Bild 12

För att ta loss bakhjulet, tryck upp fjäderknappen (A), bild 13 och dra hjulet utåt.

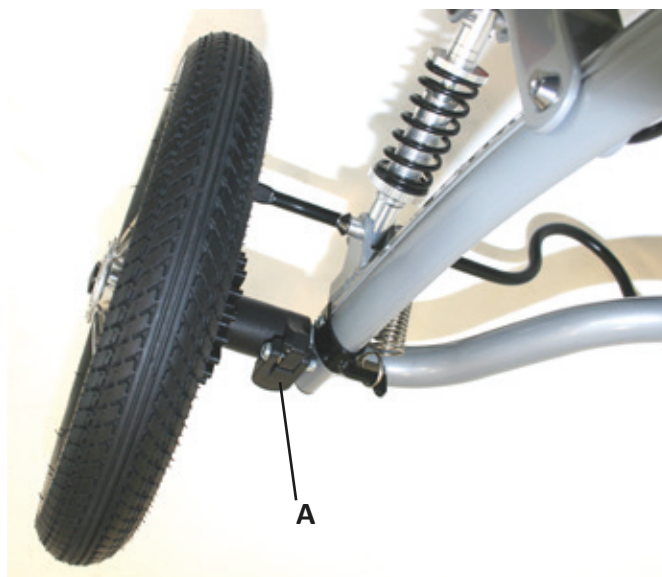


Bild 13

Parkeringsbroms

Bakhjulens parkeringsbroms ska aktiveras när sulkyn står stilla. Lämna aldrig en sulkyn utan att parkeringsbromsen är aktiverad.

Tryck ner fotbygel för att aktivera parkeringsbromsen, bild 14.

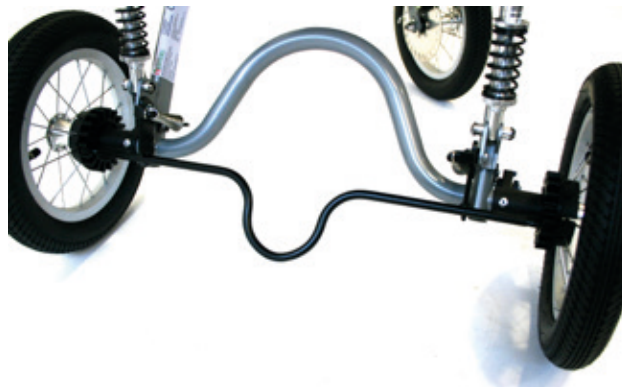


Bild 14

Lyft bygel uppåt för att hjulen ska låsas upp, bild 15.

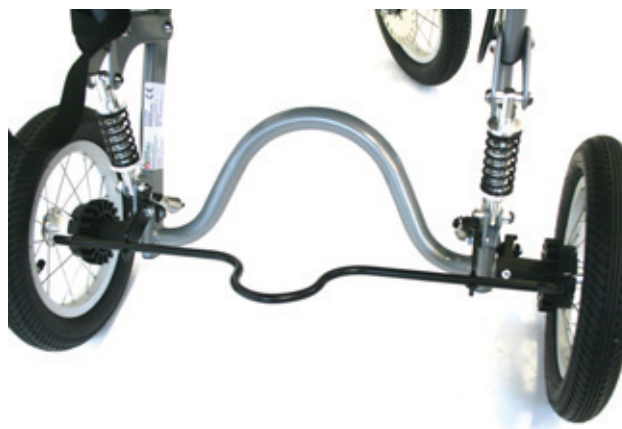


Bild 15

5-punktsbälte

Höjden på 5-punktsbältet kan justeras utifrån barnets storlek. Dessutom kan längden på axelremmarna justeras.

Haka loss axelremmarna från höftbältet, bild 16.



Bild 16

Lösa kardborrebanden som håller fast den avtagbara klädseln i sitsen, bild 17.



Bild 17

Dra ur axelremmarna ur den avtagbara klädseln, se bild 18.



Bild 18

Använd de fastsydda tvärgående remmarna för att välja en lämplig höjd och trä sedan igenom axelremmarna på motsvarande höjd i den avtagbara klädseln, bild 19.



Bild 19

Ställ in axelremmens längd. Haka fast axelremmarna i höftbältet igen och justera längden på grenremmen, bild 20.



Bild 20

Justera ryggstödet

Ryggstödet justeras enkelt och steglöst med en rem som löper på ryggstödet baksida, se bild 21, så att barnet kan gå från sittande till behagligt viloläge utan att störas. Knäpp loss spännet (A) för maximalt viloläge.

Tryck på ryggstödet med en hand och dra i remmen med den andra för att höja upp ryggstödet till sittande igen.



Bild 21

Körhandtag

Lås upp låsspärren på insidan av vikleden på båda sidor om körhandtaget, bild 22.

Körhandtagets vinkel kan nu justeras för att passa personer av olika längd.



Bild 22

När handtaget är placerat i rätt höjd och vinkel låser man fast positionen med låsspärren, se bild 23.



Bild 23

Säkerhetsrem

På vänstra sidan finns en säkerhetsrem att ha runt vänstra handleden vid promenad och jogging.

Säkerhetsremmen fästs runt förarens handled. Säkerhetsremmen förhindrar att sulkyn åker iväg om föraren skulle tappa taget om körhandtaget.

Säkerhetsremmen bör alltid användas då ett barn sitter i sulkyn.



Bild 24

Sufflett

Suffletten ger barnets huvud skydd mot stark sol och regn.

Ett genomskinligt parti i suffletten gör det lätt att ha barnet under uppsikt.

Sufflettens fäste ska passas in på den övre delen av ramen som inte täcks av tyg, bild 27. På fästets insida sitter en liten pigg som ska hålla fästet på plats. Piggan ska passas in i det förborrade hålet i ramen bild. När fästet är på plats låses det med hjälp av spännet, se bild 28.

Det är mycket viktigt att fästet inte forceras på plats och att man inte använder för stor kraft när spännet stängs, eftersom piggan lätt förstörs om den inte hamnar exakt rätt i hålet.



Bild 25



Bild 26



Bild 27



Bild 28

Ihopfällning

Jogger blir liten och lätt att transportera i bil, om den fälls ihop på rätt sätt.

Fäll sulkyns ryggstöd maximalt bakåt genom att helt knäppa loss remmen som reglerar ryggstödet vinkel (A).



Bild 29

Ta loss kardborren som håller suffletten mot ryggstödet.

För körhandtaget till sitt högsta läge (B).



Bild 30

Lås upp framhjulets riktningsspärr, se bild 31.

Knäpp upp 5-punktsbältet.



Bild 31

Ihopfällning, fortsättning

Tryck in låsspärrarna som sitter strax under körhandtaget på båda sidor.



Bild 32

Fäll ryggstödet bakåt.

Sulkyn viker sig då på mitten, se bild 36.

Använd remmen som reglerar ryggstödets vinkel till att hålla ihop sulkyn under transport, genom att dra remmen runt den hopfällda ramen.



Bild 33

Så här liten blir Jogger då man slår ihop den. Placera framhjulet och bakhjulen så att dem tar liten plats. Bakhjulen kan monteras av, se sidan 10, bild 13.



Bild 34

Tillbehör:**Transparent regnöverdrag**

Packa upp regnöverdraget ur sin påse redan vid leverans så att plastlukten försvinner så mycket som möjligt innan användning.

Öppningen i överdraget skall placeras framför suffletten, se bild 35.

Plast - "tungan" förs ner mellan handtagsbågen och skyddar ryggen, se bild 36.

Resåren och kardborrebanden håller regnöverdraget på plats över fotstödet fram.

Fäst kardborrebanden runt om vagnen så att barnet sitter skyddat från regn och rusk.

Se till att barnet har tillgång till frisk luft under regnskyddet. Tänk på att det kan bli mycket varmt och fuktigt under regnöverdraget om vädret växlar från regn till sol.



Bild 35



Bild 36



Bild 37



Bild 38

Tillbehör:**Korg**

Sätt fast tryckknapparna på korgens främre del runt det tvärgående staget under fotstödet, bild 39.



Bild 39

Korgens bakre del fästs med kardborreremmarna runt de båda bakre vertikala sidorören, bild 40.



Bild 40

Polstrat nackstöd

Nackstöd kan monteras på ryggstödet när barnet behöver mer stöd för huvudet, bild 41.



Bild 41

Extra positioneringshjälp

Barn som behöver extra stöd i sittandet kan ha god nytta av att använda Jogger tillsammans med sittdynan Hans och ryggdynan

Greta (storlek 1 och 2) eller sittdynan Susanne (stl 1 och 2).

Knäpp loss 5-punktsselens axelremmar från höftbältet.

Montera ryggdynan Greta genom att trä igenom bältena på lämplig höjd i hålen utmed ryggstödet:sidor, se bild 38.

Axelremmarna ska **inte** träs igenom hålen i ryggdynan.

Montera på samma sätt sittdynan Hans i de nedre hålen utmed ryggstödet:sidor. För sedan igenom 5-punktsselens höftbälte och grenbälte genom hålen i sittdynan.

Knäpp slutligen ihop axelremmarna med höftbältet.

Sittdynan Susanne kan monteras i sulkyn Jogger för att ge barnet ett mycket stabilt stöd. Sittdynan Susanne kan också med fördel användas att sitta i på andra stolar, fåtöljer och soffor eller placeras på olika underreden för självständigt sittande på golv.

För mer information se:
www.maydayaid.se



Bild 42



Bild 43

Skötselråd

Rengör ramen och suffletten med en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel.

Klädseln kan plockas loss från sulkyn och tvättas med en fuktad svamp och ett mildt tvättmedel.

Ta ur ryggplattan före tvätt genom att öppna dragkedjan i ryggstödetets överkant, se bild 45. Ryggplattan får inte bli fuktig, eftersom fukt gör plattan poröst.

Var uppmärksam på att sitt- och ryggplattan inte kan plockas ur.

För att undvika att klädseln krymper, rekommenderar vi att klädseln sätts tillbaka på ramen direkt efter tvätt och tillåts torka monterad. Klädseln får inte torktumlas eller tvättas med blekmedel.

Använd gärna den ljusa, avtagbara klädseln som skydd. Denna klädsel kan maskintvättas i ljummet vatten och hängtorkas. Får ej torktumlas eller tvättas med blekmedel.

Var noga med att låta sulkyn torka ordentligt innan den fälls ihop.

Förvara inte sulkyn i fuktiga utrymmen, för att undvika att tyget möglar.



Bild 44



Bild 45

Underhåll och daglig kontroll

Inför varje användning bör bromsar, hjul och 5-punktsbältet kontrolleras. Använd inte sulkyn om något är söndrigt eller inte fungerar. Bara original-reservdelar får användas för att laga eller ersätta delar som gått sönder.

Alla vikleder och skruvar bör kontrolleras med regelbundna intervall. Använd bara teflon- eller silikonbaserat smörjmedel om hjulen börjar gnissla. Olja eller fett ökar bara inlagringen av smuts i hjullagren och förkortar hjulens livslängd. Genom att följa instruktionerna för skötsel och underhåll, håller sig sulkyn i bra skick under lång tid.

Teknisk data

Sittbredd	36 cm
Sitsdjup	30,5 cm
Ryggstödshöjd	63 cm
Avstånd från sits till fotstöd	36 cm
Avstånd från sits till fotstöd (med sittdyna Hans och ryggdyna Greta, stl 1 resp 2)	41 cm
Avstånd från sits till fotstöd (med hel sits Susanne, stl 1)	43 cm
Avstånd från sits till fotstöd (med hel sits Susanne, stl 2)	46 cm
Handtagets höjd från golvet	89-109 cm
Ryggstödetets vinkel	+10° till +50°
Yttermått	H: 109 cm B: 65 cm L: 107 cm
Yttermått (hopfälld utan bakhjul)	H: 41 cm B: 65 cm L: 53 cm
Framhjul (diameter)	305 mm
Bakhjul (diameter)	305 mm
Total vikt (exkl sittdynor)	12 kg
Max brukarvikt	50 kg

Special Tomato Jogger

Säljs i Sverige genom:

Mayday Aid AB
Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300-56 97 00
Fax 0300-56 97 01

www.maydayaid.se
info@maydayaid.se



Producerad av:

Bergeron By Design
15 South Second St.
Dolgeville, NY 13329
USA

Tel 1.866.529.8407

www.specialtomato.com
customerservice@specialtomato.com

