


# Sprängskiss och Reservdelar EASyS Advantage chassi stl 1

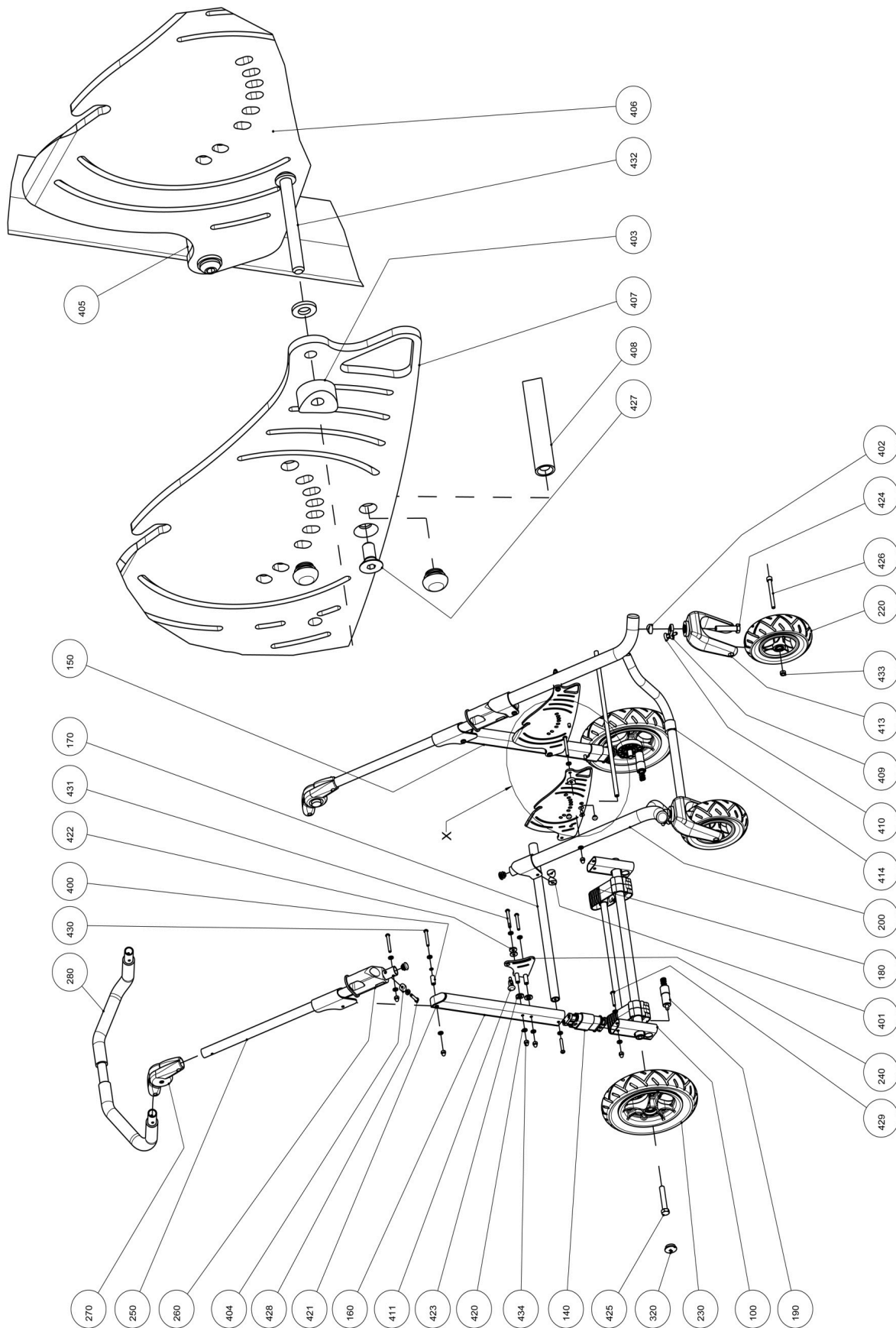



# Sprängskiss och Reservdelar EASyS Advantage chassi stl 1

## Reservdelar chassi EASyS Advantage stl 1

Pos nr	Artikelnummer	Artikel
100	9700667229005	Konstruktionskit nedere ram stl 1
140	9006979003001	Konstruktionskit fjädersystem
150	9700667379005	Nedre konstruktionsrör, höger
160	9700667389005	Nedre konstruktionsrör, vänster
170	9700667299005	Konstruktionskit ramkorsrör stl 1
180	9700664063001	Konstruktionskit broms stl 1
200	9700667519005	Främre ram stl 1
220	6032128009005	Framhjul
230	6032127009005	Bakhjul
250	9700664549005	Handtagsbågens sidorör stl 1
260	9700680720000	Låsmekanism
270	9700680350000	Ställbar led för körhandtag
280	9700667419005	Körhandtag stl 1
310	7502023019005	Korg stl 1
400	6970810060000	Distans
401	6970820049005	Distans 4mm
405	6970820100000	Distans 10mm
409	9700664390000	Riktningsspärr
410	9700664473001	Låspinne med lås
411	9700635113001	låspinne med lås, rak
413	9700668250000	Gaffel
421	6970000670000	Bricka
424	6931205540000	Skruv M12x55
425	6931206540000	Skruv M12x65
426	6930807550000	Skruv M8x75
431	6930604522000	Skruv M6x45
433	6900000841000	Låsmutter
	6637/61	Sufflett
	67839/1	Transportfäste