

Bruksanvisning och monteringsanvisning

Susanne



MAYDAY AID



Denna bruksanvisning ger information om montering, säkerhetsmeddelande och rekonditioneringsanvisningar av sitsen Susanne. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna hoppas vi att ni får stor glädje av Susanne med tillbehör.

Innehållsförteckning

Allmän information	3
Användningsområde	3
Produktansvar och säkerhet	4
Garanti och hållbarhet	4
Service och reparationer	4
Sitsen Susanne - Introduktion	5
Säkerhetsmeddelande	6
Kontroll vid leverans	7
Varning - Kvävningsrisk!	7
Montering av höft- och bålbalte	8-10
Montering av sitsen Susanne på stol	11
Sittvinkel	12
Tillbehör: Roland och Frank	14
Tillbehör: Lars och Stella	15
Rekonditionering, underhåll och skötsel	16
Teknisk fakta	17

MAYDAY AID AB

Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300-56 97 00

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se

Allmän information

Susanne är en hel sits för barn, ungdomar och vuxna som behöver stöd för att kunna sitta självständigt i sulky, stol eller annan sittmöbel.

Sitsen Susanne är framtagen och designad för personer, med funktionshinder, som behöver kunna sitta både bekvämt och säkert.

För att kunna använda sitsen Susanne så säkert som möjligt ber vi dig läsa denna bruksanvisning först, innan sitsen tas i bruk.

Om du har frågor eller undrar över något är du alltid välkommen att ringa eller skriva till oss, kontaktuppgifter hittar du på sidan 2.

Vi hoppas du kommer att bli riktigt nöjd med sitsen Susanne.

Användningsområde

Susanne är en sits för personer som på grund av funktionshinder har svårigheter att sitta. Observera, endast ett barn får sitta i sitsen åt gången. Använd alltid bälte och höftbälte så att personen sitter säkert och inte kan ramla ur sitsen. Sitsen skall monteras och sättas fast av en vuxen person.

Sitsen kan användas på stolar, i sulkyvagnar, i flygplanssäten m m. Det finns flera tillbehör till sitsen såsom underredet Roland, med hjul. Underredet Frank och underredet Lars, är båda stationära underreden. Sitsen Susanne får inte användas som bilbarnstol.



Produktansvar och säkerhet

Sitsen Susanne (Special Tomato: Sitter) är en CE märkt produkt. Detta är en garanti på att sitsen Susanne "Sitter" uppfyller alla gällande europeiska säkerhetskrav. Företaget Special Tomato försäkrar härmed, som producent med ensamt ansvar, att Susanne "Sitter" är CE märkt enligt direktiv 93/42/EEC om medicinsk utrustning i klass 1.

Produkten får inte ändras, inga tillbehör eller reservdelar från någon annan tillverkare får monteras utan att CE märket tas bort och produktansvaret slutar att gälla.

5 års Garanti

Garanti gäller endast då produkten används enligt denna bruksanvisning vilken följer producentens rekommendationer.

Sitsen Susanne "Sitter" har 5 års garanti. Garanti gäller endast om sitsen Susanne förvaras inomhus samt att underhåll och skötselanvisningarna efterföljs enligt denna bruksanvisningen och att köpehandlingar från Mayday Aid kan uppvisas.

Service och reparationer

Service och reparationer på sitsen Susanne med tillbehör skall endast utföras av behörig personal som tillexempel hjälpmedelstekniker, efter överenskommelse med MAYDAY AID AB, eller en representant från företaget MAYDAY AID AB.

Vid montering och justering av tillbehör behövs ibland verktyg. Var noga med att alltid dra åt fastsättningsremmar och bälten efter justering.

Lämna aldrig någon som sitter i sitsen Susanne ensam!

Sitsen Susanne - Introduktion

Susanne finns i fem storlekar. Sitsen Susanne är tillverkad för att passa barn, tonåringar och vuxna som behöver sitta med stöd för bålen och bäckenet. Bålstödsbältet och höftbältet ger stabilitet och trygghet och skall anpassas individuellt för personen som sitter i Susanne. Susanne får användas på underredet Roland, Frank och Lars samt på stolar och sulkys.

1. Ryggdel
2. Vertikala skårar i ryggdelen
3. Bålbälte (5-punktsbälte)
4. Höftbälte (3-punktsbälte)
5. Abduktionsförhöjning
6. Fastsättningsrem vid sits
7. Fastsättningsrem vid sidan.

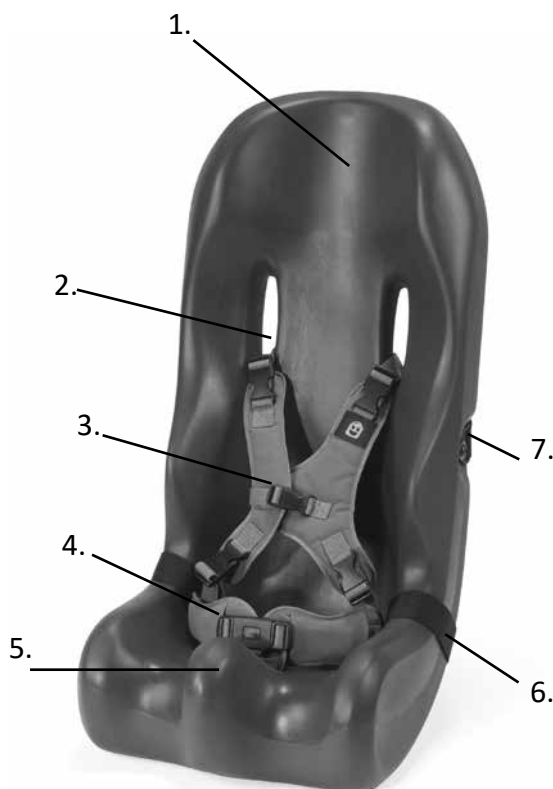


Bild 1



Säkerhetsmeddelande

Läs hela bruksanvisningen innan du använder sitsen Susanne.
Lär dig funktionerna och hur du hanterar produkten. Pröva gärna praktiskt att montera sitsen på olika sittmöbler innan någon person placeras i sitsen.

Som förälder, målsman eller annan vårdgivare är du ansvarig för säkerheten. Säkerheten kan äventyras om du inte följer instruktionerna i bruksanvisningen. Många oväntade situationer kan dyka upp som inte kan förutses och därför inte beskrivs i bruksanvisningen. Vi ber dig därför att alltid vara försiktig och informera alla personer som finns runt personen som använder sig av hjälpmedlet om hur produkten fungerar och skall användas.

Var noga med att sitsen alltid sitter fast ordentligt varje gång du sätter i eller tar barnet ur sitsen Susanne. Är sitsen monterad i en sulky, rullstol eller annat förflyttningshjälpmedel se till att parkeringsbromsa vagnen.

Kontakta oss gärna för mer information eller om det finns några oklarheter i bruksanvisningen, se sid 2 för kontaktinformation.

Kontroll vid leverans

I originalförpackningen finner du följande delar vid leverans:

- Sitsen Susanne med fastsättningsbälte i sidorna.
- 5-punktsbälte / Bålbälte
- 3-Punktsbälte / Höft-och grenbälte
- Tillbehör enligt beställning
- Bruksanvisning på svenska



Bild 2



Varning!

Ta bort allt förpackningsmaterial som skyddat sitsen under transport. Tänk på att plastpåsar och liknande kan vara livsfarligt för små barn att leka med – kvävningrisk!



Bild 3

Montering av höftbälte och bålbälte

Lägg sitsen Susanne med ryggen mot bordsskivan

Placera höftbältet genom öglan på abduktionsbältet.

För därefter abduktionsbältet genom skåran i sitsens framkant, bild 4.



Bild 4



Bild 5



Bild 6

Höftbältet dras sedan genom den vänstra bakre skåran, bild 5, därefter genom den högra på sitsens undersida, bild 6.

Knäpp ihop låset och justera remmarna för lagom längd, bild 7.



Bild 7



Bild 8

Knäpp loss ett av axelbanden.



Bild 9

Trä bandet genom de två ryggskårorna, se bilder.



Bild 10

Trä de två nedersta banden genom ryggens nedersta skåror. Sätt fast banden under sitsen.



Bild 11

Bålbältet skall sitta så här !



Bild 12

På bilden ovan ser man hur bältena skall sitta. Tänk på att bältena skall vara anpassade för personen som sitter i Susanne. Eventuellt behöver man ändra längden på remmarna beroende på olika kläder mm.

VIKTIGT!

Byxor som bildar veck eller liknande kan orsaka irritation, dra försiktigt i kläder så att tyget blir så slätt som möjligt nära huden.

Hur man sätter fast sitsen Susanne på en stol

Fastsättningsremmen, som är lös, skall träs i de bakre skårorna runt sitsens undersida och komma upp på var sida om Susanne för att slutligen knäppas runt den önskade stolens sittyta, se bild 13 och 14.

Fastsättningsremmen som är fastskruvad i ryggdelen skall om möjligt alltid sättas runt stolens rygg.

Sitsen Susanne kan med fördel användas att sitta i under flygresor. Sätt först fast Susanne i flygstolen med hjälp av fastsättningsremmarna. Sätt därefter fast barnen med hjälp av bål- och höftbältet. Sätt slutligen fast flygplansbältet.

OBSERVERA!

Sitsen Susanne **får inte** användas som bilstol. Välj en bilbarnstol som är krocktestad, t ex Recaro Reha bilbarnstolar.



Bild 13



Bild 14

Sitsvinkeln

Under sitsen finns två kardborreband. På underredet finns två anpassade kardborreband, placera sitsen i önskad lutning, se bild 5.

Därefter är det viktigt att spänna fast sitsen med fastsättningsremmarna, dels runt sittdelen, dels runt ryggen när Susanne monteras på underredet Roland (som kan rulla) eller på Frank (träunderredet utan hjul), se bild .

Önskar du ändra sittvinkeln börjar du först med att knäppa loss fastsättningsremmarna!



Bild 15

På bild 15 sitter Susanne monterad på underredet Roland. Vid montering använd endast fastspänningsremmen runt sittdelen.

På bild 16, här till höger, sitter Susanne monterad på det låga golvunderredet Lars.



Bild 16



Bild 17



Bild 18



Bild 19

Susanne kan med fördel användas monterad på olika underredet. Här ovan syns Susanne på det låga golvunderredet Lars, bild, mobila träunderredet Roland och Monterad på en stol. Nedan syns sitsen Susanne monterad i sulkyn EIO från Special Tomato/ Mayday Aid.



Bild 20

Tillbehör:**Roland - Mobilt underrede på hjul**

Underredet Roland är tillverkat i trä och har fyra hjul på vardera ben. Roland finns i två storlekar. De två bakre hjulen kan bromsas. Hjul är massiva och ledade.

På sittytan skall det sitta två kardborreband för att förenkla fastsättningen av Sitsen Susanne i olika vinkelpositioner, kardborrebanden visas inte på bilden.



Bild 21

Tillbehör:**Frank - Stationärt underrede**

Underredet Frank är tillverkat i trä och har fyra fötter dvs Roland utan hjul. Frank finns i två storlekar.

OBS! På bilden sitter sitsen Susanne i färgen blå, monterad på underredet FRANK.



Bild 22

Tillbehör:**Lars - Lågt golvunderrede**

Underredet Lars är tillverkat i samma material som sitsen Susanne. På bilden syns de två kardborrebanden som håller sitsen i önskad sitsvinkel. Underredet Lars används vid lek och gemenskap vid golvaktiviteter.



Bild 23

Tillbehör:**Stella - Mobilt, vinkelställbart bord**

Bordet Stella kan höjas och sänkas. Bordsskivan kan vinklas. Hjulen är massiva, de två främre hjulen är ledade och kan bromsas.

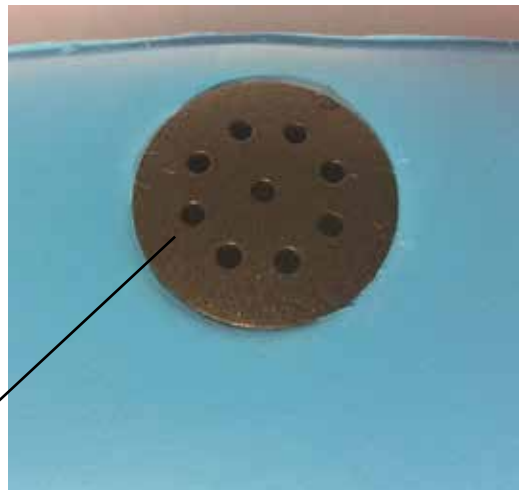


Bild 24

Rekonditionering, underhåll och skötsel

Bålbältet och höftbältet kan tvättas i maskin Fintvätt 40 °C, lägg gärna bältena i en tvättpåse. Vi rekommenderar att lägga bältena plant för torkning, torktumla inte.

Sitsen Susanne bör tvättas av med varmt vatten och mildt rengöringsmedel med en tvättlapp/trasa. Sitsen kan torkas av med desinfektionsmedel.



OBS! Vatten eller annan vätska får ej komma in i ventilen!

Sand, hår och skräp förstör hjulens förmåga att rulla. Håll därför hjulen på underredet Roland så rena som möjligt.

Alla ytor, trä och chassiram kan torkas av med fuktig trasa och milda rengöringsmedel till exempel diskmedel. Vid behov desinfektera hjälpmidlet med ytdesinfektionsmedel med tensid, alternativt ett oxiderande ytdesinfektionsmedel. Använd inte stålull eller liknande material vid rengöring. Sitsen Susanne med tillbehör skall förvaras inomhus.

Sitsen Susanne skall kontrolleras regelbundet för bästa hållbarhet och funktion, var vänlig följ checklistan nedan.

Checklista

	Dagligen	Varje vecka	Varje månad
Bälten, fastsättningsremmar	X		
Parkeringsbroms (Roland)	X		
Skruvar, fastsättningsrem		X	
Hjul (Roland)			X

Teknisk fakta Sitsen Susanne

Mått i cm	Stl 1	Stl 2	Stl 3	Stl 4	Stl 5
Sittdjup	17,5	24	29	34	40
Sittbredd	20	25	30	35	40
Ryggstödshöjd	52	65	72	87	97
Ytermått sittdjup	30	35	40	47,5	52,5
Ytermått bredd	30	35	40	45	50
Ytermått höjd	62,5	72,5	85	100	110
Höjd från golv till sittyta: LARS	12,7	13,8	13,8		
ROLAND	31,8	33,7	33	37,5	40,5
FRANK	25,4	25,4	24,6	29,2	31,8
Sitsens vikt	2,7 kg	4,5 kg	6 kg	7 kg	8,6 kg
Ca vikt på användare	9-14 kg	14-27 kg	16-36 kg	23-50 kg	41-91 kg
Ca ålder på användare	1-2 år	2-6 år	6-9 år	9-14 år	13 år-vuxen
Ca längd på användare	75-87	87-120	100-140	125-162	135-185

Sitsen **Susanne**

Säljs i Sverige genom

MAYDAY AID AB

Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300 - 56 97 00

info@maydayaid.se

www.maydayaid.se

MAYDAY AID

Producent

Special Tomato

Bergeron By Design
15 South Second Street
Dolgeville, New York 13329

Tel +1-315-429-8407

Fax +1-315-429-8862

customerservice@specialtomato.com

www.specialtomato.com

