

Bruksanvisning



ThevoChair



Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av gungstolen ThevoChair. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna hoppas vi att ni får stor glädje av ThevoChair.

Innehållsförteckning

Allmän information	3
Användningsområde	3
Produktansvar och säkerhet	4
Garanti och hållbarhet	4
ThevoChair - Introduktion	5
Kontroll vid leverans	5
Allmänna säkerhetsinstruktioner	6
Teknisk beskrivning	7
Montering av rygg	8
Montering av låsspak	9
Underhåll och skötsel	10
Checklista	11
Demontering och skrotningsinstruktion	11
Teknisk data	12

Mayday Aid AB

Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300-56 97 00

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se

Allmän information

ThevoChair är en fåtölj som rör sig när en person som sitter i fåtöljen rör sig av egen kraft. Gungrörelsen sker i horisontellt, upprätt sittande och förvärrar därmed inte personens balanssinne eller yrselupplevelser. "Gungandet" sker i varje persons egna takt och mildrar oro och ångest.

ThevoChair gungstolen är framtagen och designad framförallt för vuxna och äldre som behöver sitta bekvämt och säkert. För att kunna göra förflyttningar i och ur gungstolen så enkelt och bekvämt som möjligt, ber vi dig läsa hela bruksanvisningen först, innan fåtöljen ThevoChair tas i bruk.

Om du har frågor eller undrar över något är du alltid välkommen att ringa eller skriva till oss, kontaktuppgifter hittar du på sidan 2.

Vi hoppas ni kommer att bli riktigt nöjda med gungstolen ThevoChair.

Användningsområde

ThevoChair är framtagen för att lugna och mildra oro, rastlöshet och depression, symtom som ofta förstärks vid olika sjukdomstillstånd till exempel vid demenssjukdomar.

Gungandets positiva effekt är bevisat genom kliniska studier.

Vid dagligt användande blir personen lugnare och mer öppen för omvärlden.

Varning!

Lås alltid stolens gungfunktion med låsspaken på gungstolens ryggsida. Kontrollera att stolen inte kan gunga då någon vill sätta sig i stolen. Tänk på att stolen kan vrida sig då någon sätter sig eller reser sig ur gungstolen.



Produktansvar och säkerhet

ThevoChair är en CE märkt produkt. Detta är en garanti på att ThevoChair uppfyller alla gällande europeiska säkerhetskrav.

Företaget Thomashilfen GmbH[®] försäkrar härmed, som producent med ensamt ansvar, att EASyS Modular är CE märkt enligt direktiv 93/42/EEC om medicinsk utrustning i klass 1.

Produkten får inte ändras, inga tillbehör eller reservdelar från någon annan tillverkare får monteras utan att CE märket tas bort och produktansvaret slutar att gälla.

Garanti och hållbarhet

Garanti gäller endast då produkten används enligt denna bruksanvisning vilken följer producentens rekommendationer.

ThevoChair har 2 års garanti. Garanti gäller då ThevoChair är placerad inomhus samt att underhåll och skötselanvisningarna efterföljs.



Lämna aldrig någon som sitter eller sover i gungstolen ensam!

ThevoChair - Introduktion

Gungstolen ThevoChair leveras oftast som set, i standardutförande ingår också en gungande fotpall.

ThevoChair fåtöljen är utrustad med tvättbart inkontinensöverdrag, nackkudde och låsspak för att hindra gungrörelse vid förflyttning i och ur fåtöljen.

Svensk bruksanvisning medföljer och kan också läsas eller laddas ner på vår hemsida www.maydayaid.se

Kontroll vid leverans

Kontrollera gärna ThevoChair fåtöljen vid leverans så att inga skador uppkommit vid transport. Ta kontakt med oss på Mayday Aid direkt om något har inträffat.

1. ThevoChair fåtölj
2. Rygg med microstimular
(Obs, täckt av ryggklädsel)
3. Armstöd
4. Sits
5. Underrede med snurr-
och gungfunktion
6. Fotpall med gung-
funktion



Allmänna säkerhetsinstruktioner

Läs hela bruksanvisningen innan du använder fåtöljen ThevoChair.

Lär dig låsspaksfunktionen och hur du hanterar produkten, öva gärna praktiskt att förflytta dig i och ur fåtöljen innan du hjälper någon.

Mikrostimulansen, beröringen ökar perceptionen som tillsammans med gungrörelsen reducerar symtom som oror, aggressivitet och depression hos personer med demenssjukdom.

Som vårdpersonal eller anhörig är du ansvarig för säkerheten omkring den vårdbehövande, säkerheten kan äventyras om du inte följer instruktionerna i bruksanvisningen.

Många oväntade situationer kan dyka upp som inte kan förutses och därför inte beskrivs i bruksanvisningen. Vi ber dig därför att alltid vara försiktig och informera alla personer som använder sig av hjälpmedlet, om hur produkten fungerar och skall användas.

Använd låsspaken varje gång då någon sätter sig eller reser sig ur fåtöljen.

Kontakta oss gärna för mer information eller om det finns några oklarheter i bruksanvisningen, se sid 2, för kontaktinformation.

Viktigt!

ThevoChair skall endast användas inomhus och skall placeras på jämnt plan golyta. Tänk på att mattor runt fåtöljen kan förorsaka onödiga fallolyckor.

Varning!

Ta bort allt förpackningsmaterial som skyddat fåtöljen under transport. Tänk på att plastpåsar och liknande kan vara livsfarligt – kvävningsrisk!

Teknisk beskrivning

ThevoChairs ryggstöd kan fällas lätt bakåt i en behaglig lutning. I ryggstödet sitter rörelsepaddlar monterade som återfjädrar kroppens rörelse och ger huden en skön mikrostimulans.



ThevoChair gungar horisontellt. I underredet sitter mekanismen som gör det möjligt för varje användare att få fåtölj och pall att röra sig i sin egna takt och få ett mjukt och behagligt gungande, se bild.



ThevoChair snurrar 360 grader, det betyder att om någon kommer i i rummet kan personen, i fåtöljen, lätt se och få kontakt.



Varning!


Stå aldrig i ThevoChair fåtöljen då fallrisk föreligger om fåtöljen snurrar!

Montering av rygg

Lyft upp gungstolen ur kartongen. Var uppmärksam på att fåtöljens ryggstöd ligger i framfällt läge i kartongen och att lyftgreppet därför måste tas i stolens sits.

Först när gungstolnstolen står på golvet kan ryggstödet fällas upp.

1. Skruva fast ryggstödet i förankringsstaget (A, se bild). Staget är placerad under sitsen på fåtöljens baksida. Avlägsna först plasten som skyddar skruven och staget under transporten.
2. Använd medföljande insexskruv och den fasta nyckeln för att lösgöra muttern.
3. För skruven genom förankringsstödet och fästet (B, se bild) som är monterat nedtill på ryggens baksida.

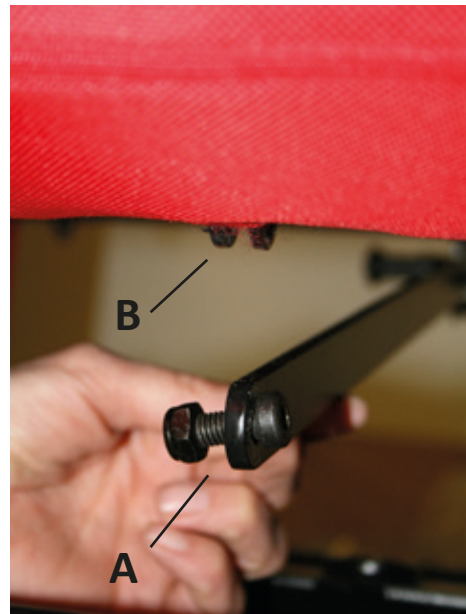

4. Skruva på muttern på skruven igen så att staget sitter fast, se bild.

Tips! När man behöver ta av eller sätta på inkontinensöverdraget går det enklare när man lossar ryggstödet från staget först.

Montering av låsspak

Lyft upp gungstolen ur kartongen. Var uppmärksam på att fåtöljens ryggstöd ligger i framfällt läge i kartongen och att lyftgreppet därför måste tas i stolens sits.

Först när gungstolnstolen står på golvet kan ryggstödet fällas upp.

1. Skruva fast ryggstödet i förankringsstaget (A, se bild). Staget är placerad under sitsen på fåtöljens baksida. Avlägsna först plasten som skyddar skruven och staget under transporten.
2. Använd medföljande insexskruv och den fasta nyckeln för att lösgöra muttern.
3. För skruven genom förankringsstödet och fästet (B, se bild) som är monterat nedtill på ryggens baksida.

Underhåll och skötsel

Inkontinensklädseln är enkel att ta av om man först monterar av ryggstaget. Klädseln kan tvättas i maskin i 60 grader. Vi rekommenderar att hänga upp eller lägga klädseln plant under torkning, **torktumla inte**.

Gungstolen, fåtöljen ThevoChair skall användas och förvaras inomhus.



do not use
a hot iron



do not
dry-clean



do not
tumble-dry



do not
bleach



Montera alltid ihop nya möbler på ett rent och mjukt underlag, exempelvis en filt. Utsätt aldrig möbler för direkt solljus. Solljus kan förkorta livslängden på dina möbler genom att färgerna bleks och tygfibrerna försvagas.

Kontrollera regelbundet att alla skruvar är ordentligt fastskruvade och efterspänn dem vid behov.

Var försiktig när du flyttar möbler så att varken du eller stolen inte utsätts för skadlig belastning.

Fåtöljer ska lyftas i själva stommen, inte i armstöd eller liknande, tyget eller sömmarna spricka kan spricka.

Tygklädseln kan rengöras genom att först dammsuga klädseln och sedan torka av med desinfektionsmedel.

ThevoChair skall kontrolleras regelbundet för bästa hållbarhet och funktion, var vänlig följ checklistan nedan.

Checklista

	Varje vecka	Varje månad
Ryggstödet	X	
Låsspaken	X	
Snurrfunktion		X
Inkontinensöverdrag	X	
Fotpall		X

Demontering och skrotningsinstruktion

Mayday Aid AB arbetar för hållbar utveckling genom återvinning. Att återvinna avfall går ut på att man tar tillvara på material och försöker återanvända dem. Kontakta din kommun för information om var ni kan lämna in en förbrukad fåtölj för återvinning.

Material som skall sorteras på återvinningscentral är följande:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Metall | Återvinns och sorteras med METALL |
| 2. Gummi / Plast | Återvinns och sorteras med BRÄNNBART |
| 3. Klädsel, tyg, remmar och annan textil. | Återvinns och sorteras med BRÄNNBART |

Teknisk data ThevoChair

Mått i cm	
Ryggstödet höjd	72
Stolens höjd	110
Bredd	73
Sitsens djup	47
Sitsens bredd	55
Ryggstödet vinkel	115°
Sitsens höjd	48
Max belastning	140 kg
Fotpall till ThevoChair	
Höjd	41
Bredd	44
Djup	44
Vikt, sitsenheten	18 kg
Vikt, pall	6 kg

Gungstolen



ThevoChair

Säljs i Sverige genom

Mayday Aid AB
Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300 - 56 97 00

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se



Producent

Thomashilfen GmbH
Medico KG
Walkmühlenstrasse 1
27432 Bremervörde

Tel +49 (0) 47 61 / 88 677
Fax +49 (0) 47 61 / 88 619

info@thomashilfen.de
www.thomashilfen.de

