

Bruksanvisning **Charlotte**



Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av sitthörnan Charlotte. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna hoppas vi att ni får stor glädje av Charlotte.

Innehållsförteckning

| | |
|-------------------------------------|----|
| Allmän information | 3 |
| Användningsområde | 3 |
| Produktansvar och säkerhet | 4 |
| Garanti och hållbarhet | 4 |
| Service och reparationer | 4 |
| Sitthörnan Charlotte - Introduktion | 5 |
| Allmänna säkerhetsinstruktioner | 6 |
| Kontroll vid leverans | 7 |
| Inställningsmöjligheter | 7 |
| Inställning av abduktionskloss | 8 |
| Ryggstödfunktioner | 9 |
| Höftbältet | 10 |
| Bröstbältet | 11 |
| Montering av ryggkil | 11 |
| Tips | 12 |
| Underhåll och skötsel | 13 |
| Checklista | 14 |
| Teknisk data | 14 |

MAYDAY AID AB

Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300-56 97 00
Fax 0300-56 97 01

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se

Allmän information

Charlotte är en sitthörna för barn och ungdomar. Sitthörnan Charlotte finns i tre storlekar. Sitthörnan kan vara placerad på golvet eller monterad på en gånstige då sitthörnan skall användas.

Det är viktigt att kontrollera alla skruvar innan ett barn ska sitta i stolen. Barnet ska kunna sitta säkert i stolen med hjälp av höftbältet, abduktionsklossen och bröstbältet.

För att undvika skador eller felanvändning ber vi dig att läsa igenom följande instruktioner och anvisningar noga. Om du har frågor eller undrar över något är du alltid välkommen att ringa eller skriva till oss, kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan 2.

Vi hoppas du kommer att bli riktigt nöjd med sitthörnan Charlotte.

Användningsområde

Charlotte skall användas som hörnstol placerad på golvet för barn som har svårt att klara av att sitta på egen hand. Med hjälp av Charlotte kan barnet sitta själv och bli delaktig i lekar och samlingar som sker i barngrupper. Sitthörnan Charlotte skall användas och förvaras inomhus.

Sitthörnan Charlotte får endast användas under övervakande av en vuxen person.

Produktansvar och säkerhet

Paddan är en CE märkt produkt. Detta är en garanti på att sitthörnan Charlotte uppfyller alla gällande europeiska säkerhetskrav. Företaget Smirthwaite Ltd försäkrar härmed, som producent med ensamt ansvar, att sitthörnan Charlotte är CE märkt enligt direktiv 93/42/EEC om medicinsk utrustning i klass 1.

Produkten får inte ändras, inga tillbehör eller reservdelar från någon annan tillverkare får monteras utan att CE märket tas bort och produktansvaret slutar att gälla.

Garanti och hållbarhet

Garanti gäller endast då produkten används enligt denna bruksanvisning vilken följer producentens rekommendationer.

Charlotte har 2 års garanti. Garanti gäller då Charlotte förvaras inomhus samt att underhåll och skötselanvisningarna efterföljs.

Service och reparationer

Service och reparationer på Charlotte skall endast utföras av behörig personal i samråd med representant från företaget MAYDAY AID AB.

Sitthörnan Charlotte får inte användas att sitta i om något på stolen är trasigt, om delarna inte sitter stabilt fast eller om tyget är sönder. Kontakta arbetsterapeut, fysioterapeut (sjukgymnast) eller Hjälpmedelscentral.

Reservdelar och tillbehör kan beställas och kompletteras med i efterhand.


Vid montering och justering behövs insexnycklar. Var noga med att alltid dra åt insexskruvarna efter justering. Kontrollera att bältena sitter fast ordentligt och är rätt åtdragna.

Lämna aldrig ett barn som sitter i Charlotte ensam!

Charlotte - Introduktion

Charlotte finns i storlekarna 1, 2 och 3, där storlek 1 är den minsta storleken. Charlotte är tillverkad för att hjälpa barn, som behöver stöd för att kunna sitta på egen hand. Paddan Charlotte endast användas inomhus på plant, rent golv eller på matta. På bilden nedan visas Charlotte i standardutförande dvs utan tillbehör.

1. Golvplatta
2. Sido /Bålstöd
3. Nackstöd
4. Abduktionskloss
5. Höftbälte
6. Ryggstöd
7. Bakre stödben
8. Justering för sittbredd
9. Justering för sidostöd

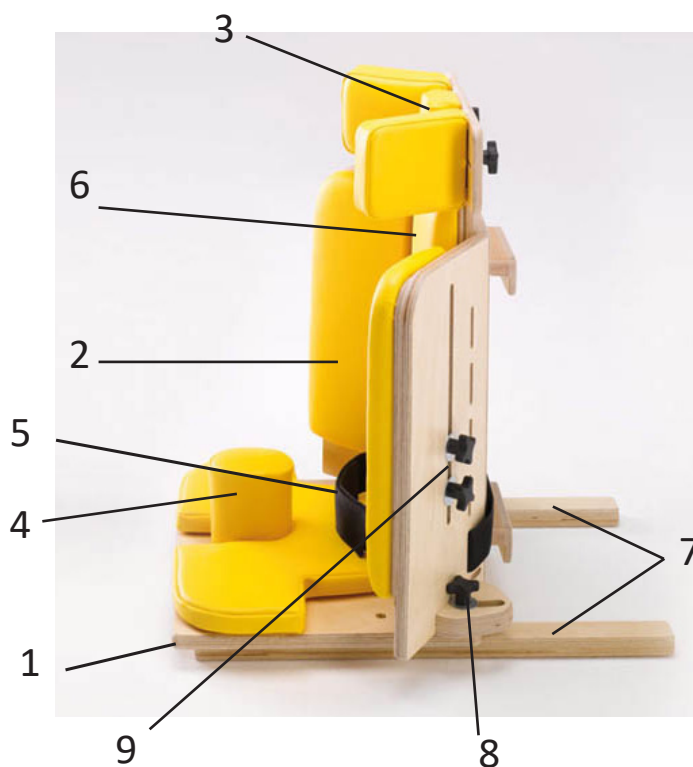

Charlotte är en golvsits av hög kvalitet. Charlotte är tillverkad av en träram som polstrats med ett tåligt tyg som kan torkas av med fuktig trasa med mildt rengöringsmedel eller desinfektionsmedel.

Allmänna säkerhetsinstruktioner

Läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder sitthörnan Charlotte. Lär dig funktionerna och hur du hanterar produkten. Som förälder eller annan målsman är du ansvarig för säkerheten omkring ditt barn. Säkerheten kan äventyras om du inte följer instruktionerna i bruksanvisningen. Många oväntade situationer kan dyka upp som inte kan förutses och därför inte beskrivs i bruksanvisningen. Vi ber er därför att alltid vara försiktiga och informera alla personer som finns runt barnet, som använder sig av hjälpmedlet och dem olika tillbehören, om hur produkten fungerar och skall användas.

Kontakta oss gärna för mer information eller om det finns några oklarheter i bruksanvisningen, se sidan 2 för kontaktinformation.

Viktigt!

Charlotte får endast användas på plan, slät golvyta inomhus. Följ rekommendationerna för ålder och vikt. Placeras inte sitthörnan Charlotte på ett bord eller liknande, hörnstolen kan falla och barnet kan komma att skadas.

Placera aldrig ett för stort barn i en för liten hörnstol, ej heller i en extremt framåtlutad eller bakåtlutad position - tipprisk!



Bild 1

Kontroll vid leverans

I originalförpackningen finner du följande delar vid leverans:

- Bottenplatta med nedre hörndel
- Bakre höjdstag med övre hörndelen monterad.
- Höftbälte
- Brösthälte
- Abduktionskloss
- Tillbehör enligt beställning
- Bruksanvisning

Bild 2

Varning!

Ta bort allt förpackningsmaterial som skyddat sitthörnan under transport. Tänk på att plastpåsar och liknande kan vara livsfarligt för små barn att leka med – kvävningsrisk!

Inställningsmöjligheter

Innan barnet kan sitta i hörnstolen Charlotte bör man justera vissa inställningar så att stolen blir anpassad efter barnets kropp och förmåga.

Bild 3

Inställning av abduktionskloss

Dra upp blixtlåset som sitter på abduktionsklossens ovansida, se sidan 7 bild 3.

För tyget åt sidan. Använd helst en insexnyckel med långt skaft. Lossa skruven försiktigt så att abduktionsklossen kan skjutas fram eller bakåt i skåran. Prova fram avståndet som barnet behöver för att kunna sitta bekvämt och stadigt. Se bild 4.

Bild 4

Kontrollera att skruven dras åt efter den önskade inställningen är gjord. Dra ihop dragkedjan på ovansidan av abduktionsklossen.

Bild 5

Ryggstödetts funktioner

På hörnstolens baksida finns ett trästag med två skåror som justerar höjden av det övre ryggstödet.

Bild 6

Genom att lossa på skruvarna på både höger och vänster sida om ryggstödet och skjuta det övre ryggstödet uppåt kan man förlänga ryggstödet.

Behöver barnet inte så mycket stöd för övre bålen, kan man helt montera av den övre ryggdelen.

Bild 7

Höftbältet

Höftbältet fram knäpps ihop med ett fixlockslås. Tryck med tumme och pek-finger samtidigt på var sida om spännet, dra sedan den inre lås delen ut från spännet. Se bild 8.

För att justera längden på bältet drar man i bältets remmar som finns på utsidan av nedre ryggstödet.

Remmen sätts fast på önskad längd mot kardborreplattan på utsidan av nedre rygghörnan. Se bild 9.

Bild 8

Bild 9

Bröstmötet

Bröstmötet har en bred polstrad tygdel mitt fram för att göra mötet så bekväm som möjligt mot kroppen.

Bröstmötet justeras med hjälp av kardborrefästen som är placerade på vardera sidan av den övre ryggdelen, se bild 10.

Bild 10

Viktigt!

Lämna aldrig ett barn i Paddan ensam. Ha alltid barnet under uppsikt!

Montering av ryggkilar

En del barn kan sitta mer uppsträckt och rak i ryggen om dem får ett tryck mot ryggraden. Ryggkilar placeras i hörnet av stolen. Se bild 11.

Förlänger man ryggdelen genom att montera det övre ryggstödet högt upp kan man använda två ryggkilar placerade över varandra för att täcka hela ryggpartiet.

Bild 11

Tips!

Om ryggkilen inte stannar kvar i hörnet, kan du trycka fast ryggkilen med hjälp av ett dubbelhäftat kardborreband.

Ta den mjuka delen mot ryggstödet om du senare behöver ta bort ryggkilen, då fastnar inte kläder mot kardborrebandet som sitter kvar.

Placera gärna kardborrebandet i den nedre sitthörnans överkant, se bild 12.

Bild 12

Bild 13

Underhåll och skötsel

Sitthörnan Charlotte ska endast användas på plant, slätt och hårt underlag. Charlotte är främst avsedd för användning inomhus, men begränsad utomhusanvändning är tillåten. Var dock uppmärksam på att underlaget måste vara plant, torrt och fritt från vatten, smuts och fukt.

Charlotte får inte förvaras utomhus. Rengör och tvätta av sitthörnan Charlotte ofta, använd fuktad trasa och milda rengöringsmedel såsom diskmedel eller liknande. Sitthörnan Charlotte kan torkas av med desinfektionsmedel, använd ett desinfektionsmedel med tensid alternativt ett oxiderande ytdesinfektionsmedel.

Bild 14

Teknisk data sitthörnan Charlotte

| Mått i cm | storlek 1 | storlek 2 | storlek 3 |
|----------------|--------------|-------------|--------------|
| Ca ålder | 6 mån - 2 år | 1 år - 6 år | 4 år - 10 år |
| Max brukarvikt | 25 kg | 35 kg | 50 kg |
| Sittdjup | 30 | 30 | 35 |
| Max sittbredd | 40 | 40 | 45 |
| Rygghöjd | 41 - 52 | 52 - 66 | 55 - 69 |
| Vikt | 10kg | 12 kg | 14 kg |

Checklista

| | Dagligen | Varje vecka | Varje månad |
|------------------------|----------|-------------|-------------|
| Bröstkådet | X | | |
| Höftbältet | X | | |
| Abduktionskloss | | X | |
| Justering bredd x höjd | | | X |

Sitthörnan **Charlotte**

Säljs i Sverige genom:

MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300 - 56 97 00
Fax 0300 - 56 97 01

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se

MAYDAY AID

Producent:

G&S Smirthwaite
17 Wentworth Road,
Newton Abbot, Devon
TQ 12 6TL UK

Tel +44 (0)1626 835552

info@smirthwaite.co.uk
www.smirthwaite.co.uk

