

Bruksanvisning



# Advantage



Senast redigerad 2017-11-17



Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av sittvagnen Advantage. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna hoppas vi att ni får stor glädje av Advantage.

## Innehållsförteckning

|                                 |    |   |    |
|---------------------------------|----|---|----|
| Allmän information              | 3  | Ryggvinkel                              | 12 |
| Användningsområde               | 3  | Klädsel                                 | 12 |
| Produktansvar och säkerhet      | 4  | Fälla upp sittvagnen                    | 13 |
| Garanti och hållbarhet          | 4  | Fälla ihop sittvagnen                   | 14 |
| Service och reparationer        | 4  | Vändbar sättenhet                       | 15 |
| Advantage - Introduktion        | 5  | Service- och rekonditioneringsanvisning | 16 |
| Allmänna säkerhetsinstruktioner | 6  | Checklista                              | 16 |
| Kontroll vid leverans           | 7  | Demontering och skrotningsinstruktion   | 16 |
| Monteringsanvisning             | 7  | Teknisk data                            | 17 |
| Montering av korg               | 8  |   |    |
| Sitsvinkeln                     | 8  |   |    |
| Montering av sättenhet          | 8  |   |    |
| Riktningsspärr                  | 9  |   |    |
| Parkeringsbroms                 | 9  |   |    |
| Sittdjup                        | 10 |   |    |
| Sittbredd                       | 10 |   |    |
| Ryggstödshöjd                   | 10 |   |    |
| Benlängd / Fotplatta            | 11 |   |    |
| Vinkla benstödet                | 11 |   |    |

## Mayday Aid AB

Arendalsvägen 35  
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300-56 97 00  
Fax 0300-56 97 01

info@maydayaid.se  
www.maydayaid.se

## Allmän information

Advantage är en sittvagn för barn och ungdomar.

Sittvagnen är framtagen och designad för barn och unga med funktionsnedsättning och som behöver sitta bekvämt och säkert vid förflyttning. För att kunna göra inställningar av sittvagnen så enkelt och bekvämt som möjligt, ber vi dig läsa denna bruksanvisning först, innan sittvagnen tas i bruk.

Om du har frågor eller undrar över något är du alltid välkommen att ringa eller skriva till oss, kontaktuppgifter hittar du på sidan 2.

Vi hoppas du kommer att bli riktigt nöjd med sittvagnen Advantage.

## Användningsområde

Advantage är en sittvagn för barn och ungdomar. Observera att endast ett barn får åka i sittvagnen. Använd alltid bälten eller selen så att barnet sitter säkert och inte kan ramla ur vagnen. Sittvagnen får endast köras av en vuxen person. Advantage skall skjutas framför förälder eller annan vårdnadsgivare.

Sittvagnen är lätt att köra. Fixera gärna framhjulen med riktningsspärrarna rakt, då sittvagnen används på ojämn mark. När Advantage körs på plan mark blir sittvagnen smidigare att svänga om man tar bort riktningsspärren på framhjulen.

Advantage skall användas för barn eller ungdomar som behöver hjälp med förflyttningar.

Tack vare Advantage konstruktion kan man fälla ihop sittvagnen så att den får plats i bagageutrymmet.

## Varning!

Lägg alltid väskor, kassar eller andra tunga föremål i korgen, (finns som tillbehör) annars finns risk för att sittvagnen tippas bakåt.

## Produktansvar och säkerhet

Advantage är en CE märkt produkt. Detta är en garanti på att Advantage uppfyller alla gällande europeiska säkerhetskrav.

Företaget Thomashilfen GmbH<sup>®</sup> försäkrar härmed, som producent med ensamt ansvar, att Advantage är CE märkt enligt direktiv 93/42/EEC om medicinsk utrustning i klass 1.

Produkten får inte ändras, inga tillbehör eller reservdelar från någon annan tillverkare får monteras utan att CE märket tas bort och produktansvaret slutar att gälla.

## Garanti och hållbarhet

Garanti gäller endast då produkten används enligt denna bruksanvisning vilken följer producentens rekommendationer.

Advantage har 2 års garanti. Garanti gäller då Advantage förvaras inomhus samt att service- och rekonditioneringsanvisningar efterföljs.

## Service och reparationer

Service och reparationer på Advantage skall endast utföras av behörig personal som till exempel hjälpmedelstekniker eller representanter från företaget Mayday AidAB.

Vid montering och justering av tillbehör behövs verktyg. Var noga med att alltid dra åt låsrattar, skruvar mm efter justering.

**Lämna aldrig barn som sitter eller sover i sittvagnen ensam!**

## Advantage - Introduktion

Advantage finns i två storlekar och är tillverkad för att passa barn som behöver sitta i vagn under förflyttningar. Advantage ska köras av vuxen person.

Tänk på att tipprisk föreligger då sittvagnar körs på ojäm och sluttande mark.

På bilden nedan visas Advantage med korg, riktningsspärr och nackstöd. I standardutförandet är klädseln grå och transportfästen ingår.

1. Körhandtagsbåge
2. Parkeringsbroms
3. Bakhjul
4. Riktningsspärr
5. Framhjul
6. Fotplatta
7. Sidostöd
8. Långa sidostöd
9. Korg



Bild 1

## Allmänna säkerhetsinstruktioner

Läs hela bruksanvisningen innan du använder sittvagnen Advantage.

Lär dig funktionerna och hur du hanterar produkten, öva gärna praktiskt att slå ihop och fälla ut sittvagnen.

Som förälder eller annan målsman är du ansvarig för säkerheten omkring ditt barn. Säkerheten kan äventyras om du inte följer instruktionerna i bruksanvisningen. Många oväntade situationer kan dyka upp som inte kan förutses och därför inte beskrivs i bruksanvisningen. Vi ber dig därför att alltid vara försiktig och informera alla personer som finns runt barnet som använder sig av hjälpmedlet om hur produkten fungerar och skall användas.

Använd parkeringsbromsen varje gång du sätter i eller tar barnet ur Advantage. Parkeringsbromsa vagnen när du ska montera eller justera ett tillbehör.

Kontakta oss gärna för mer information eller om det finns några oklarheter i bruksanvisningen, se sid 2, för kontaktinformation.

### Viktigt!

Advantage får användas ute och fungerar på såväl jämn som ojämn mark. Tänk på att sittvagnar kan tippa på gropigt eller rulla iväg på sluttande mark.

Kontrollera alltid Advantage efter flygresor eller liknande. Sittvagnen kan ha blivit utsatt för kraftiga slag och hård hantering.



Bild 2

## Kontroll vid leverans

I originalförpackningen finner du följande delar vid leverans:

- Sittenhets med klädsel
- Chassi med transportfästen
- Korg
- Tillbehör enligt beställning
- Bruksanvisning



Bild 3

## Varning!

Ta bort allt förpackningsmaterial som skyddat sittvagnen under transport. Tänk på att plastpåsar och liknande kan vara livsfarligt för små barn att leka med – kvävningsrisk!

## Monteringsanvisning

Lyft upp Advantage ur förpackningen. Vrid den röda låsknappen på vardera sidan, se bild 4.

Ta tag i körhandtaget, eventuellt behöver körhandtaget ställas i en annan vinkel. Lyft rakt upp tills dess ett ljudligt låsklick hörs.

Under sitsen finns en låsklämma som reglerar sitsvinkeln, placera sitsen i önskad position, se bild 5.



Bild 4

## Montering av korg

Korgen ingår i standardutförandet.  
Fäst korgen under sättenheten i de fyra metallöglorna som sitter på ramen.  
Se bild 5.



Bild 5

## Varning!

Lägg alltid väskor, kassar eller andra tunga föremål i korgen, annars finns risk för att sittvagnen tippar bakåt!

## Sitsvinkeln

På ryggen sitter ett låsreglage som reglerar sitsvinkeln, placera sitsen i önskad lutning, se bild 6. Kontrollera alltid att sitsen sitter fast i önskad vinkel efter justering.



Bild 6

## Montering av sättenhet

Sitsen på Advantage kan monteras så att barnet antingen åker i färdriktningen eller att föraren kan ha ögonkontakt med barnet.

Under sättenheten finns metallkrokar. Krokarna skall fästas på chassiramen. Luta sitsen bakåt, för in krokarna i ramen, se bild 7. Tryck sedan ner främre delen av sitsen, ett ljudligt klick skall höras då sitsen låses automatiskt fast i sitsen.

Kontrollera alltid att sitsen sitter ordentligt fast innan barnet flyttar över till sittvagnen.



Bild 7



## Hjulets olika funktioner

### A. Riktningsspärr

Riktningsspärren hindrar framhjulen från att snurra runt. Gör följande för att låsa riktningsspärren.

Ställ hjulen i rak linje bakåt. Lyft upp och vrid den svarta hatten på riktningsspärren. Släpp ner hatten så att hjulens fixeras i rak linje med bakhjulen.

Genom att låsa alla fyra hjulen rakt fram blir det lättare att köra sittvagnen på ojämnt underlag som trottoarer som lutar eller i snö och slask.

När man ändrar körriktning är det lättast att försiktigt luta sulkyn bakåt och samtidigt vända sulkyn åt önskat håll.

### B. Parkeringsbroms

Parkeringsbromsen hindrar hjulet helt från att rotera. Gör följande för att låsa med parkeringsbromsen:

Stå bakom sulkyn. Håll fast körhandtaget. Tryck ner bromsröret. Kontrollera att bromsklossarna på var sida slår an mot bakhjulen.

Tänk på att inte lämna parkeringsbromsen på hjulet under lång tidsperiod, bromsklossen kan då lämna märken på hjulet och göra hjulet ojämnt.



Bild 8



Bild 9

## Sittdjup

Lyft upp klädseln från sitsen. Lossa på insexskruvarna i skårorna på sittplattan och på sidodelarna.

Skjut eller dra plattan i framkant tills dess att rätt sittdjup är inställt. Skruva fast.

Sittplattan skall ge lårbenen bra understödsyta. Tänk på att sitsen bör sluta ca 2-3 cm innan knävecket.



Bild 10

## Sittbredd

Vik undan klädseln från sitsen. Lossa på de fyra låsrattarna under sitsen som håller sidodelarna på plats.

Skjut in eller tryck ut sidodelarna till önskad placering. Fixera därefter positionen genom att dra fast låsrattarna igen.



Bild 11

## Ryggstödshöjd

Skruva upp låsrattarna i skårorna. Dra upp eller skjut ner översta ryggstödsplattan till önskad höjd. Sruva fast låsrattarna på vardera sidan.

Då ryggstödshöjden befinner sig i lägsta höjd kan "överbliven" klädseln tryckas ner mellan ryggstödsplattan och sittplattan.



Bild 12

## Benlängd / Fotplattan

Inställning av fotplattans höjd.

Lossa först på bägge skruvarna på fotplattans fäste. Lyft upp eller sänk fotplattan till önskad höjd.

Fotplattan kan fällas upp då förflyttning i eller ur vagnen görs. Fotplattan kan också vinklas. Dra åt skruvarna ordentligt efter att en ändring är gjord.



Bild 13

## Vinkla benstödet

A. Lossa låsspaken på båda sidor.

För fotplattan upp eller ner för önskad vinkel i knäled. Skruva och lås fast på bägge sidor.



Bild 14

## Tips!

Då barnet ligger plant och sover eller vilar i vagnen bör benstödet höjas till vågrät position.

När barnet sitter rakt upp med ryggen, bör man vinkla benstödet rakt ner.



Bild 15

## Ryggvinkeln

Ryggvinkeln kan steglöst ställas i lutning. Lossa på låsvredet på ryggstödet baksida. För låsvredet uppåt eller neråt i skåran. Notera hur ryggstödet lutning förändras. Skruva åt låsvredet när ryggens lutning kommer i önskad position.

Under låsvredet sitter en låsspärr. Låsspärren löser ut automatiskt när rygglutningen går förbi dess läge. Dra ut låshatten för att passera läget för att få ner ryggstödet till plant läge.



Bild 16

## Klädseln

Polstringen / Klädseln är specialvävd för att få luft att cirkulera mellan sättenheten och barnets hud. Luftspalten gör att EASyS är skön och bekväm att sitta i under såväl sommar som vintertid.

Sidoklädseln kan enkelt tas av för rengöring med hjälp av kardborrebanden/ dragkedja på sidan, se bild 17.



Bild 17

Knäpp ihop de långa sidostöden med sidoklädseln.

Klädseln kan tas av för att tvättas i maskin 40°. Klädseln skall inte torktumlas. Om klädseln utsätts för starkt solljus kan det blekna. På bilden visas uttaget för sufflettfastet, se bild 18.

Tyget i klädseln är flamsäkert. Extra klädsel finns som tillbehör.



Bild 18

Vi rekommenderar att ta av sättenheten vid ihopfällning. Sittvagnen blir enklare att hantera, framförallt skonar ryggen på den som lyfter vagnen.

### Fälla upp sittvagnen med sättenheten monterad på

Sitsen skall vara monterad i färdriktningen då den fälls ihop tillsammans med chassiunderredet.

1. Lyft i körhandtaget, tryck in på handtagets sidor för att kunna vinkla handtaget för ett bättre grepp.

2. Ta tag i körhandtaget och dra sedan uppåt med en rörelse, sätt gärna foten på röret mellan bakhjulen. Ett ljudligt klick skall höras från bägge sidor när låsspärrarna hamnar på plats.

3. Vinkla sättenheten, se sid 8.

4. Vinkla ryggstödet, se bild 13.

5. Justera fotstödet/ knäleden, se sid 11



Bild 19



Bild 20



Bild 21

## Fälla ihop sittvagnen med sättenheten monterad på

1. Sättenheten måste vara monterad i färdriktningen, se bild 22.
2. Vinkla ner ryggstödet horisontellt, se bild 22.
3. Fäll upp fotplattan, vinkla knäleden uppåt så att fotplattan hamnar i sitsen, se bild 23.
4. Stå bakom sittvagnen, lyft säkerhetsbygeln samt låspärren på var sida om chassiramens ramen. Dra låspärrarna uppåt. Tryck vagnen framåt. Vagnen viker ihop sig, se bild 23.



Bild 22

## Fälla ihop sittvagnen utan sättenheten påmonterad

1. Ta av sättenheten. Ta tag i låsspaken på ryggstödet baksida, dra sättenheten bakåt. Lyft bort sättenheten.
2. Stå bakom chassiramens / underredet.
3. Lyft säkerhetsbygeln samt låspärrarna på var sida uppåt. För körbygeln bakåt samtidigt som du trycker vagnen framåt. Vagnen viker ihop sig.
4. Lås fast vagnen genom att trycka in den röda låsspaken på sidan efter ihopslagning.



Bild 23



Bild 24

## Service- och rekonditioneringsanvisningar

Advantage klädsel är enkel att ta av. Tvättas i maskin 40 grader.  
Vi rekommenderar att lägga klädseln plant under torkning, torktumla inte.

Borsta regelbundet bort ludd och annan smuts från kardborrebanden så att kardborren fäster ordentligt. Stäng ihop kardborrebanden innan klädseln tvättas.



Bild 25

## Skötsel av chassiram

Sittvagnen Advantage chassiram skall torkas av med fuktig trasa och milda rengöringsmedel till exempel diskmedel. Ramens lack behåller sin glans och färg bäst om den inte utsätts för skrap mot hårda ytor. Använd inte stålull eller liknande material vid rengöring. Var försiktig vid ihopfällning.

## Vändbar sättenhet

Sättenheten på Advantage kan monteras i färdriktning eller som här på bild 21, ansikte mot ansikte.

För många föräldrar innebär det stor trygghet att hela tiden kunna ha ögonkontakt med sitt barn.



Bild 26

## Service- och rekonditioneringsanvisningar, forts.

Sittvagnen Advantage skall förvaras inomhus.

Sand, hår och skräp förstör kullager. Håll därför hjulen så rena som möjligt.

Rengör ofta ramrör, hjulnav, bälten m m.

Advantage skall kontrolleras regelbundet för bästa hållbarhet och funktion, var vänlig följ checklistan nedan.

### Checklista

|                                | Dagligen | Varje vecka | Varje månad |
|--------------------------------|----------|-------------|-------------|
| Bälten, klädsel och körhandtag | X        |             |             |
| Parkeringsbroms                | X        |             |             |
| Låsvred och skruvar            |          | X           |             |
| Bakhjul, framhjul och kullager |          |             | X           |
| Fotplattans höjd               |          |             | X           |
|                                |          |             |             |

## Demontering och skrotningsinstruktion

Mayday Aid AB arbetar för hållbar utveckling genom återvinning. Att återvinna avfall går ut på att man tar tillvara på material och försöker återanvända dem. Kontakta din kommun för information om var du kan lämna in din förbrukade sittvagn/ sulky för återvinning.

Material som ska lämnas på återvinningscentral är följande:

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1. Metall                                 | Återvinns och sorteras med METALL    |
| 2. Gummi / Plast                          | Återvinns och sorteras med BRÄNNBART |
| 3. Klädsel, tyg, remmar och annan textil. | Återvinns och sorteras med BRÄNNBART |



## Teknisk data Advantage

| Mått i cm  | Storlek 1         | Storlek 2      |
|--|-------------------|----------------|
| Sittdjup   | 19 - 30           | 27 - 38        |
| Sittbredd  | 19 - 31           | 25 - 37        |
| Ryggstödshöjd                                    | 41,5 - 68         | 55 - 74        |
| Handtagshöjd                                     | 92 - 114          | 92 - 120       |
| Underbenslängd                                   | 17,5 - 29         | 21 - 37        |
| Fotvinkel  | 78° - 100°        | 78° - 100°     |
| Knävinkel  | 90° - 180°        | 90° - 180°     |
| Höftvinkel (vinkling av ryggstöd)                | 90° - 180°        | 90° - 180°     |
| Vinkling av sittenhet i A chassi (Tilt-in-space) | -10° till +35°    | -10° till +35° |
| Totala mått uppfälld (L x B x H)                 | 99,5 x 59,5 x 114 | 107 x 69 x 120 |
| Totala mått ihopfälld (L x B x H)                | 82 x 59,5 x 42,5  | 86 x 69 x 55   |
| Framhjul   | 7,5"              | 7,5"           |
| Bakhjul  | 10"               | 10"            |
| Vikt, sitsenheten                                | 9 kg              | 10,4 kg        |
| Max belastningsvikt                              | 35 kg             | 40 kg          |
| Vändbar sittenhet                                | 180°              | 180°           |

Sittvagnen



# Advantage

Säljs i Sverige genom

**Mayday Aid AB**

Arendalsvägen 35  
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300 - 56 97 00

Fax 0300 - 56 97 01

[info@maydayaid.se](mailto:info@maydayaid.se)

[www.maydayaid.se](http://www.maydayaid.se)



Producent

**Thomashilfen GmbH**

Medico KG  
Walkmühlenstrasse 1  
27432 Bremervörde

Tel +49 (0) 47 61 / 88 677

Fax +49 (0) 47 61 / 88 619

[info@thomashilfen.de](mailto:info@thomashilfen.de)

[www.thomashilfen.de](http://www.thomashilfen.de)

