

Bruksanvisning **Happy Strap**



MAYDAY AID



Denna bruksanvisning ger information om hur den mjuka höftledsortosen Happy Strap placeras på barnet, hur storleken ställs in, säkerhetsföreskrifter och skötselråd.

Genom att läsa igenom och följa anvisningarna hoppas vi att både ni och barnet får stor glädje av Happy Strap.

Innehållsförteckning

Allmän information	3	Säkerhetsinstruktioner	4
Användningsområde	3	Storlekstabell	5
Produktansvar och CE-märkning	3	Ta på Happy Strap och justera storleken	6
Garanti och hållbarhet	4	Skötselråd	8
Service och reparationer	4		

MAYDAY AID AB

Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300-56 97 00
Fax 0300-56 97 01

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se

Allmän information


Den mjuka höftledsortosen Happy Strap är framtagen för att ge hypotona barn en förbättrad stabilitet i höfterna, vilket hjälper barnet att utveckla sitt-, kryp- och gångförmågan.

Användningsområde

Hypotoni, ligamentär instabilitet och tonusväxling är karaktäristiskt för barn med t ex Downs syndrom. Dessa barn utvecklar ett ineffektivt rörelsemönster med utåtroterade och abducerade höfter samt flekterade och valgusställda knän. Detta kan på sikt leda till ortopediska komplikationer som orsakar smärta i höft- och knäled.

Den mjuka höftledsortosen Happy Strap har en enkel men effektiv konstruktion som stabiliserar höftlederna utan att hindra barnet i sin vilja att röra sig.

Happy Strap kan användas under såväl lek och träning som då barnet sover.

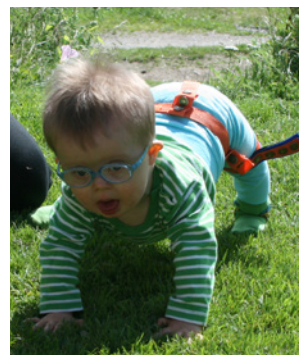

Producentansvar och CE-märkning

Den mjuka höftledsortosen Happy Strap är en CE märkt produkt. Detta är en garanti på att Happy Strap uppfyller alla gällande europeiska säkerhetskrav. Tillverkaren försäkrar, som producent med ensamt ansvar, att Happy Strap är CE märkt enligt direktiv 93/42/EEC om medicinsk utrustning i klass 1.

Produkten får inte ändras, inga tillbehör eller andra material får monteras utan att CE märket tas bort och producentansvaret slutar att gälla.

Garanti och hållbarhet

Garanti gäller endast då produkten används enligt denna bruksanvisning vilken följer producentens rekommendationer.

Den mjuka höftledsortosen Happy Strap har 1 års garanti. Garantin omfattar fel som har uppstått i samband med tillverkningen eller ursprungliga fel i materialet. Garantin omfattar ej slitage som uppstår i samband med användning eller fel som uppstått på grund av att skötselråden ej följts.

Service och reparationer

Om skötselråden följs (sid 8) krävs ingen service av Happy Strap och den håller sig i gott skick längre.

Säkerhetsinstruktioner

Ta omedelbart bort allt förpackningsmaterial som följer med vid leverans. Kartongen lämnas till återvinning.

Känn först över så att alla tryckknappar och plastdetaljer sitter ordentligt fast. En lös tryckknapp kan utgöra livsfara om barnet skulle stoppa den i munnen. Kontrollera sedan detta regelbundet.

Sätt fast Happy Strap på barnet enligt anvisning på sid 6. Den ska sitta kroppsnära, men inte så hårt att barnet får obehag av remmarna. Var extra uppmärksam på om barnet skulle få skav eller hudrodnad efter användning, liksom att den inte bör sitta för hårt runt magen när barnet sitter upp.

Storlekstabell

Happy Strap finns i fem olika storlekar.

Rätt storlek fås fram genom att mäta omkretsen på barnets lår, mitt på benet mellan ljumske och knä.

Ålder	Storlek	Lårets omkrets	Färg
ca 0-12 mån	X-small	<24 cm	ljusblå
ca 1-3 år	Small	24-34 cm	orange
ca 3-5 år	Medium	32-40 cm	grönblå
ca 5-8 år	Large	38-48 cm	lila



Ta på Happy Strap och justera storleken

Öppna midjerebben som ska sitta runt barnets mage (bild 1). Då Happy Strap tas på och av barnet är detta den enda rem som skall öppnas. Tryckknapparna används endast för att justera storleken.

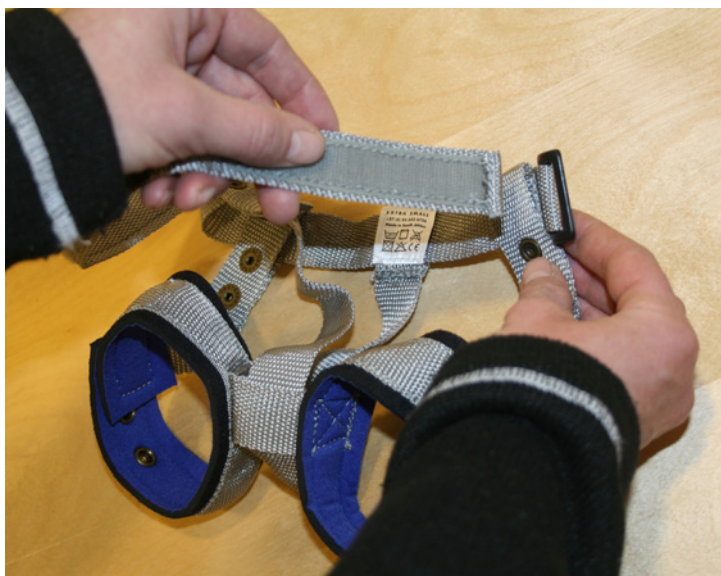


Bild 1

Trä igenom barnets ben, ett i taget, i de vadderade benremmarna (bild 2).



Bild 2

Om benremmarna sitter för hårt eller för löst, kan storleken ökas eller minskas genom att lossa på tryckknapparna (bild 3).



Bild 3

Dra upp hela höfttortosen så att mittremmen sitter strax under grenen (bild 4).



Bild 4

Sätt barnet försiktigt upp och för midjeremmen runt barnets rygg. Lägga barnet på rygg och för den därefter igenom plasthållan och fäst kardborrebandet (bild 5).



Bild 5

Justera Happy Strap så att den sitter bra. Knapparna kan användas för att justera omkretsen runt låren (bild 6, A) samt höjden från benremmarna upp till midjeremmen (bild 6, B).

Observera att dessa knappar inte ska knäppas upp då Happy Strap tas på och av barnet utan bara då den redan sitter på barnet, för att undvika trassel.



Bild 6

Skötselråd

Happy Strap rengörs i tvättmaskin i ett vanligt 40°C kulörprogram. Använd ej tvättmedel med blekmedel eller sköljmedel. Se till att fästa kardborrebandet och alla tryckknappar innan tvätt. Lägg gärna Happy Strap i en tvättpåse.

Hängtorkas efter tvätt.

Happy Strap får ej torkas i torktumlare eller strykas.



Mjuk höftledsortos

Happy Strap

Säljs i Sverige genom:

MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35
434 39 Kungsbacka

Tel 0300 - 56 97 00
Fax 0300 - 56 97 01

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se



Producent:

HAPPY STRAP
PO Box 382
Tulbagh 6820
Western Cape
South Africa

Tel/Fax +27 23 230 0156
Mob +27 82 552 4726

janet@happystrap.co.za
www.happystrap.co.za

