


# Rekonditioneringsanvisning Pacer



## Pacerns olika delar

Observera!

Pacerns utseende kan variera beroende på modell, storlek och tillbehör.

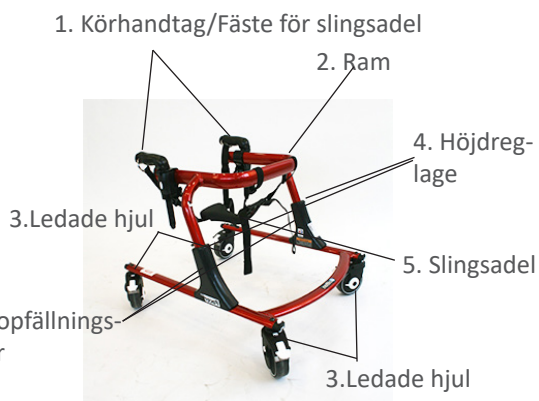

## Rengöring av Pacer i hemmiljö

Tvätta av rollatorn/gästolen och tillbehör med rengöringsmedel, använd ett rengöringsmedel utan slipmedel.

Använd ej scotchsvamp eller andra hårda material som kan skrapa sönder lackfärg.

Använd gärna dagligen tryckluft för att snabbt få bort grus och damm från rollatorn.

## Rengöring av Pacer på hjälpmedelscentral

Tvättkabinett:

Montera av täckproppar på ramen, dessa tvättas separat. Pacer kan rengöras i tvättkabinett med program innehållande med tvätt i 60°C under 3 min och tvätt i 90°C under 1 min med en normal tvättcykel på ca 25 - 45 minuter.

Eftertorka pacer genom att placera de öppna rörändarna neråt så att avrinning sker innan ändavslutarna påmonteras.

Alla tillbehör och delar som har spruckit, fått rostskador eller skadats, skall omedelbart bytas ut, originaldelar skall alltid användas.

På ramen skall det finnas en etikett med följande information:

*Denna produkt säljs i Sverige genom  
Mayday Aid AB  
Arendalsvägen 35  
434 39 KUNGSBACKA  
Beställ ny om denna saknas!*

## Gör rent hjulen:

Runt hjulen samlas mycket damm, hår mm. Smutsen gör rollatorn/ gästolen trög att köra. Tänk på att rengöra hjulen ofta.

Gör så här:

Skruva av hjulen från ramen.  
Borsta rent hjulet.  
Montera tillbaka hjulet.

Högtryckstvätt skall inte användas direkt på hjullager.

VIKTIGT!

Kontrollera att hjulet rullar lätt framåt.  
Kontrollera att framhjulet kan rotera runt sin axel.  
Kontrollera att parkeringsbroms, släpbroms, bakåtspärr och riktningsspärr fungerar.

## Kontrollera innan användning att:

- Hjulen sitter fast ordentligt.
- Hjulen inte är trasiga eller slitna.
- Rollatorn rullar rakt då den skjuts framåt.
- Bromsar, höjrdreglage och ihopfällningsspärr, se bild.



Läs mer i bruksanvisningen, [www.maydayaid.se](http://www.maydayaid.se)

Ta av alla tillbehören på Pacern och gör rent med hjälp av rengörings- eller desinfektionsmedel.

Se beskrivning nedan för att kontrollera att tillbehören är kompletta vid återanvändning.

## Vad ingår i Pacer tillbehören?

### Ramfäste

De flesta av tillbehören till Pacer sitter monterade runt ramen med ett ramfäste.

Ta bort ramfästet genom att skruva ut ratten tills ratten går att vika neråt. Lyft därefter bygeln rakt ut. Fästet kan nu tas bort eller flyttas för att monteras på annan plats runt ramen.



### Armstöd med kardborreband

Small K512, par  
Large K532, par



Ramfäste, dyna, kardborreband via dyna, räfflat handtag med höjdställning, ratt för fastsättning, L-format handtag med kardborreband samt ratt för fäste och inställning.

### Bålstödsbälte

Small K514  
Medium K524  
Large K534



Ett bålstöd inklusive två bälten, två ramfästen, två höjdstag med ratt för infästning. Storleken står tryckt på bålstödsbältet.

### Slingsadel

Small K513  
Large K533



En slingsadel, två remmar fram med fixlockslås. Två remmar bak med metallöglor samt fixlockslås. Två ramfästen, två handtagsgrepp med låskula för ögelfäste.

### Dyna till slingsadel

Small K541  
Large K542

Dyna med två remmar bak i kors och två tryckknappar fram.



### Körhandtag för assistans K589

C-format långt handtag med fäste för att kunna monteras fram på ramen till de mindre storlekarna.



### Bord, vinkelställbart K518

Plexiglasbord med överliggande plastskiva. Ledkula med ratt, höjdstag samt ramfäste.



### Benstöd, ledat

Small K515, par  
Large K535, par



Benstöd med fäste, två skruvrattar för inställning av längd och vinkel. Rem för fastsättning runt låret.

### Vristband på skena

MIni K540, par  
Small K516, par  
Medium K526, par  
Large K536, par  
XL K546, par



Metallskena som förs in i hålrum på hjulfästet fram, vitt reglage skjuts bak för att sedan fästa i bakre hjulinfästet. Rem som kan justeras i längd. Vristband med fixlockslås. Metallknäppen runt skenan trycks samman för att justera steglängd.

### Handtagsöglor

K579, par

Ramfäste, ögلهandtag fastsatt med ratt på höjdställningsstag.



### Handtagsgrepp

K519, par

Två handtag med höjdstag, två ramfästen, ingår i Slingsadel, art nr 513 och art nr 533. Kan beställas separat om man enbart behöver använda sig av handtagen.

