



Component Group
FLUX Size 1-3

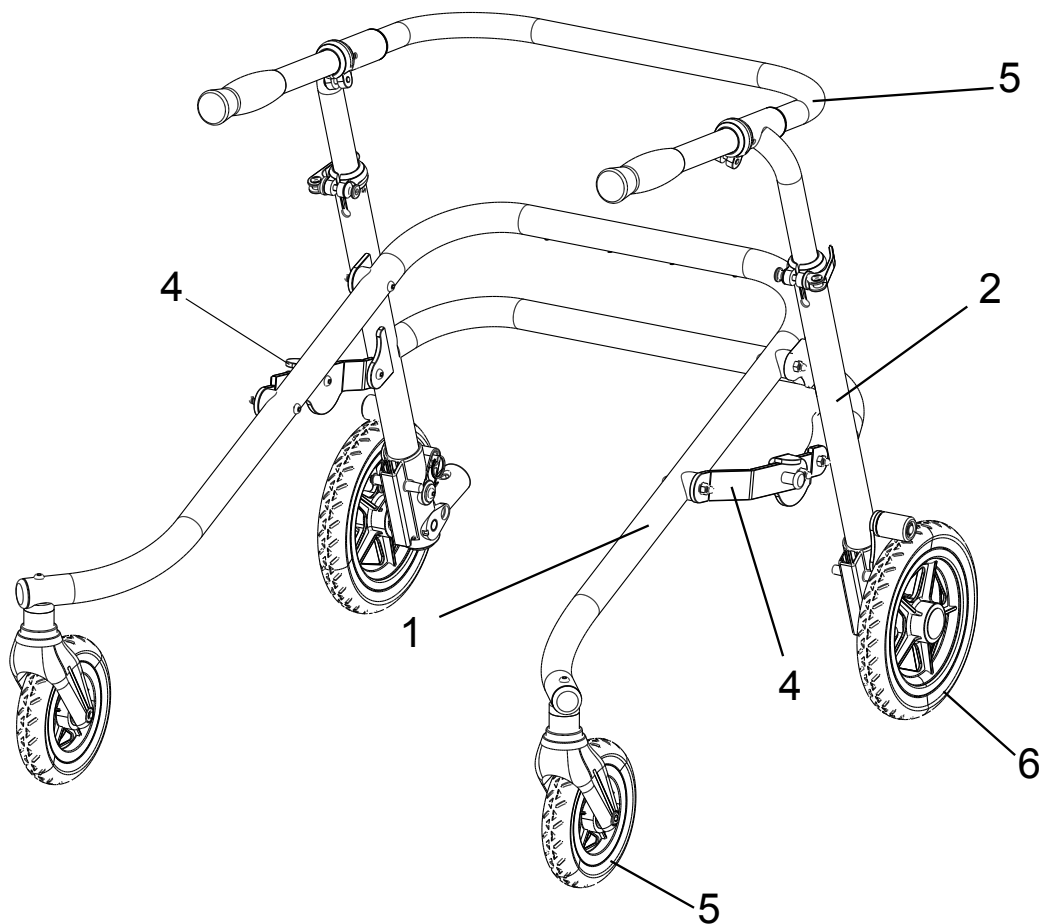


Item	Article number	Component Group	Page
1-6		FLUX Walking aid	
1		Front frame	3
2		Rear frame	5
3		Multifunctional part with revers roll lock	6-7
4		Folding lever	8
5		Grab Rail	9-10
6		Front wheel	11
7		Rear wheel	11
		Accessories	13-26

Spare parts

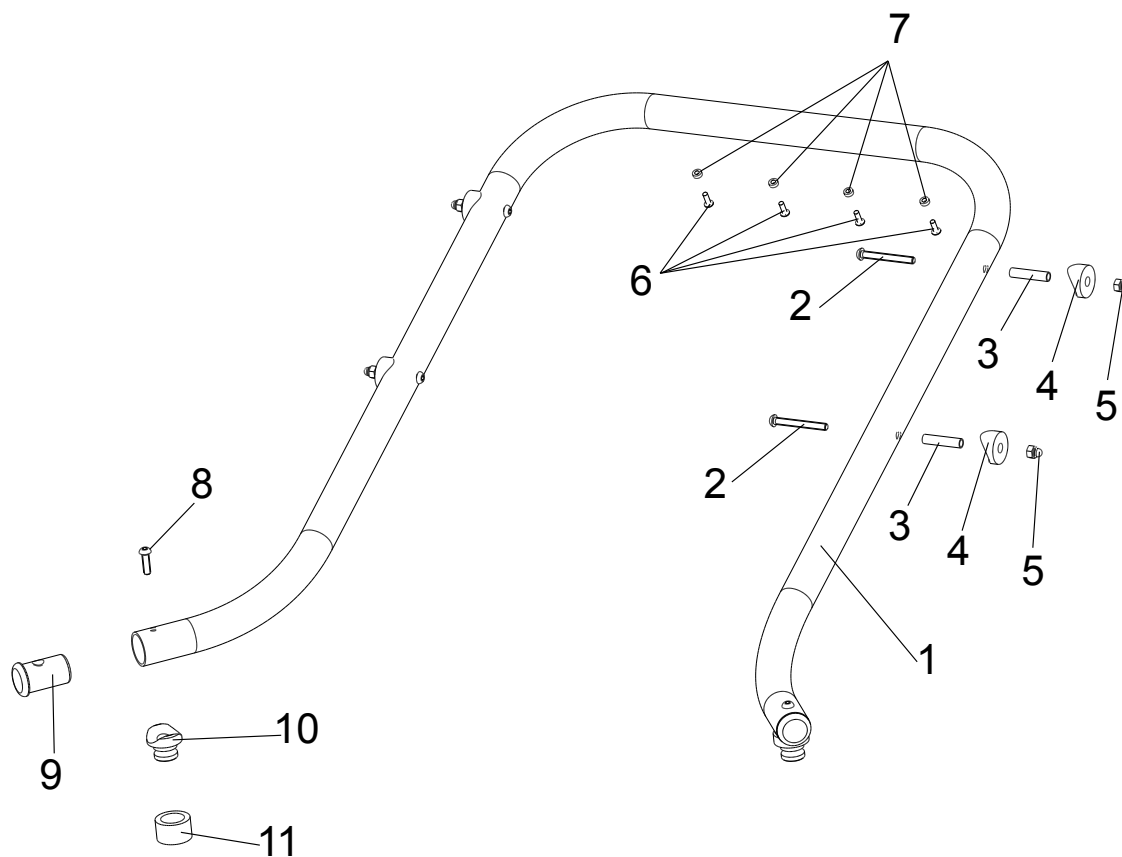


Item	Article number	Article description	Quantity	Unit
1-11	3301-1100-003	Front frame size 1, complete	1	Pc.
	3302-1100-004	Front frame size 2, complete	1	Pc.
	3303-1100-005	Front frame size 3, complete	1	Pc.
1-8	3301-1110E-003	Front frame size 1 with fasteners	1	Pc.
	3302-1110E-004	Front frame size 2 with fasteners	1	Pc.
	3303-1110E-005	Front frame size 3 with fasteners	1	Pc.
1	3301-1110-003	Front frame size 1	1	Pc.
	3302-1110-004	Front frame size 2	1	Pc.
	3303-1110-005	Front frame size 3	1	Pc.
2	1029-0650	Button head socket screw zp DIN/ISO 7380 M6x50	4	Pc.
3	1114-0047	Bushing steel zp 8x0,9x35	4	Pc.
4	1111-0006	Saddle washer PA black 28x8.4x5	4	Pc.
5	1044-0006	Hexagonal domed cap nut self-locking zp DIN/ISO 986 M6	4	Pc.
6	1062-0412	Blind rivet St/St DIN/ISO 7337 F4x12	4	Pc.
7	1112-0010	Spacer PA black 8x4,3x3	4	Pc.
8	1029-0620	Button head socket screw zp DIN/ISO 7380 M6x20	2	Pc.
9	3301-1120	Plug	2	Pc.
10	3301-1130	Saddle bushing	2	Pc.
11	3202-1151	Cover ring	2	Pc.

Spare parts

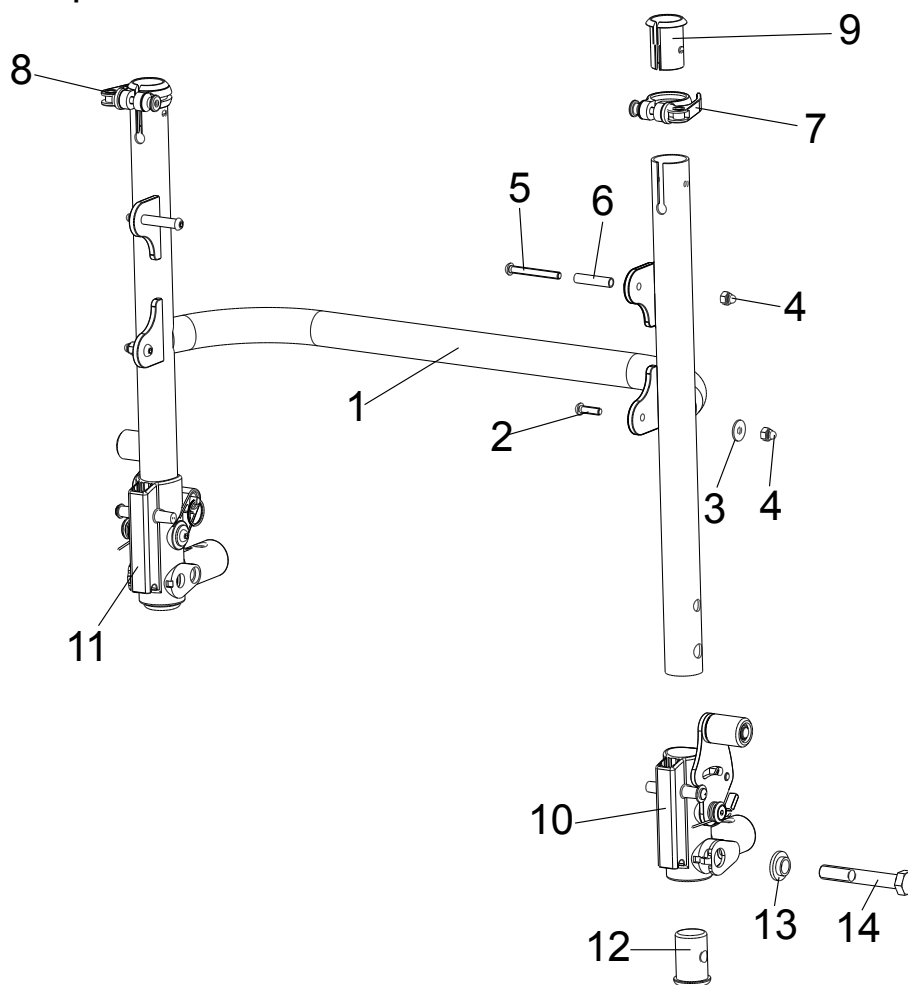


Item	Article number	Article description	Quantity	Unit
1-14	3301-1200-003	Rear frame size 1, complete	1	Pc.
	3302-1200-004	Rear frame size 2, complete	1	Pc.
	3303-1200-005	Rear frame size 3, complete	1	Pc.
1-6	3301-1210E-003	Rear frame size 1, with fasteners	1	Pc.
	3302-1210E-004	Rear frame size 2, with fasteners	1	Pc.
	3303-1210E-005	Rear frame size 3, with fasteners	1	Pc.
1	3301-1210-003	Rear frame size 1	1	Pc.
	3302-1210-004	Rear frame size 2	1	Pc.
	3303-1210-005	Rear frame size 3	1	Pc.
2	1029-0620	Button head socket screw zp DIN/ISO 7380 M6x20	2	Pc.
3	1113-0010	Washer PA black DIN/ISO equal 9021 18x6,4x1,5	2	Pc.
4	1044-0006	Hexagonal domed cap nut self-locking zp DIN/ISO 986 M6	4	Pc.
5	1029-0650	Button head socket screw zp DIN/ISO 7380 M6x50	2	Pc.
6	1114-0047	Bushing steel zp 8x0,9x35	2	Pc.
7	1129-0007	Saddle clamp with quick-release D 31,8 left	1	Pc.
8	1129-0006	Saddle clamp with quick-release D 31,8 right	1	Pc.
9	3301-1240	Clamp bushing	2	Pc.
10	3301-1910	Multifunctional part with revers roll lock left	1	Pc.
11	3301-1920	Multifunctional part with revers roll lock right	1	Pc.
12	3301-1250	Plug	2	Pc.
13	3301-1260	Distance bush	2	Pc.
14	1011-1280	Hexagon head screw zp DIN 933 M12x80 s19	2	Pc.

Spare parts

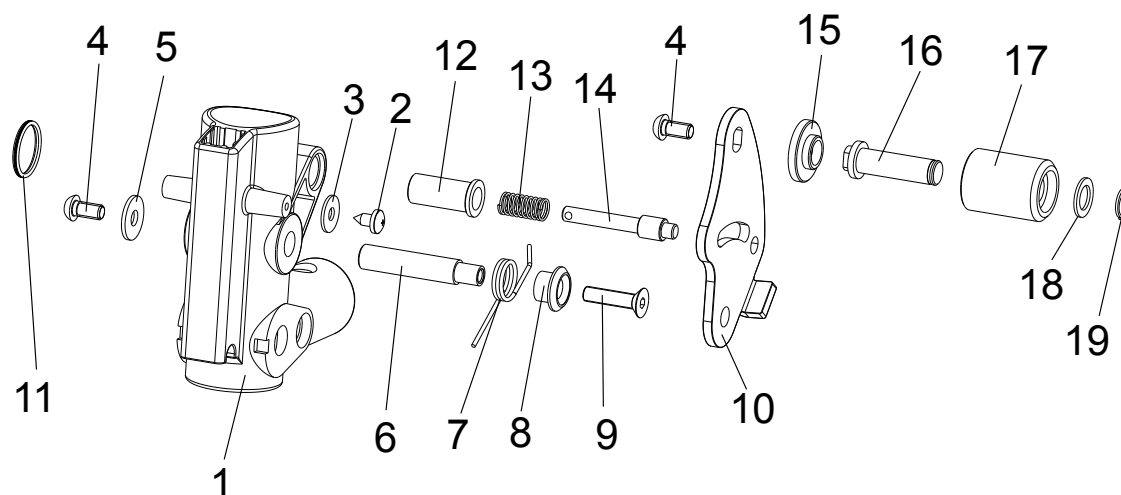


Item	Article number	Article description	Quantity	Unit
1-19	3301-1910	Multifunctional part with revers roll lock left	1	Pc.
1	3301-1230	Multifunctional part	1	Pc.
2	1039-0001	Screw for plastic, cross recessed pan head w. flange zp 4x10	1	Pc.
3	1055-0005	Washer A5,3 zp DIN/ISO 9021 A5,3	1	Pc.
4	1029-0612	Button head socket screw zp DIN/ISO 7380 M6x12	2	Pc.
5	1055-0006	Washer zp A6,4 zp DIN/ISO 9021 A6,4	1	Pc.
6	3301-1815	Axle	1	Pc.
7	1133-0012	Leg spring T-18854L 1,6x14,4x3,00	1	Pc.
8	3301-1816	Spring hanger	1	Pc.
9	1024-0625	Hexagon socket countersunk head screw zp DIN/ISO 7991 M6x25	1	Pc.
10	3301-1811-001	Base plate left	1	Pc.
11	1129-0003	Key ring 24x1,5	1	Pc.
12	3201-7520	Spring housing	1	Pc.
13	1131-0036	Compression spring D-127d 0,8x8,3x29	1	Pc.
14	3301-1817	Locking pin	1	Pc.
15	3301-1814	Spacer bushing	1	Pc.
16	3301-1812	Freewheel axle	1	Pc.
17	3301-1830	Freewheel left	1	Pc.
18	1059-0001	Shim ring zp DIN/ISO 988 10x16x1,2	1	Pc.
19	1080-0010	Retaining ring for shaft DIN/ISO 471 10x1	1	Pc.

Spare parts

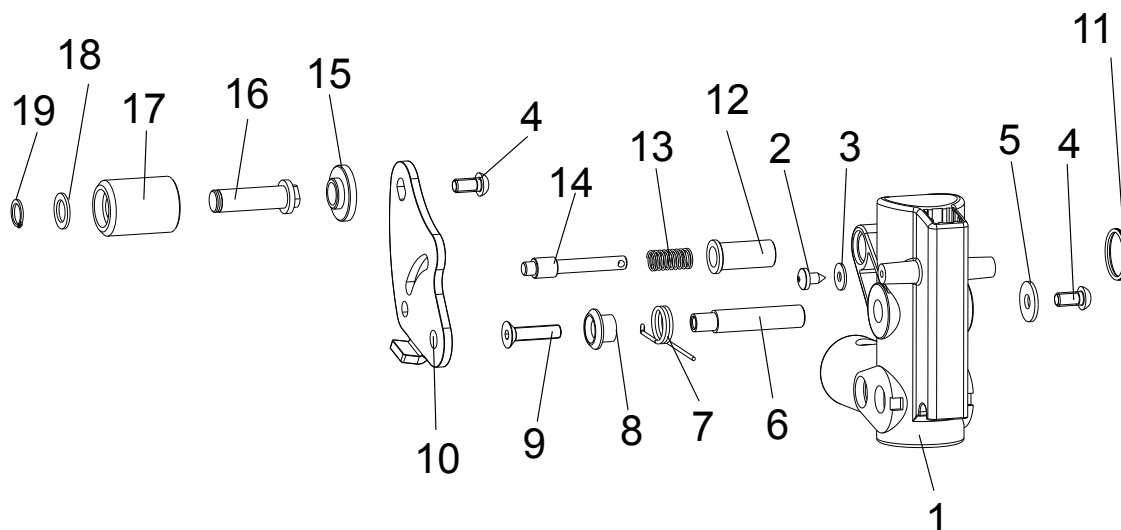


Item	Article number	Article description	Quantity	Unit
1-19	3301-1920	Multifunctional part with revers roll lock righth	1	Pc.
1	3301-1230	Multifunctional part	1	Pc.
2	1039-0001	Screw for plastic, cross recessed pan head w. flange zp 4x10	1	Pc.
3	1055-0005	Washer A5,3 zp DIN/ISO 9021 A5,3	1	Pc.
4	1029-0612	Linsenschraube m ISK verz ISO 7380 M6x12	2	Pc.
5	1055-0006	Washer DIN 9021 A6,4	1	Pc.
6	3301-1815	Axle	1	Pc.
7	1133-0013	Leg spring T-18854L 1,6x14,4x3,00	1	Pc.
8	3301-1816	Spring hanger	1	Pc.
9	1024-0625	Hexagon socket countersunk head screw zp DIN/ISO 7991 M6x25	1	Pc.
10	3301-1821-001	Base plate	1	Pc.
11	1129-0003	Key ring 24x1,5	1	Pc.
12	3201-7520	Spring housing	1	Pc.
13	1131-0036	Compression spring D-127d 0,8x8,3x29	1	Pc.
14	3301-1817	Locking pin	1	Pc.
15	3301-1814	Spacer bushing	1	Pc.
16	3301-1812	Freewheel axle	1	Pc.
17	3301-1840	Freewheel right	1	Pc.
18	1059-0001	Shim ring zp DIN/ISO 988 10x16x1,2	1	Pc.
19	1080-0010	Retaining ring for shaft DIN/ISO 471 10x1	1	Pc.

Spare parts

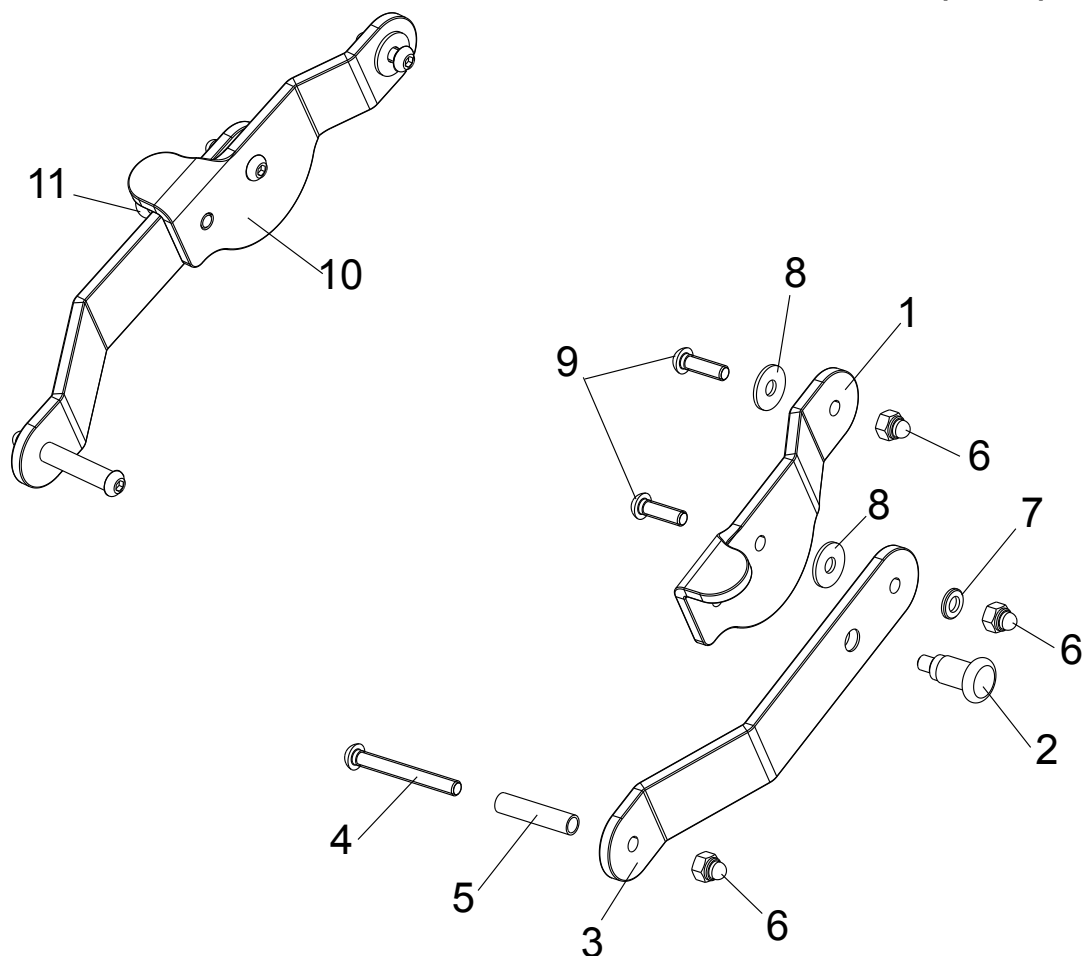


Item	Article number	Article description	Quantity	Unit
1-9	3301-1300	Folding lever set left	1	Set
3-11	3301-1400	Folding lever set right	1	Set
1	3301-1320-001	Folding lever left, back	1	Pc.
2	1127-0010	Lock pin ZS-10x1-OA-KS d6xM10xS10x31	1	Pc.
3	3301-1310-001	Folding lever front	1	Pc.
4	1029-0650	Button head socket screw zp DIN/ISO 7380 M6x50	1	Pc.
5	1114-0047	Bushing steel zp 8x0,9x35	1	Pc.
6	1044-0006	Hexagonal domed cap nut self-locking zp DIN/ISO 986 M6	3	Pc.
7	1051-0006	Washer A6,4 zp DIN/ISO 125 A6,4	1	Pc.
8	1113-0010	Washer PA black DIN/ISO equal 9021 18x6,4x1,5	2	Pc.
9	1029-0620	Button head socket screw zp DIN/ISO 7380 M6x20	2	Pc.
10	3301-1420-001	Folding lever righth back	1	Pc.
11	1127-0011	Lock pin ZS-M10x1-KS with lock	1	Pc.

Spare parts

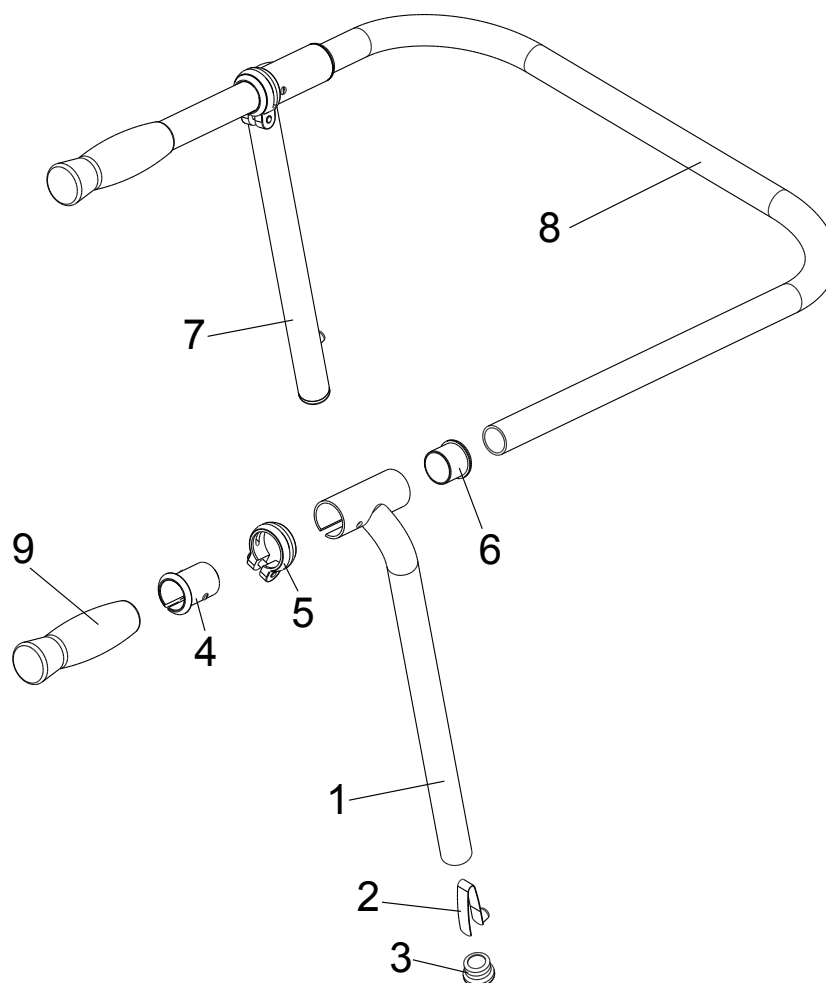


Item	Article number	Article description	Quantity	Unit
1-9	3301-1500E	Grab rail standard, size 1 (retrofit)	1	Pc.
	3302-1500E	Grab rail standard, size 2 (retrofit)	1	Pc.
	3303-1500E	Grab rail standard, size 3 (retrofit)	1	Pc.
1-6	3301-1510E	Pillar left complete size 1	1	Pc.
	3302-1510E	Pillar left complete size 2	1	Pc.
2	1134-0006	Snap button B 141 7,7x9,4	2	Pc.
3	1141-0015	Ribbed insert GL 25x1-2.5	2	Pc.
4	3301-1240	Clamp bushing	2	Pc.
5	1129-0008	Saddle clamp with bolt D 31,8	2	Pc.
6	3301-1530	Flange bushing	2	Pc.
2-7	3301-1520E	Pillar right complete size 1	1	Pc.
	3302-1520E	Pillar right complete size 2	1	Pc.
8-9	3301-1540	Grab rail standard size 1	1	Pc.
	3302-1540	Grab rail standard size 2	1	Pc.
	3303-1540	Grab rail standard size 3	1	Pc.
8	3301-1541-006	Grab rail standard tube size 1	1	Pc.
	3302-1541-006	Grab rail standard tube size 2	1	Pc.
	3303-1541-006	Grab rail standard tube size 3	1	Pc.
9	1143-0005	Handle grip TPE black d25 x 120	2	Pc.

Spare parts

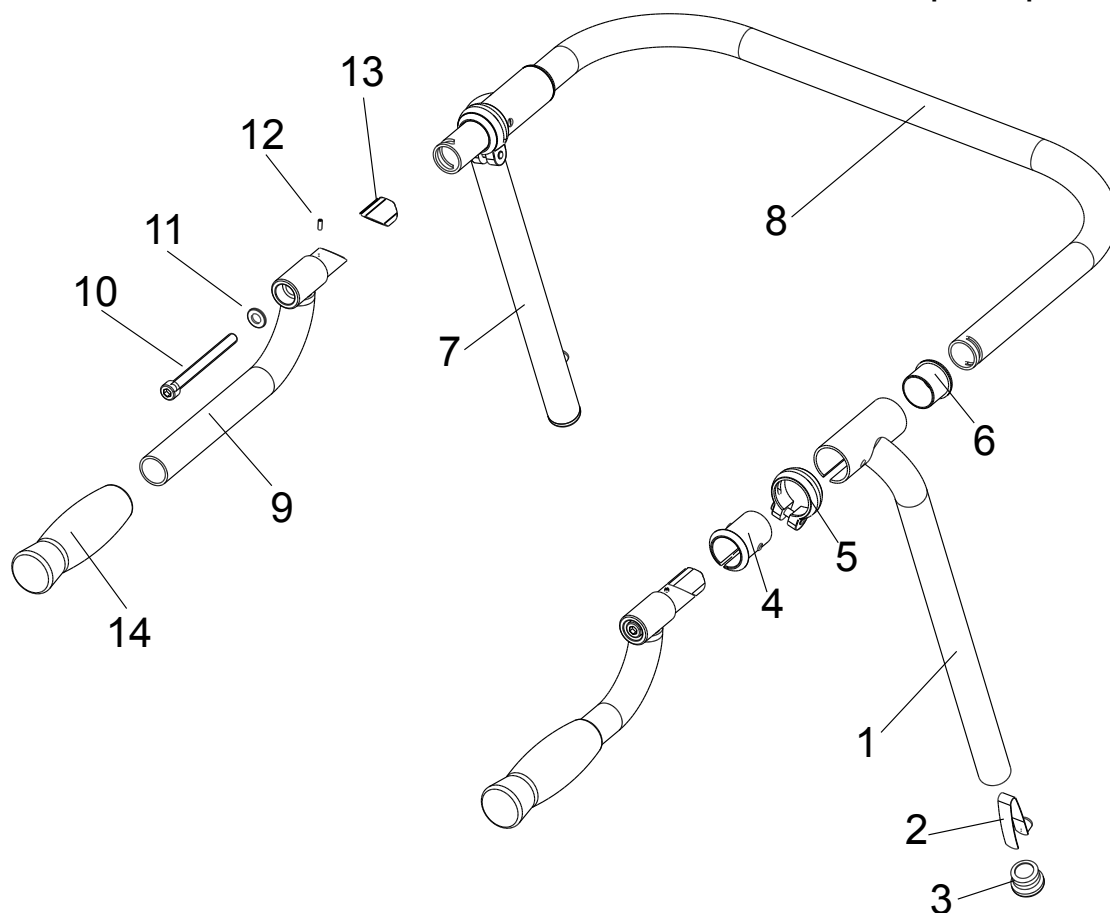


Item	Article number	Article description	Quantity	Unit
1-14	3301-5100E	Grab rail w/universal handle size 1 (retrofit)	1	Pc.
	3302-5100E	Grab rail w/universal handle size 2 (retrofit)	1	Pc.
	3303-5100E	Grab rail w/universal handle size 3 (retrofit)	1	Pc.
1-6	3301-1510E	Pillar left complete size 1	1	Pc.
	3302-1510E	Pillar left complete size 2	1	Pc.
2	1134-0006	Snap button B 141 7,7x9,4	2	Pc.
3	1141-0015	Ribbed insert GL 25x1-2.5	2	Pc.
4	3301-1240	Clamp bushing	2	Pc.
5	1129-0008	Saddle clamp with bolt D 31,8	2	Pc.
6	3301-1530	Flange bushing	2	Pc.
2-7	3301-1520E	Pillar right complete size 1	1	Pc.
	3302-1520E	Pillar right complete size 2	1	Pc.
8	3301-5110-006	Handle universal size 1	1	Pc.
	3302-5110-006	Handle universal size 2	1	Pc.
	3303-5110-006	Handle universal size 3	1	Pc.
9-14	3301-5120	Universal handle complete	1	Pc.
9	3301-5130	Universal handle	1	Pc.
10	1021-0885	Hexagon socket head cap screw zp DIN/ISO 912 M8x85	1	Pc.
11	1051-0008	Washer A8,4 zp DIN/ISO 125 A8,4	1	Pc.
12	1070-0308	Spring pin DIN/ISO 7346 3x8	1	Pc.
13	1089-0002	Wedge	1	Pc.
14	1143-0005	Handle grip TPE black d25 x 120	1	Pc.

Spare parts

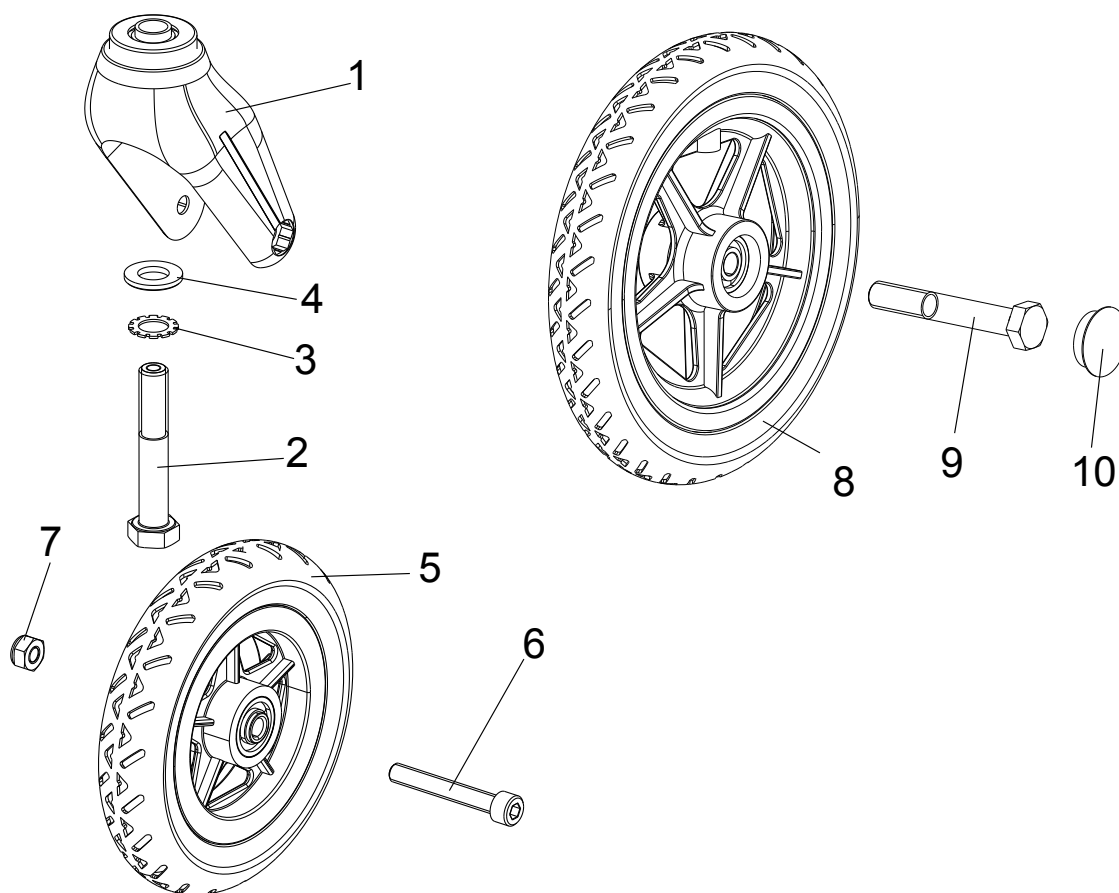


Item	Article number	Article description	Quantity	Unit
1	1281-0009	Caster fork 150	2	Pc.
2	3301-1150	Steering pivot pin	2	Pc.
3	1056-0021	Lock washer A 12,5	2	Pc.
4	1051-0012	Washer A13 zp DIN/ISO 125 A 13	2	Pc.
5	1221-1530	PU-wheel R150/32-1-PU-S 150x30	2	Pc.
6-7	1205-0855E	Hexagon socket screw	2	Pc.
8	1221-2030	PU-wheel R200/30-1-PU- 200x30	2	Pc.
9	1011-1280	Hexagon head screw zp DIN 933 M12x80 s19	2	Pc.
10	1209-0004	Cover cap KN-S-32/2	2	Pc.

Spare parts for accessories

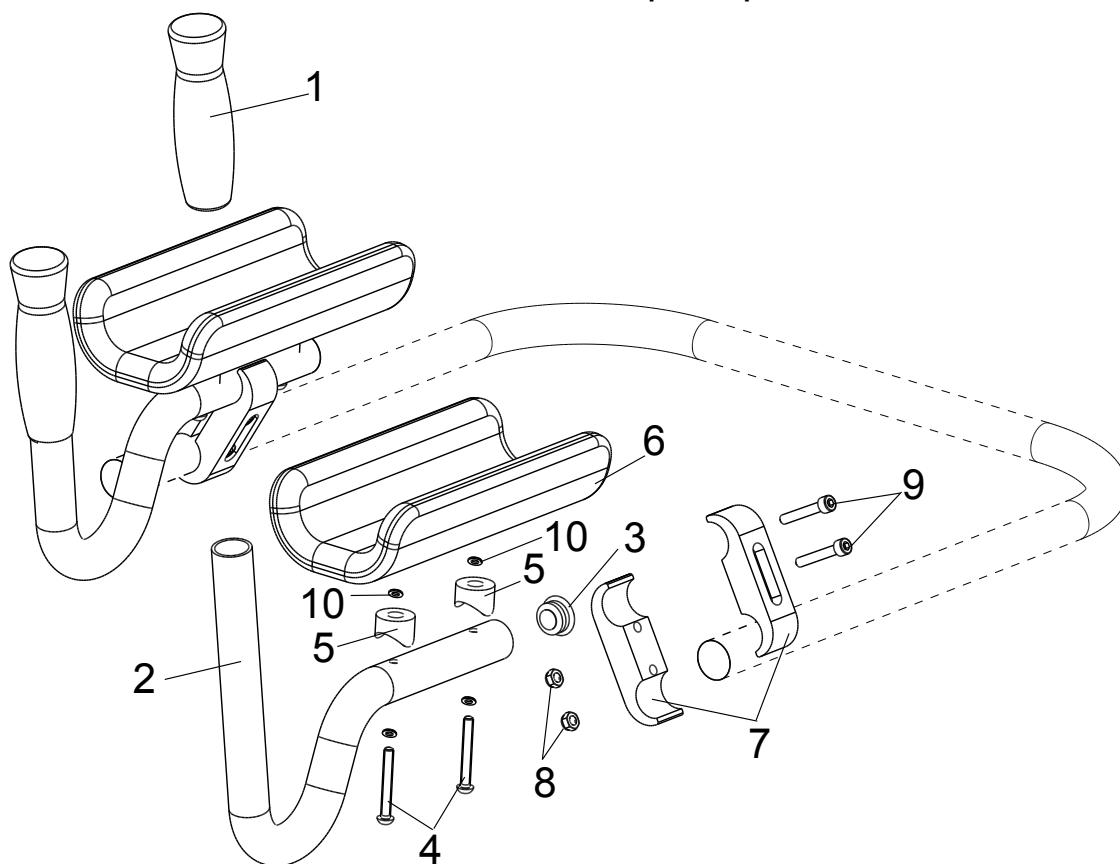

Item	Article number	Article description	Quantity	Unit
1-10	3302-5200	Lower arm support with handles	1	Set
1-3	3301-5220-001	Handhold	2	Pc.
1	1143-0005	Handle grip TPE black d25 x 120	2	Pc.
2	3301-5221	Handhold	2	Pc.
3	1141-0009	Ribbed insert SFL 25x1-2,5	2	Pc.
4	1029-0640	Button head socket screw zp DIN/ISO 7380 M6x40	4	Pc.
5	1111-0001	Saddle washer PA black 24x6.3x8	4	Pc.
6	3302-5240	Lower arm support	2	Pc.
7-9	3301-5210	Terminal holder	2	Pc.
7	3301-5211	Clamp shell	4	Pc.
8	1042-0006	Hexagon nut self-locking zp DIN/ISO 985 M6	4	Pc.
9	1021-0635	Hexagon socket head cap screw zp DIN/ISO 912 M6x35	4	Pc.
10	1051-0006	Washer A6,4 zp DIN/ISO 125 A6,4	4	Pc.

Spare parts for accessories

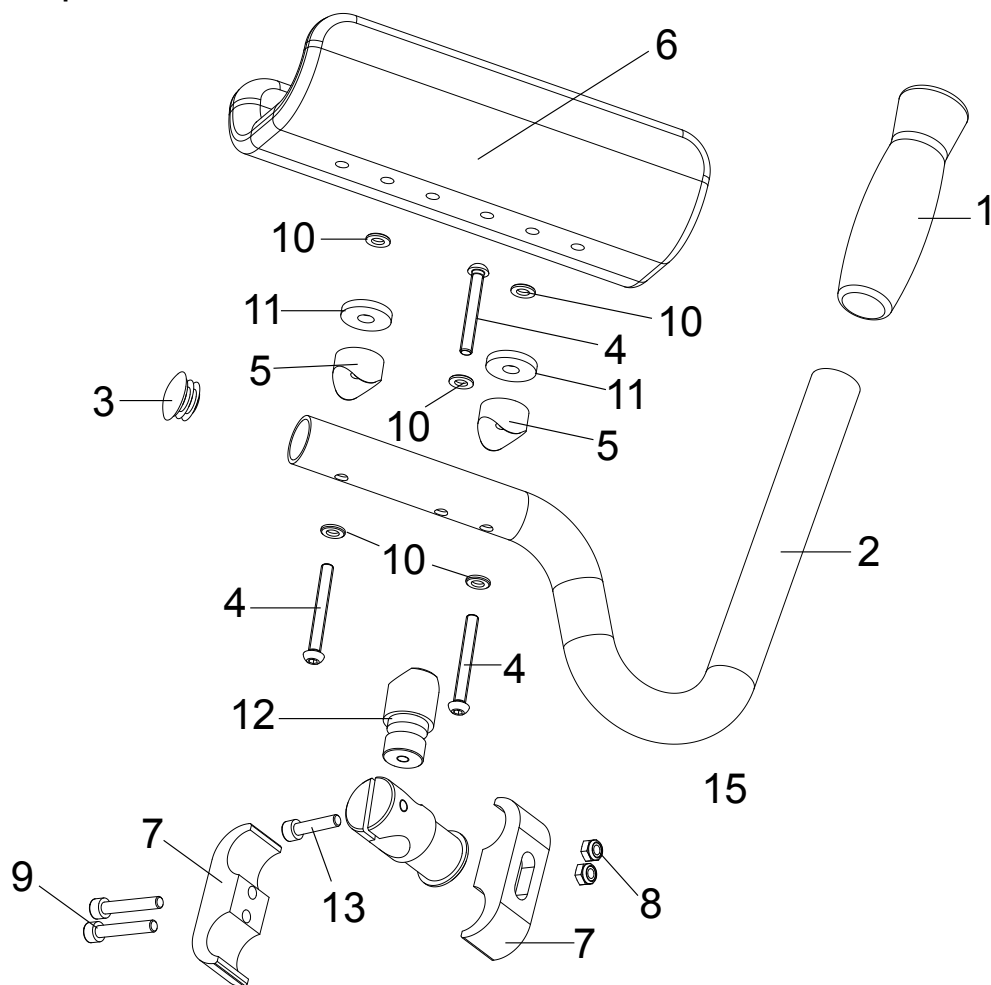


Item	Article number	Article description	Quantity	Unit
1-13	3302-5300	Lower arm support with handles, 3-axis adjustable	1	Set
1-3	3301-5220-001	Handhold	2	Pc.
1	1143-0005	Handle grip TPE black d25 x 120	2	Pc.
2	3301-5221	Handhold	2	Pc.
3	1141-0009	Ribbed insert SFL 25x1-2,5	2	Pc.
4	1029-0645	Button head socket screw zp DIN/ISO 7380 M6x40	6	Pc.
5	1111-0001	Saddle washer PA black 24x6.3x8	4	Pc.
6	3302-5240	Lower arm support	2	Pc.
7-9	3301-5210	Terminal holder	2	Pc.
7	3301-5211	Clamp shell	4	Pc.
8	1042-0006	Hexagon nut self-locking zp DIN/ISO 985 M6	4	Pc.
9	1021-0635	Hexagon socket head cap screw zp DIN/ISO 912 M6x35	4	Pc.
10	1051-0006	Washer A6,4 zp DIN/ISO 125 A6,4	10	Pc.
11	1113-0047	Washer PA black 24x8,4x4	4	Pc.
12	3301-5360	Spacer ring	2	Pc.
13	1021-0625	Hexagon socket head cap screw zp DIN/ISO 912 M6x25	2	Pc.

Spare parts for accessories




Item	Article number	Article description	Quantity	Unit
1-5	3301-6600	Hand disk	1	Set
1	3301-6610	Clamp for hand disk	2	Pc.
2	1089-0002	Wedge	2	Pc.
3	1249-0002	Bumper wheels 100 mm black	2	Pc.
4	1021-0885	Hexagon socket head cap screw zp DIN/ISO 912 M8x85	2	Pc.
5	1055-0008	Washer zp A8,4 zp DIN/ISO 9021 A8,4	2	Pc.

Spare parts for accessories

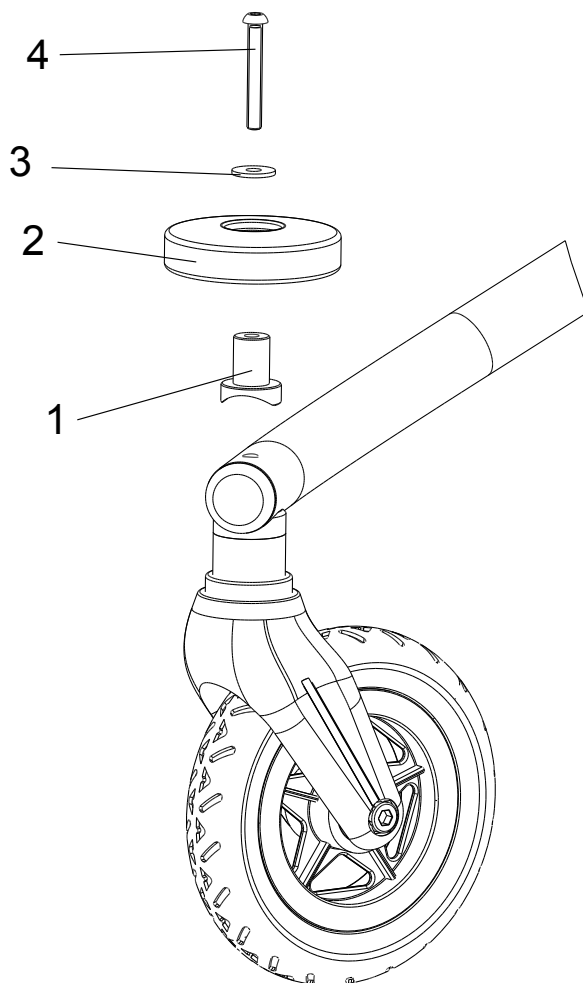


Item	Article number	Article description	Quantity	Unit
1-4	3301-5400	Bumper wheels	1	Set
1	3301-5410	Saddle bushing	2	Pc.
2	1249-0001	Bumper wheel 75 mm black	2	Pc.
3	1055-0006	Washer zp A6,4 zp DIN/ISO 9021 A6,4	2	Pc.
4	1029-0645	Button head socket screw zp DIN/ISO 7380 M6x45	2	Pc.

Spare parts for accessories

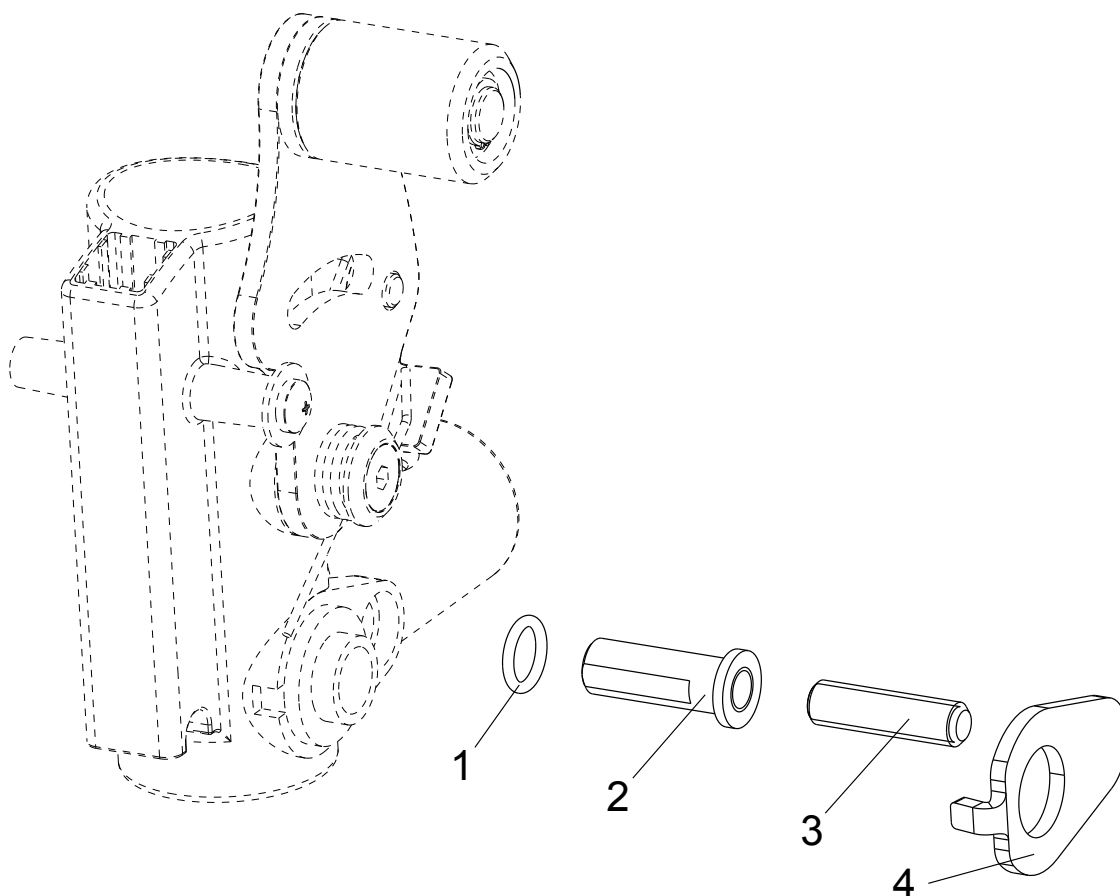


Item	Article number	Article description	Quantity	Unit
1-4	3301-5500	Drag brake	1	Set
1	1150-0002	O-ring NBR 70 DIN/ISO 3771 10x2	2	Pc.
2	3301-5520	Insert nut	2	Pc.
3	1031-0830	Hexagon socket set screw zp DIN/ISO 913 M8x30	2	Pc.
4	3301-5510	Sliding plate	2	Pc.

Spare parts for accessories

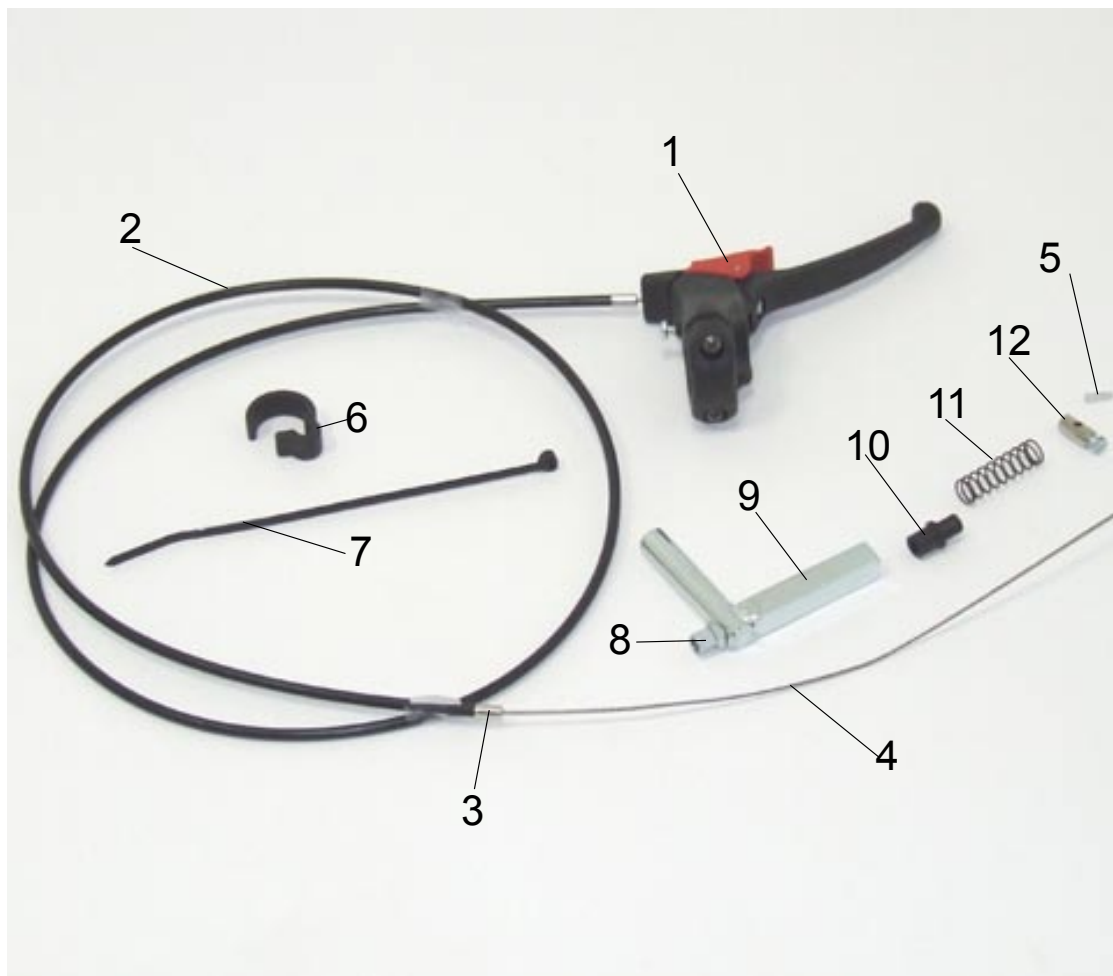


Item	Article number	Article description	Quantity	Unit
	3301-5600	Brake with wheel lock	1	Set
1	1209-0002	Hand brake 80° manual lock 25mm	2	St.
2-5	1209-0001	Bowden wire set 1,5m	2	Set
2+4	1209-0005	Bowdenzug 1500/1700	2	Pc.
3	1209-0006	End cap brass U-BA-H for Bowden cable cover	2	Pc.
5	1209-0007	End cap aluminium U-BA-S for Bowden cable wire	2	Pc.
6	1149-0001	Cable clip D 25	2	Pc.
7	1089-0004	Cable connector	2	Pc.
8	1099-0003	Adjuster screw with nut M6x20/30	2	Pc.
9	3301-5610	Brake handle	2	Pc.
10	3301-5620	Guide bush	2	Pc.
11	1131-0053	Compression spring	2	Pc.
12	1099-0005	Screw nipple 1255, D8x15	2	Pc.

Spare parts for accessories

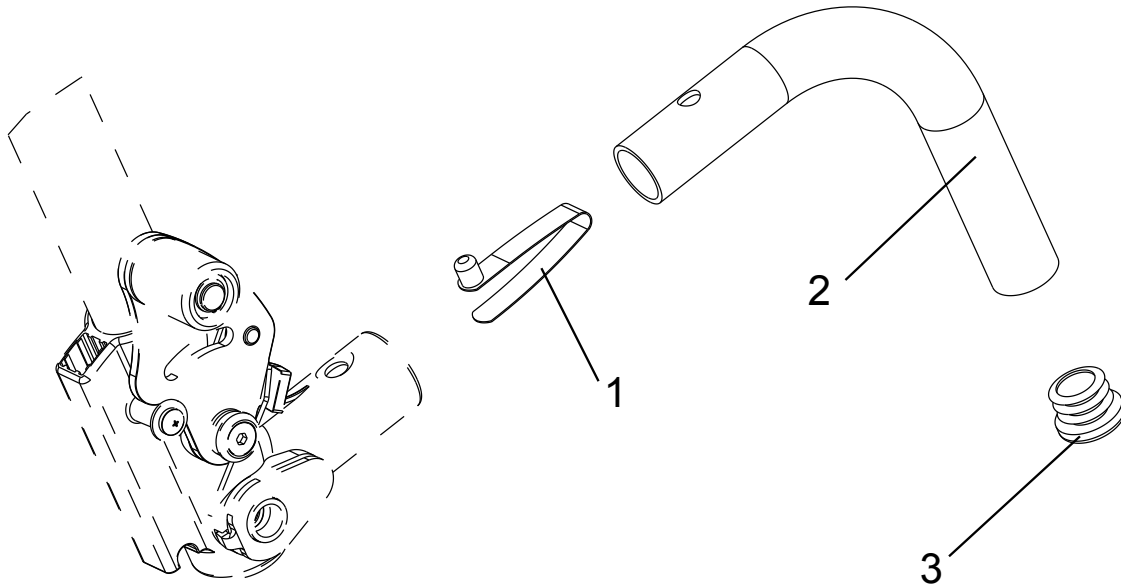


Item	Article number	Article description	Quantity	Unit
1-3	3301-5700	Anti tips	1	Set
1	1134-0006	Snap button B 141 7,7x9,4	2	Pc.
2	3301-5710	Bent tube anti tip	2	Pc.
3	1141-0015	Ribbed insert GL 25x1-2.5	2	Pc.

Spare parts for accessories

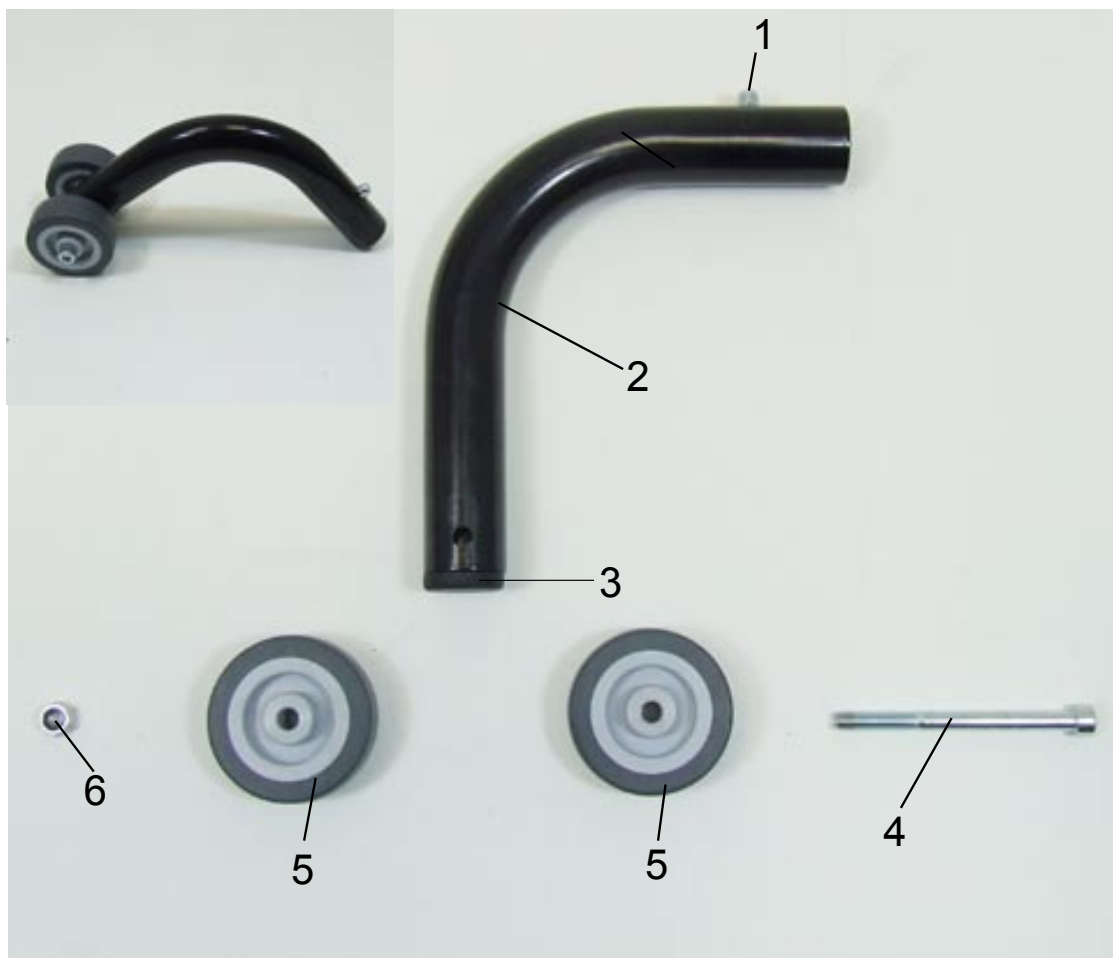


Item	Article number	Article description	Quantity	Unit
1-6	3301-5701	Anti-tips with rolls	1	Set
1	1134-0006	Snap button B 141 7,7x9,4	2	Pc.
2	3301-5720-001	Rohrbogen Kippschutz mit Rollen	2	Pc.
3	1141-0015	Ribbed insert SFL 25x1-2,5	2	Pc.
4	1021-0675	Hexagon socket head cap screw zp DIN/ISO 912 M6x75	2	Pc.
5	1249-0008	Rolle mit Gummibandage 50x18	4	Pc.
6	1042-0006	Hexagon nut self-locking zp DIN/ISO 985 M6	2	Pc.

Spare parts for accessories

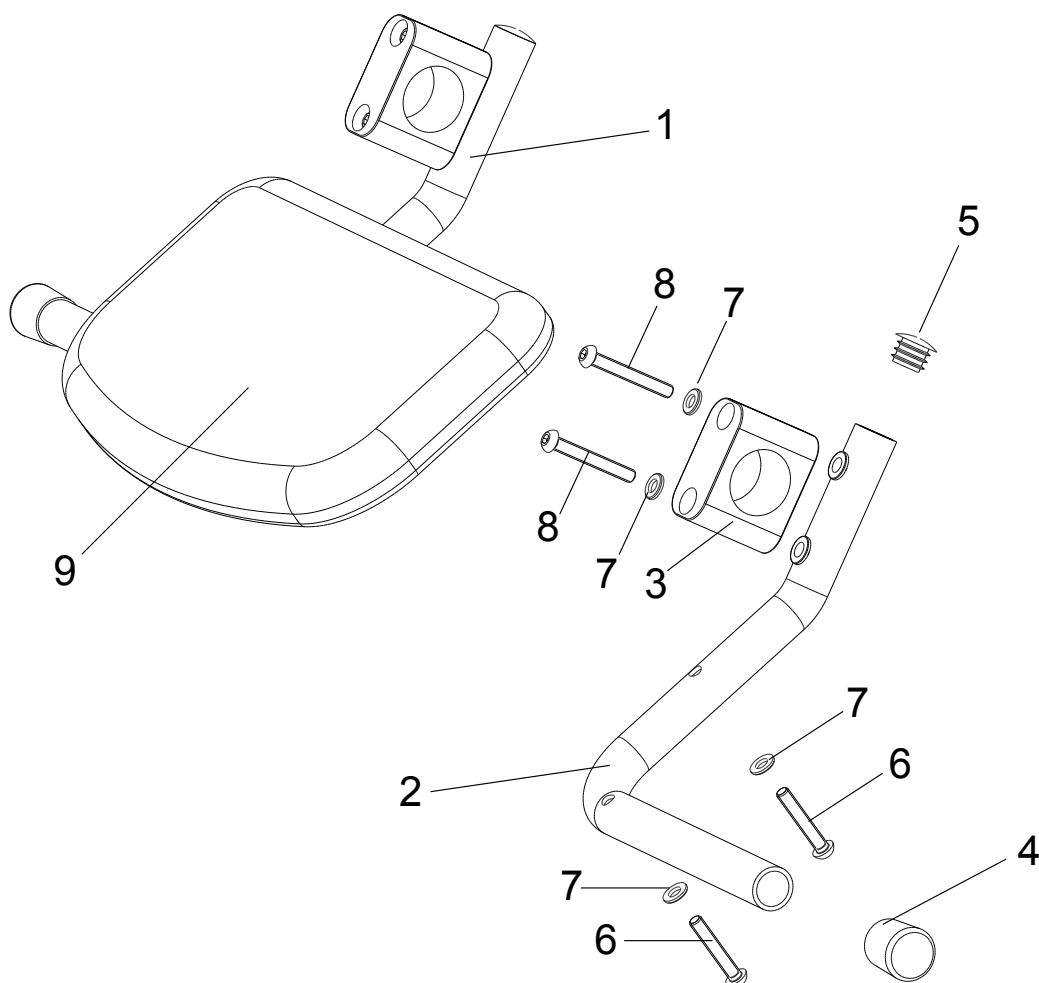


Item	Article number	Article description	Quantity	Unit
1-9	3301-5800	Seat plate, complete	1	Pc.
1	3301-5822E-001	Support arm right with rivet nut head	1	Pc.
2	3301-5821E-001	Support arm left with rivet nut head	1	Pc.
3	1116-0003	Tube clamp PA black D30	2	Pair
4	1142-0002	Cover K 20 PE black	2	Pc.
5	1141-0006	Ribbed insert SFL 20x0,8-2,5	2	Pc.
6	1029-0635	Button head socket screw zp DIN/ISO 7380 M6x35	4	Pc.
7	1051-0006	Washer A6,4 zp DIN/ISO 125 A6,4	4	Pc.
8	1029-0645	Button head socket screw zp DIN/ISO 7380 M6x45	4	Pc.
9	3301-5810	Seat plate	1	Pc.

Spare parts for accessories

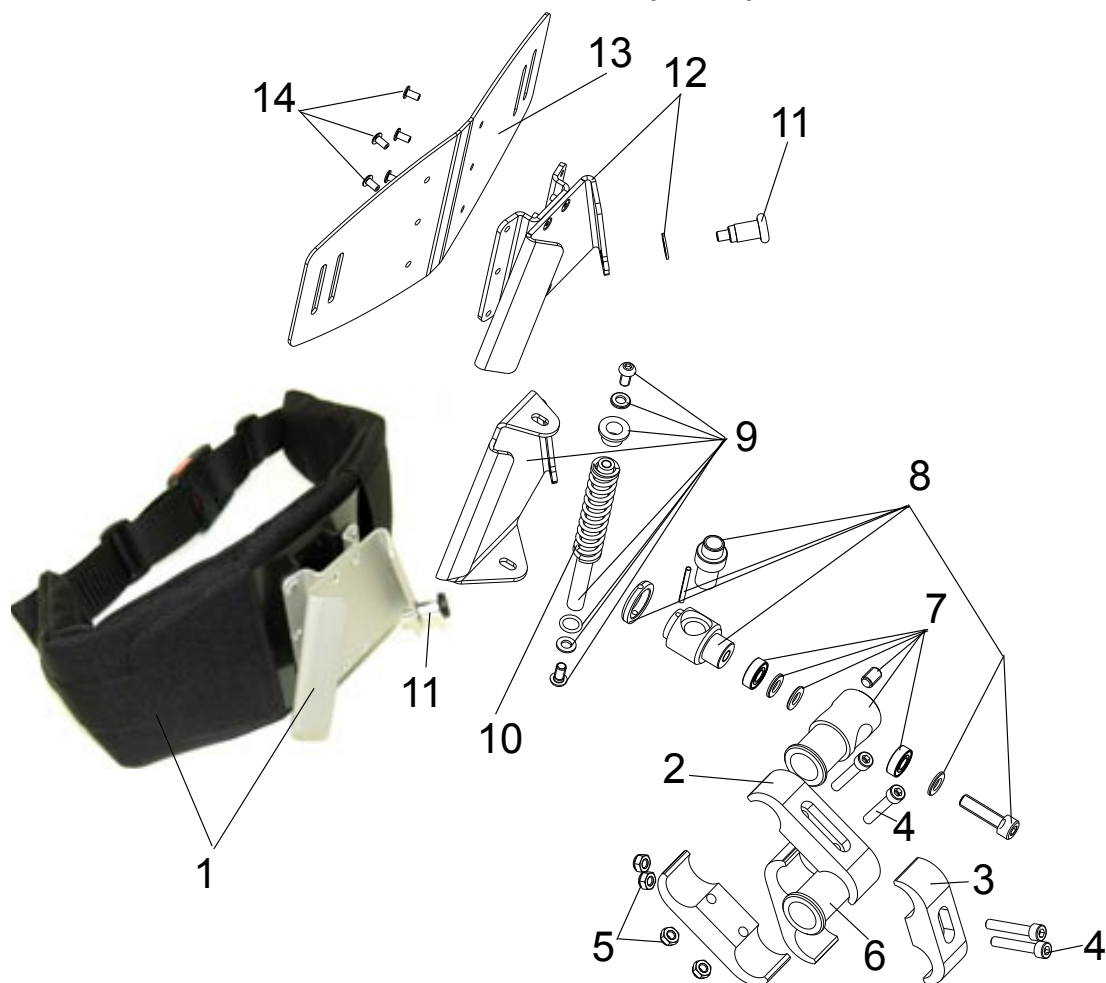


Item	Article number	Article description	Quantity	Unit
2-14	3301-6000	Dynamic hip control kit for orthoses	1	Set
2-10	3301-6001	Dynamic hip control, suspension soft (yellow)	1	Set
2-10	3301-6002	Dynamic hip control, suspension hard (red)	1	Set
1	3301-6300	Hip belt for dynamic hip control, hip size 53 - 83 cm	1	Pc.
	3302-6300	Hip belt for dynamic hip control, hip size 65 - 115 cm	1	Pc.
2-6	3301-5910	Clamp bracket	1	Pc.
2	3301-5211	Clamp shell 60	2	Pc.
3	3301-5915	Clamp shell 45	2	Pc.
4	1021-0635	Hexagon socket head cap screw zp DIN/ISO 912 M6x35	4	Pc.
5	1042-0006	Hexagon nut self-locking zp DIN/ISO 985 M6	4	Pc.
6	3301-5913	Hollow axle	1	Pc.
7-8	3301-6010	Guiding unit	1	Pc.
7	3301-6020	Propshaft unit	1	Pc.
8	3301-6030	Bar bearing	1	Pc.
9	3301-6040	Concole unit	1	Pc.
10	1131-0045-009	Compression spring D-207J-90 1,5x18,5x104 (FLUX DHC yellow)	1	Pc.
	1131-0046-011	Compression spring D-251 2,0x18x98 (FLUX DHC red)	1	Pc.
11	1127-0010	Lock pin ZS-10x1-OA-KS d6xM10xS10x31	1	Pc.
11-12	3301-6080	Trapeze adapter	1	Pc.
13	3301-6091	Base plate PE black 270x131,15x2 mm	1	Pc.
14	1062-0408	Blind rivet St/St DIN/ISO 7337 F4x8	6	Pc.

Spare parts for accessories

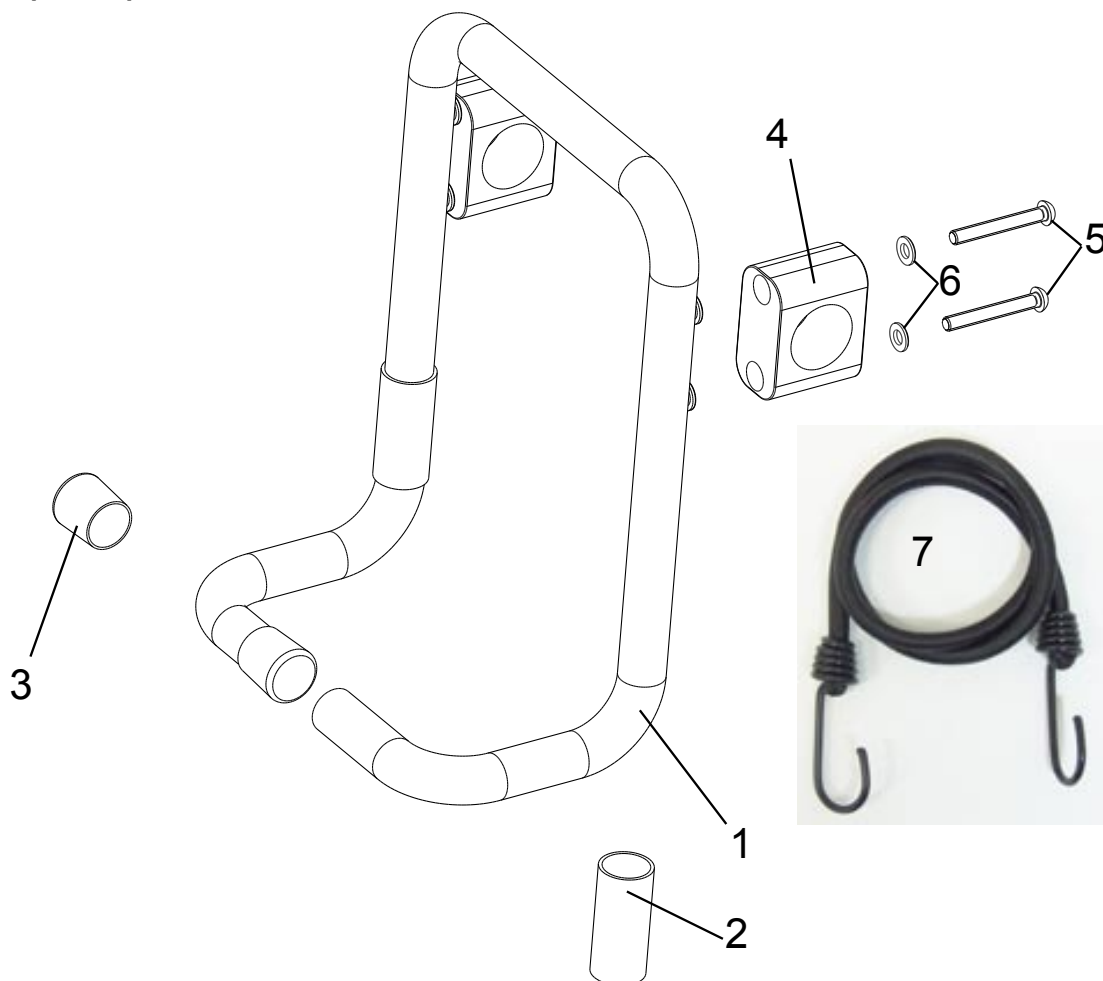


Item	Article number	Article description	Quantity	Unit
1-7	3301-6100	Carrier, fits to size 1 and size 2	1	Pc.
	3303-6100	Carrier, fits to size 3 and 4	1	Pc.
1	3301-6110	Frame size 1 with rivet nut steel head	1	Pc.
	3303-6110	Frame size 2 with rivet nut steel head	1	Pc.
2	1143-0006	Soft Grip Schlauch TP/K	1	Pc.
3	1142-0002	Kappe K 20 PE black	2	Pc.
4	1116-0003	Tube clamp PA black D30	2	Pair
5	1029-0650	Button head socket screw zp DIN/ISO 7380 M6x50	4	Pc.
6	1051-0006	Washer A6,4 zp DIN/ISO 125 A6,4	4	Pc.
7	7000-0022	Tension belt 800 mm	1	Pc.

Spare parts for accessories

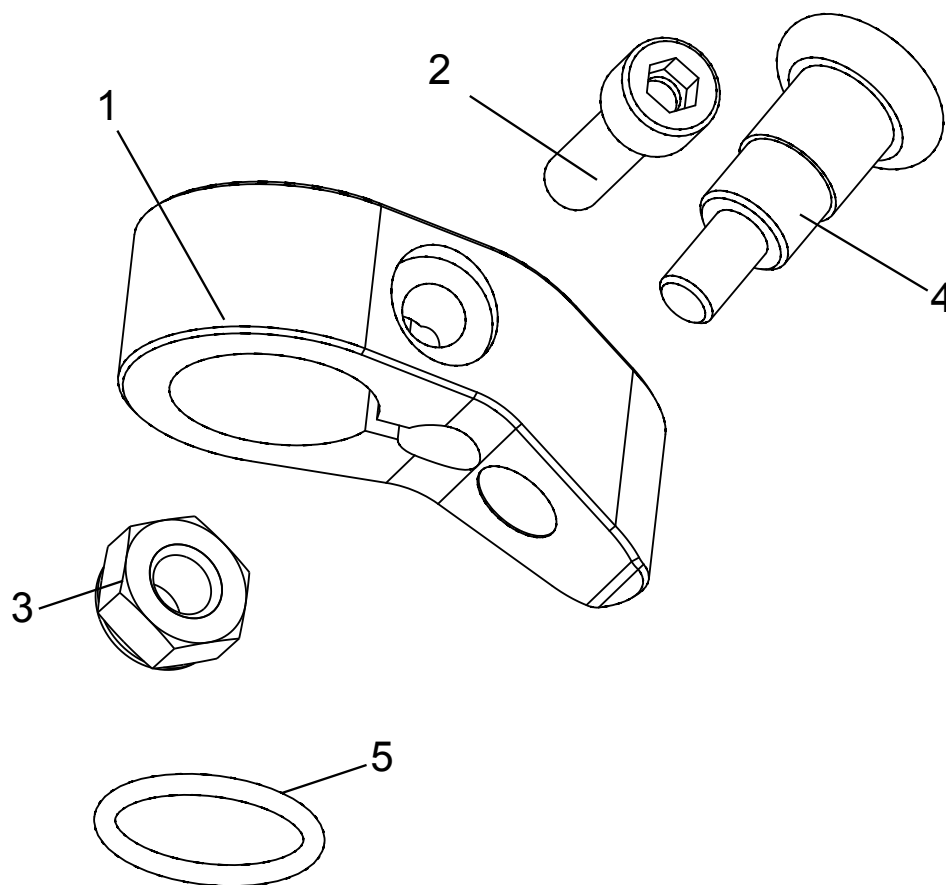


Item	Article number	Article description	Quantity	Unit
1-5	3202-7100	Swivel lock, complete	1	Set
1-3	3202-7110E	Swivel lock housing with set screw	2	Pc.
2	1022-0625	Hexagon socket head cap screw zp DIN/ISO 7984 M6x25	2	Pc.
3	1042-0006	Hexagon nut self-locking zp DIN/ISO 985 M6	2	Pc.
4	1127-0009	Lock pin Zs-lg-feri-va-hog d6xM10xS10x33,5	2	Pc.
5	1150-0001	O-ring NBR 70 DIN/ISO 3771 18x2	2	Pc.

Spare parts for accessories

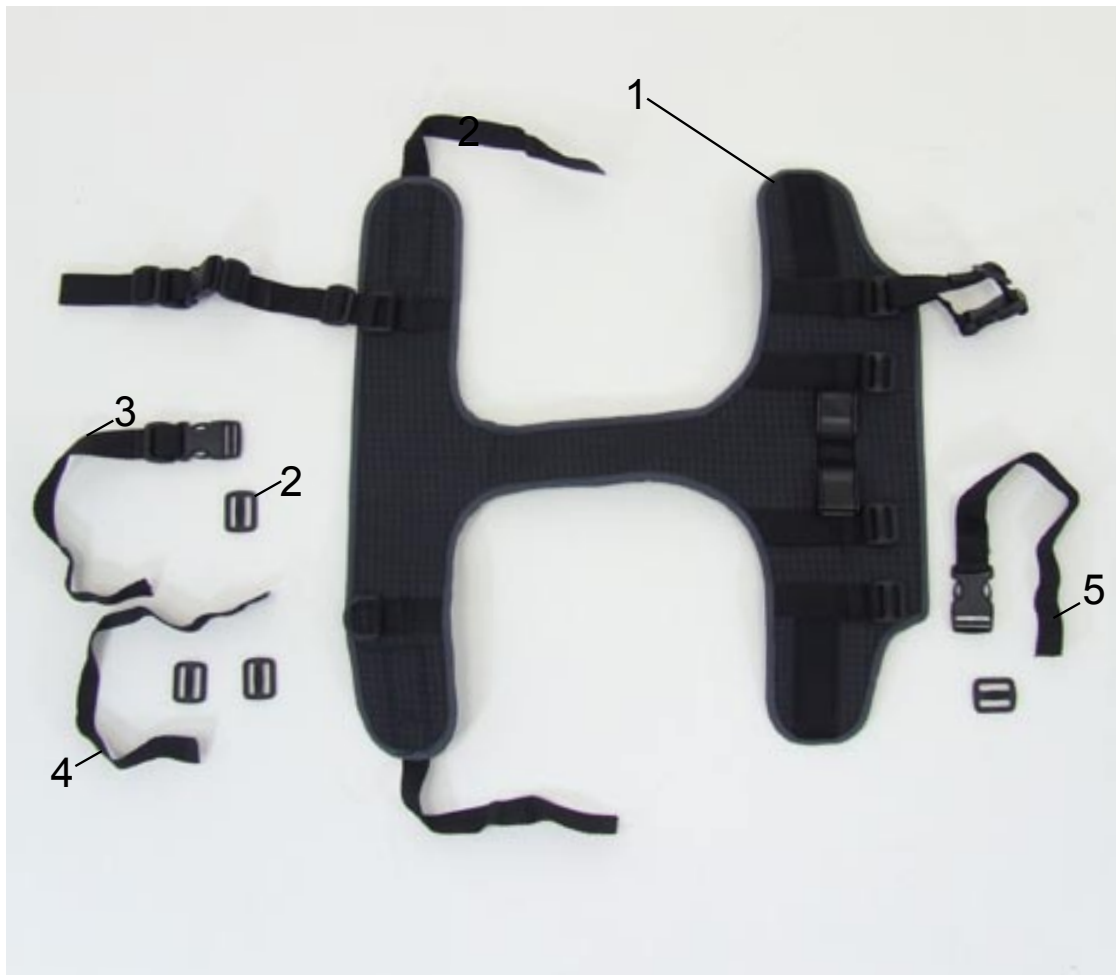

Item	Article number	Article description	Quantity	Unit
1-5	3302-6400	Sling seat, hip size 57 - 77 cm	1	Set
	3303-6400	Sling seat, hip size 73 - 103 cm	1	Set
2	1530-0004	Buckle TG 25/N	2	Pc.
3	1512-0006	PP-strap 25x350 black one sewn loop with a clip and a buckle	2	Pc.
4	1511-2535	PE-strap 25x350	2	Pc.
5	1512-0007	PP-strap 25x350 black one sewn loop with a clip	2	Pc.

Spare parts for accessories

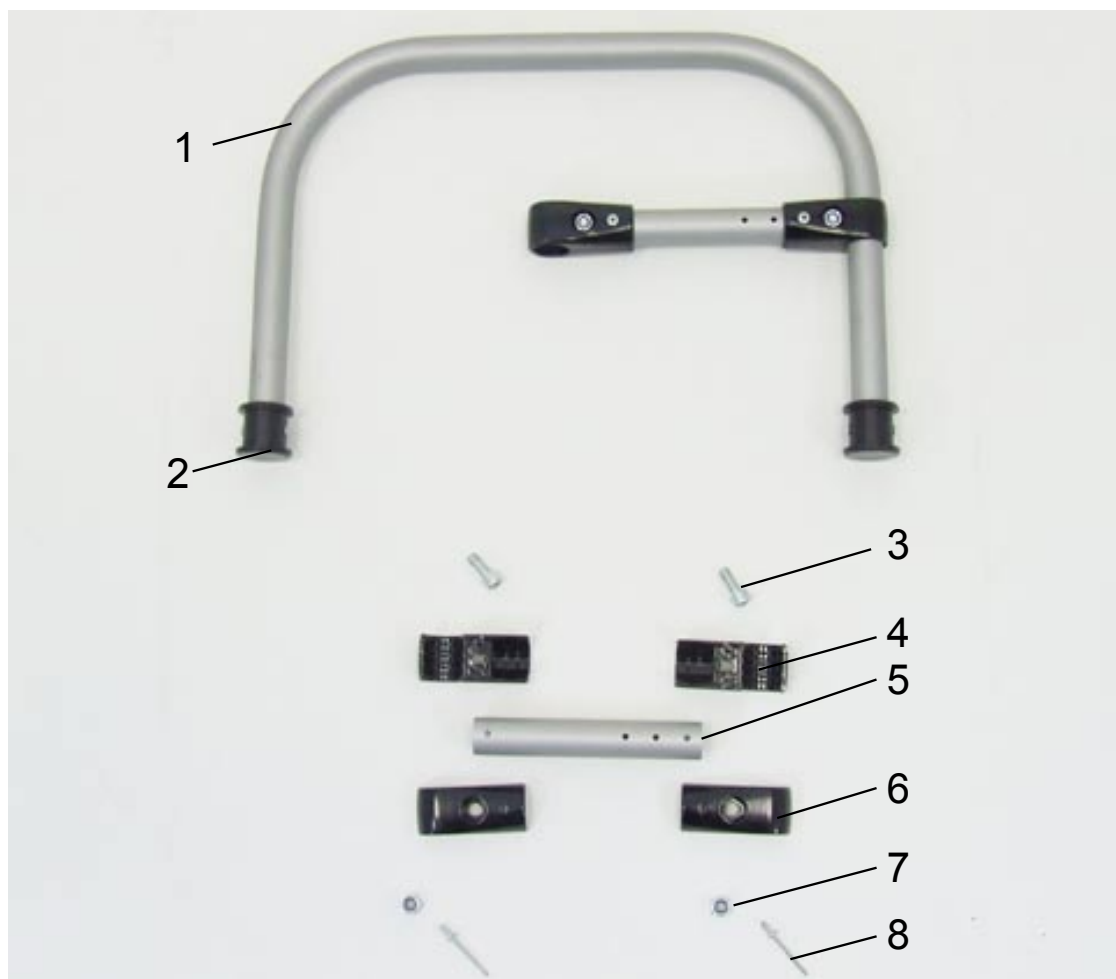

Item	Article number	Article description	Quantity	Unit
1-8	3301-6500	Sling seat rail, size 1	1	Set
	3302-6500	Sling seat rail, size 2	1	Set
	3303-6500	Sling seat rail, size 3	1	Set
1-2	3301-6510E	Sling seat rail size 1 with belt guide	1	Pc.
	3302-6510E	Sling seat rail size 2 with belt guide	1	Pc.
	3303-6510E	Sling seat rail size 3 with belt guide	1	Pc.
3	1021-0820	Hexagon socket head cap screw zp DIN/ISO 912 M8x20	4	Pc.
4	1145-0002-001	Rohrverbinderhälfte T-90° 25/25	4	Pc.
5	3301-6521	Distance tube	2	Pc.
6	1145-0001-001	Rohrverbinderhälfte T-90° 25/25 mit Bohrung 4,2	4	Pc.
7	1042-0008	Hexagon nut self-locking zp DIN/ISO 985 M8	4	Pc.
8	1062-0412	Blind rivet St/St DIN/ISO 7337 F4x12	4	Pc.

1011-1280	Sexkanthålskruv DIN/ISO 4017 M12x80
1021-0625	Sexkanthålskruv helgängad M6x25
1021-0635	Sexkanthålskruv DIN 912 M6x35
1021-0885	Sexkanthålskruv DIN 912 M8x85
1024-0625	Sexkanthålskruv med försänkt huvud zp DIN/ISO 7991 M6x25
1029-0612	Sexkantshålskruv med rundat huvud zp DIN/ISO 7380 M6x12
1029-0620	Sexkantshålskruv med rundat huvud zp DIN/ISO 7380 M6x20
1029-0635	Sexkantshålskruv med rundat huvud zp DIN/ISO 7380 M6x35
1029-0645	Sexkantshålskruv med rundat huvud zp DIN/ISO 7380 M6x45
1029-0650	Sexkantshålskruv med rundat huvud zp DIN/ISO 7380 M6x50
1031-0830	Sexkantshålskruv med rundat huvud zp DIN/ISO 913 M8x30
1039-0001	Skruv för plast 4x10
1042-0006	Sexkantslåsmutter DIN/ISO 985 M6
1044-0006	Sexkantig hattlåsmutter DIN/ISO 986 M6
1051-0006	Bricka A6,4 zp DIN/ISO 125 A6,4
1051-0008	Bricka A8,4 zp DIN/ISO 125 A8,4
1051-0012	Bricka A13 zp DIN/ISO 125 A 13
1055-0005	Bricka A5,3 zp DIN/ISO 9021
1055-0006	Bricka zp A6,4 zp DIN/ISO 9021 A6,4
1056-0021	Låsbricka A 12,5
1059-0001	Passbricka DIN/ISO 988 10x16x1,2
1062-0412	Blindnit DIN/ISO 7337 F4x12
1070-0308	Spår sprint DIN 7346 3x8
1080-0010	Spårring för axel DIN/ISO 471 10x1
1089-0002	Metall kil M8
1089-0004	Låsband 525 MXR
1099-0003	Justeringskruv
1099-0005	Skruv klämma 1255
1111-0001	Distans kloss, svart PA 25x6.3x8
1111-0006	Distanskloss, svart PA 28x8.4x5
1112-0010	Distansbricka, svart PA 8x4,3x3
1113-0010	Bricka, svart PA DIN/ISO equal 9021 18x6,4x1,5
1114-0047	Stål bussningsrör 8x0,9x35

Art nr	Produkt
1116-0003	Rörklämma, svart PA D30
1116-0005	Rörklämma, svart PA klädd insida D25
1127-0009	Låssprint M10
1127-0010	Låssprint ZS-10x1-OA-KS d6xM10xS10x31 (w/o catch)
1127-0011	Låssprint ZS-10x1-KS (with catch)
1129-0003	Nyckelring 20x1,5
1129-0006	Rörklämma med snabbblås D 31,8 höger
1129-0007	Rörklämma med snabb lås D 31,8 vänster
1129-0008	Rörklämma med lås D 31,8
1131-0036	Tryckfjäder D-127d 0,8x8,3x29
1131-0053	Tryckfjäder D-153
1133-0012	VridfjädrarT-18855L 1,6x14,4x3,25
1133-0013	Vridfjädrar T-18855R 1,6x14,4x3,25
1134-0006	Knapplås med fjäder B 141 7,7x9,4
1141-0006	Ändavslutning SFL 20x0,8-2,5
1141-0009	Ändavslutning SFL 25x1-2,5
1141-0015	Ändavslutning GL 25x1-2,5
1142-0002	Huv utvändig, svart K 20 PE
1143-0005	Handtag, svart TPE d25 x 120
1143-0006	Mjukt skumrör, svart TP/K
1149-0001	Kabelhållare D 25
1150-0001	O-ring 18x2
1150-0002	O-ring NBR 70 DIN/ISO 3771 10x2
1205-0855-E	Sexkanthålskruv med mutter M8x55 w
1209-0001	Låswire set (1,5m)
1209-0002	Handbroms 80° manuellt lås 25mm
1209-0004	Navkapsel KN-S-32/2
1209-0005	Wire med plasthölje 1500/1700
1209-0006	Mässingnippel
1209-0007	Aluminiumnippel
1221-1530	PU Hjul R150/32-1-PU-S 150x30
1221-2030	PU Hjul R200/30-1-PU- 200x30
1249-0001	Avbärarhjul AR75/15,5/9005 black
1281-0009	Hjulgaffel fram LG-K-150-115/2
3201-7520	Fjäderhylsa
3202-1151	Bussning
3202-7100	Riktningsspärr för ledade länkhjul fram, set
3202-7110E	Riktningsspärrhylsa med sexkantsskruv
3301-1100-003	Främre ram stl 1 komplett
3301-1110-003	Främre ram stl 1, endast rör
3301-1110E-003	Främre ram med skruvset stl 1 exkl länkhjulsfäste
3301-1120	Gaffelhylsa
3301-1130	Sadel bussning
3301-1150	Bultaxel
3301-1200-003	Bakre ram komplett stl 1
3301-1210-003	Bakre ram stl 1
3301-1210E-003	Bakre ram med skruvset
3301-1230	multifunktionellt fäste
3301-1240	Klammerbussning
3301-1250	Hylsa
3301-1260	Distanshylsa
3301-1300	Fällmekanism vänster, set

3301-1310-001	Främre stag av fällmekanism
3301-1320-001	Bakre stag av fällmekanism, vänster
3301-1400	Fällmekanism höger, set
3301-1420-001	Bakre stag av fällmekanism, höger
3301-1500	Standardhandtagsbåge för stl 1, komplett
3301-1510	Höjdjusteringsrör vänster stl 1
3301-1510E	Höjdjusteringsrör vänster komplett set stl 1
3301-1520	Höjdjusteringsrör höger stl 1
3301-1520E	Höjdjusteringsrör höger komplett set stl 1
3301-1530	Kopplingsbeslag
3301-1540	Standardhandtagsbåge 1 exkl fästen
3301-1541	Standardhandtagsbåge för stl 1, endast rör
3301-1811-001	Basplatta vänster sida
3301-1812	Frihjul saxel
3301-1814	Distansbussning
3301-1815	Axel
3301-1816	Fjäderhylsa
3301-1817	Låsskruv
3301-1821-001	Basplatta höger
3301-1830	Frihjul vänster
3301-1840	Frihjul höger
3301-1910	Multifunktionellt fäste med backspärr, vänster
3301-1920	Multifunktionellt fäste med backspärr, höger
3301-5100	Universalhandtagsbåge för stl 1
3301-5110-006	Bakre båge till universalhandtagsbågen stl 1
3301-5120	Handtag komplett sats för universalhandtag
3301-5130	Handtagsrör till universalhandtag
3301-5211	Dubbelbeslag 60
3301-5400	Avbärarhjul, set
3301-5410	Sadelbussning
3301-5500	Släpbroms, set
3301-5510	Släpbromsplatta
3301-5520	Gängad bussning
3301-5600	Broms med riktningsspärr
3301-5700	Antitippstöd, par
3301-5710-001	Antitippstödsrör, st
3301-5800	Sits, uppfällbar
3301-5900	Höftstöd, justerbar par
3301-5910	Klammerbeslag komplett
3301-5913	Axel med genomgående hål
3301-5915	Klammerbeslag 45
3301-5921	Rör, endast
3301-5960	Höftdyna
3301-6100	Pakethållare till stl 1 och 2
3301-6110	Pakethållare stl 1 och 2 endast rör
3302-1100-004	Främre ram stl 2 komplett
3302-1110-004	Främre ram stl 2 endast rör
3302-1110E-004	Främre ram med skruvset stl 2 exkl länkhjulsfäste
3302-1200-004	Bakre ram stl 2 komplett
3302-1210-004	Bakre ramrör stl 2
3302-1210E-004	Bakre ram stl 2 med skruvsats
3302-1500	Standardhandtagsbåge stl 2 komplett
3302-1510	Höjdjusteringsrör vänster stl 2
3302-1510E	Höjdjusteringsrör vänster stl 2 komplett set
3302-1520	Höjdjusteringsrör höger stl 2
3302-1520E	Höjdjusteringsrör höger stl 2 komplett set

3302-1540	Standardhandtagsbåge 2 exkl fästen
3302-1541	Standardhandtagsbåge för stl 2, endast rör
3302-5100	Universalhandtagsbåge för stl 2
3302-5110-006	Bakre båge till universalhandtagsbågen stl 2
3302-5200	Underarmstöd med handtag
3303-1100-005	Främre ram stl 3 komplett
3303-1110-005	Främre ram stl 3 endast rör
3303-1110E-005	Främre ram med skruvset stl 3 exkl länkhjulsfäste
3303-1200-005	Bakre ram stl 3 komplett
3303-1210-005	Bakre ramrör stl 3
3303-1210E-005	Bakre ram stl 3 med skruvsats
3303-1500	Standardhandtagsbåge för stl 3
3303-1540	Standardhandtagsbåge 3 exkl fästen
3303-1541	Standardhandtagsbåge för stl 3, endast rör
3303-5100	Universalhandtagsbåge för stl 3
3303-5110-006	Bakre båge till universalhandtagsbågen stl 3
3303-6100	Pakethållare till stl 3
3303-6110	Pakethållare stl 3 endast rör
3313-1500	Standardhandtagsbåge stl 4, komplett
3313-5100	Universalhandtagsbåge stl 4, komplett
3313-5500	Släpbroms, set
3313-5600	Handbroms/parkeringsbroms
3313-5700	Tippstöd, set
3313-5800	Sits stl 4, komplett
7000-0022	Gummiband med krokar till pakethållare