

Charlotte



Hörnstol Charlotte



CHARLOTTE säljs i Sverige genom: MAYDAY AID AB, Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA
Tel 0300-56 97 00, Fax 0300-56 97 01, info@maydayaid.se, www.maydayaid.se



CHARLOTTE

Stabil sitthörna

Sitthörnan finns i tre storlekar. Den minsta har röd klädsel och passar barn från 9 månader till ca 2,5 år. Storlek 2 har grön klädsel, används av barn från ca 2 - 4 år. Största storleken 3, är grön och kan användas från ca 4 - 9 års ålder.

Nackstödet kan justeras både i bredd och höjd. Nackstödet är också enkelt att montera bort då barnet klarar av att balansera huvudet själv. Sidostöden ställs i sidbredd och höjd. Bålstödsbältet regleras med hjälp av skårorna i ryggstödet. Abduktionsklossen monteras så att barnet får rätt sittdjup.

På bilden använder barnet ett ställbart lågt bord. På bordet är ett handtag med sugkoppar fastsatt. Handtaget hjälper barn, med ofrivilliga rörelser, att lättare gripa och släppa leksaker. Läs mer om våra handtag under fliken Övriga hjälpmedel



Sitsen Charlotte är här placerad högre upp från golvet på en gästege.



Bordet ställs i höjd och vinkel med hjälp av rattar och skåror på bordets sidodelar.



Nackstödet kan höjas upp. Sidodelarna kan breddas ut eller föras ihop för bästa stöd. Höftremmen fästs samman med kardborreband. Fler remmar kan monteras för stöd även högre upp runt kroppen.

Fakta Sitthörna

Artikel	Färg	Bredd	Djup	Höjd
5501	Röd	400	270	410-520
5502	Grön	400	300	520-660
5503	Gul	450	350	550-690

Fakta Lekbord

Artikel		Bredd	Djup	Höjd
5521	Lågt, fristående	600	600	130-280
5523	Högt, fristående	600	600	345-545



CHARLOTTE säljs i Sverige genom:
MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35, 434 39 KUNGSBACKA
Tel 0300-56 97 00, Fax 0300-56 97 01
info@maydayaid.se www.maydayaid.se

MAYDAY AID