

Multivagnen finns i två storlekar och i två färger, blå eller svart klädsel.

Välj framhjul:

Buggy: två ledade framhjul

Jogger: ett stort framhjul

Offroad: två stora framhjul

Standardutförande: Klädsel, fotplatta, ställbar handtagsbygel och luftpumpade bakhjul.



Multivagnen med framhjul offroad

Användningsområde


Sulkyvagnen Multi skall endast användas av en person åt gången. Vagnen får inte användas att köra någon/något som överstiger maxvikten. Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

Se www.maydayaid.se



Viktigt att veta

Vid utomhusanvändning får aldrig någon lämnas ensam i vagnen, en vuxen person måste alltid övervaka. Tänk på att ojämn mark kan orsaka att sulkyvagnen välter eller rullar iväg. Försök att förutse olycksrisker utomhus!

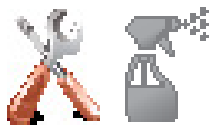

Skötsel / Underhåll

Ta bort smuts, hår och damm regelbundet när hjulen rullar trögt. Kontrollera alltid att hjulen sitter fast. Använd aldrig en skadad vagn. Tvätta sulkyvagnen med mjuk, fuktig trasa och milda rengöringsmedel t ex diskmedel. Kontrollera alltid att bromsar fungerar efter tvätt! Förvara vagnen inomhus.



Ta med i bil / Montera upp och slå ihop



1. Montera hjul fram



2. Tryck här för att lossa eller sätta på hjulen



3. Slå upp chassi montera bakhjulen



4. Montera på framhjul



5. Tryck in låsspärr



6. Slå ihop - ta av bakhjul



7. Skjut upp låsspärr på var sida samtidigt



8. Vik sulkyvagnen framåt



9. Fäll helt ihop och tag av framhjul vid behov