

# Monteringsanvisning Cykelkoppling

## MULTI



Läs hela bruksanvisningen som medföljer Multivagnen. Bruksanvisningen ger bra information om hur vagnen Multi ska hanteras för en säker och bekväm användning. Vi ber er följa monteringsanvisningar, säkerhetsföreskrifter och skötselråd.

Vi hoppas att ni kommer att få stor glädje av sulkyn Multi.

### **VIKTIGT!**

Tänk alltid i första hand på ditt barns säkerhet!

Läs igenom bruksanvisning och monteringsanvisningen innan du använder sulkyvagnen MULTI ihop med cykelkopplingen.

När du använder cykelkoppling med sulkyvagnen MULTI måste du känna till och följa de trafikregler och lagar som gäller i det land som du befinner dig i.

Var noga med att anpassa cykelkopplingssystemet med följande omständigheter:

- Maxvikt på person i sulkyn 35 kg
- Maxfart 25 km/h
- Maxfart i vägkurva 10km/h

Säljs genom:

**MAYDAY AID AB**

Arendalsvägen 35  
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300-56 97 00

info@maydayaid.se  
www.maydayaid.se

Montera reflexer som är inkluderade på Multivagnens hjul. Använd cykellampor såväl fram som bak på cykeln. Vi rekommenderar att utrusta cykeln med backspegel när man använder cykelkopplingen.

Cykla endast med felfria och tekniskt godkända cyklar.

Föraren på cykeln med cykelkoppling och som kör sulkyn måste vara minst 16 år.

Var noga med att alla som kör cykeln med cykelkopplingen också läser denna instruktion.

Ha en skön cykeltur!



Bild 1

Till Multivagnen kan man välja tre olika framhjul beroende på var vagnen kommer att användas.

1. Framhjul Off road (2 st stora hjul)
2. Framhjul Jogger (1 st stort hjul)
3. Framhjul Buggy (2 st ledade små hjul)



Bild 2

Den främre ramen med de olika hjulen kan lätt bytas med hjälp av låsspärrar på ramen.

Cykelkopplingen kan endast användas då framhjul Jogger är monterad, se bild 3.



Bild 3



Bild 4

Börja med att montera cykelfästet på var sida om cykelns bakhjul.

Lossa snabbkopplingen eller muttern vid hjulnavet och montera fästet.

Klicka på och lås fast cykelnbygeln på cykeln.



Bild 5



Bild 6



Bild 7

Ta av framhjulet på Multivagnen genom att ta loss den genomgående axeln. Kom ihåg var du lägger fastsättningsaxeln och Joggerhjulet.

På vissa Multivagnar finns en ficka i ryggstödet, saknas ryggfickan kan man använda sig av en korg.



Bild 8

Nu skall cykelkopplingens stag monteras fast i framhjulsramen.

På bilden till höger är framhjulsramen separerad från övriga sulkychassit, det går bra att montera cykelkopplingen ändå, då behöver någon hålla i sulkyns körhandtag för att underlätta monteringen.



Bild 9

Lägg cykelkopplingens stag mot chassiramens tvärgående rör, se bild 10.



Bild 10

Fäll upp säkerhetsspärren (svarta plastkåpan) genom att trycka in låsspärren och därefter föra säkerhetsspärren bakåt.

Fäll fram säkerhetskåpan när fästet är i position, se bild 11.  
Cykelkopplingen dras ihop med Multivagnens framram och låses samman.

SÄKERHETSKÅPA

LÅSSPÄRR

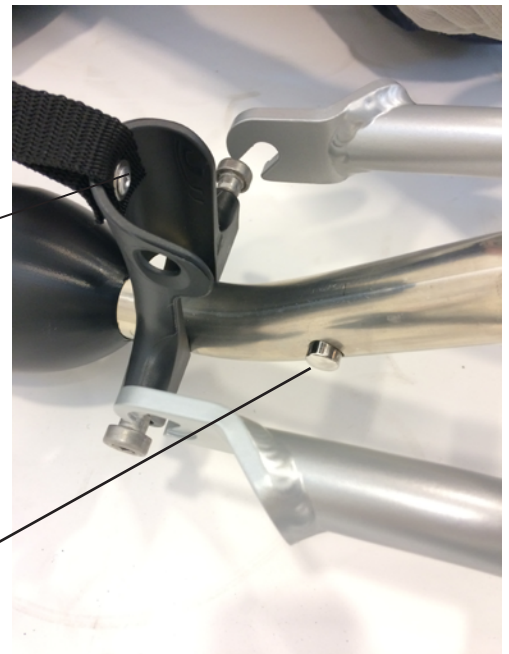


Bild 11

Tryck säkerhetskåpan tillbaka mot ramen.

### VIKTIGT!

1. Kontrollera att låsspärren är utlöst.
2. Kontrollera fastsättningen genom att dra i sammankopplingen.
3. Försäkra kopplingen mellan cykel och vagn med säkerhetsbanden som medföljer.



Bild 7

Nyckellåset hittar du genom att föra undan smutsskyddet från låsöppningen.

NYCKELBAND

LÅS

SMUTSSKYDD



Bild 7



# Sulkyvagnen Multi

Säljs i Sverige genom:

**Mayday Aid AB**  
Arendalsvägen 35  
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300-56 97 00  
Fax 0300-56 97 01

[www.maydayaid.se](http://www.maydayaid.se)  
[info@maydayaid.se](mailto:info@maydayaid.se)



Producerad av:

**RehaNorm Bingen**  
Am Ockenheimer Graben 50 D  
554 11 BINGEN  
Tyskland  
Tel +49 (0)6721-906-0

[www.rehanorm.de](http://www.rehanorm.de)  
[info@rehanorm.de](mailto:info@rehanorm.de)

