

Bruksanvisning **EIO Sulky**



MAYDAY AID

special
tomato.

Denna bruksanvisning ger information om hur EIO, Special Tomato sulkyn, skall hanteras för en säker och bekväm användning. Bruksanvisningen innehåller också monteringsanvisningar, säkerhetsföreskrifter och skötselråd.

Genom att läsa igenom och följa bruksanvisningen hoppas vi att både du och ditt barn får stor glädje av sulkyn EIO.

Innehållsförteckning

Användningsområde	3	Sufflett	12
Producentansvar och säkerhet	4	Vadderade sidostöd	13
Garantivillkor	4	5-punktsbälte	14
Allmänna säkerhetsinstruktioner	5	Parkeringsbroms	15
Standardutförande	6	Justera ryggstödet vinkel	15
Montering och justering	7	Justera fotstödet vinkel	16
Ram	7	Framhjulens riktningsspärrar	16
Bakaxel	7	Ihopfällning av sulkyn	17
Bakhjul	7	Skötselråd	18
Framhjul	8	Underhåll	18
Fotstöd	8	Teknisk data	19
Klädsel	9	Kontaktuppgifter	20

Säljs genom:

MAYDAY AID AB

Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300-56 97 00

Fax 0300-56 97 01

info@maydayaid.se

www.maydayaid.se

Användningsområde

Special Tomatos sulky EIO är en innovativ sulky, som kombinerar designen hos en klassisk sulky, med extra komfort för barn med särskilda behov utav stöd i sittande.

Sulkyn är lättkörd tack vare de två svängbara framhjulen och den nätta konstruktionen. EIO har på samma gång en rymlig sittyta för att kunna ge god plats åt barn upp till 40 kg.

Sulkyn är enkel att fälla ihop och tar liten plats i bilens bagageutrymme.

Lättviktsramen och den genomtänkta utformningen, ner till minsta detalj, gör att sulkyn endast väger 10 kg och på så sätt blir mycket lätt att hantera.

Sitsen har vadderade sidostöd för både höft och bål samt ett 5-punktsbälte för barnets säkerhet. Ryggstödet kan fällas ner till liggläge, för sköna vilostunder. I standardutförandet ingår också en väl tilltagen sufflett, ett transparent regnskydd och en korg.

För barn som har extra behov av stöd kan sulkyn med fördel användas tillsammans med sittdynan Hans och ryggdynan Greta eller den hela sittdynan Susanne.

Se mer information på www.maydayaid.se

Producentansvar och säkerhet

Tillverkaren garanterar att Special Tomato sulky är CE-märkt. Inga andra tillbehör eller reservdelar än tillverkarens egna får monteras utan att CE-märkningen upphör att gälla. Detta gäller även väskor och dylikt som placeras på sulkyn på annan plats än i korgen under sitsen.

Garantivillkor

Special Tomato Sulky har två års garanti från inköpsdatum. Garantin gäller fabrikationsfel och under förutsättning att sulkyn endast har använts på det sätt den är avsedd att användas och som beskrivs i denna bruksanvisning.

Vid garantiärende skall Mayday Aid AB kontaktas omgående. Inga garantiärenden får åtgärdas av utomstående part, förutom om detta har överenskommits med representant från Mayday Aid AB. Spara alla handlingar du får i samband med köpet för att kunna bevisa garantins giltighet.

Garantin omfattar inte sådant slitage som uppstår vid normal daglig användning, misskötsel eller i de fall en utomstående part utan tillstånd har genomfört reparationer eller special-anpassningar på sulkyn.

Allmänna säkerhetsinstruktioner

- Lämna aldrig ett barn obevakat i sulkyn.
- Sulkyn är endast avsedd för ett barn åt gången.
- Barnet får aldrig stå på fotstödet.
- Barnet ska ha 5-punktsselen på sig när det sitter i sulkyn. 5-punktsselen måste vara väl inställd så att barnet sitter säkert och bekvämt.
- Aktivera alltid parkeringsbromsen när sulkyn står stilla.
- Lasta bara sulkyn på det sätt och med den maximala vikt som denna bruksanvisning visar. En fellastad sulky kan välta och skada barnet. Väskor och annan utrustning ska läggas i korgen under sulkyn och barnet ska sitta fastspänt i sulkyn.
- Var uppmärksam på klämrisker när sulkyn fälls ihop.
- Barnet får inte sitta kvar i sulkyn under transport i bil eller buss. Barnet får inte sitta i sulkyn då sulkyn ska transporteras i en rulltrappa eller upp och nedför en trappa.
- Placera aldrig någonting ovanpå suffletten då den kan ta skada.
- Var särskilt uppmärksam vid körning i ojämn terräng. Upprepad belastning av hårda gupp kan skada sulkyn.

Standardutförande



Bild 1

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1 Sufflett | 9 Bakhjul med quick-release |
| 2 Avtagbar klädsel | 10 Fotbroms |
| 3 Sidostöd för bålen | 11 Lättviktsram i aluminium |
| 4 Sidostöd för bäckenet | 12 Flaskhållare |
| 5 Vinkelställbart fotstöd | 13 Vinkelställbart ryggstöd |
| 6 Solida gummidäck | 14 5-punktssele |
| 7 Framhjul med riktningspärr | 15 Höjdjusterbart huvudstöd |
| 8 Korg | 16 Justerbart körhandtag |

Montering och justering

Ram

Öppna upp ramen till en stående position (bild 2).

Var uppmärksam på klickljudet som visar att både låsspärren (A) och säkerhetsbygeln (B) har stängts.

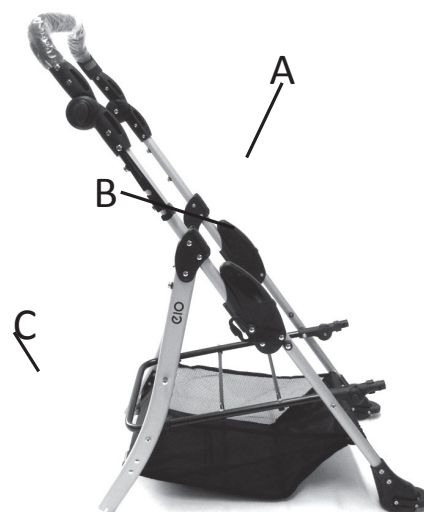


Bild 2

Bakaxel

Placera de två bakre ramdelarna (C, bild 2 resp A, bild 3) i hållarna på bakaxeln (B, bild 3).

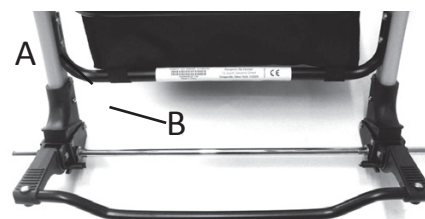


Bild 3

Bakhjul

Bakhjulen har en quick-release-funktion. Tryck in hjulet på hjulaxeln (bild 4). Hjulet sitter fast när det hörs ett tydligt klickljud.

För att ta av hjulet, håll in knappen på hjulets nav och dra loss hjulet från hjulaxeln.



Bild 4

Framhjul

Skjut in hjulaxeln i hjulhuset på den främre ramen (bild 5). Ett tydligt klickljud visar att hjulet sitter fast.

Smörj vid behov sparsamt med silikon- eller teflonbaserat smörjmedel.

För att ta loss framhjulet, tryck på knappen på hjulhusets ovansida och dra ut hjulaxeln.



Bild 5

Fotstöd

Se till att fotstödet skålade del är vänd åt rätt håll. För samtidigt in fotstödet båda stag i hållarna i ramen (bild 6). Ett tydligt klickljud visar att fotstödet sitter fast.



Bild 6

Klädsel

Knäpp fast knapparna på klädselns övre sidor (A, bild 7) i ramen strax under handtaget (B, bild 7).

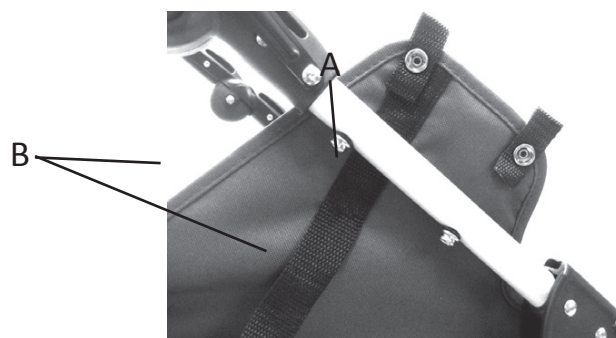


Bild 7

Knäpp fast knapparna nedtill på klädsel, i den undre bakre ramen (bild 8).



Bild 8

Under sitsen finns två par remmar som ska fästas (bild 9).



Bild 9

Dra den ena remmen igenom metallöglan på den andra remmen (bild 10). Dra inte åt för hårt.

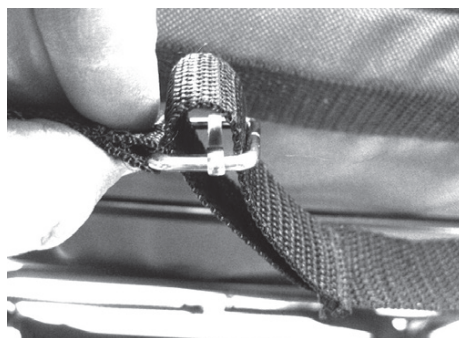


Bild 10

Klädsel forts.

Den kvarvarande delen av remmen läggs in under klädseln (bild 11).



Bild 11

Knäpp fast tryckknapparna på tyget som ska sitta på fotstödet (A, bild 12), i den skålade delen av fotstödet (B, bild 12).

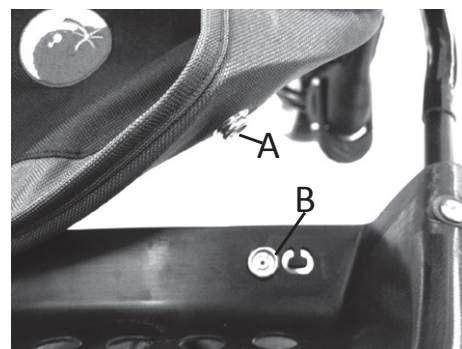


Bild 12

Sätt fast kardborrebanden på tyget till fotstödet runt fotstödet ram (A, bild 13).



Bild 13

På klädselns sidor finns två sidostycken som ska fällas över den primära låsbygeln och fästas med kardborre (bild 14).

På utsidan av sidostycket finns en förvaringsficka för exempelvis en dricksflaska.



Bild 14

Sufflett

För ner suffletten i ramens fästansordning på båda sidor tills ett klickljud hörs (A, bild 15). Forcera inte. Var uppmärksam så att inget tyg kommer emellan.

För att koppla loss suffletten, tryck ner knappen (B, bild 15) och lösgör fästet.

Fäst suffletten med remmen (A, bild 16) och dragkedjan (B, bild 16), strax under knappen som justerar körhandtagets höjd.

Genom att öppna dragkedjan på båda sidor kan sufflettens bakre tygstycke tas bort.

Vadderade sidostöd

För bättre positionering finns avtagbara vadderade sidostöd för både bålen och höfterna.

I sitsens och ryggstödet tyg finns utskurna hål där sidostödets kardborreband träs igenom (bild 17), för att fästas på sitsens respektive ryggens baksida (bild 18). Banden ska löpa genom hålen och runt ramen innan de fästs.

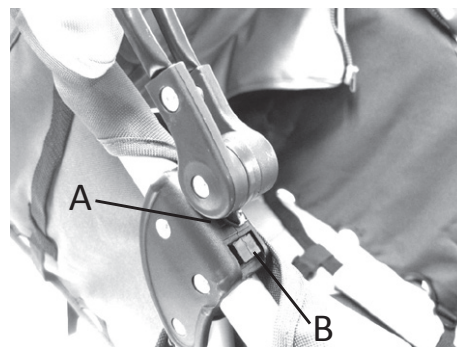


Bild 15

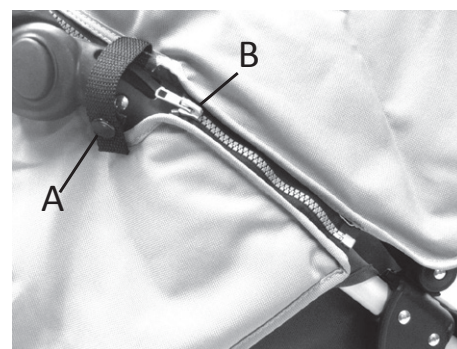


Bild 16



Bild 17



Bild 18

5-punktsbälte

Barnet ska alltid ha på sig 5-punktsbältet när det befinner sig i sulkyn. Justera remmarna med hjälp av plastspännena på båda sidor (A, bild 19). Var noga med att axel- och grenremmar är justerade efter barnets storlek. Ett 5-punktsbälte som är för löst ger barnet en större rörelsefrihet, vilket i värsta fall kan skapa en obalans med tipprisk för sulkyn.

Stäng 5-punktsbältet genom att samtidigt föra ner båda sidors plastspännen i fästet på grenbältet (bild 19). Öppna 5-punktsbältet genom att samtidigt trycka in sidorna på spännet och dra det uppåt (bild 20).

Om ett litet barn ska sitta i sulkyn, kan axelremmarna kortas ytterligare genom att först trä dem in genom de lägre hålen i sitsens tyg och därefter ut genom de övre hålen (bild 21). Huvudstödet placeras över spännena.

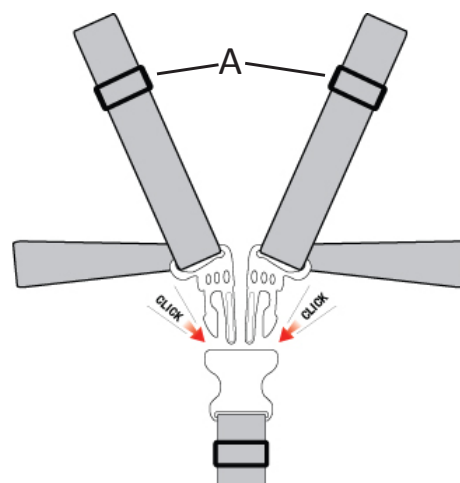


Bild 19

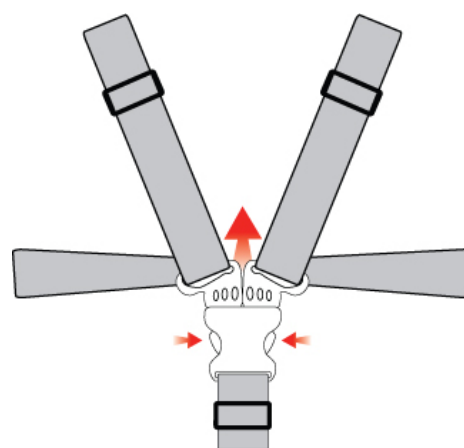


Bild 20



Bild 21

Parkeringsbroms

Tryck ner parkeringsbromsen med foten för att låsa. Lyft upp den för att låsa upp (bild 22).



Bild 22

Justera ryggstödetets vinkel

För att sänka ryggstödet, håll tummen på pilen på spännnet och dra i pilens riktning (A, bild 23).

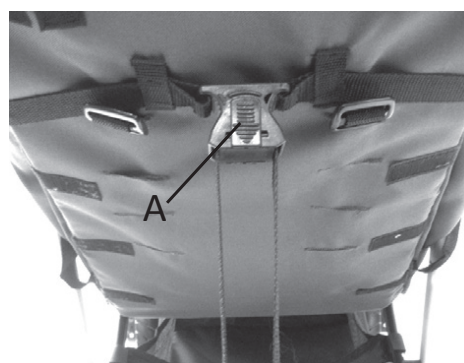


Bild 23

Justera fotstödetets vinkel

Tryck in knappen (A, bild 24) på båda sidor om fotstödet och justera till önskad vinkel. Ett tydligt klickljud när knapparna släpps visar att positionen är låst.



Bild 24

Framhjulets riktningsspärrar

Ställ framhjulen så att de står rakt framåt. När riktningsspärren (A, bild 25) trycks ner låses hjulets riktning. Ett tydligt klickljud visar att riktningsspärren är aktiverad.



Bild 25

För att låsa upp, tryck riktningsspärren uppåt och hjulet blir åter rörligt.

Ihopfällning av sulkyn

Följ dessa steg (enligt bild 27) för att fälla ihop sulkyn på ett säkert sätt. Var uppmärksam så att inga fingrar kommer i kläm.

- A. Fäll ryggstödet till fullt liggläge.
- B. Lossa sufflettens bakre del från ryggstödet.
- C. Fäll upp handtaget till sitt högsta läge.
- D. Framhjulens riktningsspärrar ska vara upplåsta.
- E. Fäll ner fotstödet helt.
- F. Stå bakom sulkyn. Dra både låsspärren (F, bild 27 och G, bild 26) och säkerhetsbygeln (H, bild 26) bakåt.
- G. Tryck ner körhandtaget så att vagnen fälls ihop (bild 28).
- H. Fäst transportlåset (A, bild 29) för att förhindra att sulkyn fäller upp sig under transport.

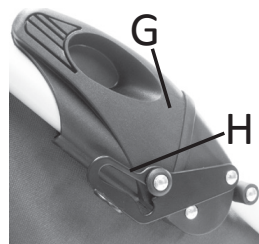


Bild 26



Bild 27



Bild 28

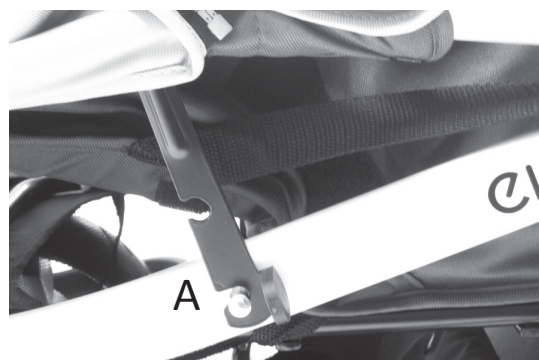


Bild 29

Skötselråd

Rengör ramen och suffletten med en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel.

Överdraget till klädseln, de vadderade sidostöden, vadderingen på 5-punktselen och huvudkudden kan tvättas i ljummet vatten med ett mildt tvättmedel och sedan hängtorkas. Klädseln får ej torktumlas eller tvättas med blekmedel.

Var noga med att låta sulkyn torka ordentligt innan den fälls ihop och förvara den aldrig i fuktiga utrymmen, för att undvika att tyget möglar.

Underhåll

Inför varje användning bör bromsarna, hjulen och 5-punktselen kontrolleras. Använd inte sulkyn om något går sönder. Bara originalreservdelar får användas för att laga eller ersätta delar som gått sönder. Alla vikleder och skruvar bör kontrolleras med regelbundna intervall.

Använd bara teflon- eller silikonbaserat smörjmedel om hjulen börjar gnissla. Olja eller fett ökar bara inlagringen av smuts i hjullagren och förkortar hjulens livslängd.

Genom att följa instruktionerna för skötsel och underhåll, håller sig sulkyn i bra skick längre. Ett serviceintervall på 12 månader rekommenderas.

Teknisk data

Sittbredd (utan sidostöd)	36 cm
Sittbredd (med sidostöd)	23 cm
Sitsdjup	30,5 cm
Ryggstödshöjd	61 cm
Avstånd från sits till fotstöd	33 cm
Avstånd från sits till fotstöd (med sittdyna Hans och ryggdyna Greta, stl 1 resp 2)	38 cm
Avstånd från sits till fotstöd (med hel sits Susanne, stl 1)	41 cm
Avstånd från sits till fotstöd (med hel sits Susanne, stl 2)	43 cm
Handtagets höjd från golvet	76-107 cm
Handtagets vinkel (från golvet)	+ 60° till -65°
Fotstödet vinkel (från golvet)	+15° till -55°
Ryggstödet vinkel	+ 25° till +75°
Yttermått	H: 114 cm B: 61 cm L: 117 cm
Yttermått (hopfälld)	H: 41 cm B: 46 cm L: 81 cm
Yttermått (hopfälld med sittdynor)	H: 48,5 cm B: 46 cm L: 81 cm
Framhjul (diameter)	229 mm
Bakhjul (diameter)	279 mm
Total vikt (exkl sittdynor)	10 kg
Max brukarvikt	40 kg

EIO Sulky

Säljs i Sverige genom:

Mayday Aid AB
Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300-56 97 00
Fax 0300-56 97 01

www.maydayaid.se
info@maydayaid.se



Producerad av:

Bergeron By Design
15 South Second St.
Dolgeville, NY 13329
USA

Tel 1.866.529.8407

www.specialtomato.com
[customerservice@specialtomato.](mailto:customerservice@specialtomato)

