

Bruksanvisning **ThevoVital**



Senast reviderad 2013-03-01



Denna bruksanvisning ger information om användningsområde och skötselråd för ThevoVital samt beskrivning av madrassens olika delar.

Genom att läsa igenom bruksanvisningen och följa skötselråden, så hoppas vi att ni får god nytta av madrassen.

Innehållsförteckning

Introduktion	sid 2
Kontroll vid leverans	sid 2
Användningsområde	sid 3
Teknisk beskrivning	sid 4
Storlekar	sid 5
Skötselråd	sid 5
Garanti	sid 5
Specifikation	sid 6
Teknisk data	sid 6
Kontaktuppgifter	sid 7

Kontroll vid leverans

ThevoVital levereras i en plastpåse, i en kartong. Ta bort all plast från madrassen och släng den, så att plastpåsen inte kan utgöra någon kvävningsrisk. ThevoVital består av en specialskuren skummadrass som vilar på en sängbotten av kompositribbor.

Madrass och sängbotten levereras sammansatt som en enhet med ett bomullsöverdrag eller inkontinensöverdrag.

ThevoVital ska placeras med röda sidan överst i sängen (se bild 1), och med den vita pilen (på det svarta tyget) riktad mot sängens huvudända.

Kontrollera emballaget och ThevoVital noga. Alla transportskador skall omgående rapporteras till Mayday Aid AB.

Användningsområde

Madrassen ThevoVital är utvecklad för personer med demenssjukdom som ofta lider av orolig sömn och frekventa uppvaknanden under natten.

ThevoVital har genomgått flera kliniska tester, med dokumenterat goda resultat.



Bild 1

Teknisk beskrivning

ThevoVital består av en speciellt framtagen skummadrass som vilar på en sängbotten av komposittribbor med fjädrande plastvingar (bild 2 och 4).

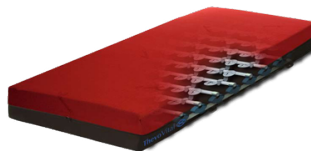


Bild 2

Vingarna (bild 3) återfjädrar kroppens rörelser, allt från de små andningsrörelserna till de större kroppsrörelserna. Denna mikrostimulans ökar perceptionen, vilket ger en lugnare och djupare sömn med mer naturlig sömnrytm.



Bild 3

Madrasen ThevoVital kan beställas med ett avtagbart madrassöverdrag i bomull eller med ett inkontinensöverdrag.

ThevoVital är CE-märkt.



Bild 4

Storlekar

Madrassen ThevoVital har standardmåten 90 x 200 cm och passar i vanliga sängramar. ThevoVital kan även beställas i storlekar som är från 80 till 100 cm breda.

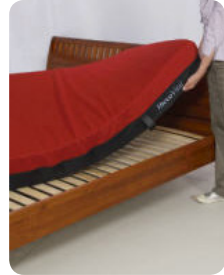


Bild 5

Observera att madrassen måste kunna ligga helt plant i sängramen.

ThevoVital finns i två modeller. En modell är anpassad till personer som väger upp till 80 kg. Den andra modellen är anpassad till personer som väger från 80 till 140 kg.

Madrassen kan användas i sängar där liggställningen kan ändras (bild 6).

Skötselråd

Madrassöverdragen i bomull respektive med inkontinensskydd, maskintvättas i 65 grader och kan torktumlas.



Bild 6

Garanti

Madrassen har 2 års garanti. Garantin gäller under förutsättning att skötselråden följs och att madrassen endast används till att sova /ligga på. Observera att det inte är tillåtet att stå eller hoppa på madrassen eftersom det då finns risk för att de fjädrande vingarna och ribborna bryts. Fel som omfattas av garantin skall omedelbart meddelas till Mayday Aid. Kontaktuppgifter finns på sista sidan.

Specifikation	Art nr
ThevoVital inkl bomullsöverdrag 80 kg	62821
ThevoVital inkl bomullsöverdrag 140 kg	62841
ThevoVital inkl inkontinensöverdrag 80 kg	62831
ThevoVital inkl inkontinensöverdrag 140 kg	62851

Teknisk data	Mått
Längd	200 cm
Bredd	90 cm
Höjd	18/20 cm
Vikt (art nr 62821, 62831)	18 kg
Vikt (art nr 62841, 62851)	19,5 kg

ThevoVital

Säljs i Sverige genom:

MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300-56 97 00
Fax 0300-56 97 01

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se



Producent:

THOMASHILFEN
Walkmühlenstrasse 1
D - 27432 Bremervörde
Tyskland

Tel +49(0)4761/886-63 eller -68
Fax +49(0)4761/88619

www.thevo-division.com

