

MAYDAY AID

Monteringsanvisning

xRover skidor



MAYDAY AID

Montering av skidor på sulky / vagn


1. Börja med att anpassa skidans "bindning" till storleken på hjulen. Obs, hjulen kan mycket väl sitta kvar på vagnen då skidorna monteras.



2. Placera stoppen så att däcken når skidans botten dvs vilar på skidan men är fast emellan de två stoppen. Stoppskruvarna löper i skårorna längs bindningen.




3. Lossa på stoppskruvarna för att sedan skjuta dem så nära hjulen som möjligt.

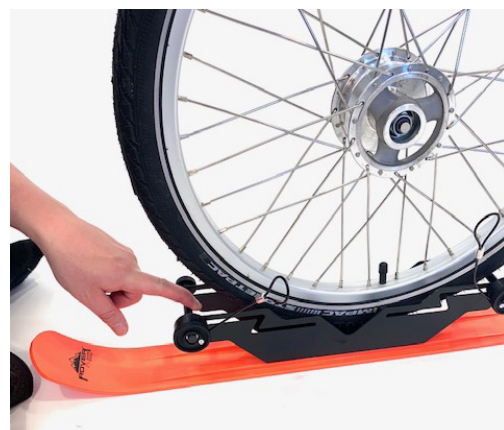

4. I en av rullarna löper en svart plastad wire som ytterst har en ögla. Dra ut skruven för att mer wirelina skall kunna löpa ut.




5. Placera öglan över fälgen och lägg runt motsatta skruvratten.

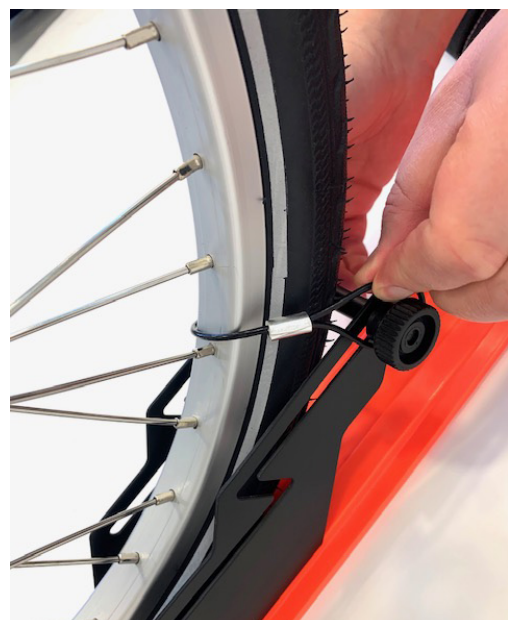

6. Spänn åt genom att skruva ratten tills dess att wiren är sträckt.



7. Avsluta med att kontrollera att hjulen sitter ordentligt fast på skidan.

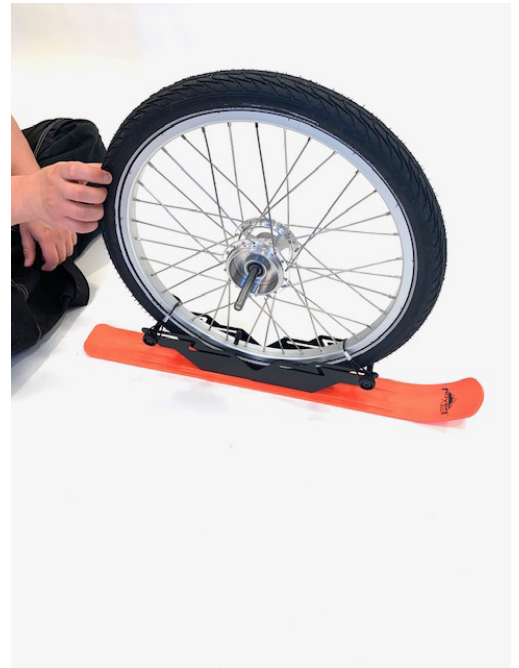

8. Skidorna kan beställas i trepack eller fyrapack beroende på hur många skidor man behöver.
Tänk på att alltid låsa hjulen med riktningspärr då skidor skall användas.



9. Transportväska medföljer så att skidorna med bindingarna är enkla att ta med eller förvara.

