

Bruksanvisning **All Road**



KFN ApS

Denna bruksanvisning ger information om montering, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av sulkyvagnen All Road. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna hoppas vi att ni får stor glädje av sulkyvagnen.

Innehållsförteckning

Allmän information	3	Justering av fotstöd	9
Användningsområde	3	Montering av tillbehör	10
Produktansvar och säkerhet	4	Justera körhandtag	11
Garanti och hållbarhet	4	Underhåll	12
Service och reparationer	4	Checklista	12
All Road - Introduktion	5	Demontering och skrotningsinstruktion	12
Allmänna säkerhetsinstruktioner	6	Teknisk data	13
Kontroll vid leverans	7		
Underhåll och skötsel	7		
Monteringsanvisning	8		
Fälla upp	8		
Sufflett	9		
Regnskydd för ben	9		

MAYDAY AID AB

Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel. 0300-56 97 00

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se

Allmän information

All Road är en enkel sittvagn för barn och ungdomar med funktionsvariationer, som behöver sitta bekvämt och säkert vid förflyttning .

För att kunna göra inställningar av sittvagnen så att du och ditt barn får en optimal kör- och sittkomfort ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder sittvagnen.

Om du har frågor eller undrar över något är du alltid välkommen att ringa eller skriva till oss, kontaktuppgifter hittar du på sidan 2.

Vi hoppas du kommer att bli riktigt nöjd med sittvagnen All Road.

Användningsområde

All Road är en sittvagn för barn och ungdomar. Observera att endast en person åt gången får åka i sittvagnen. Använd alltid bälte så att personen sitter säkert och inte kan ramla ur. Sittvagnen får endast köras av vuxen person. All Road skall köras av förälder eller annan vårdnadsgivare.

Sittvagnen är lätt att köra, alla hjulen är fixerade rakt fram vilket gör att sittvagnen fungerar väl även på ojämn mark även med ledade länkhjul rullar vagnen enkelt på promenader.

Varning!

Tänk på att aldrig lägga tunga föremål i tygfickan på sulkyryggen, då finns det risk för att sittvagnen tipsar bakåt!

Produktansvar och säkerhet

Sittvagnen 4Wheler (nedan kallad All Road) är en CE märkt produkt. Detta är en garanti på att 4 Wheler uppfyller alla gällande europeiska säkerhetskrav. Företaget KFN Design A/S[®] försäkrar härmed, som producent med ensamt ansvar, att produkten uppfyller kraven i förordningen för medicintekniska produkter (2017 /745). CE-märkningen måste tas bort när produkten byggs om, används i kombination med produkter från en annan tillverkare. Se testrapporten under Dokument på hemsidan: www.maydayaid.se

Garanti och hållbarhet

Garanti gäller endast då produkten används enligt denna bruksanvisning vilken följer producentens rekommendationer.

All Road-vagnen har 2 års garanti. Garanti gäller då All Road förvaras inomhus samt att underhåll och skötselanvisningarna efterföljs.

Service och reparationer

Service och reparationer på All Road skall endast utföras i samråd med personal från företaget MAYDAY AID AB.

Vid montering och justering behövs ibland verktyg. Var noga med att alltid dra åt skruvar och muttrar efter justering.

Lämna aldrig barn som sitter eller sover i sittvagnen ensam!

All Road introduktion

All Road finns i en storlek och är tillverkad för att användas av barn, ungdomar och vuxna som behöver hjälp vid förflyttningar. All Road kan användas på både jämn och ojämn mark.

Tänk på att tipprisk föreligger då sittvagnar körs på ojämnt och/ eller på sluttande underlag.

1. Körhandtag
2. Låsvred
3. Handbromsar
4. Bakhjul
5. Framhjul
6. Sufflett
7. Fotstöd
8. Justeringsvred



Allmänna säkerhetsinstruktioner

Läs hela bruksanvisningen innan du använder sittvagnen All Road.

Lär dig funktionerna och hur du hanterar produkten, öva gärna praktiskt att slå ihop och fälla ut sittvagnen.

Som förälder eller annan målsman är du ansvarig för säkerheten omkring ditt barn. Säkerheten kan äventyras om du inte följer instruktionerna i bruksanvisningen. Många oväntade situationer kan dyka upp som inte kan förutses och därför inte beskrivs i bruksanvisningen. Vi ber dig därför att alltid vara försiktig och informera alla personer som finns runt brukaren som använder sig av hjälpmedlet och de olika tillbehören om hur produkten fungerar och skall användas.

Använd parkeringsbromsen varje gång du ska sätta i eller ta barnet ur All Road vagnen. Parkeringsbromsa vagnen också när du ska montera på ett tillbehör.

Kontakta oss gärna för mer information eller om det finns några oklarheter i bruksanvisningen, se sid 2 för kontaktinformation.

Viktigt!

All Road får användas ute och fungerar på såväl jämn som ojämn mark. Tänk på att sittvagnar kan tippa på gropigt underlag eller rulla iväg nerför sluttningar.

Följ alltid viktrekommendationerna.

Kontrollera alltid All Road extra noga efter flygresor eller liknande. Sittvagnen kan ha blivit utsatt för kraftiga slag och hård hantering, försäkra dig om att vagnen fortfarande fungerar.

Kontroll vid leverans

I originalförpackningen finner du följande delar vid leverans:

- All Road sittenhets, tygfotplatta och chassi
- Sufflett
- Två stora bakhjul 18'
- Två mindre framhjul 16'
- Tillbehör enligt beställning
- Bruksanvisning

Varning!

Ta bort allt förpackningsmaterial som skyddat All Road under transport. Tänk på att plastpåsar och liknande kan vara livsfarligt för små barn att leka med – kvävningsrisk!



Underhåll och skötsel

Klädsel är enkel att torka av. Borsta regelbundet bort ludd och annan smuts från kardborrebanden så att kardborren fäster ordentligt.

All Roads chassiram skall torkas av med fuktig trasa och milda, miljövänliga rengöringsmedel som till exempel diskmedel / såpa. Använd inte stålull eller liknande material vid rengöring.

Viktigt!

Tänk på att byxor som bildar veck eller liknande kan orsaka hudirritation och rodnad på personen som sitter i vagnen, dra försiktigt i kläder så att tyget ligger så slätt som möjligt mot huden.

Monteringsanvisning

Fälla upp

1. Skruva av låsvreden på båda sidor av sulkyns sidorör. Vinkla och lyft därefter nedre ramröret över hålet där låsvredet satt tidigare.

Placera låsvredet i det förberedda hålet och dra åt. Gör detsamma på sulkyns andra sida.

Tänk på att låsvredet kan dras rakt ut för att kunna placeras i annan vinkel så att det blir enklare att dra åt. Tänk också på att ställa låsvredet så att ingen skadar sig på det vid t ex förflyttning i och ur vagnen.



Hjulen monteras genom "quick release", tryck in metallknappen i mitten av hjulens nav. Observera att bakhjulen (18") är större än framhjulen (16").

Skjut in hjulets metallaxel i ramens bakaxel och släpp metallknappen.

Försäkra dig om att låsspärren utlöst genom att skaka hjulet och kontrollera att det då sitter kvar ordentligt.

Tänk på att bromsarna inte skall vara påslagna vid av och på montering av hjulen.



Sufflett

Placera suffletten över personen som sitter i vagnen. Bestäm avståndet genom att dra det bakre kardborrebandet runt handtagsbågen och fäst på bandet.
Kardborrebanden på sufflettens sidor fästs på vagnens sidor.



Suffletten är monterad på ramen och kan placeras nerfälld bakom ryggen på vagnen då den inte används.



Regnskydd för benen

Regnskyddet för benen, tillsammans med suffletten, skyddar mot regn och snö.
Regnskyddet ligger i sulkyns ryggficka.

Regnskyddet monteras med kardborrebanden som sitter på bägge sidorna av överdraget och vid fotändan.



Justering av körhandtag

Lossa på de övre låsvreden på sidorna av körhandtaget. Dra körhandtaget rakt upp till önskad höjd.

VIKTIGT!

Skruva åt låsvreden väl så att körhandtaget tål att belastas med en person sittandes i vagnen.



Justering av fotstöd

Lossa på de nedersta insexskruvarna på var sida om fotstödet. Fotstödet kan därefter skjutas upp eller ner för rätt höjdställning. Glöm inte att skruva åt då fotstödet hamnat i rätt höjd.

OBS! Kontrollera att fotstaget hamnar på samma avstånd på bägge sidor, annars kan vagnen börja dra snett!



Montering av länkhjul

Länkhjuls set art nr 1060

Du behöver följande verktyg:
Fast nyckel st 17




Gör så här:

1. Skruva loss hjulfästet på sidan med hjälp av den fasta nyckel / skiftnyckel.
2. Ta ut hjulfästet ur ramen.
3. För in muttern i ramen.


1.



2.

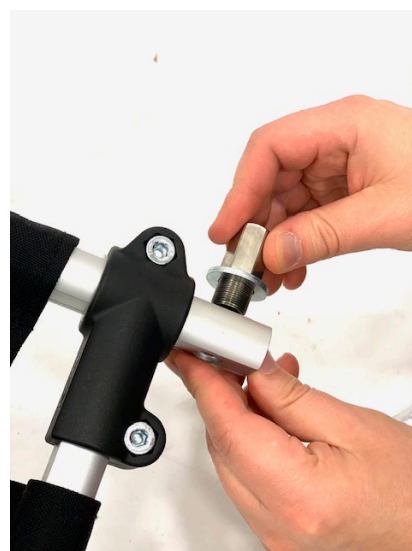

3.

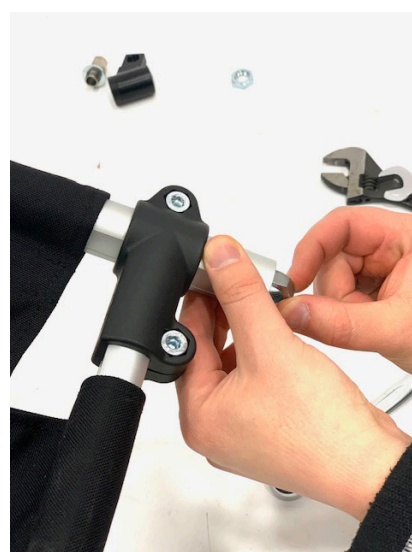


4. Sätt fast länkhjulshuset genom att skruva fast hjulfästet

4.



5. Sätt fast länkhjulet genom att trycka på metallringen under länkhjulsgaffeln samt i digt som gaffelaxeln skjuts upp i länkhjuls fästet.

5.

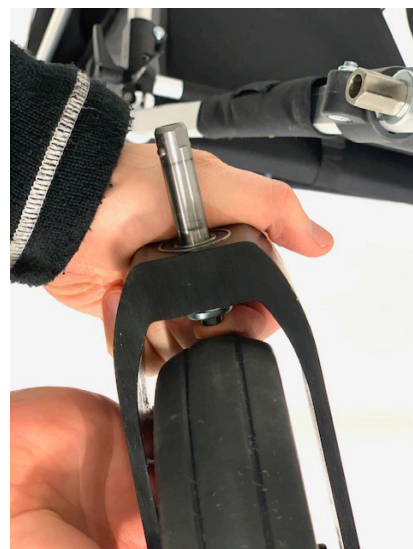

6. När länkhjulen skall tas bort, tryck metall ringen upp mot gaffeln och dra ut länkhjul saxeln från fästet.

6.



Främre fotramen, med fotstödet, kan tas av helt och hållet då man ev vill kunna packa vagnen i ett litet utrymme.

Lossa på låsvreden vid sidoklämmorna.



Dra ut hela främre ramen med hjul. Tag ev bort hjulen från ramen.



När man sätter tillbaka främre ramen är det viktigt att skjuta in den så pas långt att fjäderlåsen vilar mot sidoklämmorna.



Kontrollera att länkhjulshusen står i rät lod med hjälp av ett vattenpass. Sulkyvagnen blir då enklare att köra och länkhjulen förhindras att "vobbla".



Montering av tillbehör

Sittinsats

Öppna fempunktsbältet. Placera sittinsatsen så att sits och rygg stämmer överens. I sittinsatsens "hörn" finns öppningar för bältet. Trä bältena genom öppningarna. Bind fast insatsen med banden i vagnens ram.

Bältesremmen, som skall vara placerad mellan benen, träs via hanken till mittpunktens lås.

Sittinsatsen består av fyra separata kamrar, där varje fack kan stängas med hjälp av dragkedjor. I varje fack finns det kuddar som består av en mängd plastkuler. Genom att ta bort eller lägga till plastkuler i respektive fack kan man förändra sittkomforten.

Tänk på att plastkuler är farliga att få i sig! Överdraget på sittinsatsen är i bomull och kan tvättas i 40° C.



Underhåll och skötsel

Sittvagnen All Road skall förvaras inomhus. Sand, hår och skräp förstör kullager. Håll därför hjulen så rena som möjligt. Se till att alla fyra hjulen är pumpade lika. Rengör ofta ramrör, hjulnav, bälten m m.

All Road skall kontrolleras regelbundet för bästa hållbarhet och funktion. Följ checklistan nedan.

Checklista

	Dagligen	Varje vecka	Varje månad
Bälten, klädsel och körhandtag	X		
Parkeringsbroms	X		
Låsvred och skruvar		X	
Bakhjul, framhjul och kullager			X
Fotplattans höjd			X

Demontering och skrotningsinstruktion

Mayday Aid AB arbetar för hållbar utveckling genom återvinning. Att återvinna avfall är att man tar tillvara på material och försöker återanvända dem.

Vid privat inköp, kontakta din kommun för information om var du kan lämna in din förbrukade sittvagn/ sulky för återvinning. Material som kan lämnas på återvinningscentral är följande:

1. Emballage / kartong.
Återvinns och sorteras med KARTONG
2. Metall.
Återvinns och sorteras med METALL
3. Gummi / Plast.
Återvinns och sorteras med BRÄNNBART
4. Klädsel. Tyg, remmar och annan textil.
Återvinns och sorteras med BRÄNNBART.

Teknisk data All Road

Mått i cm	All Road
Artikelnummer	1014-21
Sittbredd fram / bak	39 / 34
Sittdjup	42
Sittbredd med insats	ca 24
Sittdjup med insats	ca 35
Ryggstödshöjd	64
Ryggstödshöjd med förlängning, tillbehör	75
Underbenslängd / Fotplatta	20 - 45
Ryggvinkel	82°
Vagnens vikt	13 kg
Max belastning	80 kg
Längd, ihopskjuten fotram och körbygel	123
Totala mått uppfälld (B x H x D)	69 x 90 x 125
Totala mått ihopfälld (B x H x L), delad ram	53 x 20 x 89
Framhjul	16"
Bakhjul	18"
Färg chassi	Silver
Färg klädsel	Svart
Körhandtagets höjd	80-119

Sittvagnen **All Road** €

Säljs i Sverige genom:

MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA

Tel 0300 - 56 97 00

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se



Producent

KFN ApS

Bondesvadvej 15
8300 Odder

Telefon +45 86 14 22 65
Mobil +45 20 23 22 65

kfn@kfn-aps.dks

www.kfn-aps.dk

KFN ApS