

KONTROLL OCH TEST

Schema för att kontrollera och testa VELA arbetstolar och ståstödstolar



Arbetsstolar och ståstödstolar

Datum: _____

Stolmodell: _____

ID-nummer: _____

Kontrollerad av: _____

- Skrot
 Service
 Reparation

Adress:

1. Underrede

- Kontrollera svetsar
 Dra åt skruvar

2a. Lyftanordning med gaspatron

- Kontrollera funktion
 Smörjning av rörliga delar
 Kontrollera avseende slitage
 Dra åt skruvar

2b. Elektrisk lyftanordning

- Kontrollera ledningar avseende brott/skador
 Smörjning av rörliga delar
 Dra åt skruvar
 Lyssna efter missljud
Laddningsfunktion

3. Hjul

- Kontrollera rullmotstånd
 Undersök ev. glapp i lager
 Dra åt skruvar
 Avlägsna smuts/hår från hjul

4. Bromsfunktion

- Kontrollera bromsfunktion
 Kontrollera svetsar
 Lyssna efter missljud
 Dra åt skruvar

5. Sitsmekanism/stödplatta

- Kontrollera alla funktioner
 Lyssna efter missljud
 Dra åt skruvar
 Smörjning av rörliga delar

6. Armstöd

- Kontrollera funktion
 Kontrollera svetsar
 Undersök avseende brott
 Dra åt skruvar
 Kontrollera yta/klädsel

7. Klädsel/överdrag

- Kontrollera klädsel på sits
 Kontrollera klädsel på ryggstöd
 Kontrollera klädsel på nackstöd
 Kontrollera klädsel på sidostöd
 Kontrollera lösa överdrag

8. Tillbehör

- Kontrollera kroppsstödens funktion
 Kontrollera skjuthandtag
 Kontrollera nackstödens funktion
 Kontrollera benstödens funktion
 Kontrollera sidostödens funktion

9. Elektriska tillbehör

- Elektrisk broms
 Kontakter
 Handenhet

10. Rengöring

- Klädsel
 Underrede
 Armstöd
 Övriga tillbehör

Anmärkningar:
