




Bruksanvisning HeadActive

Innehållsförteckning


Montering HeadActive Kit 1	3
Montering HeadActive Kit 2	5
Användarinställningar	6
Underhåll	10
Förpackning och lagring	10
Återanvändning	10
Anpassningar	10

Montering HeadActive Kit 1


1. Placera fästet över huvudstödet så att framsidan av klämman (ett ben) är närmast patienten och baksidan av klämman (två ben) bakom huvudstödet. Viktigt att alla tre ben är parallella för största möjliga klämyta.

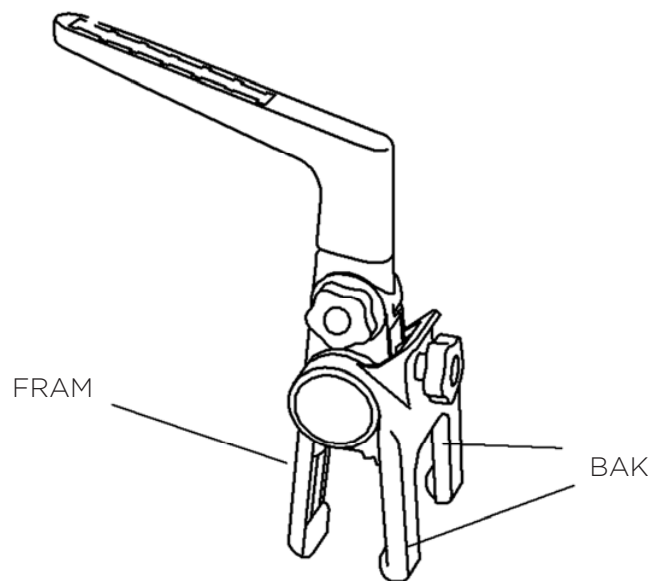

2. Spänn fast spännskruven genom att vrida medurs.

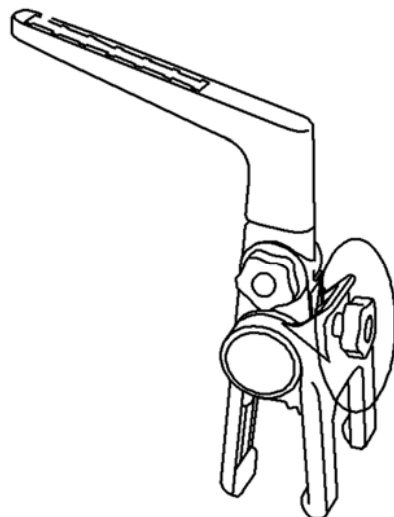

3. Justera hängarens vinkel efter behov.

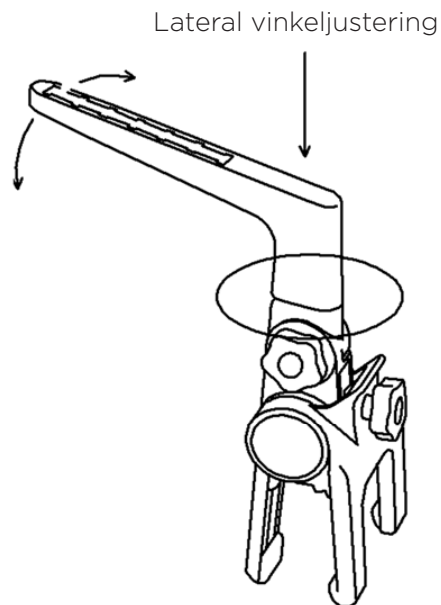

4. Vinkeln på stödkolonnen kan justeras framåt eller bakåt med skruven på höger sida av basen. Denna justering används för att justera tyngdpunkten till det läge man eftersöker. Denna justering kommer väl till användning när man justerar in HeadActive till brukare med en kyphotisk hållning.

HeadActive förlängare 15 cm


Standardmodellen kan förses med en förlängare för att ge ytterligare höjd vid behov.

Montering HeadActive Kit 2


Det finns två sätt att montera HeadActive Kit 2.

1. Placera fixeringsplattan på ryggstödet baksida eller på huvudstödet så att skruvarna linjeras med de befintliga hålen. Om du behöver skapa nya hål säkerställ att ankarstycket sitter jämnt.




Skrubar (ingår ej) för denna typ av fixering måste vara lämpliga för materialtypen.

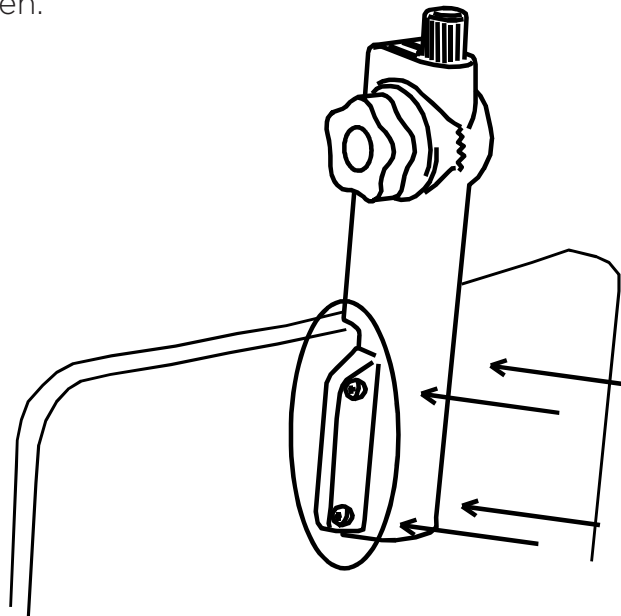

2. Placera fixeringsplattan på ett fyrkantigt rör 15x15 mm (ingår ej) (art. nr. 790205) som kan fästas på baksidan av huvudstödet.

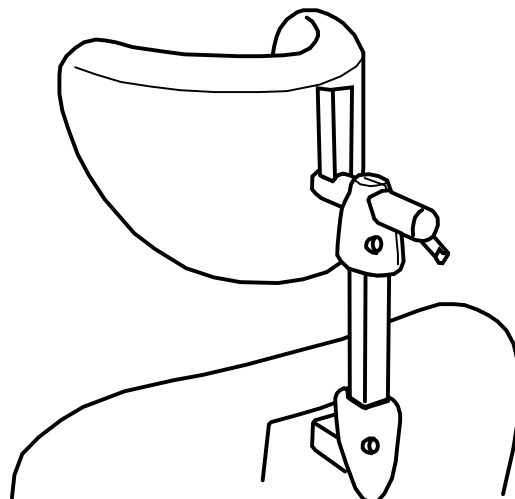

2. Om fixeringsplattan är fixerad direkt på baksidan av stödkolonnen bör vinkeln inte överstiga 20°. Överdriven vinkel kan äventyra användarsäkerheten.

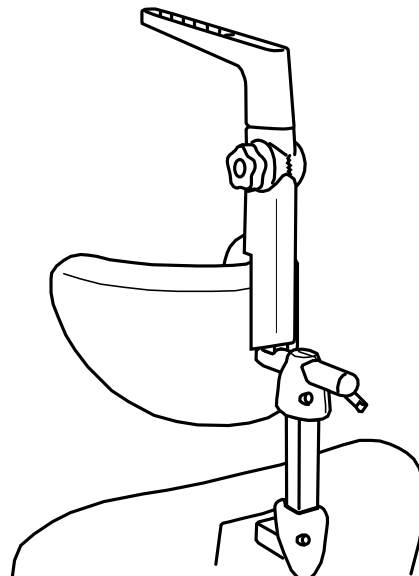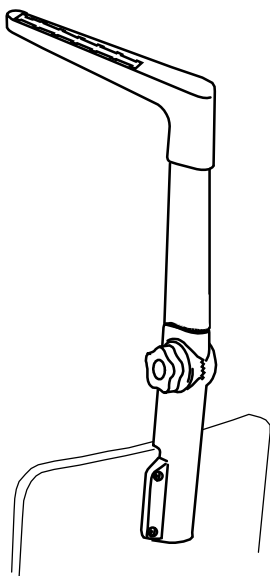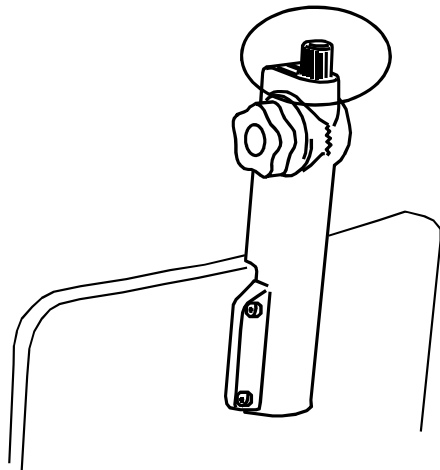


Användarinställningar


Ställ in HeadActive® i en tyst och lugn miljö, där du kan förklara alla steg i installationen för brukaren. För en säker installation krävs två personer - en som håller användarens huvud och en som monterar selen. Dra inte åt spännet på huvudkonturen. Placera inte selen över ögonbrynen eller öronen.

Använd inte vassa eller farliga föremål nära användaren.


Placera inte användaren i fara eller i farliga positioner.

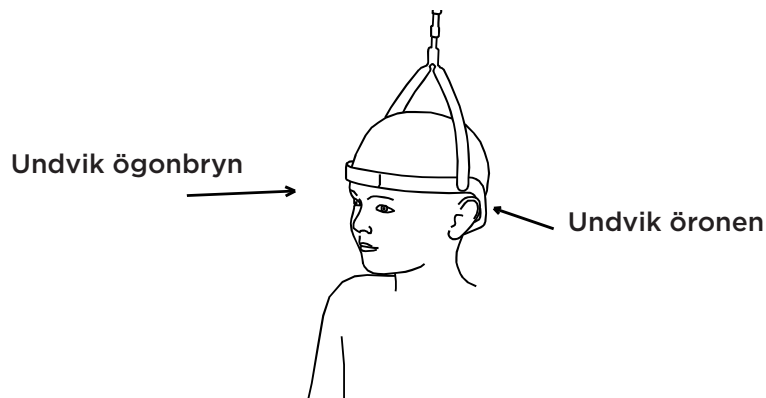


1. Börja med att hålla brukarens huvud i den önskade positionen.

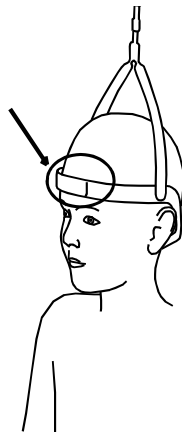

2. Placera selen runt brukarens huvud. Selen justeras med kardborre både fram och bak. Justera vid båda punkterna för att få båda sidorna av selen i linje med öronen. När rätt position har uppnåtts håller selen upp huvudet utan att du behöver dra åt för hårt.

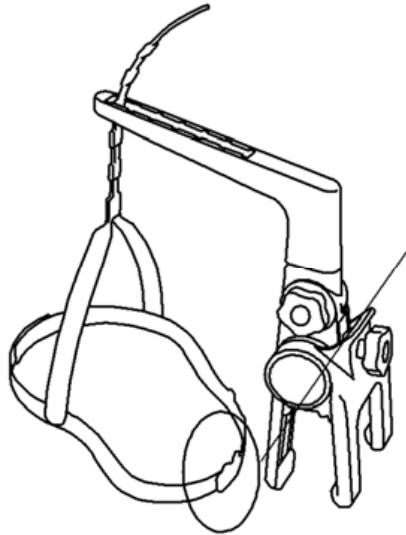

3. Fäst selen på hängaren med den tandade remsan (för höjjustering) som följer med selen. Höjden på fixeringsläget beror på önskad position för brukaren.

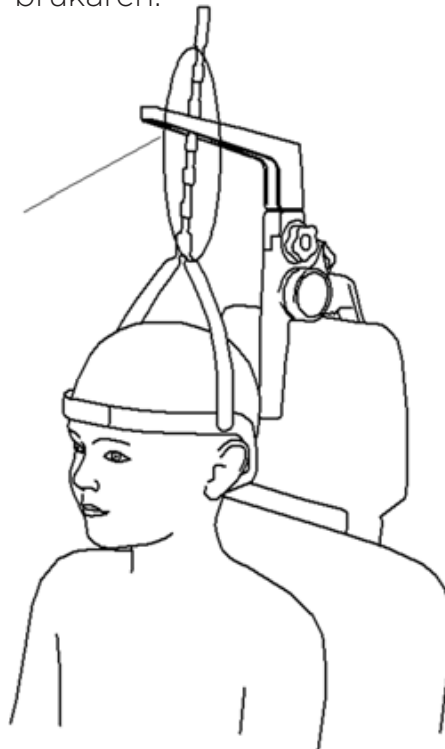

HeadActive® fungerar bäst mellan rekommenderade vinkelintervaller på 0° (upprätt) till 20° (lutad). Kontakta din återförsäljare om du har för avsikt att ställa in systemet utanför dessa rekommendationer.

Om du ändrar vinkeln på stödkolonnen behöver du också justera mittremsan för att uppnå optimal huvudposition. Justering av vinkeln på stödkolonnen kommer att orsaka ytterligare förlängning av nacken vilket kan vara extra känsligt för brukare med en cervikal ryggmärgsskada. För brukare som roterar rekommenderar vi att positionera hängaren på motsatt sida till det som brukaren föredrar, förutom i de fall där brukaren har en sned hals (torticollis).

Sidoskruven kan ändra vinkeln på stödkolonnen för att ge ett säkert stöd för användare med kyphos.

Underhåll

Tvätta HeadActives olika delar med varmt vatten och mild tvål. Använd inte blekmedel. Utsätt inte produkten för temperaturer som överstiger 75°C.

Förpackning och lagring

Produktens förpackning skyddar mot skador under transport och förvaring, och undviker exponering för kemiska föroreningar. Förvara på en ren, torr plats.

Återanvändning

Produkten lämpar sig inte för återanvändning för någon annan person än den ursprungliga brukaren.

Anpassningar

Eventuella Anpassningar som gjorts utan den ursprungliga produkttillverkaren samtycke befriar det från något ansvar om det uppstår problem med produkten under dess användning.

SE

Anatomic SITT AB

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Support +46 11 16 18 05

Besöksadress

Terminalgatan 1, SE-602 29 Norrköping, Sweden

DK

Anatomic SITT A/S

Viengevej 4, 8240 Risskov, Denmark

Tel +45 86 17 01 74

Fax +45 86 17 01 75

FI

Rehaco OY

Haaransuontie 6 A7, 90240 Oulu, Finland

Tel: +35 840 775 22 88

NL

Anatomic SITT Nederland BV

Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Netherlands

Tel +31 344 63 45 40

Fax +31 344 62 33 61

World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

facebook.com/anatomicsitt

